



FGP

Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



2023 **CATALOGO GENERALE**
IL BENESSERE
IN CONTINUA
EVOLUZIONE



DAL 1988 CI IMPEGNIAMO SENZA SOSTA PER OFFRIRE SOLUZIONI DI BENESSERE E RIABILITAZIONE PER TUTTI

Ci miglioriamo ogni giorno per migliorare la vita di ognuno.

Questo è il nostro concetto di innovazione: una filosofia che coinvolge tanti aspetti del nostro lavoro per creare prodotti sempre più performanti e ottimizzare le prestazioni di quelli già esistenti.

Ogni giorno sperimentiamo nuovi materiali, studiando nuovi design e nuove funzionalità, ci avvaliamo dell'ausilio di sistemi software all'avanguardia e del supporto di specialisti con cui ci confrontiamo quotidianamente. Perché per noi la ricerca costante è un investimento per il benessere di tutti.

Solo così, guardando sempre avanti e anticipando le esigenze riabilitative, siamo oggi leader e punto di riferimento per il settore.



FGP

Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment





IL BENESSERE
IN CONTINUA
EVOLUZIONE

LA RICERCA DEL BENESSERE ATTRAVERSO IL RECUPERO DEL MOVIMENTO

In FGP pensiamo che il benessere psico-fisico sia un **diritto fondamentale** e che per questo debba essere accessibile a tutti: per questo il cuore della nostra ricerca e produzione è **il recupero e la conservazione della libertà di movimento**, come componente della qualità di vita a tutte le età.

Dal 1988 operiamo approfondendo le problematiche ortopediche e **anticipando le soluzioni**, supportando ogni evoluzione di prodotto con rigorosi studi clinici, in **collaborazione con enti di ricerca italiani e internazionali**.





FGP srl sostiene
il bando per giovani
ricercatori promosso da



FONDAZIONE
PER L'OSTEOPOROSI
O.N.L.U.S.



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



INNOVAZIONE IN CONTINUO MOVIMENTO

La **trasformazione digitale**, operata da FGP in questi anni, interessa sia gli aspetti produttivi, grazie a **software d'avanguardia integrati nelle nostre tecnologie**, sia gli aspetti di relazione con gli specialisti dell'ortopedia cui è dedicata FGP OrteSystem® l'app che consente la consultazione e un aggiornamento costante sugli oltre 450 articoli a catalogo.



OLTRE 120 BREVETTI DEPOSITATI



**LABORATORIO
DI BIOMECCANICA INTERNO:**
test sul 100% dei prodotti



MATERIALI ESCLUSIVI,
molti dei quali con tecnologia brevettata



INVESTIMENTO IN R&D:
circa il 10% dei ricavi annuali



**PROGETTAZIONE E PRODUZIONE
100% MADE IN ITALY**
Certificazione ISO 13485:2016



**CURA ARTIGIANALE
E CONTROLLO DI OGNI FINITURA**
a garanzia di comfort e vestibilità



ORTESYSTEM®

**CONNESSI CON LE ESIGENZE
DEL PAZIENTE, GRAZIE A UN SISTEMA
DI RICERCA INTELLIGENTE**

L'app OrteSystem® consente ai **medici e tecnici ortopedici** di accedere al mondo FGP in qualsiasi momento. L'app è costruita su un **sistema intuitivo di filtri** che permette di individuare il tutore più adatto ad ogni paziente e ad ogni caso specifico. Con OrteSystem®, inoltre, è possibile condividere il risultato delle proprie ricerche in modo sicuro e sostenibile, limitando gli spostamenti.

 **FGPOrteSystem®**



3 FILTRI PER: ricerca rapida, caratteristiche prodotto, patologie



FILTRO NUOVI PRODOTTI



FILTRO RICERCHE PRECEDENTI



**FUNZIONE CONDIVIDI LA SCHEDA
PRODOTTO** (tramite WhatsApp, email, sms e altre modalità)



**FUNZIONE CONSIGLIA PRODOTTO
AL PAZIENTE PER EMAIL**
(riservata ai medici)

REALIZZIAMO IL BENESSERE FILO PER FILO

L'innovazione FGP inizia dallo **studio dei tessuti e di materiali all'avanguardia**, per un'esperienza di benessere completa attraverso soluzioni performanti e confortevoli.

TESSUTO FULLFIT® PERFORMANCE E COMODITÀ IN UN'UNICA SOLUZIONE

FullFit® è l'innovativo **tessuto double-layer**, elastico e leggero, conformabile, dedicato a chi vive **sport e gesti quotidiani** come momenti di benessere.

Aspetti tecnici di Fullfit®

- Struttura esterna liscia: garantisce una maggior durata; l'azione compressiva protegge le fasce muscolari e ne favorisce l'attività.
- Struttura interna morbida: offre una piacevole sensazione al tatto; la struttura a nido d'ape veicola il sudore all'esterno, mantenendo il calore corporeo e garantendo traspirabilità.
- Tecnologia Q-Skin by Fulgar®: sfavorisce la formazione di colonie di batteri, riducendo il rischio di cattivi odori che si potrebbero sviluppare.



GENERATO DALLA RICERCA FGP, CREATO PER NUOVE PERFORMANCE

Oltre un decennio fa, FGP ha dato vita al progetto Phylo, una nuova filosofia del benessere in una linea di ginocchiere per un **comfort attivo**.

L'evoluzione di quella filosofia porta oggi a presentare il **nuovo concetto PhyloEtek**: un'unica gamma che unisce gli elementi di eccellenza di Phylo e Phylotek e attraverso studi su materiali e tecnologie - condotti nei centri di ricerca FGP - porta a una nuova generazione di prodotti ulteriormente avanzati nel controllo della stabilità così come nella vestibilità, leggerezza e traspirabilità.

11 modelli che rispondono a qualsiasi esigenza riabilitativa del ginocchio, risultato di un processo di innovazione che non si ferma mai.



NUOVO **PHYLOEtek**

INNOVAZIONE: IL FILO CONDUTTORE PHYLOEtek

Grazie all'esclusiva tecnologia WholeGarment®, la **base dei tutori PhyloEtek** è realizzata in un **unico pezzo** per un comfort senza limiti e "senza cuciture". L'evoluzione interessa anche gli **snodi** modellabili, in materiale di derivazione aeronautica **ad alta tecnologia**, **ridotti nel peso** e nelle dimensioni per esaltare la leggerezza della ginocchiera.

Caratteristiche della costruzione PhyloEtek

- Elasticità elevata frutto della costante ricerca interna.
- Struttura a nido d'ape per un miglior scambio termico.
- Spessore ridotto per favorire anche le attività intense.

Caratteristiche dei tessuti PhyloEtek

- Fibra con ioni d'argento Q-Skin by Fulgar® con proprietà batteriostatiche permanenti.
- Tessuti a termoregolazione intelligente Smart Temp che si adatta alle variazioni della temperatura corporea.
- Tessuti che rispettano le pelli più sensibili.



INDICE ANALITICO

FGP BLU

BLU INSOLE	16
------------	----

RACHIDE CERVICALE

CLC-100	20
CLM-250P	20
CLL-300	21
CLL-400	21
CLL-901	22
ASPEN® VISTA	24
ASPEN® VISTA TX	24
ASPEN® VISTA MULTIPOST	25
VISTA® ICU BACK PANEL	25
VISTA® CTO2	26
VISTA® CTO4	26
VISTA® MULTIPOST THERAPY	27
ASPEN® CERVICAL COLLAR	27
ASPEN® CTO	28
ASPEN® PEDIATRIC	28
ASPEN® CTO PEDIATRIC	29

TRONCO

I-35 TOP	NUOVO	32
F35 POWER	NUOVO	32
F35-100	NUOVO	33
F35-100TR	NUOVO	33
G35-100		34
F35 TRICONTROL PLUS		34
SPINOMED® V		35
SPINOMED® ACTIVE		35
ASPEN TRI-POINT FSO®		36
STABILITYSILVER		36
DYNAMICSILVER		37
LOMBOSILVER		37
DORSOSILVER EVO/EVO SHORT		38
BACKSILVER EVO		38
LOMBOFIXÒ® 4.0		39
LOMBOFIXÒ® 33-4.0		39
LOMBOFIXÒ®		40
DORSOFIXÒ® 4.0		40
DORSOFIXÒ®		41
IN-CROSS		41
IN-CROSS 33		42
PLURIVAL		42
GLAM		43
ALLEVIA		43
ALLEVIA PLUS		44
HORIZON 627		44
ASPEN® LUMBAR SUPPORT		45
PRO ACTION		45
2 SKIN®		46

FLEXÒ	46
CRM 950	47
CRL 300	47
CRL 350	48
LUMBAMED® BASIC	48
LUMBAMED® PLUS	49
LUMBAMED® PLUS E+MOTION	49
LUMBAMED® DISC	50
LUMBAMED® SACRO	50
RICAMBI PER IPERESTENSORI	51
P+ FORCE	53
P+ TECH	54
P+ EFFECT	55
P+ PERFECT ZIP	56
P+ SMART BRA	57
P+ YOUNG UP	58
P+ YOUNG EASY UP	59
P+ DORSOLLIEVO	60
P+ PANTS	61

ARTO SUPERIORE

POLSO-MANO

STAX	64
SCAPHOMED®	64
FINGER CAP	65
PDN-SCA	65
FILAMED® 101 / FILAMED® 111	66
RHIZOMED® SOFT	66
D.T3-01	67
DUAL LOCK RHIZO	NUOVO 67
PFO-100	68
DTX-04 MANUMED®	69
DTX-05 MANUMED® T	69
D.T3-02	70
D.T3-03	70
DUAL LOCK	NUOVO 71
DUAL LOCK MAX	NUOVO 71
DUAL LOCK T	NUOVO 72
DUAL LOCK T MAX	NUOVO 72
DTX-06 MANUMED® LONG	73
PLE-101 MANUMED® DISK	73
PLE-201 THUMBLOCK®	74
CTP-101 SUR.FING®	74
MANUMED® E+MOTION	75

AVAMBRACCIO-SPALLA

EPIBRACE® PRO	75
D.T3-FSP	76
EPICOMED®	76
EPICOMED® E+MOTION	77
RGB-150	77

RGB-100	78	FILAMED® 501	105
IMB-200 NEW	78	FILAMED® 601	105
IMB-300	79	FILAMED® 701	106
IMB-350 OG	79	FILAMED® 701 AR	106
IMB-400	80	FILAMED® 701 WRAP	107
IMB-700N	80	FILAMED® 801	107
IMB-700	81	FILAMED® 851	108
IMB-750	81	PHYLO® 90 PT-CONTROL	108
IMB-800 MULTISAS®	82	PHYLO® 90A PT-CONTROL	109
SHOULDER ACTION	82	REHABRACE®	109
OMOMED®	83	GNT-601	110
RDS-100	83	GN-3PAN	110
RDS-200 CLAVIO®	84	PTS	111
HFB	84	GNO-970 LEGGY®	112
ACROFIX	86	GNO-970 LEGGY® COOL	112
EPICO ACTIVE	86	GNO-970 LEGGY® ECO	113
EPICO-REVO	87	GNO-970 LEGGY® ECO COOL	113
EPICO-REVO PS	87	GNO-970 LEGGY® PLUS	114
		GNO-970 LEGGY® PLUS ECO	114
		GNO-960	115
		FLEX-PRO	115
		M.4® s PCL DYNAMIC	116
		M.4® s COMFORT	116
		M.4® s COMFORT SHORT	117
		M.4® s X LOCK	117
		PROTECT 4 EVO	118
		PROTECT 4 SHORT	118
		M.4® s OA	119
		M.4® s OA SHORT	119
		M.4® s OA COMFORT	120
		PROTECT 4 OA	120
		LIGHT OA	121
		SOFT OA	121
		M.3® s	122
		M.4® ANTIRECURVATUM	122
		ACCESSORI PER ORTESI DEL GINOCCHIO	123

ARTO INFERIORE

ANCA-GINOCCHIO

IMA-110 HIPONE®	90		
IMA-110 BR HIPONE®	90		
IMA-103	91		
IMA-150	91		
IMA-109	92		
PHYLOETEK 20	NUOVO 93		
PHYLOETEK 40	NUOVO 93		
PHYLOETEK 41	NUOVO 94		
PHYLOETEK 60	NUOVO 94		
PHYLOETEK 61	NUOVO 95		
PHYLOETEK STABIMED® PRO	NUOVO 95		
PHYLOETEK STABIMED® PRO OPEN	NUOVO 96		
PHYLOETEK STABIMED®	NUOVO 96		
PHYLOETEK STABIMED® CLOSE	NUOVO 97		
PHYLOETEK COLLAMED®	NUOVO 97		
PHYLOETEK COLLAMED® CLOSE	NUOVO 98		
D.T3-TTP	98		
TR-BRACE	99		
M 601	99		
GENUMEDI®	100		
GENUMEDI® E+MOTION	100		
GENUMEDI® PRO	101		
GENUMEDI® PSS	101		
GENUMEDI® PT	102		
FILAMED® 201	102		
FILAMED® 301	103		
FILAMED® 411	103		
FILAMED® 401	104		
FILAMED® 451	104		
		CAVIGLIA	
		CVO-700 BOOTY®/CVO-710 BOOTY® SHORT	124
		CVO-700 ECO/CVO-700P ECO	124
		CVO-750 BOOTY®/CVO-720 BOOTY® SHORT	125
		CVO-750 ECO SMART/DELUX	125
		M.STEP®	126
		CVO-601	126
		FILAMED® 901	127
		D.T3-CVT	127
		CVO-800 ANKLE STABIL	128
		8LIGHT	128
		CVO-400	130
		LEVAMED® 508	130
		LEVAMED® E+MOTION	131

LEVAMED® ACTIVE	131	PROTEZIONE PRT-S23	156
ACHIMED®	132	MEMOSTEP PRT-S50	157
M 501	132	ACTIONSTEP PRT-S51	157
CVO-730 KIT	133	GUIDA ALLE MISURAZIONI	158

RIABILITAZIONE/VARIO

SWI-TWO	133
---------	-----

LINEA FULLFIT®

GOMITIERA FullFit®	137
COSCIALE FullFit®	138
GINOCCHIERA FullFit®	138
POLPACCERA FullFit®	139
CAVIGLIERA FullFit®	139

LINEA KIDZ

KIDZ-CLM	142
ASPEN® PEDIATRIC	142
ASPEN® CTO PEDIATRIC	143
KIDZ-P04	143
KIDZ-P06	144
KIDZ-P06D	144
KIDZ-RGB	145
KIDZ-IMB	145
KIDZ-RDS	146
KIDZ-TEK	146
KIDZ-TRB	147
KIDZ-601	147
KIDZ-990	148
KIDZ-750	148
KIDZ-CL8	149
M.STEP® KIDZ	149

LINEA PIEDE

PLANTARE PRT-S01	152
PLANTARE PRT-S02	152
SOLETTA PRT-S04	152
TALLONIERA PRT-S06	152
TALLONIERA PRT-S07	153
CUSCINETTO PRT-S09	153
CUSCINETTO PRT-S10	153
CUSCINETTO PRT-S11N	153
SEPARATORE PRT-S12	154
DIVARICATORE PRT-S13	154
PROTEZIONE PRT-S20	154
PROTEZIONE PRT-S14	154
PRO_HALLUX PRT-S15N	155
HALLUX_MED PRT-S16	155
PDN-ALV	155
FASCIA PRT-S21N	156
PROTEZIONE PRT-S22	156

INDICE LINEE

LINEA ASPEN®

ASPEN® VISTA	24
ASPEN® VISTA TX	24
ASPEN® VISTA MULTIPOST	25
VISTA® ICU BACK PANEL	25
VISTA® CTO2	26
VISTA® CTO4	26
VISTA® MULTIPOST THERAPHY	27
ASPEN® CERVICAL COLLAR	27
ASPEN® CTO	28
ASPEN® PEDIATRIC	28
ASPEN® CTO PEDIATRIC	29
ASPEN TRI-POINT FSO®	36
HORIZON 627	44
ASPEN® LUMBAR SUPPORT	45

LINEA SILVERFIXÒ

STABILITYSILVER	36
DYNAMICSILVER	37
LOMBOSILVER	37
DORSOSILVER EVO/EVO SHORT	38
BACKSILVER EVO	38

LINEA POSTURALE

P+ FORCE	53
P+ TECH	54
P+ EFFECT	55
P+ PERFECT ZIP	56
P+ SMART BRA	57
P+ YOUNG UP	58
P+ YOUNG EASY UP	59
P+ DORSOLLIEVO	60
P+ PANTS	61

LINEA D.T3

D.T3-01	67
D.T3-02	70
D.T3-03	70
D.T3-FSP	76
D.T3-TTP	98
D.T3-CVT	127

LINEA PHYLOTEK

PHYLOTEK 20	NUOVO	93
PHYLOTEK 40	NUOVO	93
PHYLOTEK 41	NUOVO	94
PHYLOTEK 60	NUOVO	94
PHYLOTEK 61	NUOVO	95
PHYLOTEK STABIMED® PRO	NUOVO	95
PHYLOTEK STABIMED® PRO OPEN	NUOVO	96
PHYLOTEK STABIMED®	NUOVO	96
PHYLOTEK STABIMED® CLOSE	NUOVO	97
PHYLOTEK COLLAMED®	NUOVO	97
PHYLOTEK COLLAMED® CLOSE	NUOVO	98

LINEA TESSUTO ELASTICO

MANUMED® E+MOTION	75
EPICOMED®	76
EPICOMED® E+MOTION	77
M 601	99
GENUMEDI®	100
GENUMEDI® E+MOTION	100
GENUMEDI® PRO	101
GENUMEDI® PSS	101
GENUMEDI® PT	102
LEVAMED® 508	130
LEVAMED® E+MOTION	131
LEVAMED® ACTIVE	131
ACHIMED®	132
M 501	132

LINEA FULLFIT®

GOMITIERA FullFit®	137
COSCIALE FullFit®	138
GINOCCHIERA FullFit®	138
POLPACCERA FullFit®	139
CAVIGLIERA FullFit®	139

LINEA FILAMED

FILAMED® 101 / FILAMED® 111	66
FILAMED® 201	102
FILAMED® 301	103
FILAMED® 411	103
FILAMED® 401	104
FILAMED® 451	104
FILAMED® 501	105
FILAMED® 601	105
FILAMED® 701	106
FILAMED® 701 AR	106
FILAMED® 701 WRAP	107
FILAMED® 801	107
FILAMED® 851	108
FILAMED® 901	127

LINEA PHYLO®

PHYLO® 90 PT-CONTROL	108
PHYLO® 90A PT-CONTROL	109

LINEA PROTECT

PLANTARE PRT-S01	152
PLANTARE PRT-S02	152
SOLETTA PRT-S04	152
TALLONIERA PRT-S06	152
TALLONIERA PRT-S07	153
CUSCINETTO PRT-S09	153
CUSCINETTO PRT-S10	153
CUSCINETTO PRT-S11N	153
SEPARATORE PRT-S12	154
DIVARICATORE PRT-S13	154
PROTEZIONE PRT-S20	154
PROTEZIONE PRT-S14	154
PRO_HALLUX PRT-S15N	155
HALLUX_MED PRT-S16	155
PDN-ALV	155
FASCIA PRT-S21N	156
PROTEZIONE PRT-S22	156
PROTEZIONE PRT-S23	156
MEMOSTEP PRT-S50	157
ACTIONSTEP PRT-S51	157

LINEA KIDZ

KIDZ-CLM	142
ASPEN® PEDIATRIC	142
ASPEN® CTO PEDIATRIC	143
KIDZ-P04	143
KIDZ-P06	144
KIDZ-P06D	144
KIDZ-RGB	145
KIDZ-IMB	145
KIDZ-RDS	146
KIDZ-TEK	146
KIDZ-TRB	147
KIDZ-601	147
KIDZ-990	148
KIDZ-750	148
KIDZ-CL8	149
M.STEP® KIDZ	149

**BLU INSOLE:
IL SISTEMA CON
SENSORI PER RILEVARE
CON PRECISIONE
IL GIUSTO CARICO**

PRECISIONE

Grazie a 214
sensori resistivi

EFFICACIA

Agevola
il percorso
riabilitativo

SICUREZZA

Il giusto carico
ad ogni passo



INDICAZIONI

Dispositivo destinato alla rilevazione del carico applicato dal paziente sull'arto interessato e a fornire allo stesso un feedback, sonoro o meccanico (vibrazione), con due livelli di allarme impostabili.



MISURE (DX/SX)

Taglia unica personalizzabile 35-48

MD



FGP

Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



A photograph of a man in boxing gear, including red gloves and a grey waistband, with a blue overlay. The man is looking forward with a serious expression. The background is dark blue.

RACHIDE CERVICALE

CLC-100

COLLARE CERVICALE MORBIDO



INDICAZIONI

Tutore destinato alla limitazione del range di movimento del rachide cervicale. Utile, ad esempio, nei casi di:

- cervicalgia
- traumi distorsivi del rachide cervicale
- cervicobrachialgie con o senza vertigini
- condizioni infiammatorie degenerative post-traumatiche di lieve entità

STRUTTURA

- gommapiuma ad alta densità rivestita con maglina in cotone

MENTONIERA

- assente

FORO TRACHEALE

- assente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

NOTE

- dotato di maglina di ricambio

MISURE

Taglie	Ø Collo
S	32-38 cm
M	38-44 cm
L	44-50 cm

Altezze 6 cm; 8 cm; 10 cm; 12 cm

MD



Codici d'ordine: CLC-100/6; CLC-100/8;
CLC-100/10; CLC-100/12

CLM-250P

COLLARE CERVICALE SEMIRIGIDO
MODULABILE



INDICAZIONI

Tutore destinato alla limitazione del range di movimento del rachide cervicale. Utile, ad esempio, nei casi di:

- cervicalgia
- traumi distorsivi del rachide cervicale
- cervicalgia in quadro artrosico
- cervicobrachialgie con o senza vertigini
- condizioni infiammatorie degenerative post-traumatiche di lieve entità

STRUTTURA

- gommapiuma ad alta densità rivestita con maglina in cotone e rinforzo in polietilene

MENTONIERA

- assente

FORO TRACHEALE

- assente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

NOTE

- dotato di maglina di ricambio

MISURE

Taglie	Ø Collo
S	34-39 cm
M	38-44 cm
L	42-48 cm

Altezza 10 cm

MD



Codice d'ordine: CLM-250P



INDICAZIONI

Tutore destinato alla limitazione del range di movimento del rachide cervicale. Utile, ad esempio, nei casi di:

- cervicalgia
- discopatie in quadro artrosico e/o post acute con o senza ernie discali
- esiti dolorosi di fratture cervicali
- traumi distorsivi del rachide cervicale
- condizioni infiammatorie degenerative post-traumatiche di moderata entità

STRUTTURA

- polietilene forato con imbottitura in gommapiuma rivestita in similpelle

MENTONIERA

- assente

FORO TRACHEALE

- assente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo



INDICAZIONI

Tutore destinato alla limitazione del range di movimento del rachide cervicale. Utile, ad esempio, nei casi di:

- cervicalgia
- discopatie in quadro artrosico e/o post acute con o senza ernie discali
- esiti dolorosi di fratture cervicali
- traumi distorsivi del rachide cervicale
- piccoli distacchi ossei dei processi spinosi cervicali
- dolore cervicale in artrite reumatoide iniziale
- dolore cervicale in artrosi
- condizioni infiammatorie degenerative post-traumatiche di moderata entità

STRUTTURA

- polietilene forato con imbottitura in gommapiuma rivestita in similpelle

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- assente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

MISURE

Taglie	Ø Collo
0°	29-35 cm
1°	34-39 cm
2°	38-44 cm
3°	42-48 cm
4°	47-55 cm

Altezza regolabile con sistema a strappo

Codice d'ordine: CLL-300

MD



MISURE

Taglie	Ø Collo
S	34-39 cm
M	38-44 cm
L	42-48 cm
XL	47-55 cm

Altezza regolabile con sistema a strappo

Codice d'ordine: CLL-400

MD



**INDICAZIONI**

Tutore destinato alla limitazione del range di movimento del rachide cervicale. Utile, ad esempio, nei casi di:

- cervicalgia severa secondaria ad artrosi
- artrite reumatoide
- spondilite anchilosante
- esiti di fratture vertebre cervicali stabili (singole o combinate)
- esiti interventi chirurgici al rachide cervicale
- trattamento continuativo in patologie croniche non operabili (neoplastiche e non)
- piccoli distacchi ossei dei processi spinosi cervicali
- artrosi cervicale
- condizioni infiammatorie degenerative post-traumatiche di severa entità

STRUTTURA

- bivalve in plastazote con placche rigide di rinforzo anteriore e posteriore

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

NOTE

- predisposizione per collegamento ad iperestensore modello F35-100, F35 POWER, I-35 TOP e F35-100TR

MISURE

Taglie	Ø Collo
S	30-35 cm
M	35-40 cm
L	40-45 cm

Altezza	CLL-901/2 1/4	5 cm
	CLL-901/3 1/4	7,5 cm
	CLL-901/4 1/4	10 cm
	CLL-901/5 1/4	12 cm

MD

Codice d'ordine: CLL-901/2; CLL-901/3; CLL-901/4; CLL-901/5



INSIEME PER UNA MIGLIOR QUALITÀ DI VITA

Aspen ed FGP: unire le competenze
per moltiplicare i benefici offerti.

 **Aspen**
MEDICAL PRODUCTS

ASPEN® VISTA

**COLLARE CERVICALE BIVALVE
REGOLABILE IN ALTEZZA**



INDICAZIONI

Tutore destinato alla limitazione del range di movimento del rachide cervicale. Utile, ad esempio, nei casi di:

- procedura decompressiva
- gestione della frattura
- cefalea cervicale
- sindrome del disco cervicale
- stabilizzazione post chirurgica
- dolore muscolo-scheletrico
- colpo di frusta
- strappi
- radicolopatia

STRUTTURA

- bivalve realizzata in plastica rigida con imbottitura in tessuto accoppiato a celle aperte con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno latex free

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

NOTE

- utilizzabile durante esami RX e MRI

MISURE

Taglia unica

MD

Altezza regolabile con sistema brevettato a ghiera

Codice d'ordine: VISTA

ASPEN® VISTA TX

**COLLARE CERVICALE BIVALVE REGOLABILE
IN ALTEZZA CON APPOGGIO STERNALE**



INDICAZIONI

Tutore destinato alla limitazione del range di movimento del rachide cervicale. Utile, ad esempio, nei casi di:

- procedura decompressiva
- gestione della frattura
- cefalea cervicale
- sindrome del disco cervicale
- stabilizzazione post chirurgica
- dolore muscolo-scheletrico
- colpo di frusta
- strappi
- radicolopatia

STRUTTURA

- bivalve realizzata in plastica rigida con imbottitura in tessuto accoppiato a celle aperte con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno latex free

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

NOTE

- utilizzabile durante esami RX e MRI

MISURE

Taglia unica

MD

Altezza regolabile con sistema brevettato a ghiera

Codice d'ordine: VISTA TX



INDICAZIONI

Tutore destinato alla limitazione del range di movimento del rachide cervicale. Utile, ad esempio, nei casi di:

- procedura decompressiva
- gestione della frattura
- cefalea cervicale
- sindrome del disco cervicale
- stabilizzazione post chirurgica
- dolore muscolo-scheletrico
- colpo di frusta
- strappi
- radicolopatia

STRUTTURA

- bivalve realizzata in plastica rigida con imbottitura in tessuto accoppiato a celle aperte con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno latex free

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

NOTE

- utilizzabile durante esami RX e MRI



INDICAZIONI

Tutore destinato alla limitazione del movimento a causa di una lesione o instabilità su pazienti in posizione supina per un lungo periodo di tempo.

Da usare con il collare cervicale Vista su pazienti che rimangono supini per lunghi periodi.

STRUTTURA

- accessorio realizzato in plastica rigida con imbottitura a doppia densità a celle aperte con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

MENTONIERA

- no

FORO TRACHEALE

- no

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

NOTE

- accessorio compatibile con tutti i collari Vista

MISURE

Taglia unica



Altezza regolabile con sistema brevettato a ghiera

Codice d'ordine: VISTA MP

MISURE

Taglia unica



Codice d'ordine: VISTA ICU

VISTA® CTO2

**COLLARE CERVICALE BIVALVE CON
IMMOBILIZZAZIONE STERNALE (MINERVA)**



INDICAZIONI

Tutore destinato alla limitazione del movimento del rachide cervicale.

Utile nei casi di:

- procedure di decompressione
- gestione della frattura
- cefalea cervicale
- sindrome del disco cervicale
- stabilizzazione post chirurgica
- dolore muscolo-scheletrico
- colpo di frusta
- strappi
- radicolopatia

STRUTTURA

- bivalve realizzata in plastica rigida con imbottitura in tessuto accoppiato a celle aperte con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno latex free, asta toracica in materiale plastico

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- si

CHIUSURA

- a strappo con fibbie

NOTE

- il collare è modulabile e permette la gestione del percorso riabilitativo del paziente.
- il tutore è composto dal collare Vista Multipost ed il prolungamento toracico anteriore
- utilizzabile durante esami RX e MRI
- supporta accessorio ICU Back Panel

MISURE

Taglia unica

MD

Altezza regolabile con sistema brevettato a ghiera e aste toraciche con sistema telescopico

Codice d'ordine: VISTA CTO2

VISTA® CTO4

**COLLARE CERVICALE BIVALVE CON
IMMOBILIZZAZIONE TORACICA (MINERVA)**



INDICAZIONI

Tutore destinato alla limitazione del movimento del rachide cervicale.

Utile nei casi di:

- procedure di decompressione
- gestione della frattura
- cefalea cervicale
- sindrome del disco cervicale
- stabilizzazione post chirurgica
- dolore muscolo-scheletrico
- colpo di frusta
- strappi
- radicolopatia

STRUTTURA

- bivalve realizzata in plastica rigida con imbottitura in tessuto accoppiato a celle aperte con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno latex free, asta toracica in materiale plastico e asta dorsale in alluminio

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- si

CHIUSURA

- a strappo con fibbie

NOTE

- il collare è modulabile e permette la gestione del percorso riabilitativo del paziente.
- il tutore è composto dal collare Vista Multipost ed il prolungamento toracico anteriore
- utilizzabile durante esami RX e MRI

MISURE

Taglia unica

MD

Altezza regolabile con sistema brevettato a ghiera e aste toraciche con sistema telescopico

Codice d'ordine: VISTA CTO4



INDICAZIONI

Tutore destinato alla limitazione del movimento del rachide cervicale.

Utile nei casi di:

- cefalea cervicale
- perdita del range di movimento
- dolore al collo generale
- spasmi muscolari
- radicolopatia
- neuropatia
- ipercifosi
- portamento della testa in avanti

STRUTTURA

- bivalve realizzata in plastica rigida con imbottitura in tessuto con struttura alveolare traspirante all'interno e vellutino grippante all'esterno, pneumatico con cuscinetto cervicale removibile per terapia caldo/freddo

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo



INDICAZIONI

Tutore destinato alla limitazione del movimento del rachide cervicale.

Utile nei casi di:

- procedura decompressiva
- gestione della frattura
- cefalea cervicale
- sindrome del disco cervicale
- stabilizzazione post chirurgica
- dolore muscolo-scheletrico
- colpo di frusta
- strappi
- radicolopatia

STRUTTURA

- bivalve realizzata in plastica semirigida con imbottitura in tessuto accoppiato a celle aperte con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno latex free

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

MISURE

Taglia unica



Altezza regolabile con sistema brevettato a ghiera

Codice d'ordine: VISTA MP THERAPY

MISURE

Taglie

Altezza

CORTO

2 cm

SHORT

REGULAR

3,5 cm

REGULAR

ALTO

5 cm

TALL

EXTRA ALTO

7 cm

EXTRA TALL



La misura si riferisce alla distanza tra il mento in posizione neutrale e la parte prossimale della spalla (richiedere misuratore)

Codice d'ordine: ASPEN

ASPEN® CTO

COLLARE CERVICALE BIVALVE CON
IMMOBILIZZAZIONE TORACICA (MINERVA)



INDICAZIONI

Tutore destinato alla limitazione del movimento del rachide cervicale. Utile nei casi di:

- procedura decompressiva
- gestione della frattura
- cefalea cervicale
- sindrome del disco cervicale
- stabilizzazione post chirurgica
- dolore muscolo-scheletrico
- colpo di frusta
- strappi
- radicolopatia

STRUTTURA

- bivalve in plastica semirigida con imbottitura in tessuto accoppiato a celle aperte con monospugna all'interno e vellutino grappante all'esterno latex free, asta toracica e dorsale in alluminio

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo con fibbie

NOTE

- la costruzione del tutore lo identifica come Gold Standard anche per pazienti con peso elevato.
- utilizzabile durante esami RX e MRI

MISURE

Taglie*	Altezza	
CORTO	2 cm	SHORT
REGULAR	3,5 cm	REGULAR
ALTO	5 cm	TALL
EXTRA ALTO	7 cm	EXTRA TALL

MD



La misura si riferisce alla distanza tra il mento in posizione neutrale e la parte prossimale della spalla (richiedere misuratore)

*identificare la taglia sulla base del collare Aspen Cervical Collar.

Codice d'ordine: ASPEN CTO

ASPEN® PEDIATRIC

COLLARE CERVICALE BIVALVE PEDIATRICO



INDICAZIONI

Tutore pediatrico destinato alla limitazione del movimento del rachide cervicale. Utile nei casi di:

- procedura decompressiva
- gestione della frattura
- cefalea cervicale
- sindrome del disco cervicale
- stabilizzazione post chirurgica
- dolore muscolo-scheletrico
- colpo di frusta
- strappi
- radicolopatia

STRUTTURA

- bivalve realizzata in plastica semirigida con imbottitura in tessuto accoppiato a celle aperte con monospugna all'interno e vellutino grappante all'esterno latex free

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

NOTE

- utilizzabile durante esami RX e MRI

MISURE

Taglie*	Peso	Altezza
PD1	5-13 Kg	53-84 cm
PD2	10-15 kg	74-94 cm
PD3	11-16 kg	84-102 cm
PD4	12-19 kg	89-114 cm
PD5	19-25 kg	94-122 cm

MD

*identificare la taglia sulla base dei due parametri, peso e altezza.

Codice d'ordine: ASPEN KIDZ

COLLARE CERVICALE BIVALVE CON IMMOBILIZZAZIONE TORACICA PEDIATRICO (MINERVA)



INDICAZIONI

Tutore pediatrico destinato alla limitazione del movimento del rachide cervicale. Utile nei casi di:

- procedura decompressiva
- gestione della frattura
- cefalea cervicale
- sindrome del disco cervicale
- stabilizzazione post chirurgica
- dolore muscolo-scheletrico
- colpo di frusta
- strappi
- radicolopatia

STRUTTURA

- bivalve in plastica rigida con imbottitura in tessuto accoppiato a celle aperte con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno latex free, asta toracica e dorsale in alluminio

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo con fibbie

NOTE

- utilizzabile durante esami RX e MRI

TAGLIA UNICA VALIDA PER LE MISURE

MD

Taglie*	Peso	Altezza
PD4	12-19 Kg	89-114 cm
PD5	19-25 kg	94-122 cm

Il collare contiene al suo interno il pannello frontale PD4 e PD5

*identificare la taglia sulla base del Collare Aspen Pediatric

Codice d'ordine: ASPEN CTO KIDZ



FGP

Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment





TRONCO

TRONCO

I-35 TOP

**IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI
BASCULANTE TELESCOPICO**

NUOVO



Pelota sternale
snodabile

Sistema di regolazione
telescopica

INDICAZIONI

Tutore destinato alla limitazione del range di movimento del tratto di colonna vertebrale compreso tra D10 ed L3, quando richiesto nel trattamento di stati patologici di natura ortopedica del tronco, come ad esempio:

- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile

BANDA PELVICA

- basculante

SPINTA STERNALE

- fissa dotata di pelota snodabile di ridotte dimensioni

STRUTTURA

- scatolata in alluminio ed imbottiture spessorate antiscivolo a contatto pelle e grippanti esternamente
- regolazione telescopica dell'altezza e della larghezza sternale e del bacino

PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura a strappo
- realizzata con imbottitura in materiale accoppiato con scarico vertebrale e ulteriore sistema di stecche in alluminio modellabile
- disponibile in 3 misure

NOTE

- predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia
- a richiesta è possibile l'inserimento della doppia fibbia autobloccante per la cintura a strappo

MISURE

Taglie	Ø Bacino
XS	45–60 cm
S	60–80 cm
M	80–110 cm
L	110–130 cm

Altezza I35T-100N standard
I35T-090N short

Codici d'ordine: I35T-100N; I35T-090N

MD



La tg XS è
utilizzabile anche
dai bambini

F35 POWER

**IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI
BASCULANTE CON BANDA PELVICA BLOCCABILE**

NUOVO



Pelota sternale
snodabile

INDICAZIONI

Tutore destinato alla limitazione del range di movimento del tratto di colonna vertebrale compreso tra D10 ed L3, quando richiesto nel trattamento di stati patologici di natura ortopedica del tronco, come ad esempio:

- cedimenti somatici (traumatici e non)
- cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile

BANDA PELVICA

- basculante con possibilità di blocco nel punto di massima estensione (30°)

SPINTA STERNALE

- fissa dotata di pelota snodabile imbottita con rivestimento in materiale idrorepellente

STRUTTURA

- in alluminio con regolazione telescopica dell'altezza
- imbottiture rivestite in materiale spalmato idrorepellente, le imbottiture laterali sono fissate mediante viti in tecnopolimero

PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura a strappo
- realizzata con imbottitura maggiorata e scarichi paravertebrali con rivestimento in materiale idrorepellente
- posizionabile sia orizzontalmente che verticalmente

NOTE

- predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia
- il tutore è idrorepellente, pertanto idoneo anche in caso di riabilitazione in acqua
- a richiesta è possibile l'inserimento della doppia fibbia autobloccante per la cintura a strappo

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
MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60–75 cm
M	76–90 cm
L	91–105 cm
XL	106–115 cm

Altezza F35P-100N standard
F35P-090N short

Codici d'ordine: F35P-100N; F35P-090N

MD



NUOVO

**INDICAZIONI**

Tutore destinato alla limitazione del range di movimento del tratto di colonna vertebrale compreso tra D10 ed L3, quando richiesto nel trattamento di stati patologici di natura ortopedica del tronco, come ad esempio:

- cedimenti somatici (traumatici e non)
- cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile

BANDA PELVICA

- basculante

SPINTA STERNALE

- fissa dotata di pelota con rivestimento in similpelle snodabile imbottita

STRUTTURA

- in alluminio
- imbottiture realizzate in polietilene a bassa densità e rivestimento in similpelle
- la cintura di chiusura è dotata di un ulteriore doppia fibbia autobloccante di sicurezza

PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura a strappo
- realizzata con rivestimento in similpelle e dotata di imbottitura maggiorata e scarichi paravertebrali
- orientabile sia orizzontalmente che verticalmente

NOTE

- predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia

NUOVO

**INDICAZIONI**

Tutore destinato alla limitazione del range di movimento del tratto di colonna vertebrale compreso tra D10 ed L3, quando richiesto nel trattamento di stati patologici di natura ortopedica del tronco, come ad esempio:

- cedimenti somatici (traumatici e non)
- cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile

BANDA PELVICA

- basculante

SPINTA STERNALE

- regolabile dotata di pelota pneumatica snodabile di dimensioni ridotte

STRUTTURA

- in alluminio
- imbottiture realizzate in polietilene a bassa densità e rivestimento in similpelle
- possibilità di regolazione sternale
- la cintura di chiusura è dotata di un ulteriore doppia fibbia autobloccante di sicurezza

PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura a strappo
- realizzata con rivestimento in similpelle e dotata di imbottitura maggiorata e scarichi paravertebrali
- orientabile sia orizzontalmente che verticalmente

NOTE

- predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia
- possibilità di regolazione dell'appoggio sternale

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60-75 cm
M	76-90 cm
L	91-105 cm
XL	106-115 cm
XXL	116-130 cm

MD



Altezza F35-100N, F35T-100N standard
F35-090N, F35T-090N short


Disponibile in versione light: F35T-100N; F35T-090N

Codici d'ordine: F35-100N; F35-090N

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60-75 cm
M	76-90 cm
L	91-105 cm
XL	106-115 cm
XXL	116-130 cm

MD

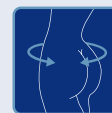

Altezza F35TR-100N standard
F35TR-090N short

Codici d'ordine: F35TR-100N; F35TR-090N

G35-100

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI FISSO



INDICAZIONI

Tutore destinato alla limitazione del range di movimento del tratto di colonna vertebrale compreso tra D10 ed L3, quando richiesto nel trattamento di stati patologici di natura ortopedica del tronco, come ad esempio:

- cedimenti somatici (traumatici e non)
- cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile

BANDA PELVICA

- fissa

SPINTA STERNALE

- fissa dotata di pelota in similpelle imbottita

STRUTTURA

- in alluminio
- imbottiture in similpelle e materiale espanso

PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura a strappo
- realizzata in similpelle
- orientabile sia orizzontalmente che verticalmente

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60–75 cm
M	76–90 cm
L	91–105 cm
XL	106–115 cm

Altezza G35-100 standard
G35-090 short

Codici d'ordine: G35-100; G35-090

MD



F35 TRICONTROL PLUS

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI BASCULANTE TELESCOPICO



INDICAZIONI

Tutore destinato alla limitazione del range di movimento del tratto di colonna vertebrale compreso tra D10 ed L3, quando richiesto nel trattamento di stati patologici di natura ortopedica del tronco, come ad esempio:

- cedimenti somatici (traumatici e non)
- cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile

BANDA PELVICA

- basculante con possibilità di blocco nel punto di massima estensione

SPINTA STERNALE

- fissa con struttura in alluminio con effetto a molla, snodabile, di piccole dimensioni, con imbottitura in poliuretano e rivestimento in tessuto Sensitive® Fabrics

STRUTTURA

- in alluminio anodizzato con regolazione telescopica dell'altezza e della larghezza ascellare
- imbottiture in poliuretano con rivestimento in tessuto Sensitive® Fabrics
- possibilità di regolazione sternale

PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura ritagliabile dotata di pinzetta a strappo, dotata di fibbia a doppio passaggio per il bloccaggio della stessa
- realizzata con imbottitura in poliuretano con scarichi vertebrali e rivestimento in tessuto Sensitive® Fabrics
- sistema di aggancio a strappo che permette un posizionamento sia verticale che orizzontale

MISURE


Taglie	Ø Bacino
XS	60–75 cm
S	76–90 cm
M	91–105 cm
L	106–115 cm
XL	116–125 cm

Altezza F35 TRI-100 standard
F35 TRI-090 short

Codici d'ordine: F35TRI-100; F35TRI-090

MD



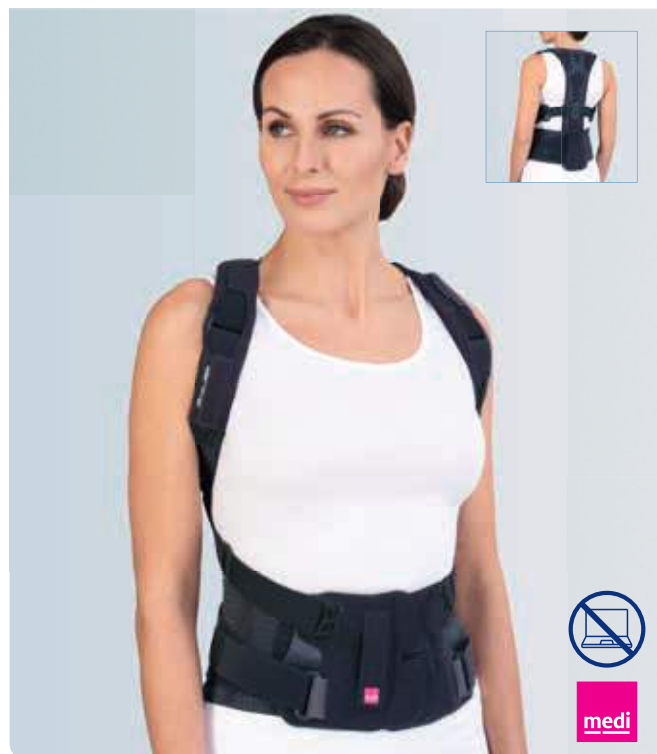

INDICAZIONI

Tutte le indicazioni in cui è necessario uno scarico e/o una correzione del rachide lombare/toracico nonché una limitazione del movimento sul piano sagittale, come ad es.:

- fratture da fragilità ossea, indotta da osteoporosi a carico del rachide dorsale e lombare
- malattia di Scheuermann o cifosi giovanile
- cifosi dorsolombare con mal di schiena cronico

STRUTTURA

- barra posteriore brevettata in alluminio modellabile contenuta in una tasca in morbido tessuto di vellutino accoppiato

TIRANTI


- 2 tiranti personalizzabili che si agganciano alle fibbie presenti sulla patella anteriore
- il tirante ascellare è dotato di morbida imbottitura e stecca-guida per facilitare l'indosso e della spinta posteriore regolabile anti-assuefazione
- ampio tirante lombare

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo

NOTE

- si indossa come uno zainetto

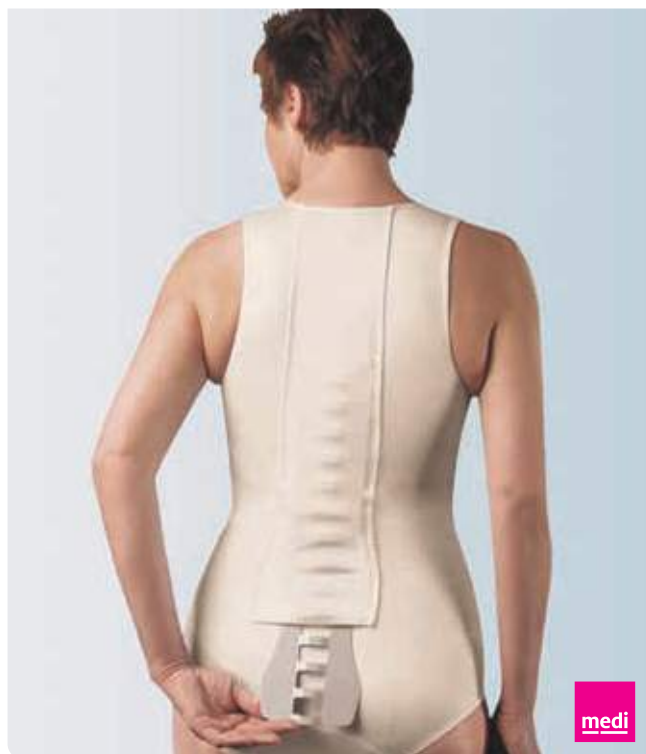

INDICAZIONI

Il suo uso è indicato in tutte le situazioni in cui sono necessari uno scarico e/o una correzione della colonna lombare/toracica nonché una limitazione del movimento sul piano sagittale, ad es.:

- frattura osteoporotica delle vertebre toraciche e/o lombari
- morbo di Scheuermann
- ipercifosi con dolore cronico

STRUTTURA

- barra posteriore brevettata in alluminio modellabile contenuta in un modellatore in materiale elastico realizzato su misura

TIRANTI

- nessuno

CHIUSURA ANTERIORE

- con cerniera

NOTE

- discreto sotto gli abiti e personalizzato

MISURE

Taglie	H Tronco	H asta	Codici d'ordine
XS	fino a 43 cm	39 cm	5669081005
S	44-49 cm	42 cm	5669082005
M	50-55 cm	47 cm	5669083005
L	56-61 cm	52 cm	5669084005
XL	61-67 cm	57 cm	5669085005



MD

MISURE

Prodotto personalizzato
Richiedere la scheda per la corretta presa misure

MD

Altezza su misura

Codice d'ordine: M700

ASPEN TRI-POINT FSO®

ORTESI FRONTALE SAGITTALE

STABILITYSILVER

CORSETTO LOMBARE SEMIRIGIDO
CON FILO D'ARGENTO

TRONCO



INDICAZIONI

Tutore destinato al trattamento dei sintomi relativi alla scoliosi negli adulti.

STRUTTURA

- materiale anelastico con struttura alveolata traspirante e zone a strappo

TIRANTI

- due, con meccanismo brevettato a carrucola SlickTrack™ System

STECCATURA

- asta di sostegno laterale, regolabile, dotata di accessori

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, morbida

MISURE

Taglia unica

MD

Altezza corsetto 25 cm

Codice d'ordine: 3POINT-ASPEN



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto lombare della colonna.

Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto D12 - S1 della colonna, come ad esempio:

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocruralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare

STRUTTURA

- tessuto elastico, altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggior comfort

TIRANTI

- 4 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, solamente le 2 stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarriccamento

MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm

Altezza 37 cm

Codice d'ordine: LSIL-300

MD





INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto lombare della colonna.

Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto L1 - S1 della colonna, come ad esempio:

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare

STRUTTURA

- tessuto elastico, altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggior comfort

TIRANTI

- 3 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, solamente le 2 stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto lombare della colonna.

Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto D12 - S1 della colonna, come ad esempio:

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocuralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare

STRUTTURA

- tessuto elastico, altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggior comfort

TIRANTI

- 4 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, solamente le 2 stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm

Altezza 27 cm

Codice d'ordine: LSIL-050

MD



MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm

Altezza 33 cm

Codice d'ordine: LSIL-100

MD



DORSOSILVER EVO

CORSETTO SEMIRIGIDO CON SPALLACCI
E FILO D'ARGENTO



DORSOSILVER
EVO SHORT

INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione e sostegno attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto dorso-lombare della colonna. Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto D4 - S1 della colonna, come ad esempio:

- dorsalgie e lumbalgie (acute e croniche)
- esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
- dorso curvo
- post operatorio interventi discectomia
- esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- cedimenti somatici su base osteoporotica

STRUTTURA

- tessuto elastico Sensitive® Fabrics, altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggior comfort

TIRANTI

- 4 fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti
- sistema Double X Pro con incrocio posteriore e spallacci contrapposti imbottiti sagomati per un migliore comfort

STECCATURA

- 2 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm

MD



**DORSOSILVER
EVO SHORT**

Altezza 54 cm

Altezza 47 cm

Codici d'ordine: DSIL-150 (normale); DSIL-150 SH (short)

BACKSILVER EVO

CORSETTO SEMIRIGIDO CON FILO D'ARGENTO,
SPALLACCI E ASTA DI SOSTEGNO



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione e sostegno attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto dorso-lombare della colonna. Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto D4 - S1 della colonna, come ad esempio:

- dorsalgie e lumbalgie (acute e croniche)
- dorsalgie e lumbalgie di tipo meccanico
- esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
- dorso curvo
- supporto nella gestione di localizzazioni metastatiche vertebrali dorso-lombari
- post operatorio interventi discectomia
- coadiuvante nel postoperatorio di interventi correttivi per scoliosi
- esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- cedimenti somatici su base osteoporotica
- spondililiscoartrosi dorso-lombare

STRUTTURA

- tessuto elastico, altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggior comfort
- patella anteriore di dimensioni ridotte
- sacca porta asta dotata di imbottitura di protezione

TIRANTI

- 2 tiranti elastici che si agganciano anteriormente in un unico tirante
- sistema di spallacci Double X Pro con doppio incrocio posteriore e spallacci sagomati per un migliore comfort

STECCATURA

- 2 stecche in acciaio armonico removibili
- 1 asta sagomata in alluminio modellabile ed estraibile

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm

MD



Altezza 54 cm

Codice d'ordine: DBSIL-150



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto lombare della colonna.

Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto D12 - S1 della colonna, come ad esempio:

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocuralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare

STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico altamente traspirante, conformato anatomicamente

TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, le due stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

NOTE

- in dotazione vengono fornite 2 stecche aggiuntive di rinforzo
- dotato di appositi fermatiranti per facilitare il posizionamento



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto lombare della colonna.

Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto D12 - S1 della colonna, come ad esempio:

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocuralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare

STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico altamente traspirante, conformato anatomicamente

TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, le due stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

NOTE

- in dotazione vengono fornite 2 stecche aggiuntive di rinforzo
- dotato di appositi fermatiranti per facilitare il posizionamento

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm

MD



Altezza LFU-600 36 cm
LFD-610 38 cm

Codici d'ordine: LFU-600 (uomo); LFD-610 (donna)

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm

MD



Altezza 33 cm

Codici d'ordine: LFU-500 (uomo); LFD-510 (donna)



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto lombare della colonna.

Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto D12 - S1 della colonna, come ad esempio:

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocuralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare

STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico traspirante

TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, le due stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo con maniglia per paziente artrosico

NOTE

- in dotazione vengono fornite 2 stecche aggiuntive di rinforzo



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione e sostegno attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto dorso-lombare della colonna.

Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto D4 - S1 della colonna, come ad esempio:

- dorsalgie e lombalgie (acute e croniche)
- esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
- dorso curvo
- post operatorio interventi discectomia
- esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- cedimenti somatici su base osteoporotica

STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico altamente traspirante, conformato anatomicamente

TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti
- spallacci sagomati e imbottiti dotati di sistema modulare di regolazione della spinta che si agganciano anteriormente in un tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, le due stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

NOTE

- in dotazione vengono fornite 2 stecche aggiuntive di rinforzo
- dotato di appositi fermatiranti per facilitare il posizionamento

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm
XXXL	-	131-141 cm
XXXXL	-	141-151 cm

Altezza LFU-100 36 cm
LFD-110 38 cm

Codici d'ordine: LFU-100 (uomo); LFD-110 (donna)

MD



MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm
XXXL	136-146 cm	-

Altezza 55 cm

Codici d'ordine: DFU-700 (uomo); DFD-710 (donna)

MD





INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione e sostegno attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto dorso-lombare della colonna.

Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto D4 - S1 della colonna, come ad esempio:

- dorsalgie e lumbalgie (acute e croniche)
- esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
- dorso curvo
- post operatorio interventi discectomia
- esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- cedimenti somatici su base osteoporotica

STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico traspirante

TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti
- spallacci imbottiti dotati di sistema modulare di regolazione che si agganciano anteriormente in un tirante

STECCATURA


- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, le due stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo con maniglia per paziente artrosico

NOTE

- in dotazione vengono fornite 2 stecche aggiuntive di rinforzo

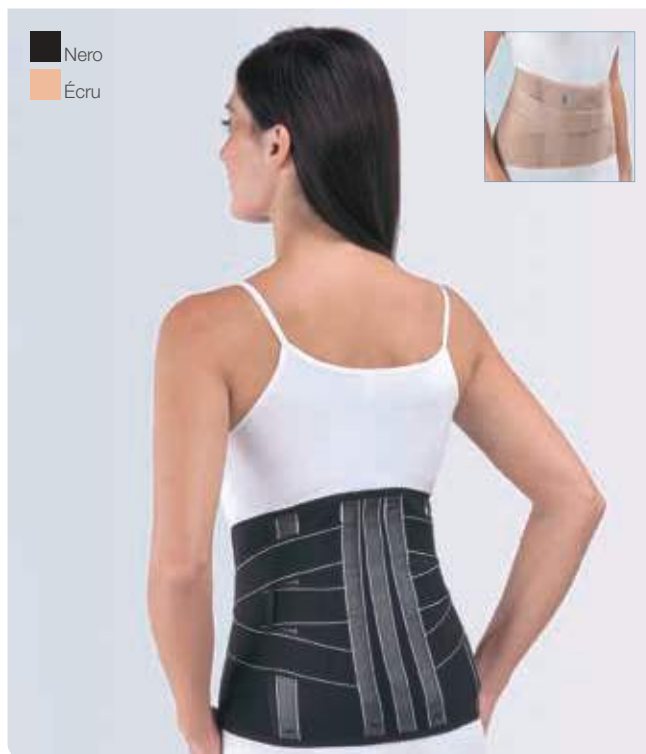

■ Nero
■ Écru

INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto lombare della colonna.

Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto L1 - S1 della colonna, come ad esempio:

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare

STRUTTURA

- tessuto Sensitive® Fabrics che conferisce elasticità, leggerezza, traspirabilità ed aderenza

TIRANTI

- tre fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, morbida

NOTE

- dotato di fermatiranti a strappo per facilitare il posizionamento

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm
XXXL	136-146 cm	-
XXXXL	146-156 cm	-

Altezza 55 cm

Codici d'ordine: DFU-200 (uomo); DFD-210 (donna)

MD



MISURE

Taglie	Ø Bacino
XS	70-80 cm
S	80-90 cm
M	90-100 cm
L	100-110 cm
XL	110-120 cm
XXL	120-130 cm

Altezza 28 cm

Codici d'ordine: INC-100 (nero); INC-101 (écru)

MD



IN-CROSS 33

CORSETTO ELASTICO



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto lombare della colonna.

Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto D12 - S1 della colonna, come ad esempio:

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocuralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare

STRUTTURA

- tessuto Sensitive® Fabrics che conferisce elasticità, leggerezza, traspirabilità ed aderenza

TIRANTI

- quattro fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, morbida

NOTE

- dotato di fermatiranti a strappo per facilitare il posizionamento

MISURE

Taglie	Ø Bacino
XS	70-80 cm
S	80-90 cm
M	90-100 cm
L	100-110 cm
XL	110-120 cm
XXL	120-130 cm

Altezza 33 cm

Codici d'ordine: INC-200 (nero); INC-201 (écru)

MD



PLURIVAL

CORSETTO ELASTICO TRAFORATO



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto lombare della colonna.

Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto L1 - S1 della colonna, come ad esempio:

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- traumi lievi del rachide lombare

STRUTTURA

- tessuto semirigido traforato jaquard

TIRANTI

- due fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, con patella ridotta e sagomata

NOTE

- particolarmente adatto nella prevenzione e nelle attività quotidiane

MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm

Altezza 20 cm

Codice d'ordine: PLU-100

MD



**INDICAZIONI**

Tutore destinato alla stabilizzazione attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto lombare della colonna.

Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto L1 - S1 della colonna, come ad esempio:

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- traumi lievi del rachide lombare

STRUTTURA

- tessuto semirigido traforato jaquard, sagomata anatomicamente

TIRANTI

- nessuno

STECCATURA


- 4 stecche posteriori in acciaio presagomate, non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, con patella ridotta

NOTE

- particolarmente adatto alla silhouette femminile

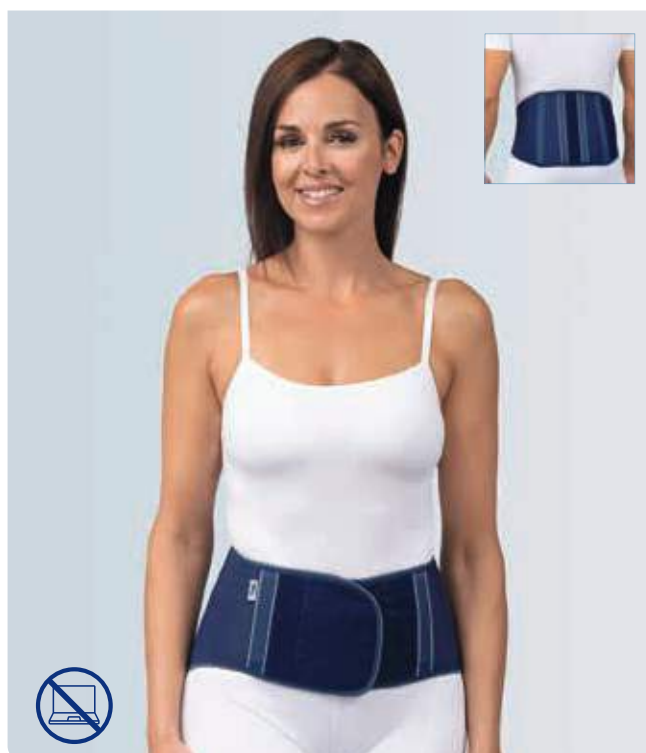**INDICAZIONI**

Tutore destinato alla stabilizzazione attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto lombare della colonna.

Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto L1 - S1 della colonna, come ad esempio:

- lombalgia lieve
- lombosciatalgia
- traumi lievi del rachide lombare
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare

STRUTTURA

- tessuto elastico, sagomata anatomicamente

TIRANTI

- nessuno

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante e 2 anteriori non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, con patella ridotta e sagomata

MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm

MD



Altezza 25 cm

Codici d'ordine: GLA-100 (nero/nero); GLA-200 (nero/skin)

MISURE

Taglie	Ø Vita
S	62-74 cm
M	75-88 cm
L	89-103 cm
XL	104-120 cm

MD



Altezza 24 cm

Codice d'ordine: ALL-100

ALLEVIA PLUS

CORSETTO ELASTICO CON TIRANTI



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto lombare della colonna.

Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto L1 - S1 della colonna, come ad esempio:

- lombalgia lieve
- lombosciatalgia
- traumi lievi del rachide lombare
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare

STRUTTURA

- tessuto elastico, sagomata anatomicamente

TIRANTI

- 2 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante e 2 anteriori non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, con patella ridotta e sagomata

MISURE

Taglie	Ø Vita
S	62-74 cm
M	75-88 cm
L	89-103 cm
XL	104-120 cm

Altezza 24 cm

Codice d'ordine: ALL-101

MD



HORIZON 627

CORSETTO SEMIRIGIDO LOMBOSACRALE CON SISTEMA DI TIRANTI A CARRUCOLA



INDICAZIONI

Tutore destinato alla limitazione del movimento e alla stabilizzazione della colonna vertebrale lombare-sacrale. Utile nei casi di: supporto postoperatorio, muscolatura del tronco decondizionata, sindrome post laminectomia, procedure di decompressione chirurgica, procedure di decompressione non chirurgiche, malattia degenerativa del disco, gonfiore o ernia del disco, dolore lombare non specifico, dolore lombare cronico, gestione delle fratture, spondilolisi, spondilolistesi, stenosi spinale, stiramenti dei legamenti/strati muscolari, spondilosi (osteoartrosi/malattia degenerativa delle articolazioni), sindrome di Facet, disfunzione dell'articolazione, sacroileite, radiculopatia, iniezioni, ablazione a radiofrequenza, atrofia muscolare lombare multifido.

STRUTTURA

- materiale anelastico con struttura alveolata traspirante e zone a strappo

TIRANTI

- due, con sistema SlickTrack™ System

STECCATURA

- nessuna

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, morbida

MISURE

Taglia unica (da 60 a 130 cm)

Altezza posteriore 23 cm

Codice d'ordine: HORI-627

MD



INDICAZIONI

Tutore destinato alla limitazione del movimento e alla stabilizzazione della colonna vertebrale lombare-sacrale. Utile nei casi di: supporto postoperatorio, muscolatura del tronco decondizionata, sindrome post laminectomia, procedure di decompressione chirurgica, procedure di decompressione non chirurgiche, malattia degenerativa del disco, gonfiore o ernia del disco, dolore lombare non specifico, dolore lombare cronico, gestione delle fratture, spondilolisi, spondilolistesi, stenosi spinale, stiramenti dei legamenti/strati muscolari, spondilosi (osteoartrosi/malattia degenerativa delle articolazioni), sindrome di Facet, disfunzione dell'articolazione, sacroileite, radiculopatia, iniezioni, ablazione a radiofrequenza, atrofia muscolare lombare multifido.

STRUTTURA

- tessuto grippante anelastico per una maggiore efficacia

TIRANTI

- due, con meccanismo brevettato a carrucola SlickTrack™ System

STECCATURA

- nessuna

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, morbida



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto lombare della colonna.

Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto L1 - S1 della colonna, come ad esempio:

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- traumi lievi del rachide lombare

STRUTTURA

- tessuto semirigido con particolare trama areata altamente traspirante

TIRANTI

- due fasce anelastiche che dalla steccatura posteriore si incrociano creando un effetto a carrucola e si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in polietilene flessibile non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo con pelota addominale in polietilene rigida removibile

NOTE

- particolarmente adatto nella prevenzione e nelle attività quotidiane

MISURE

Taglie	Ø Bacino
XS	53-69 cm
S	66-79 cm
M	79-91 cm
L	91-107 cm
XL	104-122 cm
XXL	109-132 cm



Altezza posteriore 22 cm

Codice d'ordine: ASPEN-LUMBSUP

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	68-85 cm
M	80-100 cm
L	95-120 cm
XL	115-135 cm



Altezza 20 cm

Codice d'ordine: PRT-T1

CORSETTO ELASTICO DOUBLE SKIN
CON TIRANTI REMOVIBILI

CORSETTO SEMIRIGIDO MILLERIGHE



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto lombare della colonna.

Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto L1 - S1 della colonna, come ad esempio:

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- traumi lievi del rachide lombare

STRUTTURA

- tessuto in lycra elastica traspirante accoppiato con membrana idrofilica, realizzato senza cuciture

TIRANTI

- due fasce elastiche saldate alla pelota posteriore totalmente removibile si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo

NOTE

- la patella anteriore è dotata di maniglia interna per facilitare la chiusura, il tirante removibile permette di modulare il tutore in base al percorso terapeutico del paziente

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	65-79 cm
M	80-94 cm
L	95-109 cm
XL	110-124 cm
XXL	125-140 cm

Altezza 2S-200, 2S-201 27 cm
2S-250, 2S-251 24 cm

Codici d'ordine: 2S-200 (skin); 2S-250 (skin);
2S-201 (grigio); 2S-251 (grigio)

MD



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto lombare della colonna.

Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto L1 - S1 della colonna, come ad esempio:

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- traumi lievi del rachide lombare

STRUTTURA

- tessuto elastico millerighe semirigido con sistema di trazione lombare a diamante

TIRANTI

- nessuno

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo

MISURE

Taglie	Ø Vita
S	60-74 cm
M	75-89 cm
L	90-104 cm
XL	105-119 cm
XXL	120-135 cm

Altezza 27 cm

Codice d'ordine: CRM-900

MD





INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto lombare della colonna.

Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto L1 - S1 della colonna, come ad esempio:

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare

STRUTTURA

- tessuto elastico millerighe semirigido traspirante

TIRANTI

- due fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si incrociano e si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto lombare della colonna.

Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto L1 - S1 della colonna, come ad esempio:

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare

STRUTTURA

- tessuto elastico

TIRANTI

- nessuno

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo

NOTE

- incrocio posteriore coadiuvante nell'efficacia della distrazione vertebrale

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60-74 cm
M	75-89 cm
L	90-104 cm
XL	105-119 cm
XXL	120-135 cm

Altezza 27 cm

Codice d'ordine: CRM-950




MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	70-85 cm
M	80-95 cm
L	90-105 cm
XL	100-115 cm
XXL	oltre 116 cm

Altezza 27 cm

Codici d'ordine: CRL-300 (nero); CRL-301 (écru)

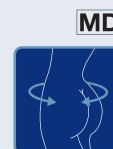

CRL 350

CORSETTO ELASTICO CON TIRANTI



■ Nero
■ Écru

INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto lombare della colonna.

Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto L1 - S1 della colonna, come ad esempio:

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare

STRUTTURA

- tessuto elastico

TIRANTI

- due fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si incrociano e si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	70-85 cm
M	80-95 cm
L	90-105 cm
XL	100-115 cm
XXL	oltre 116 cm

Altezza 27 cm

Codici d'ordine: CRL-350 (nero); CRL-351 (écru)

MD



LUMBAMED® BASIC

CORSETTO LOMBARE CON STECCHE DI STABILIZZAZIONE



INDICAZIONI

Il suo uso è indicato in tutte le situazioni in cui è necessaria una stabilizzazione della colonna lombare, ad es.:

- lombalgia
- insufficienza muscolare
- dolore nel tratto lombosacrale

STRUTTURA

- materiale latex-free, traspirante, elastico e morbido all'interno con fibre di eucalipto
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort

TIRANTI

- nessuno

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio da modellare e removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo con maniglia per paziente artrosico
- bordo superiore e inferiore della patella pieghevole


MISURE

Taglie	Ø Bacino Donna 663	Ø Vita Uomo 664
1°	76-86 cm	66-76 cm
2°	87-98 cm	77-88 cm
3°	99-111 cm	89-101 cm
4°	112-125 cm	102-115 cm
5°	126-140 cm	116-130 cm

Altezza M663 27 cm
M664 26 cm

Codici d'ordine: M663 DONNA; M664 UOMO

MD

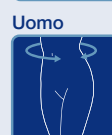



INDICAZIONI

Il suo uso è indicato in tutte le situazioni in cui è necessaria una stabilizzazione della colonna lombare attraverso una ridistribuzione della pressione tramite un cuscinetto dorsale, ad es.:

- lombalgie
- squilibri delle capacità motorie-muscolari nella regione lombare

STRUTTURA

- materiale latex-free, traspirante, elastico e morbido all'interno con fibre di eucalipto
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- pelota posteriore in silicone con superficie massaggiante in 3D dotata di copertura in morbido tessuto traspirante, removibile

TIRANTI

- nessuno

STECCATURA

- 2 stecche posteriori a spirale

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo con maniglia per paziente artrosico
- bordo superiore e inferiore della patella pieghevole



INDICAZIONI

Il suo uso è indicato in tutte le situazioni in cui è necessaria una stabilizzazione della colonna lombare attraverso una ridistribuzione della pressione tramite un cuscinetto dorsale, ad es.:

- lombalgie
- squilibri delle capacità motorie-muscolari nella regione lombare

STRUTTURA

- materiale latex-free, traspirante ed elastico con fibre di lana Merinos
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- pelota posteriore di silicone integrato con fibre di quarzo per un'azione massaggiante dotata di copertura in morbido tessuto traspirante, removibile

TIRANTI

- nessuno

STECCATURA

- 2 stecche a spirale posteriori

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo con maniglia per paziente artrosico
- bordo superiore e inferiore della patella pieghevole


MISURE

Taglie	Ø Bacino	Ø Vita
	Donna 669	Uomo 666
1°	76-86 cm	66-76 cm
2°	87-98 cm	77-88 cm
3°	99-111 cm	89-101 cm
4°	112-125 cm	102-115 cm
5°	126-140 cm	116-130 cm

Altezza M669 24 cm
M666 23 cm

Codici d'ordine: M669 DONNA; M666 UOMO

MD

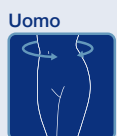


MISURE

Taglie	Ø Bacino donna	Ø Vita uomo
1°	76-86 cm	66-76 cm
2°	87-98 cm	77-88 cm
3°	99-111 cm	89-101 cm
4°	112-125 cm	102-115 cm
5°	126-140 cm	116-130 cm

Altezza 24 cm

Codice d'ordine: M670E

MD

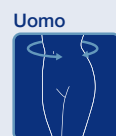

LUMBAMED® DISC

CORSETTO CON SISTEMA A PONTE CON FUNZIONE DI MOBILIZZAZIONE PROGRESSIVA



INDICAZIONI

Il suo uso è indicato in tutte le situazioni in cui è necessario uno scarico parziale tramite delordizzazione e successiva mobilitazione funzionale della colonna lombare, ad es.:

- protrusione discale, ernia del disco (trattamento conservativo, postoperatorio)
- sindrome dolorosa pseudoradicolare
- squilibri muscolari nella regione lombare
- lombalgia moderata
- lomboischialgia moderata

STRUTTURA

- materiale latex-free, traspirante, elastico e morbido all'interno con fibre di eucalipto
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort

TIRANTI

- 2 fasce elastiche agganciate al sistema a ponte che si fissano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio armonico da modellare

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo con maniglia per paziente artrosico
- bordo superiore e inferiore della patella pieghevole

NOTE

- sistema modulare per incrementare la mobilità

MISURE

Taglie	Ø Bacino	Ø Vita
	Donna 667	Uomo 668
1°	76–86 cm	66–76 cm
2°	87–98 cm	77–88 cm
3°	99–111 cm	89–101 cm
4°	112–125 cm	102–115 cm
5°	126–140 cm	116–130 cm

Altezza M667 35 cm
M668 37 cm

Codici d'ordine: M667 DONNA; M668 UOMO

MD

Donna



Uomo



LUMBAMED® SACRO

CORSETTO PER L'ARTICOLAZIONE SACRO-ILIACA



INDICAZIONI

Il suo uso è indicato in tutte le situazioni in cui è necessaria una stabilizzazione del bacino, ad es.:

- sindrome dell'articolazione ileosacrale
- instabilità dell'articolazione ileosacrale
- mialgie e tendinopatie nella regione del bacino
- instabilità del bacino
- in caso di miotendopatie recidivanti (m. rectus abdominis, m. piriformis)

STRUTTURA

- materiale latex-free, traspirante, elastico e morbido all'interno con fibre di eucalipto
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- design modulabile
- 2 cuscinetti massaggianti posteriori riposizionabili e removibili

TIRANTI

- 2 fasce elastiche per garantire migliore elasticità e aderenza con possibilità di essere removibili

STECCATURA

- nessuna

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo con maniglia

NOTE

- il corsetto permette la modulabilità sulla base del percorso terapeutico del paziente

MISURE

Taglie	Ø Bacino
1°	70–85 cm
2°	85–100 cm
3°	100–115 cm
4°	115–130 cm
5°	130–145 cm

Altezza 18 cm

Codice d'ordine: M680

MD



PELOTE STERNALI



A. PELOTA STERNALE CLASSICA

Di serie su **G35-100**

MISURE: piccola (S-M); grande (L-XL)

B. ART. 41 PELOTA STERNALE ELASTICA PNEUMATICA

Struttura in alluminio elastica con effetto a molla e imbottitura pneumatica. A richiesta posizionabile su tutti tranne G35-100 e F35 Tricontrol Plus (il prezzo potrebbe cambiare)

MISURE: taglia unica

C. ART. 43 PELOTA STERNALE

Struttura in alluminio con effetto elastico e basculante. A richiesta posizionabile su F35-100 e F35-100TR (il prezzo potrebbe cambiare)

MISURE: taglia unica

D. ART. 45 PELOTA STERNALE

Struttura in alluminio con effetto elastico e basculante. Di serie su I-35 TOP

MISURE: taglia unica

E. ART. 44 PELOTA STERNALE

Struttura in alluminio con effetto elastico e basculante. Di serie su F35 Power

MISURE: taglia unica

F. ART. 46 PELOTA STERNALE

Struttura in alluminio con effetto a molla, snodabile, di piccole dimensioni, con imbottitura in poliuretano e rivestimento in tessuto Sensitive® Fabrics.

Di serie su **F35 Tricontrol Plus**

MISURE: piccola (XS-S-M); grande (L-XL)

PELOTE DORSALI



G. CF2-N CUSCINO LOMBOSACRALE

Cuscino lombosacrale anatomico con asta in alluminio modellabile

MISURE: piccola (S-M); grande (L-XL)

H. PELOTA DORSALE CLASSICA

Di serie su **G35-100**

MISURE: piccola (S); media (M-L); grande (XL)

I. ART. 44 PELOTA DORSALE

Con imbottitura e scarichi vertebrali

Posizionabile su **F35-100** e **F35-100TR**

MISURE: piccola (S); grande (M-L-XL)

COLORE: bianco o grigio (per F35P-100)

L. PELOTE DORSALI

Di serie su **I-35 TOP**

MISURE: piccola (XS)

media (S-M-L per I-35 TOP SHORT e S-M per I-35 TOP)

grande (L)

M. PELOTE DORSALI

Di serie su **F35 Tricontrol Plus**

CHIUSURE



N. CHIUSURA B. FAST

Codice d'ordine: **SP-TBF**

In colore bianco o grigio



O. CHIUSURA PGS

Codice d'ordine: **SP-TPGS**

In colore bianco o grigio



P. CHIUSURA C. FAST & SAFE

Codice d'ordine: **SP-TFS**





Q. CHIUSURA C. EASY RING

Codice d'ordine: **SP-TCRIN**



MAGLIA POSTURALE CON CERNIERA

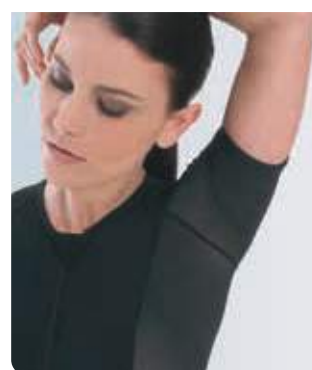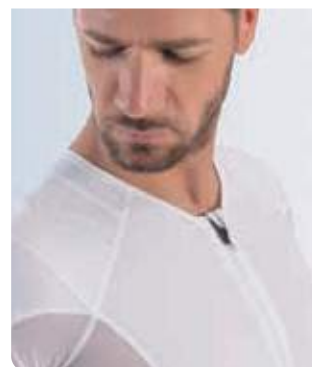

TRONCO

INDICAZIONI

Tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tronco mediante stimolazione meccanica neuromuscolare del tronco, come ad esempio:

- dorso curvo non strutturato
- iperlordosi non strutturata
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonoatrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann e nella correzione di vizi posturali
- coadiuvante nel dolore da dorso curvo strutturato
- esiti fratture clavicolari

STRUTTURA

- combinazione di tessuto elastico di base in Sensitive® Fabrics associato a fasce di tensionamento toraco-dorsali in materiale anelastico
- rete traspirante nella zona sottoascellare
- rifinita con silicone sul bordo inferiore e strisce a livello scapolare

CHIUSURA

- con zip



MISURE DONNA

Taglie	Ø Seno	Ø Vita
XS	82-87 cm	64-69 cm
S	88-93 cm	70-75 cm
M	94-99 cm	76-81 cm
L	100-105 cm	82-87 cm
XL	106-111 cm	88-93 cm



MISURE UOMO

Taglie	Ø Torace	Ø Vita
S	92-97 cm	82-87 cm
M	98-103 cm	88-93 cm
L	104-109 cm	94-99 cm
XL	110-115 cm	100-105 cm
XXL	116-121 cm	106-111 cm



Nel caso in cui le due misure (seno/vita o torace/vita) rientrino in due taglie diverse, scegliere sempre la tg. più grande.

Codici d'ordine:

PXT-SHIRTW (colore nero donna); PXT-SHIRT M (colore nero uomo); PXT-SHIRT B W (colore bianco donna); PXT-SHIRT B M (colore bianco uomo)

**INDICAZIONI**

Tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tronco mediante stimolazione meccanica neuromuscolare del tronco, come ad esempio:

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia del “capo integrale” ovvero una assenza totale di cuciture per un comfort e vestibilità ottimali; il filato usato “Nilit Breeze®” garantisce la sensazione di freschezza sulla pelle
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- zona pettorale e sottoascellare a rete

CHIUSURA

- senza zip

**MISURE (UNISEX)**

Taglie	Ø Seno/Torace
XS	80–88 cm
S	88–96 cm
M	96–104 cm
L	104–112 cm
XL	112–122 cm

MD



Codici d'ordine: PPS-TECH B (bianca); PPS-TECH N (nera)

MAGLIA POSTURALE SEAMLESS



TRONCO

INDICAZIONI

Tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tronco mediante stimolazione meccanica neuromuscolare del tronco, come ad esempio:


- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
- filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
- trattamento termo-regolatore HEIQ SMART TEMP e per una maggior sensazione di freschezza HEIQ PURE
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- struttura tridimensionale a livello lombare per portare esternamente il sudore e mantenere la zona asciutta
- tramatura a rete nella zona sottoascellare
- scollatura per un maggior comfort

CHIUSURA


- senza zip

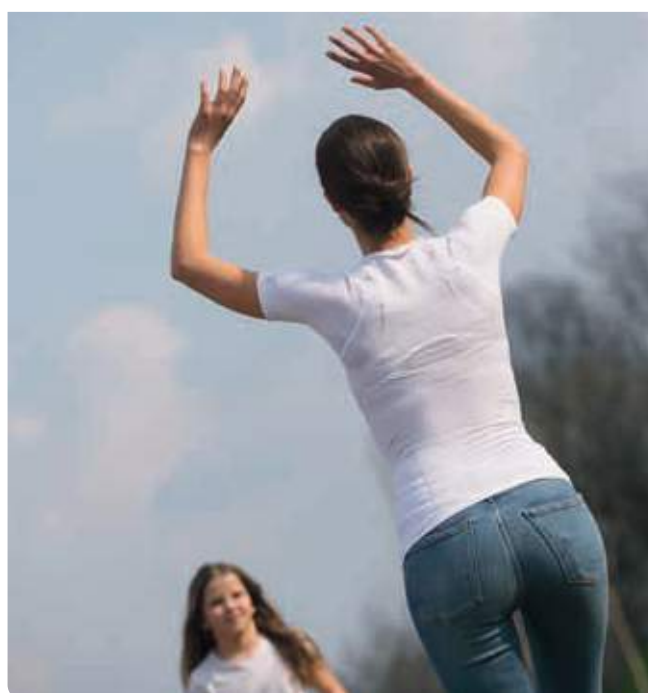

MISURE (UNISEX)

Taglie	Ø Seno/Torace
1°	80-95 cm
2°	95-110 cm
3°	110-125 cm

MD

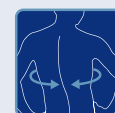


Codici d'ordine: PPS-EFFECT B (bianca); PPS-EFFECT N (nera)

P+ PERFECT ZIP

MAGLIA POSTURALE SEAMLESS

TRONCO

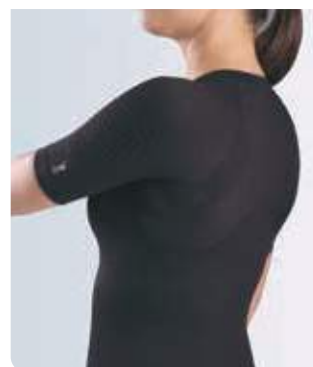

INDICAZIONI

Tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tronco mediante stimolazione meccanica neuromuscolare del tronco, come ad esempio:


- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotono-trofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
- filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
- trattamento termo-regolatore HEIQ SMART TEMP e per una maggior sensazione di freschezza HEIQ PURE
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- struttura tridimensionale a livello lombare per portare esternamente il sudore e mantenere la zona asciutta
- tramatura a rete nella zona sottoascellare
- scollatura per un maggior comfort

CHIUSURA

- con zip

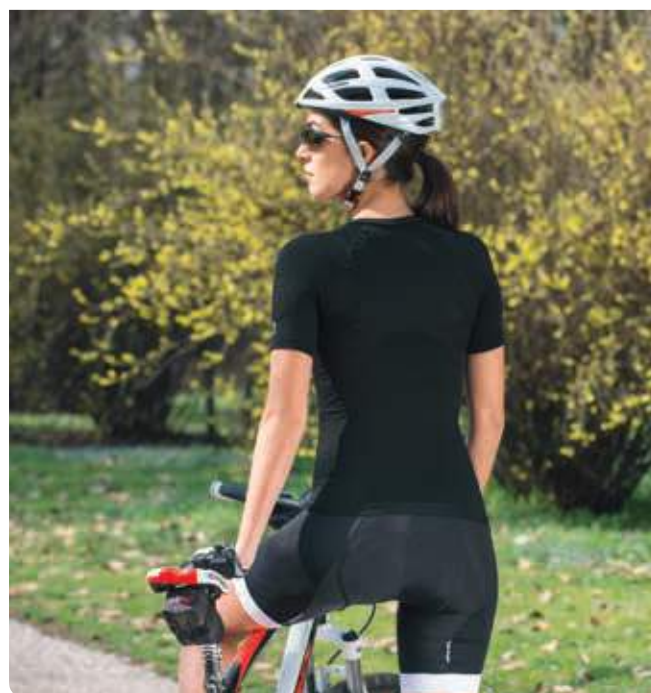

MISURE (UNISEX)

Taglie	Ø Seno/Torace
1°	80-95 cm
2°	95-110 cm
3°	110-125 cm

MD



Codici d'ordine: PPS-PZIP B (bianca); PPS-PZIP N (nera)



INDICAZIONI

Tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tronco e sostegno del seno mediante stimolazione meccanica neuromuscolare, come ad esempio:

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

STRUTTURA

- realizzato con tecnologia WholeGarment®, ovvero assenza totale di cuciture, con filo Nilit® Breeze per una sensazione di freschezza sulla pelle
- particolare tramatura nella zona interscapolare
- bordo inferiore morbido ed elastico



MISURE

Taglie	Sottoseno	Taglie Reggiseno*
S	66-76 cm	1°-2°
M	72-82 cm	2°-3°
L	78-88 cm	3°-4°
XL	84-94 cm	4°-5°
XXL	90-100 cm	6°-7°

*taglia abituale del reggiseno indossato

MD



Codici d'ordine: PPS-SMART BRA B (bianca); PPS-SMART BRA N (nero)

**INDICAZIONI**

Tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tronco mediante stimolazione meccanica neuromuscolare del tronco, come ad esempio:

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
- filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
- trattamento termo-regolatore HEIQ SMART TEMP e per una maggior sensazione di freschezza HEIQ PURE
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- struttura tridimensionale a livello lombare per portare esternamente il sudore e mantenere la zona asciutta
- tramatura a rete nella zona sottoascellare
- scollatura per un maggior comfort

CHIUSURA


- con zip

**MISURE (UNISEX)**

Taglie	Ø Torace
1°	60–67 cm
2°	67–74 cm
3°	74–80 cm

MD



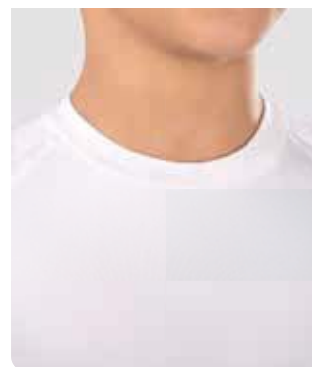

TRONCO

INDICAZIONI

Tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tronco mediante stimolazione meccanica neuromuscolare del tronco, come ad esempio:

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
- filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
- trattamento termo-regolatore HEIQ SMART TEMP e per una maggior sensazione di freschezza HEIQ PURE
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- struttura tridimensionale a livello lombare per portare esternamente il sudore e mantenere la zona asciutta
- tramatura a rete nella zona sottoascellare
- scollatura per un maggior comfort

CHIUSURA


- senza zip



MISURE (UNISEX)

Tg.	Ø Torace
1°	60-67 cm
2°	67-74 cm
3°	74-80 cm

MD

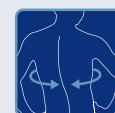



Sistema modulare di trazione



Barre di rinforzo in alluminio

INDICAZIONI

Tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tronco mediante stimolazione meccanica neuromuscolare del tronco, come ad esempio:

- dorso curvo non strutturato
- iperlordosi non strutturata
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann e nella correzione di vizi posturali
- coadiuvante nel dolore da dorso curvo strutturato
- esiti fratture clavicolari

STRUTTURA

- la parte a contatto con il dorso è realizzata in materiale 3D traspirante, privo di cuciture
- le fasce di trazione ascellare ed addominale sono realizzate in materiale ad alto coefficiente elastico con sistema modulare di tensionamento
- dotato di barre di rinforzo in alluminio modellabile

CHIUSURA

- a strappo



MISURE



Taglie	Ø Vita
XS	56-64 cm
S	64-72 cm
M	72-80 cm
L	80-90 cm
XL	90-100 cm

Altezza 44,5 cm

MD



Codici d'ordine: PPS-DSO G (grigio); PPS-DSO S (skin)

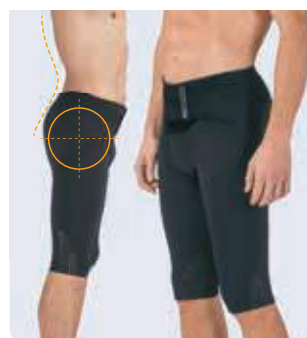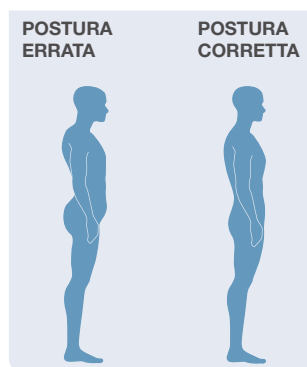

Riallineamento del bacino

INDICAZIONI

Tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tratto lombo - sacrale del tronco mediante stimolazione meccanica neuromuscolare, come ad esempio:

- coadiuvante nella correzione delle patologie correlate all'antiversione del bacino
- correzione atteggiamento iperlordotico
- coadiuvante nel trattamento delle stenosi lombari
- patologie della sacroiliaca

STRUTTURA

- combinazione di tessuto elastico di base in Sensitive® Fabrics a fasce di spinta del cingolo sacrale rinforzate in materiale anelastico

CHIUSURA

- a strappo a livello addominale



MISURE DONNA

Taglie	Ø Bacino
XS	88-93 cm
S	94-99 cm
M	100-105 cm
L	106-111 cm
XL	112-117 cm



MISURE UOMO

Taglie	Ø Vita
S	82-87 cm
M	88-93 cm
L	94-99 cm
XL	100-105 cm
XXL	106-111 cm





FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment





ARTO SUPERIORE

ARTO
SUPERIORE

**INDICAZIONI**

Tutore destinato all'immobilizzazione delle falangi distali. Utile, ad esempio, nei casi di:

- fratture falangi distali
- distorsioni
- contusioni
- lesioni di Segond
- esito di intervento di Ishiguro

STECCATURA

- data dalla struttura stessa in ABS

STRUTTURA

- in ABS trasparente con fori per l'aerazione

NOTE

- disponibile anche in scatola completa di 30 pezzi nelle varie misure

MISURE

Taglie **La confezione (30 pz.) contiene:**

1°	3 pz. mis. 1°
2°	4 pz. mis. 2°
3°	4 pz. mis. 3°
4°	4 pz. mis. 4°
5°	4 pz. mis. 5°
5,5°	4 pz. mis. 5,5°
6°	4 pz. mis. 6°
7°	3 pz. mis. 7°

Codici d'ordine:

STX-001 (per singolo pezzo); STX-030 (per confezione)

**INDICAZIONI**

Tutore destinato alla limitazione del range di movimento del primo dito. Utile, ad esempio, nei casi di:

Utile, ad esempio, nei casi di:

- rizoartrosi moderata o grave
- tendinopatie del pollice
- distorsioni metacarpofalangee
- esiti frattura di Bennett
- lesione di Stener
- morbo di De Quervain
- post operatorio di artroplastica o emiartroplastica per rizoartrosi
- fratture base falange prossimale del primo dito

STECCATURA

- mediante guscio anatomico in tecnopolimero con bordi arrotondati e materiale più rigido in corrispondenza dello scafoide

STRUTTURA

- cuffia interna di protezione in tessuto elastico senza cuciture

PRESA POLLICE

- sì

CHIUSURA

- mediante sistema a strappo elastico sul polso

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	13-17 cm
M	17-19 cm
L	19-23 cm
XL	23-28 cm



Codici d'ordine: SCA-101 DX; SCA-101 SX



INDICAZIONI

Tutore destinato alla limitazione del range di movimento del primo dito. Utile, ad esempio, nei casi di:

- rizoartrosi
- tendinopatie del pollice
- distorsioni metacarpofalangee

STECCATURA

- nessuna

STRUTTURA

- in tessuto elastico accoppiato contenitivo ad elasticità differenziata con silicone interno

PRESA POLLICE

- sì

CHIUSURA

- a strappo sul polso



INDICAZIONI

Tutore destinato alla limitazione del range di movimento del primo dito. Utile, ad esempio, nei casi di:

- rizoartrosi moderata o grave
- tendinopatie del pollice
- distorsioni metacarpofalangee
- esiti frattura di Bennett
- lesione di Stener
- morbo di De Quervain
- post operatorio di artroplastica o emiartroplastica per rizoartrosi
- fratture base falange prossimale del primo dito

STRUTTURA

- il programma Night & Day è composto dal tutore SCAPHOMED® e FINGER CAP

FASE DAY

- prevede l'uso di SCAPHOMED® nelle ore diurne, per garantire il normale svolgimento delle attività quotidiane mantenendo in posizione disciplinata lo scafoide grazie all'apposito tutore rigido

FASE NIGHT

- prevede l'uso di FINGER CAP durante la notte, per favorire il processo anti-infiammatorio a riposo, mantenendo il controllo dello scafoide grazie all'innovativo tessuto elastico e contenitivo

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	13-17 cm
M	17-19 cm
L	19-23 cm
XL	23-28 cm

MD



Codici d'ordine: FIN-101 DX; FIN-101 SX

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	13-17 cm
M	17-19 cm
L	19-23 cm
XL	23-28 cm

MD



Codici d'ordine: PDN-SCA DX; PDN-SCA SX

FILAMED® 101

LINEA FILAMED®
POLSINO SEMPLICE



INDICAZIONI FILAMED® 101

Tutore destinato alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del polso tramite bendaggio.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- distorsioni lievi del polso
- lievi artralgie del polso
- polso SNAC iniziale
- polso SLAC iniziale
- lievi instabilità radio-carpiche

INDICAZIONI FILAMED® 111

Tutore destinato alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del polso e del primo dito tramite bendaggio.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- distorsioni di polso e primo dito
- iniziale morbo di De Quervain
- iniziale primo dito a scatto doloroso
- esiti lesioni di Stener (pollice dello sciatore)

STECCATURA

- nessuna

STRUTTURA

- in neoprene leggero

PRESA POLLICE

- FILAMED® 101: no
- FILAMED® 111: sì

CHIUSURA

- a strappo sul polso

MISURE (ambidestro)

Taglia unica

MD



Codici d'ordine: FILAMED101; FILAMED111 (con dito)

RHIZOMED® SOFT

IMMOBILIZZATORE PRIMO DITO



INDICAZIONI

Il suo uso è indicato in tutte le situazioni in cui è necessario immobilizzare l'articolazione a sella del pollice e l'articolazione metacarpo-falangea, ad es.:

- rizoartrosi
- lesioni del legamento (pollice dello sciatore)
- irritazioni dell'articolazione del pollice

STECCATURA

- elemento distanziale tra pollice e indice in tecnopolimero

STRUTTURA BASE

- in cotone all'interno e con ampie zone grippanti esternamente

PRESA POLLICE

- sì con zona a soffietto modulabile alle varie conformazioni anatomiche del pollice e tiranti

CHIUSURA

- a strappo sia a livello del polso che del pollice

NOTE

- il dispositivo non impedisce la presa pollice-indice

MISURE (ambidestro)

Taglie

Ø Polso

1°

13-17 cm

2°

18-23 cm

MD



Altezza 8 cm

Codice d'ordine: RHI-100

**INDICAZIONI**

Tutore destinato all'immobilizzazione meccanica del primo dito in posizione neutra. Utile, ad esempio, nei casi di:

- rizoartrosi lieve o moderata
- traumi distorsivi del primo dito
- esiti intervento di artroplastica ed emiartroplastica per rizoartrosi
- esiti lesione di Stener (conservativo o post operatorio)
- esiti fratture primo metacarpo, dolorosi fratture di scafoide

STECCATURA

- laterale in alluminio modellabile

STRUTTURA

- in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, batteriostatico sul dispositivo e termoregolatore

PRESA POLLICE

- sì

CHIUSURA

- a strappo sul polso e sul pollice regolabile a misura tagliando il materiale in eccesso

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore HEIQ SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza HEIQ PURE

NUOVO**INDICAZIONI**

Tutore destinato all'immobilizzazione meccanica del primo dito in posizione neutra. Utile, ad esempio, nei casi di:

- rizoartrosi lieve o moderata
- traumi distorsivi del primo dito
- esiti intervento di artroplastica ed emiartroplastica per rizoartrosi
- esiti lesione di Stener (conservativo o post operatorio)
- esiti fratture primo metacarpo, dolorosi fratture di scafoide

STECCATURA

- laterale in alluminio modellabile

STRUTTURA

- materiale interno in morbido tessuto Sensitive® Fabrics
- materiale esterno in vellutino grippante per una totale adattabilità

PRESA POLLICE

- sì

CHIUSURA

- a strappo sul polso e sul pollice

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	fino a 15 cm
M	15-20 cm
L	20-25 cm
XL	oltre 25 cm

MD**Altezza** 14,5 cm

Codici d'ordine: DT3-01 DX; DT3-01 SX

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
1°	13-17 cm
2°	18-23 cm

MD**Altezza** 14,5 cm

Codici d'ordine: DUA-500 DX; DUA-500 SX



INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione meccanica o limitazione del range di movimento del quarto e quinto dito. Utile, ad esempio, nei casi di:

- fratture di IV e/o V metacarpo conservative o chirurgiche
- fratture prima falange di IV e/o V dito conservative o chirurgiche
- lussazione volare della metacarpo falangea IV e/o V raggio
- lesione tendine superficiale e/o profondo del IV-V raggio post operatorio
- morbo di Dupuytren IV e/o V raggio
- lesioni tendini estensori (comune di IV e/o V raggio e/o proprio del V raggio) post operatorio
- lussazione dorsale della metacarpo falangea del IV e/o V raggio
- dinamizzazione precoce o tardiva di IV e/o V raggio (trattamento conservativo o post operatorio)

STECCATURA

- mediante la struttura in alluminio posta lateralmente

STRUTTURA

- in alluminio modellabile
- possibilità di regolazione del ROM dell'articolazione del polso e metacarpo falangea
- imbottitura termoformata in morbido vellutino grappante

CHIUSURA

- mediante 4 fasce a strappo regolabili

BLOCCATO IN FLESSIONE



DINAMICO



BLOCCATO A 0°



BLOCCO IN SWAN NECK POSITION



MISURE (DX/SX)

Taglie		Altezza
S	5,5-6,5 cm	23 cm
M	6,5-8,0 cm	25 cm
L	8,0-9,5 cm	27 cm

Nel prendere le misure va considerata la distanza tra i centri di rotazione del polso e del V metacarpo.

Codici d'ordine: PFO-100 DX; PFO-100 SX

MD





INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione meccanica dell'articolazione del polso. Utile, ad esempio, nei casi di:

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio e/o ulna distali
- artralgie

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile

STRUTTURA

- in tessuto traspirante

CHIUSURA

- mediante 3 fasce a strappo
- ulteriore fascia sul polso per una maggiore stabilità dell'articolazione

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
0°	10-14 cm
1°	14-18 cm
2°	19-23 cm
3°	24-28 cm

Altezza 20 cm

Codici d'ordine: DTX-04 DX; DTX-04 SX



INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione meccanica dell'articolazione del polso e del primo dito. Utile, ad esempio, nei casi di:

- esiti frattura scafoide carpale
- trattamento lesioni di Stener
- fratture combinate di primo dito e polso stabili
- post operatorio del primo raggio
- traumi distorsivi moderati e severi di polso e primo dito
- esiti artroplastica ed emiartroplastica per rizoartrosi

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile
- stecca di supporto per pollice in alluminio modellabile

STRUTTURA

- in tessuto traspirante

PRESA POLLICE

- sì

CHIUSURA

- mediante 3 fasce a strappo
- ulteriore fascia sul polso per una maggiore stabilità dell'articolazione

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
0°	10-14 cm
1°	14-18 cm
2°	19-23 cm
3°	24-28 cm

Altezza 20 cm

Codici d'ordine: DTX-05 DX; DTX-05 SX



D.T3-02

POLSIERA STECCATA



INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione meccanica dell'articolazione del polso. Utile, ad esempio, nei casi di:

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio e/o ulna distali
- artralgie

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile

STRUTTURA

- in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, batteriostatico sul dispositivo e termoregolatore

CHIUSURA

- mediante 4 fasce a strappo regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso
- ulteriore fascia sul polso per una maggiore stabilità dell'articolazione

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore HEIQ SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza HEIQ PURE

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
XS	fino a 13 cm
S	13–16 cm
M	16–20 cm
L	20–25 cm
XL	oltre 25 cm

Altezza 19 cm

MD



Codici d'ordine: DT3-02 DX; DT3-02 SX

D.T3-03

POLSIERA STECCATA LIGHT



INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione meccanica dell'articolazione del polso. Utile, ad esempio, nei casi di:

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio e/o ulna distali
- artralgie

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile

STRUTTURA

- in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, batteriostatico sul dispositivo e termoregolatore
- apribile completamente

CHIUSURA

- mediante 4 fasce a strappo regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore HEIQ SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza HEIQ PURE

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
XS	fino a 13 cm
S	13–16 cm
M	16–20 cm
L	20–25 cm
XL	oltre 25 cm

Altezza 19 cm

MD



Codici d'ordine: DT3-03 DX; DT3-03 SX

NUOVO



INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione meccanica dell'articolazione del polso. Utile, ad esempio, nei casi di:

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio e/o ulna distali
- artralgie

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile
- passante multiplo superiore in tecnopolimero

STRUTTURA

- materiale interno in morbido tessuto Sensitive® Fabrics con imbottiture di protezione e fori per maggior traspirabilità
- materiale esterno in velluto grippante per una totale adattabilità
- sagomatura anatomica per un controllo ottimale del polso
- apribile completamente

CHIUSURA

- mediante 3 cinturini di fissaggio a strappo dotati di alette di sicurezza per impedire l'uscita dal passante multiplo
- fascia centrale allungata per una maggiore stabilizzazione

NUOVO



INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione meccanica dell'articolazione del polso. Utile, ad esempio, nei casi di:

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio e/o ulna distali
- artralgie in malattia reumatica
- post interventi alle filiere del carpo

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile
- passante multiplo superiore in tecnopolimero

STRUTTURA

- materiale interno in morbido tessuto Sensitive® Fabrics con imbottiture di protezione e fori per maggior traspirabilità
- materiale esterno in velluto grippante per una totale adattabilità
- sagomatura anatomica per un controllo ottimale del polso
- apribile completamente

CHIUSURA

- mediante 4 cinturini di fissaggio a strappo dotati di alette di sicurezza per impedire l'uscita dal passante multiplo
- fascia centrale allungata per una maggiore stabilizzazione

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Polso
S	14-18 cm
M	19-23 cm
L	24-28 cm

MD



Altezza 21 cm

Codice d'ordine: DUA-100

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Polso
S	14-18 cm
M	19-23 cm
L	24-28 cm

MD



Altezza 27 cm

Codice d'ordine: DUA-200

DUAL LOCK T

**POLSIERA STECCATA
CON IMMOBILIZZATORE POLLICE**

NUOVO



INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione meccanica dell'articolazione del polso e del primo dito. Utile, ad esempio, nei casi di:

- traumi distorsivi moderati e severi di polso e primo dito
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio e/o ulna distali
- artralgie
- esiti frattura scafoide carpale
- trattamento lesioni di Stener
- fratture combinate di primo dito e polso stabili
- post operatorio del primo raggio
- esiti artroplastica ed emiartroplastica per rizoartrosi

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile
- passante multiplo superiore in tecnopolimero
- stecca di supporto per pollice in alluminio modellabile

STRUTTURA

- materiale interno in morbido tessuto Sensitive® Fabrics con imbottiture di protezione e fori per maggior traspirabilità
- materiale esterno in velluto grappante per una totale adattabilità
- sagomatura anatomica per un controllo ottimale del polso
- apribile completamente

PRESA POLLICE

- sì

CHIUSURA

- mediante 3 cinturini di fissaggio a strappo dotati di alette di sicurezza per impedire l'uscita dal passante multiplo
- fascia centrale allungata per una maggiore stabilizzazione
- del pollice personalizzabile a grip

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	14-18 cm
M	19-23 cm
L	24-28 cm

MD



Altezza 21 cm

Codici d'ordine: DUA-300 DX; DUA-300 SX

DUAL LOCK T MAX

**POLSIERA STECCATA LUNGA
CON IMMOBILIZZATORE POLLICE**

NUOVO



INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione meccanica dell'articolazione del polso e del primo dito. Utile, ad esempio, nei casi di:

- traumi distorsivi moderati e severi di polso e primo dito
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio e/o ulna distali
- artralgie in malattia reumatica
- post interventi alle filiere del carpo
- esiti frattura scafoide carpale
- trattamento lesioni di Stener
- fratture combinate di primo dito e polso stabili
- post operatorio del primo raggio
- esiti artroplastica ed emiartroplastica per rizoartrosi

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile
- passante multiplo superiore in tecnopolimero
- stecca di supporto per pollice in alluminio modellabile

STRUTTURA

- materiale interno in morbido tessuto Sensitive® Fabrics con imbottiture di protezione e fori per maggior traspirabilità
- materiale esterno in velluto grappante per una totale adattabilità
- sagomatura anatomica per un controllo ottimale del polso
- apribile completamente

PRESA POLLICE

- sì

CHIUSURA

- mediante 4 cinturini di fissaggio a strappo dotati di alette di sicurezza per impedire l'uscita dal passante multiplo
- fascia centrale allungata per una maggiore stabilizzazione
- del pollice personalizzabile a grip

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	14-18 cm
M	19-23 cm
L	24-28 cm

MD



Altezza 27 cm

Codici d'ordine: DUA-400 DX; DUA-400 SX



INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione meccanica dell'articolazione del polso. Utile, ad esempio, nei casi di:

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio e/o ulna distali
- artralgie in malattia reumatica
- post interventi alle filiere del carpo

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile
- rinforzi laterali in polietilene

STRUTTURA

- in tessuto traspirante
- apribile completamente

CHIUSURA

- mediante 3 fasce a strappo
- la fascia polso è amovibile e riposizionabile per la personalizzazione del tutore e per una maggiore stabilità dell'articolazione



INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione meccanica dell'articolazione del polso. Utile, ad esempio, nei casi di:

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio e/o ulna distali
- artralgie

STECCATURA

- mediante struttura interna in alluminio modellabile

STRUTTURA

- doppia imbottitura elettrosaldada con monospugna a contatto con la pelle
- apribile completamente
- cuciture solo sui tiranti

CHIUSURA

- mediante 3 cinturini a strappo regolabili

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
XS	fino a 14 cm
S	15-17 cm
M	18-20 cm
L	21-23 cm
XL	oltre 23 cm

Altezza 27 cm

MD



Codici d'ordine: DTX-06 DX; DTX-06 SX

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso	Altezza
1°	14,5-19,5 cm	22 cm
2°	19,5-23,5 cm	24 cm

MD



Codici d'ordine: PLE-101 DX; PLE-101 SX

PLE-201 THUMBLOCK®

TUTORE RIGIDO PER POLSO E POLLICE



INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione meccanica dell'articolazione del polso e del primo dito. Utile, ad esempio, nei casi di:

- esiti frattura scafoide carpale
- trattamento lesioni di Stener
- fratture combinate di primo dito e polso stabili
- post operatorio del primo raggio
- traumi distorsivi moderati e severi di polso e primo dito
- esiti artroplastica ed emiartroplastica per rizoartrosi

STECCATURA

- mediante struttura interna in alluminio modellabile con supporto per pollice

STRUTTURA

- doppia imbottitura elettrosaldata con monospugna a contatto con la pelle
- apribile completamente
- cuciture solo sui tiranti

PRESA POLLICE

- sì

CHIUSURA

- mediante 3 cinturini regolabili a strappo e cinturino di fissaggio del pollice

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	14–18 cm
M	19–23 cm
L	24–28 cm

Altezza 22 cm

Codici d'ordine: PLE-201 DX; PLE-201 SX

MD



CTP-101 SUR.FING®

TUTORE PER TUNNEL CARPALE



INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione meccanica dell'articolazione del polso e della posizione in estensione dal secondo al quarto dito. Utile, ad esempio, nei casi di:

- lesioni nervo radiale
- esiti fratture combinate di mano e polso
- post operatorio di lesioni a tendini flessori ed estensori dal II al IV raggio
- sindrome del tunnel carpale

STECCATURA

- mediante struttura interna in alluminio modellabile con prolungamento sulle dita della mano

STRUTTURA

- doppia imbottitura elettrosaldata con monospugna a contatto con la pelle
- apribile completamente
- cuciture solo sui tiranti

CHIUSURA

- mediante 4 cinturini a strappo regolabili

MISURE (DX/SX)

Taglie	Lungh. mano
S	15–17,5 cm
M	17,5–19,5 cm
L	19,5–22 cm

Altezza 29 cm

Codici d'ordine: CTP-101 DX; CTP-101 SX

MD





INDICAZIONI

Tutte le indicazioni in cui è necessario un sostegno del polso con un rinforzo o un cuscinetto, ad es.:

- lesioni al polso, ad es. slogature e distorsioni
- artrosi al polso
- tenosinovite
- sensazione di instabilità articolare

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile

STRUTTURA

- tessuto in materiale bielastico con fibre merinos latex-free altamente traspirante ed elastico
- tessuto Medi con sistema Climafresh e Climacomfort
- bordi morbidi e confortevoli
- comfort zone nella zona del pollice per una maggiore libertà di movimento

CHIUSURA

- nessuna
- fascia di stabilizzazione sul polso



INDICAZIONI

Tutore destinato allo scarico della tensione sui tendini flessori ed estensori del polso mediante compressione meccanica.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- epicondiliti
- epitrocleiti

STRUTTURA

- parte interna in monospugna per garantire stabilità e comfort
- particolare effetto 3D interno per un'azione massaggiante
- parte esterna in vellutino grippante per la massima adattabilità

PRESSORE

- cuscinetto pressore orientabile in silicone ricoperto in morbido tessuto, agganciato con sistema grippante

CHIUSURA

- a strappo con sistema di tensionamento facilitato grazie alle tacche numerate di riferimento
- presenza di un elemento elastico a livello del passante di chiusura per evitare effetto laccio

NOTE

- disponibile in 4 colori: fucsia, lime, azzurro e grigio



MISURE (DX/SX)

Taglie Ø Polso

1°	13-15 cm
2°	15-17 cm
3°	17-19 cm
4°	19-21 cm

Altezza 18 cm

MD



La tg 1° e 2° è utilizzabile anche dai bambini

Codici d'ordine: M844E DX; M844E SX

MISURE (ambidestro)

Taglia unica

MD

Codici d'ordine:

EPI-200F (fucsia); EPI-200L (lime);
EPI-200A (azzurro); EPI-200G (grigio)

D.T3-FSP

TUTORE PER EPICONDILITE ED EPITROCLEITE



INDICAZIONI

Tutore destinato allo scarico della tensione sui tendini flessori ed estensori del polso mediante compressione meccanica.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- epicondiliti
- epitrocleiti

STRUTTURA

- soft in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, batteriostatico sul dispositivo e termoregolatore

PRESSORE

- pneumatico posizionabile nella zona desiderata

CHIUSURA

- a strappo

MISURE (ambidestro)

Taglia unica

MD

Codice d'ordine: DT3-FSP

EPICOMED®

GOMITIERA IN TESSUTO ELASTICO
CON PRESSORE IN SILICONE



Cuscinetto pressore
in grado di realizzare
un micro massaggio

INDICAZIONI

Tutte le indicazioni in cui è necessaria una compressione dei tessuti molli con imbottiture profilate sul gomito, ad es.:

- epicondiliti (ad esempio gomito del tennista o del golfista)
- artrosi
- artriti

STRUTTURA

- tessuto in materiale bielastico latex-free altamente traspirante, batteriostatico sul dispositivo e termoregolatore
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- bordo superiore morbido e confortevole

PRESSORE

- in silicone integrato lateralmente con scarico trocleare e superficie massaggiante
- dotato di cinturino a strappo di tensionamento regolabile e staccabile

MISURE (ambidestro)

Taglie Ø Avambraccio

1°	17-20 cm
2°	20-23 cm
3°	23-26 cm
4°	26-29 cm
5°	29-32 cm
6°	32-35 cm

MD



5 cm
dal gomito



La tg 1° e 2° è
utilizzabile anche
dai bambini

Codice d'ordine: M 822



INDICAZIONI

Tutte le indicazioni in cui è necessaria la compressione dei tessuti molli attraverso cuscinetti al gomito, ad es.:

- epicondiliti (ad esempio gomito del tennista o del golfista)
- artrosi
- artriti

STRUTTURA

- tessuto in materiale bielastico con fibre merinos latex-free altamente traspirante ed elastico
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- bordo superiore morbido e confortevole

PRESSORE

- in silicone con fibre di quarzo con scarico trocleare e superficie massaggiante
- dotato di cinturino a strappo di tensionamento regolabile e staccabile

MISURE (ambidestro)

Taglie Ø Avambraccio

2°	20-23 cm
3°	23-26 cm
4°	26-29 cm
5°	29-32 cm
6°	32-35 cm



La tg 2° è utilizzabile anche dai bambini

Codice d'ordine: M 822E



INDICAZIONI

Tutore destinato al sostegno meccanico dell'arto superiore. Utile, ad esempio, nei casi di:

- post trauma spalla e gomito
- entesopatia calcifica della spalla in fase acuta
- rottura atraumatica del capolungo del bicipite
- fase acuta di artrosi glenomeroale e/o acromion claveare
- trattamento del braccio pendulo (lesioni del plesso brachiale)

STRUTTURA

- soft con sacca in cotone e cintura spalla in vellutino regolabile con sistema a strappo

CHIUSURA

- a strappo

MISURE (ambidestro)

Taglie Lungh. avambraccio

S	fino a 32 cm
M	33-40 cm
L	oltre 40 cm



Codice d'ordine: RGB-150

RGB-100

REGGIBRACCIO SEMPLICE



INDICAZIONI

Tutore destinato al sostegno meccanico dell'arto superiore. Utile, ad esempio, nei casi di:

- post trauma spalla e gomito
- entesopatia calcifica della spalla in fase acuta
- rottura atraumatica del capolungo del bicipite
- fase acuta di artrosi glenomeroale e/o acromion claveare
- trattamento del braccio pendulo (lesioni del plesso brachiale)

STRUTTURA

- soft con sacca in cotone e cintura spalla regolabile mediante fibbia dotata di tubolare di protezione collo

CHIUSURA

- mediante fibbia

MISURE (ambidestro)

Taglie	Lungh. avambraccio
S	fino a 32 cm
M	33-40 cm
L	oltre 40 cm

MD



Codice d'ordine: RGB-100

IMB-200 NEW

IMMOBILIZZATORE BRACCIO E SPALLA
CON ACCESSORIO PER CONTENIMENTO GOMITO



INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione delle articolazioni della spalla e del braccio. Utile, ad esempio, nei casi di:

- lussazioni gleno-omerali
- post operatorio intervento di Latarjet
- post operatorio di fratture diafisarie e prossimale di omero
- esiti di intervento di riparazione del tendine distale del bicipite
- traumi distorsivi moderati e severi della spalla

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno con gomito libero
- cuffia in tessuto traspirante tridimensionale con bordatura in cotone per la stabilizzazione del gomito con sistema a strappo
- dotato di fascia di immobilizzazione in vellutino grippante

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- cinghie nella zona delle spalle in vellutino grippante con doppio manicotto imbottito a protezione del collo

NOTE

- le dimensioni ampie e il design sagomato rendono il dispositivo maggiormente confortevole e permettono di avvolgere e contenere più efficacemente la zona interessata

MISURE (ambidestro)

Taglia unica

MD

Codice d'ordine: IMB-200N

IMB-300

IMMOBILIZZATORE BRACCIO E SPALLA
CON GOMITO CHIUSO



INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione delle articolazioni della spalla e del braccio. Utile, ad esempio, nei casi di:

- lussazioni gleno-omerali
- post operatorio intervento di Latarjet
- post operatorio di fratture diafisarie e prossimale di omero
- esiti di intervento di riparazione del tendine distale del bicipite
- traumi distorsivi moderati e severi della spalla

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in cotone con contenimento del gomito
- dotato di fascia di immobilizzazione in vellutino grippante

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- in vellutino con doppio manicotto imbottito di protezione collo

IMB-350 OG

IMMOBILIZZATORE BRACCIO E SPALLA
CON GOMITO CHIUSO IN TESSUTO GRIPPANTE



INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione delle articolazioni della spalla e del braccio. Utile, ad esempio, nei casi di:

- lussazioni gleno-omerali
- post operatorio intervento di Latarjet
- post operatorio di fratture diafisarie e prossimale di omero
- esiti di intervento di riparazione del tendine distale del bicipite
- traumi distorsivi moderati e severi della spalla

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno con gomito chiuso
- dotato di fascia di immobilizzazione in vellutino grippante

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- in vellutino con doppio manicotto imbottito di protezione collo

MISURE (ambidestro)

Taglia unica



Codice d'ordine: IMB-300

MISURE (ambidestro)

Taglia unica



Codice d'ordine: IMB-350 OG

IMB-400

CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA DA 30° A 70°



INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione delle articolazioni della spalla e del braccio. Utile, ad esempio, nei casi di:

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart

GRADO ABDUZIONE

- da 30° a 70°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità con copertura in vellutino

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- fissaggio mediante 2 anelli realizzati in vellutino imbottito e pallina riabilitativa di supporto mano

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce a strappo in vellutino imbottito grappante
- dotato di fascia addominale a strappo

NOTE

- dotato di pallina riabilitativa

MISURE (ambidestro)

Taglia unica



Codice d'ordine: IMB-400

IMB-700N

CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA DA 10° A 20°



INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione dell'articolazione della spalla in posizione abdotta da 10° a 20°. Utile, ad esempio, nei casi di:

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart
- lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili)

GRADO ABDUZIONE

- da 10° a 20°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità con copertura in vellutino all'esterno e struttura alveolare traspirante a contatto con il corpo

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in tessuto con struttura alveolare traspirante a contatto con la pelle ed inserti esterni in vellutino grappante con cinturino di sostegno del pollice

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce in vellutino a strappo con manicotto imbottito di protezione collo e fibbia a scatto di chiusura
- dotata di cintura addominale regolabile con fibbia a scatto

NOTE

- a richiesta pallina riabilitativa

MISURE (ambidestro)

Taglie	Lungh. avambraccio
S	fino a 34 cm
M	35-39 cm
L	oltre 39 cm



Codice d'ordine: IMB-700N

IMB-700

CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA DA 10° A 20°



INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione dell'articolazione della spalla in posizione abdotta da 10° a 20°. Utile, ad esempio, nei casi di:

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart
- lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili)

GRADO ABDUZIONE

- da 10° a 20°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità con copertura in vellutino grippante

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in cotone con fettuccia di rinforzo sulla base

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce in vellutino a strappo, manicotto imbottito di protezione collo
- dotato di fascia addominale regolabile

NOTE

- a richiesta pallina riabilitativa

IMB-750

CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA DA 10° A 30°



INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione dell'articolazione della spalla in posizione abdotta da 10° a 30°. Utile, ad esempio, nei casi di:

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart
- lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili)

GRADO ABDUZIONE

- da 10° a 30°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità anatomico con copertura in vellutino grippante

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce in vellutino a strappo con manicotto imbottito di protezione collo e cinghia sottoascellare per la ridistribuzione del peso
- dotato di fascia addominale regolabile

NOTE

- la conformazione avvolgente del cuscino è in grado di assicurare la stabilità dell'arto anche nella fase notturna. A richiesta pallina riabilitativa

MISURE (ambidestro)

Taglia unica



Codice d'ordine: IMB-700

MISURE (ambidestro)

Taglia unica



Codice d'ordine: IMB-750

IMB-800 MULTISAS®

**CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA A 15°
CON SISTEMA INTRA-EXTRA ROTAZIONE
FINO A 20°**

SHOULDER ACTION

SUPPORTO PER SPALLA



INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione dell'articolazione della spalla in posizione abdotta da 15° e in intra-extra rotazione +20° - 20°.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart
- lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili)

GRADO ABDUZIONE

- a 15°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità anatomico ed avvolgente con copertura in vellutino e morbida lycra nella zona di appoggio dell'avambraccio
- cuneo di regolazione intra-extra rotazione fino a 20° con copertura in vellutino grappante

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- rete di contenimento avambraccio in morbido tessuto traspirante agganciata con sistema a strappo sulla struttura del cuscino

- dotato di pallina riabilitativa

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce in vellutino a strappo con manicotto imbottito di protezione collo con fibbia a scatto di chiusura e cinghia sottoascellare per la ridistribuzione del peso
- dotato di fascia addominale regolabile con fibbia a scatto

NOTE

- la conformazione avvolgente del cuscino è in grado di assicurare la stabilità dell'arto anche nella fase notturna, inoltre l'alloggiamento dell'avambraccio inglobato nel cuscino stesso permette di distribuire in modo migliore il peso e ridurre lo stress muscolare, dotato di pallina riabilitativa

MISURE (DX/SX)

Taglia unica

MD

Codici d'ordine: IMB-800 DX; IMB-800 SX



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione della spalla.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- instabilità articolazione glenomerale
- prevenzione lussazioni glenomerali
- esiti pregresse lussazioni glenomerali
- coadiuvante nel recupero dello stupor del nervo ascellare
- lussazione glenomerale recidivante
- esiti di intervento di Latarjet e artroscopia di spalla
- esiti lussazioni acromion clavari di I o II grado secondo Rockwood

STRUTTURA BASE

- tessuto elastico traspirante con particolare gommatura in grado di aderire alla cute e creare la giusta tensionatura del tutore
- dotata di particolare cuffia spalla con regolazione a strappo per controllare il movimento della spalla

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Torace
S	75-85 cm
M	82-100 cm
L	97-110 cm
XL	107-120 cm

MD



Codici d'ordine: ACT-100 DX; ACT-100 SX



INDICAZIONI

Il suo uso è indicato in tutte le situazioni in cui è necessario limitare, bloccare o modificare almeno una direzione di movimento della spalla, ad es.:

- trattamento conservativo in seguito a lussazione della spalla anteriore, sublussazione anteriore cronica
- omartrosi dolorosa
- trattamento postoperatorio dopo intervento di stabilizzazione della spalla

STRUTTURA BASE

- tessuto in materiale bielastico latex-free altamente traspirante ed elastico
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- bordo superiore morbido e confortevole
- dotato di cinghiaggio spalla elastico con doppia fibbia di regolazione per il controllo del movimento
- 2 anelli di trazione permettono di modulare il range di movimento
- cintura vita in materiale elastico



INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione della clavicola.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento delle fratture di clavicola (conservativo o chirurgico)
- trattamento conservativo lussazioni acromion clavari

STRUTTURA BASE

- sistema ad 8 con fasce di tensionamento ampie dotate di imbottitura morbida e sagomate anatomicamente
- design studiato per garantire miglior vestibilità sotto gli abiti
- inserto interno in silicone per maggiore stabilità

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- fasce adattabili e ritagliabili, con fissaggio tramite linguette a strappo
- dotato di fibbie autoadattanti per una vestibilità ottimale

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Bicipite
0°	inferiore 26 cm
1°	26-29 cm
2°	29-33 cm
3°	33-36 cm
4°	36-39 cm



Codici d'ordine: M808DX; M808SX

MISURE

Taglie	Ø Torace
XS	60-75 cm
S	75-90 cm
M	90-105 cm
L	105-115 cm
XL	115-125 cm



Codice d'ordine: RDS-100

**INDICAZIONI**

Tutore destinato all'immobilizzazione della clavicola.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento delle fratture di clavicola (conservativo o chirurgico)
- trattamento conservativo lussazioni acromion clavari

STRUTTURA BASE

- della spinta posteriore termosaldada realizzata in materiale traspirante alveolare a contatto con la pelle e vellutino nella parte esterna
- i cinghiaggi delle spalle sono realizzati in monospugna all'interno e vellutino all'esterno con tubolari di protezione e agganciati con fibbie alla struttura posteriore

MISURE

Taglie	Ø Torace
S	65–75 cm
M	76–90 cm
L	91–105 cm
XL	106–120 cm

MD

Codice d'ordine: RDS-200

**INDICAZIONI**

Tutore destinato alla compressione rigida dei tessuti molli dell'arto superiore. Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento conservativo delle fratture dell'omero prossimale
- trattamento conservativo delle fratture dell'omero non operabili
- trattamento post operatorio delle fratture di omero, scapola clavicola (Floating Shoulder)
- trattamento delle fratture del trochite omerale non chirurgiche

STRUTTURA BASE

- tessuto imbottito in poliammide e elastomero
- manicotto predisposto per l'inserimento di barre in alluminio laterali estraibili e modellabili

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- polsino reggibraccio removibile

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- sistema di cinghie a strappo regolabili e ritagliabili
- dotato di fascia di immobilizzazione braccio removibile

NOTE

- copertura di protezione del manicotto per una maggiore discrezione e comfort

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Bicipite
S	21–28 cm
M	26–34 cm
L	31–40 cm

MD

Codici d'ordine: HFB-100 DX; HFB-100 SX



ACROFIX

**TUTORE PER LUSSAZIONE
DELL'ARTICOLAZIONE ACROMION-CLAVEARE**



INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione meccanica dell'articolazione acromion - claveare. Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento conservativo o post operatorio delle lussazioni acromion claveari
- trattamento post operatorio delle fratture dell'estremo laterale di clavicola

STRUTTURA BASE

- spallina principale in vellutino imbottita e modellata dotata di sistema di tensionatura contemporanea e contrapposta con cinghie regolabili e fibbie autoadattanti
- fascia regolabile sottoascellare per la ridistribuzione del peso
- cintura addominale a strappo con chiusura regolabile

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in tessuto tridimensionale dalla struttura alveolare leggero e traspirante, con zona grippante nella regione del gomito
- fascia di rinforzo alla base
- anello d'ancoraggio per il pollice
- cinghia di sostegno del polso

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- fasce in vellutino ritagliabili con fissaggio tramite linguette a strappo con pinzetta numerata
- sistema di fissaggio ad anello

NOTE

- la numerazione delle fasce a strappo di chiusura facilitano la prima applicazione da parte del tecnico ortopedico o del medico

MISURE (DX/SX)

Taglie	Lungh. avambraccio
S	fino a 32 cm
M	33-40 cm
L	41-46 cm

MD



Codici d'ordine: ACRO-100 DX; ACRO-100 SX

EPICO ACTIVE

TUTORE SOFT PER GOMITO CON R.O.M.



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica e limitazione del range di movimento dell'articolazione del gomito. Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento funzionale precoce nella terapia conservativa dopo una lussazione del gomito con instabilità del gomito mediale e/o laterale
- utilizzo conservativo al fine di evitare lussazioni recidivanti del gomito
- utilizzo post-operatorio in caso di osteocondrite dissecante
- utilizzo post-operatorio dopo il trattamento di patologie della cartilagine, e dopo intervento di sutura o plastica dei legamenti

STRUTTURA

- struttura di base in tessuto double-layer in grado di garantire un'ottima elasticità. La struttura interna a nido d'ape offre una piacevole sensazione di morbidezza al tatto e traspirabilità.
- tessuto in tecnologia Q-skin by Fulgar®, una fibra in poliammide che tramite ioni d'argento presenti al suo interno, aiuta a diminuire la propria flora batterica in eccesso riducendo così eventuali odori sgradevoli
- zona cavo cubitale realizzata in rete elastica traspirante utile a garantire maggiore traspirabilità ed evitare accumuli di materiali in fase di flessione
- bordo inferiore siliconato per una maggiore tenuta
- imbottitura nella zona del capitello radiale a protezione e comfort

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- doppi snodi policentrici piatti in alluminio Avional
- regolabile mediante kit in dotazione
- quattro gradi di regolazione per la flessione e per l'estensione

PRONO-SUPINAZIONE POLSO

- assente

CHIUSURA

- a strappo

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Avambraccio	Ø Bicipite
XS	19-23 cm	21-24 cm
S	23-26 cm	24-28 cm
M	26-29 cm	28-32 cm
L	29-32 cm	32-37 cm
XL	> 32 cm	> 37 cm

MD



REGOLAZIONI

Ext.	10°, 20°, 30°, 40°
Flex.	45°, 60°, 75°, 90°

Codice d'ordine: EPI-ACT



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica, blocco e limitazione del range di movimento dell'articolazione del gomito.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- post operatorio di fratture, lussazioni, protesi del gomito
- lussazione del gomito
- iniziale trattamento nel post operatorio di protesi di capitello radiale
- riabilitazione nel trattamento post op. o conservativo di fratture di gomito
- trattamento fratture distali dell'omero

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- imbottitura realizzata in MTP accoppiato a vellutino con particolari scanalature per stimolare i recettori muscolari e prevenirne le tensioni muscolari
- supporto palmare regolabile
- cintura spalla regolabile con tubolare di protezione collo

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- snodo ROM di dimensioni contenute
- regolabile mediante un semplice tasto
- disponibili 13 settaggi per flessione, estensione, immobilizzazione (con regolazione ogni 10°)

PRONO-SUPINAZIONE POLSO

- fissa

CHIUSURA

- a strappo



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica, blocco e limitazione del range di movimento dell'articolazione del gomito.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- post operatorio di fratture, lussazioni, protesi del gomito
- lussazione del gomito e trattamento fratture distali dell'omero
- iniziale trattamento nel post operatorio di protesi di capitello radiale
- riabilitazione nel trattamento post operatorio o conservativo di fratture di gomito

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- imbottitura realizzata in MTP accoppiato a vellutino con particolari scanalature per stimolare i recettori muscolari e prevenirne le tensioni muscolari
- dispositivo palmare che consente la prono-supinazione del polso
- cintura spalla con tubolare di protezione collo

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- snodo ROM di dimensioni contenute
- regolabile mediante un semplice tasto
- 13 settaggi per flessione, estensione, immobilizzazione (con reg. ogni 10°)

PRONO-SUPINAZIONE POLSO

- regolabile

CHIUSURA

- a strappo

MISURE (DX/SX)

Taglia unica
A richiesta versione Short

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
40°	40°	40°
50°	50°	50°
60°	60°	60°
70°	70°	70°
80°	80°	80°
90°	90°	90°
100°	100°	100°
110°	110°	110°
120°	120°	120°

MD

Codici d'ordine:
EPICO-REVO DX;
EPICO-REVO SX

MISURE (DX/SX)

Taglia unica
A richiesta versione Short

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
40°	40°	40°
50°	50°	50°
60°	60°	60°
70°	70°	70°
80°	80°	80°
90°	90°	90°
100°	100°	100°
110°	110°	110°
120°	120°	120°

MD

Codici d'ordine:
EPICO-REVO PS DX;
EPICO-REVO PS SX




FGP

Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment





ARTO INFERIORE

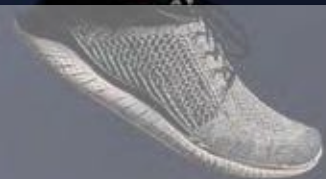

ARTO
INFERIORE

IMA-110 HipOne®

**TUTORE FUNZIONALE R.O.M. PER ANCA
COMPLETAMENTE IN ALLUMINIO**



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica, all'immobilizzazione ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione dell'anca. Utile, ad esempio, nei casi di:

- coxartrosi non operabile
- lussazione d'anca
- lussazione articolare protesi totale ed endoprotesi
- fratture composte del cotile, prossimali del femore, periprotetichiche del terzo prossimale del femore
- post operatorio emibacino, acetabolo
- esiti ri protesizzazioni anca

STRUTTURA

- rigida con valve anatomiche di presa bacino e coscia in alluminio modellabile
- imbottiture in vellutino grappante

SNODO

- controlla l'abduzione fisiologica del paziente grazie a 3 settaggi regolabili mediante camma interna
- disponibili 7 settaggi per la regolazione in flessione, estensione e immobilizzazione
- disponibile versione con asta dello snodo corta (IMA-120)

CHIUSURA

- della presa bacino con fibbia e regolazione a strappo
- della presa coscia a strappo

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Vita (A)	Ø Pross. (B)
S	70-90 cm	38-50 cm
M	90-110 cm	50-62 cm
L	110-135 cm	62-76 cm

MD

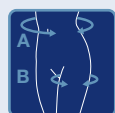


TABELLA REGOLAZIONI

Ext. 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

Flex. 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

Imm. 0° 15° 30°

Codici d'ordine:

IMA-110 DX (asta normale); IMA-110 SX (asta normale);

IMA-120 DX (asta corta); IMA-120 SX (asta corta)

IMA-110 BR HipOne®

**TUTORE FUNZIONALE R.O.M.
PER ANCA CON BRACCETTO DISTANZIALE**



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica, all'immobilizzazione ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione dell'anca. Utile, ad esempio, nei casi di:

- coxartrosi non operabile
- lussazione d'anca
- lussazione articolare protesi totale ed endoprotesi
- fratture composte del cotile, prossimali del femore, periprotetichiche del terzo prossimale del femore
- post operatorio emibacino, acetabolo
- esiti ri protesizzazioni anca

STRUTTURA

- rigida con valve anatomiche di presa bacino e coscia in alluminio modellabile
- imbottiture in vellutino grappante

SNODO

- controlla l'abduzione fisiologica del paziente grazie a 3 settaggi regolabili mediante camma interna
- dotato di braccetto distanziale per permettere l'allineamento della parte inferiore del tutore alla direzione del femore
- disponibili 7 settaggi per la regolazione in flessione, estensione e immobilizzazione
- disponibile versione con asta dello snodo corta (IMA-120 BR)

CHIUSURA

- della presa bacino con fibbia e regolazione a strappo
- della presa coscia a strappo

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Vita (A)	Ø Pross. (B)
S	70-90 cm	38-50 cm
M	90-110 cm	50-62 cm
L	110-135 cm	62-76 cm

MD

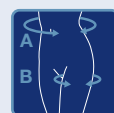


TABELLA REGOLAZIONI

Ext. 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

Flex. 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

Imm. 0° 15° 30°

Codici d'ordine: IMA-110BR DX (asta normale);

IMA-110BR SX (asta normale); IMA-120BR DX (asta corta);

IMA-120BR SX (asta corta); SP-HBR (braccetto distanziale)



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica, all'immobilizzazione ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione dell'anca. Utile, ad esempio, nei casi di:

- coxartrosi non operabile
- lussazione d'anca
- lussazione articolare protesi totale ed endoprotesi
- fratture composte del cotile, prossimali del femore, periprotetichiche del terzo prossimale del femore
- post operatorio emibacino, acetabolo
- esiti ri protesizzazioni anca

STRUTTURA

- rigida con valve anatomiche di presa bacino e coscia in materiale plastico
- imbottitura in morbida monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

SNODO

- vite di allineamento asta femorale
- disponibili 13 settaggi per la regolazione in flessione, estensione e immobilizzazione

CHIUSURA

- della presa bacino con fibbia e regolazione a strappo
- della presa coscia a strappo



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica, all'immobilizzazione ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione dell'anca. Utile, ad esempio, nei casi di:

- coxartrosi non operabile
- lussazione d'anca
- lussazione articolare protesi totale ed endoprotesi
- fratture composte del cotile, prossimali del femore, periprotetichiche del terzo prossimale del femore
- post operatorio emibacino, acetabolo
- esiti ri protesizzazioni anca

STRUTTURA

- rigida con valve anatomiche di presa bacino e coscia in alluminio modellabile
- imbottitura in vellutino grippante

SNODO

- vite di allineamento asta femorale
- disponibili 13 settaggi per la regolazione in flessione, estensione e immobilizzazione

CHIUSURA

- della presa bacino con fibbia e regolazione a strappo
- della presa coscia a strappo

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Vita (A)	Ø Pross. (B)	Ø Distale (C)
S	70-80 cm	38-46 cm	35-40 cm
M	81-100 cm	47-56 cm	41-47 cm
L	101-115 cm	57-66 cm	48-54 cm
XL	116-135 cm	67-76 cm	55-62 cm

MD

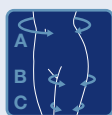


TABELLA REGOLAZIONI

Ext.	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°
Flex.	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°			
Imm.	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°

Codici d'ordine: IMA-103 DX; IMA-103 SX

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Vita (A)	Ø Pross. (B)
S	70-90 cm	38-50 cm
M	90-110 cm	50-62 cm
L	110-135 cm	62-76 cm

MD

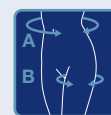


TABELLA REGOLAZIONI

Ext.	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°
Flex.	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°			
Imm.	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°

Codice d'ordine: IMA-150

TUTORE FUNZIONALE PER ANCA SOFT



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica dell'articolazione dell'anca. Utile, ad esempio, nei casi di:

- FAI (Femoral Acetabular Impingement) pre-post operatorio
- esiti lussazioni d'anca
- coxartrosi non operabile
- esiti ri protesizzazioni anca

STRUTTURA

- soft in lycra e materiale traspirante ed anallergico
- dotato di rinforzo laterale con stecche a spirale ispezionabile mediante cerniere di apertura

SNODO

- set di stecche a spirale

CHIUSURA

- del bacino e della coscia a strappo

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Vita
S	60-72 cm
M	73-85 cm
L	86-98 cm
XL	99-110 cm

MD



Altezza 44 cm

Codici d'ordine: IMA-109 DX; IMA-109 SX

PHYLOETEK

Generato dalla ricerca FGP
creato per nuove performance



LINEA PHYLOETEK
GINOCCHIERA TRASPIRANTE
CON FORO ROTULEO



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli. Utile, ad esempio, nei casi di:

- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lievi distorsioni di ginocchio
- idrarto o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie

STRUTTURA

- soft in tessuto PhyloEtek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- nessuna

LINEA PHYLOETEK
GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON STABILIZZATORE
ROTULEO AD ANELLO IN SILICONE



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli, con cuscinetto ad azione compressiva locale intorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di:

- moderata o grave condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee

STRUTTURA

- soft in tessuto PhyloEtek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- in silicone ad anello

CHIUSURA

- nessuna

NOTE

- tasca per stabilizzatore realizzata direttamente dal telaio

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia
XS	34-40 cm
S	40-46 cm
M	46-52 cm
L	52-58 cm
XL	58-65 cm
XXL	65-72 cm



Altezza 25 cm

Codice d'ordine: PY-TK20

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia
XS	34-40 cm
S	40-46 cm
M	46-52 cm
L	52-58 cm
XL	58-65 cm
XXL	65-72 cm




Altezza 25 cm

Codice d'ordine: PY-TK40

PHYLOETEK 41

LINEA PHYLOETEK
GINOCCHIERA TRASPIRANTE
CON STABILIZZATORE ROTULEO A MEZZALUNA

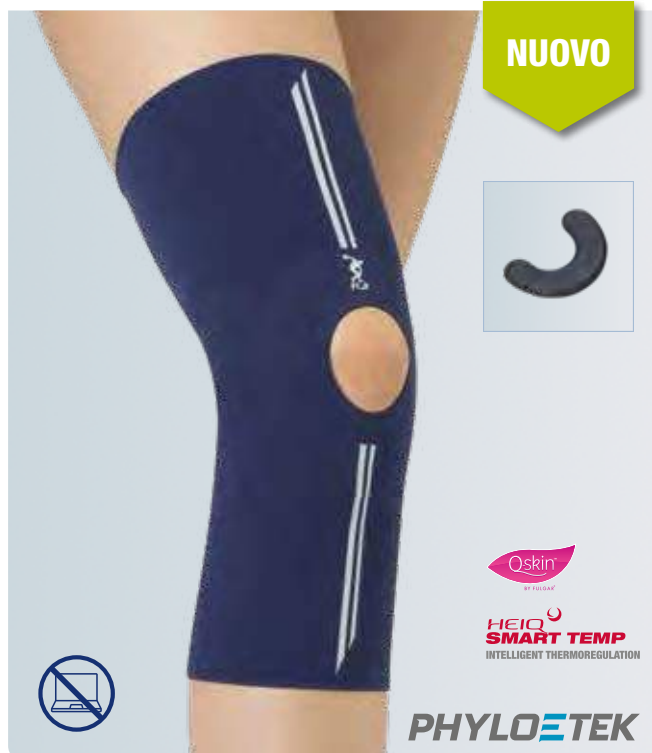

INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli, con cuscinetto ad azione compressiva locale intorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di:

- moderata o grave condropatia femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee e/o distorsioni del ginocchio
- lieve instabilità post traumatica

STRUTTURA

- soft in tessuto PhyloEtek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- a forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, orientabile a 360° con sistema a strappo

CHIUSURA

- nessuna

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia
XS	34-40 cm
S	40-46 cm
M	46-52 cm
L	52-58 cm
XL	58-65 cm
XXL	65-72 cm



Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PY-TK41

PHYLOETEK 60

LINEA PHYLOETEK
GINOCCHIERA TRASPIRANTE
CON STECCHE A SPIRALE



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli, con cuscinetto ad azione compressiva locale intorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di:

- moderata o grave condropatia femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee e/o distorsioni del ginocchio
- lieve instabilità post traumatica

STRUTTURA

- soft in tessuto PhyloEtek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- doppie stecche a spirale laterale e mediale

STABILIZZATORE ROTULEO

- a forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, orientabile a 360° con sistema a strappo

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia
XS	34-40 cm
S	40-46 cm
M	46-52 cm
L	52-58 cm
XL	58-65 cm
XXL	65-72 cm



Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PY-TK60

PHYLOETEK 61

LINEA PHYLOETEK
GINOCCHIERA TRASPIRANTE APERTA
CON STECCHE A SPIRALE



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli. Utile, ad esempio, nei casi di:

- lieve instabilità post traumatica
- esito distorsione ginocchio
- esiti stabilizzati di traumi del ginocchio
- gonartrosi lieve

STRUTTURA

- soft in tessuto PhyloEtek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, completamente apribile, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- doppie stecche a spirale laterale e mediale

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate

PHYLOETEK STABIMED® PRO

LINEA PHYLOETEK
GINOCCHIERA TRASPIRANTE
CON SNODO POLICENTRICO



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica tramite compressione dei tessuti molli e guida del movimento dell'articolazione del ginocchio tramite snodi, con cuscinetto ad azione compressiva locale attorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di:

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- traumatismi della rotula
- lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- esiti distorsione ginocchio
- instabilità post traumatica

STRUTTURA

- soft in tessuto PhyloEtek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico libero, totalmente coperto ed estraibile

STABILIZZATORE ROTULEO

- a forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, orientabile a 360° con sistema a strappo

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia
XS	34-40 cm
S	40-46 cm
M	46-52 cm
L	52-58 cm
XL	58-65 cm
XXL	65-72 cm



MD

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PY-TK61

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia
XS	34-40 cm
S	40-46 cm
M	46-52 cm
L	52-58 cm
XL	58-65 cm
XXL	65-72 cm



MD

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PY-TKST PRO

PHYLOETEK STABIMED® PRO OPEN

LINEA PHYLOETEK
GINOCCHIERA TRASPIRANTE APERTA
CON SNODO POLICENTRICO



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica tramite compressione dei tessuti molli e guida del movimento dell'articolazione del ginocchio tramite snodi. Utile, ad esempio, nei casi di:

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- esiti distorsione ginocchio
- instabilità post traumatica

STRUTTURA

- soft in tessuto PhyloEtek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, completamente apribile, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico libero, totalmente coperto ed estraibile

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia
XS	34-40 cm
S	40-46 cm
M	46-52 cm
L	52-58 cm
XL	58-65 cm
XXL	65-72 cm

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PY-TKST PRO OP



MD

PHYLOETEK STABIMED®

LINEA PHYLOETEK
GINOCCHIERA TRASPIRANTE APERTA
CON SNODO PHYSIOGLIDE®



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica tramite compressione dei tessuti molli ed alla limitazione e guida del movimento dell'articolazione del ginocchio tramite snodi regolabili. Utile, ad esempio, nei casi di:

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- esiti distorsione ginocchio
- instabilità post traumatica

STRUTTURA

- soft tessuto PhyloEtek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, completamente apribile, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide® con regolazione rapida mediante stop, coprisnodo in poliuretano

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta numerate

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia
XS	34-40 cm
S	40-46 cm
M	46-52 cm
L	52-58 cm
XL	58-65 cm
XXL	65-72 cm

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PY-TKSTAB

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
-5°	0°	0°
0°	10°	10°
10°	20°	20°
20°	30°	30°
30°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	
	140° (flex free)	



MD

LINEA PHYLOETEK
GINOCCHIERA TRASPIRANTE
CON SNODO PHYSIOGLIDE®



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica tramite compressione dei tessuti molli ed alla limitazione e guida del movimento dell'articolazione del ginocchio tramite snodi regolabili, con cuscinetto ad azione compressiva locale attorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di:

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- esiti distorsione ginocchio
- instabilità post traumatica
- traumatismi della rotula e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave

STRUTTURA

- soft in tessuto PhyloEtek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide® con regolazione rapida mediante stop, coprisnodo in poliuretano

STABILIZZATORE ROTULEO

- a forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, orientabile a 360° con sistema a strappo

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate

LINEA PHYLOETEK
GINOCCHIERA TRASPIRANTE LUNGA APERTA
CON SNODO PHYSIOGLIDE®



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica tramite compressione dei tessuti molli ed alla limitazione e guida del movimento dell'articolazione del ginocchio tramite snodi regolabili. Utile, ad esempio, nei casi di:

- grave instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- trattamento post acuto delle instabilità dei legamenti crociati
- lesioni combinate legamentose di grado lieve o moderato
- instabilità post traumatica

STRUTTURA

- soft in tessuto PhyloEtek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, completamente apribile, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide® con regolazione rapida mediante stop, coprisnodo in poliuretano

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante quattro fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate, le fasce inferiori sono suddivise anteriormente e posteriormente

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia	Ext.	Flex.	Imm.
XS	34-40 cm	-5°	0°	0°
S	40-46 cm	0°	10°	10°
M	46-52 cm	10°	20°	20°
L	52-58 cm	20°	30°	30°
XL	58-65 cm	30°	45°	45°
XXL	65-72 cm		60°	

75°
90°
140° (flex free)

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PY-TKSTAB CL



MD


MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia	Ext.	Flex.	Imm.
XS	34-40 cm	-5°	0°	0°
S	40-46 cm	0°	10°	10°
M	46-52 cm	10°	20°	20°
L	52-58 cm	20°	30°	30°
XL	58-65 cm	30°	45°	45°
XXL	65-72 cm		60°	

75°
90°
140° (flex free)

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PY-TKCO

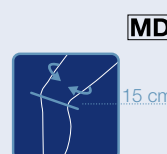

MD

PHYLOETEK COLLAMED® CLOSE

LINEA PHYLOETEK
GINOCCHIERA TRASPIRANTE LUNGA
CON SNODO PHYSIOGLIDE®



NUOVO



Oskin
HEIQ
SMART TEMP
INTELLIGENT THERMOREGULATION

PHYLOETEK

INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica tramite compressione dei tessuti molli ed alla limitazione e guida del movimento dell'articolazione del ginocchio tramite snodi regolabili, con cuscinetto ad azione compressiva locale attorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di:

- grave instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- trattamento post acuto delle instabilità dei legamenti crociati
- lesioni combinate legamentose di grado lieve o moderato
- instabilità post traumatica
- traumatismi della rotula e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave

STRUTTURA

- soft in tessuto PhyloEtek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide® lungo con regolazione rapida mediante stop, coprisnodo in poliuretano

STABILIZZATORE ROTULEO

- a forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, orientabile a 360° con sistema a strappo

CHIUSURA

- mediante quattro fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate, le fasce inferiori sono suddivise anteriormente e posteriormente

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia	Ext.	Flex.	Imm.
XS	34-40 cm	-5°	0°	0°
S	40-46 cm	0°	10°	10°
M	46-52 cm	10°	20°	20°
L	52-58 cm	20°	30°	30°
XL	58-65 cm	30°	45°	45°
XXL	65-72 cm		60°	

75°
90°
140° (flex free)

Altezza 40 cm

Codice d'ordine: PY-TKCO CL



MD

D.T3-TTP

CINTURINO SOTTOROTULEO



HEIQ
PURE
ANTIMICROBIAL ODOR CONTROL

HEIQ
SMART TEMP
INTELLIGENT THERMOREGULATION

INDICAZIONI

Tutore destinato allo scarico della tensione sul tendine rotuleo mediante compressione. Utile, ad esempio, nei casi di:

- sindrome di Osgood Schlatter
- sindrome di Sinding-Larsen-Johansson
- tendinopatia del rotuleo
- esiti dolorosi ricostruzione LCA con tendine rotuleo

STRUTTURA

- soft in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, batteriostatico sul dispositivo e termoregolatore
- con pressore pneumatico anatomico

CHIUSURA

- a strappo

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore HEIQ SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza HEIQ PURE

MISURE (ambidestro)

Taglia unica

MD

Codice d'ordine: DT3-TTP



INDICAZIONI

Tutore destinato allo scarico della tensione sul tendine rotuleo mediante compressione. Utile, ad esempio, nei casi di:

- sindrome di Osgood Schlatter
- sindrome di Sinding-Larsen-Johansson
- tendinopatia del rotuleo
- esiti dolorosi ricostruzione LCA con tendine rotuleo

STRUTTURA

- parte interna in monospugna per garantire stabilità e comfort
- particolare effetto 3D interno per un'azione massaggiante
- parte esterna in vellutino grippante per la massima adattabilità

PRESSORE

- cuscinetto pressore in silicone ricoperto in morbido tessuto, agganciato con sistema grippante

CHIUSURA

- a strappo con doppia fibbia
- presenza di un elemento elastico a livello del passante di chiusura per evitare effetto laccio

NOTE

- disponibile in 4 colori: fucsia, lime, azzurro e grigio



MISURE (ambidestro)

Taglia unica



Codici d'ordine:

TRB-100F (fucsia); TRB-100L (lime);
TRB-100A (azzurro); TRB-100G (grigio)



INDICAZIONI

Tutte le indicazioni che richiedono la compressione dei tessuti molli nell'area del ginocchio, ad es.:

- leggera instabilità dell'articolazione del ginocchio
- versamenti articolari e gonfiori
- artrosi e artriti

STRUTTURA

- soft tubolare anatomica in materiale elastico bidirezionale (compressione di classe 2)
- conformazione anatomica
- bordo anti-arricciamento
- tramatura differenziata sul cavo popliteo e rotula

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- nessuna

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø A	Ø B
1°	37-41 cm	25-28 cm
2°	41-43 cm	28-31 cm
3°	43-46 cm	31-34 cm
4°	46-49 cm	34-37 cm
5°	49-52 cm	37-40 cm
6°	52-56 cm	40-43 cm
7°	56-58 cm	43-46 cm

Altezza 30 cm

Codice d'ordine: M601



GINOCCHIERA ELASTICA
CON ANELLO ROTULEO IN SILICONE

INDICAZIONI

Il suo utilizzo è indicato in tutte le situazioni in cui è necessaria una compressione dei tessuti molli con cuscinetto/i ad azione compressiva locale intorno alla rotula, ad es.:

- modesta instabilità
- artrosi e artrite
- sindrome dolorosa femoro-rotulea

STRUTTURA

- soft tubolare in materiale elastico latex-free altamente traspirante con fibre di eucalipto
- in tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- senza cuciture
- dotata di silicone antiscivolo interno
- con foro rotuleo coperto

SNODO/ASTE

- stecca a spirale mediale e laterale

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- in silicone ad anello con profilo 3D per massaggio
- removibile

CHIUSURA


- nessuna

NOTE

- possibilità di versione ExtraWide per una maggiore vestibilità della coscia

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø A	Ø B	Ø A ExtraWide
1°	37-40 cm	25-28 cm	-
2°	40-43 cm	28-31 cm	-
3°	43-46 cm	31-34 cm	46-49 cm
4°	46-49 cm	34-37 cm	49-52 cm
5°	49-52 cm	37-40 cm	52-55 cm
6°	52-55 cm	40-43 cm	55-58 cm
7°	55-58 cm	43-46 cm	58-61 cm

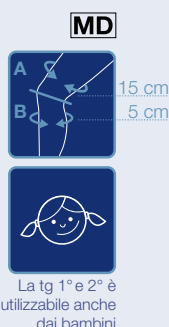

Disponibile versione comfort nella zona coscia. Vedi ExtraWide (riferimento per misurazione Ø A ExtraWide e Ø B)

Altezza 30 cm | Codici d'ordine: M613; M613ew (ExtraWide)

GINOCCHIERA ELASTICA
CON ANELLO ROTULEO IN SILICONE

INDICAZIONI

Il suo utilizzo è indicato in tutte le situazioni in cui è necessaria una compressione dei tessuti molli con cuscinetto/i ad azione compressiva locale intorno alla rotula, ad es.:

- modesta instabilità
- artrosi e artrite
- sindrome dolorosa femoro-rotulea

STRUTTURA

- soft tubolare in materiale elastico con fibre merinos latex-free altamente traspirante
- in tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- senza cuciture
- dotata di silicone antiscivolo interno
- con foro rotuleo coperto

SNODO/ASTE

- stecca a spirale mediale e laterale

STABILIZZATORE ROTULEO

- in silicone con aggiunta di fibre di quarzo ed anello con profilo 3D per massaggio
- removibile

CHIUSURA


- nessuna

NOTE

- possibilità di versione ExtraWide per una maggiore vestibilità della coscia

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø A	Ø B	Ø A ExtraWide
1°	37-40 cm	25-28 cm	-
2°	40-43 cm	28-31 cm	-
3°	43-46 cm	31-34 cm	46-49 cm
4°	46-49 cm	34-37 cm	49-52 cm
5°	49-52 cm	37-40 cm	52-55 cm
6°	52-55 cm	40-43 cm	55-58 cm

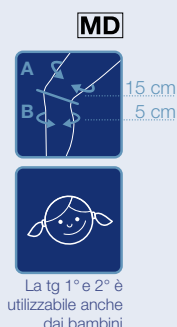

Disponibile versione comfort nella zona coscia. Vedi ExtraWide (riferimento per misurazione Ø A ExtraWide e Ø B)

Altezza 30 cm | Codici d'ordine: M613E; M613Eew (ExtraWide)



INDICAZIONI

Tutte le indicazioni in cui è necessario assicurare un sostegno fisiologico dell'articolazione del ginocchio, ad es.:

- instabilità lievi e medie dell'articolazione del ginocchio
- gonartrosi
- lievi instabilità dei legamenti laterali

STRUTTURA

- soft tubolare in materiale elastico latex-free altamente traspirante con fibre di eucalipto
- in tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- senza cuciture
- dotata di silicone antiscivolo interno
- con foro rotuleo coperto

SNODO/ASTE

- policentrico libero in tecnopolimero Easyglide

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- in silicone ad anello con profilo 3D per massaggio
- removibile

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili



INDICAZIONI

Tutte le indicazioni in cui è necessario incidere sulla sede di scorrimento della rotula, ad es.:

- infiammazione del tendine rotuleo (ginocchio del saltatore)
- sindrome di Osgood-Schlatter
- sindrome dolorosa patello-femorale

STRUTTURA

- soft tubolare in materiale elastico latex-free altamente traspirante
- in tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- senza cuciture
- dotata di silicone antiscivolo interno
- con foro rotuleo coperto

SNODO/ASTE

- stecca a spirale mediale e laterale

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- cinghia a strappo sottorotulea che permette la regolazione della pressione sul tendine indipendentemente dalla regolazione posteriore

STABILIZZATORE ROTULEO

- stabilizzatore rotuleo e cuscinetto sottorotuleo in silicone 3D per massaggio

CHIUSURA

- nessuna


NOTE

- potrebbero esserci consegne miste

- zona in silicone "grip on" per una migliore presa durante la calzatura

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø A	Ø B	Ø A ExtraWide
1°	37-40 cm	25-28 cm	—
2°	40-43 cm	28-31 cm	—
3°	43-46 cm	31-34 cm	46-49 cm
4°	46-49 cm	34-37 cm	49-52 cm
5°	49-52 cm	37-40 cm	52-55 cm
6°	52-55 cm	40-43 cm	55-58 cm
7°	55-58 cm	43-46 cm	58-61 cm

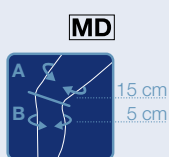


Disponibile versione comfort nella zona coscia. Vedi ExtraWide (riferimento per misurazione Ø A ExtraWide e Ø B)

Altezza 30 cm | Codici d'ordine: M615; M615ew (ExtraWide)

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø A	Ø B	Ø A ExtraWide
0°	34-37 cm	22-25 cm	—
1°	37-40 cm	25-28 cm	—
2°	40-43 cm	28-31 cm	—
3°	43-46 cm	31-34 cm	46-49 cm
4°	46-49 cm	34-37 cm	49-52 cm
5°	49-52 cm	37-40 cm	52-55 cm
6°	52-55 cm	40-43 cm	55-58 cm
7°	55-58 cm	43-46 cm	58-61 cm

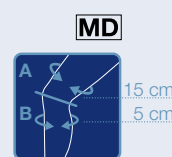

La tg 0°, 1° e 2° è utilizzabile anche dai bambini

Disponibile versione comfort nella zona coscia. Vedi ExtraWide (riferimento per misurazione Ø A ExtraWide e Ø B)

Altezza 30 cm | Codici d'ordine: M616; M616ew (ExtraWide)

GENUMEDI® PT

**GINOCCHIERA ELASTICA
CON SISTEMA DI STIMOLAZIONE MUSCOLARE
PER IL CONTROLLO DELLA ROTULA**



INDICAZIONI

Tutte le indicazioni in cui è necessario incidere sulla sede di scorrimento della rotula, ad es.:

- sindrome dolorosa patello-femorale
- maltracking rotuleo
- lateralizzazione della rotula
- ipermobilità rotulea
- disallineamento della rotula

STRUTTURA

- soft tubolare in materiale elastico latex-free altamente traspirante con fibre d'eucalipto
- in tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- senza cuciture
- dotata di silicone antiscivolo interno
- con foro rotuleo coperto

SNODO/ASTE

- stecca a spirale mediale e laterale

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- sistema di regolazione a strappo della spinta sul Trigger-point del vasto laterale

STABILIZZATORE ROTULEO

- anello in silicone 3D per il massaggio e la stimolazione muscolare


CHIUSURA

- nessuna

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø A	Ø B
1°	37-40 cm	25-28 cm
2°	40-43 cm	28-31 cm
3°	43-46 cm	31-34 cm
4°	46-49 cm	34-37 cm
5°	49-52 cm	37-40 cm
6°	52-55 cm	40-43 cm
7°	55-58 cm	43-46 cm

Altezza 30 cm

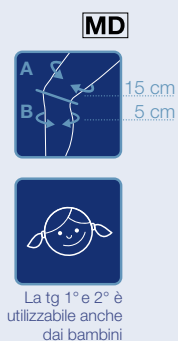

La tg 1° e 2° è utilizzabile anche dai bambini

Codici d'ordine: M614 DX; M614 SX

FILAMED® 201

**LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA TUBOLARE IN NEOPRENE**



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli. Utile, ad esempio, nei casi di:

- lievi distorsioni di ginocchio
- idrartro o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie
- borsite sovrarotulea
- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo

STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, senza foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- nessuna

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	39-47 cm
M	47-53 cm
L	53-59 cm
XL	oltre 59 cm

Altezza 32 cm



Codice d'ordine: FILAMED201

FILAMED® 301

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE
CON SUPPORTO PATELLARE



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli, con cuscinetto ad azione compressiva locale intorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di:

- lievi distorsioni di ginocchio
- idrartro o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie
- borsite sovrarotulea
- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo

STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con fascia patellare di rinforzo e foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°

CHIUSURA

- nessuna

FILAMED® 411

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE CON STABILIZZATORE
ROTULEO PERSONALIZZABILE



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli, con cuscinetto ad azione compressiva locale intorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di:

- lievi distorsioni di ginocchio
- idrartro o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie
- borsite sovrarotulea
- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo

STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene con rinforzo nella zona del ginocchio, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- tubetto in spugna ritagliabile e personalizzabile sulle necessità del paziente

CHIUSURA

- nessuna

MISURE (ambidestro)

Taglie Ø Coscia

XS	34-39 cm
S	39-47 cm
M	47-53 cm
L	53-59 cm
XL	oltre 59 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED301

MD



MISURE (ambidestro)

Taglie Ø Coscia

0°	37-40 cm
1°	40-43 cm
2°	43-45 cm
3°	45-48 cm
4°	48-51 cm
5°	51-56 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED411

MD



FILAMED® 401

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE
CON STABILIZZATORE ROTULEO



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli, con cuscinetto ad azione compressiva locale intorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di:

- lievi distorsioni di ginocchio
- idrartro o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie
- borsite sovrarotulea
- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo

STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°

CHIUSURA

- nessuna

FILAMED® 451

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE CON STECCA
A SPIRALE E STABILIZZATORE ROTULEO



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli, con cuscinetto ad azione compressiva locale intorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di:

- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee e/o distorsioni di ginocchio
- lieve instabilità post traumatica

STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- stecca a spirale mediale e laterale

STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°

CHIUSURA

- nessuna

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 32 cm



Codice d'ordine: FILAMED401

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	58-63 cm
XXL	oltre 64 cm

Altezza 32 cm



Codice d'ordine: FILAMED451

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE
CON STABILIZZATORE LATERALE A "J"



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli, con cuscinetto ad azione compressiva locale intorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di:

- lievi distorsioni di ginocchio
- idrartro o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie
- borsite sovrarotulea
- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo

STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e fascia a Y per la trazione rotulea

SNODO/ASTE

- stecche a spirale mediali e laterali

STABILIZZATORE ROTULEO

- in gomma tubolare a forma di J posizionata lateralmente e tensionabile con due fasce a Y in neoprene a strappo

CHIUSURA

- nessuna

NOTA

- a richiesta la J potrà essere posizionata verso l'alto o il basso

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE
CON STECCHE A SPIRALE



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli, con cuscinetto ad azione compressiva locale intorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di:

- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee e/o distorsioni di ginocchio
- lieve instabilità post traumatica

STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e popliteo

SNODO/ASTE

- doppie stecche a spirale laterale e mediale

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	58-63 cm
XXL	oltre 64 cm

Altezza 32 cm

Disponibile su richiesta J superiore o J inferiore

Codici d'ordine:

FILAMED501JS (superiore); FILAMED501JI (inferiore)



MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	58-63 cm
XXL	oltre 64 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED601



FILAMED® 701

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA
CON SNODO POLICENTRICO



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica tramite compressione dei tessuti molli e guida del movimento dell'articolazione del ginocchio tramite snodi, con cuscinetto ad azione compressiva locale intorno alla rotula.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- instabilità post traumatica
- esiti distorsione ginocchio
- esiti stabilizzati di traumi al ginocchio
- traumatismi della rotula
- lieve o moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave

STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e popliteo

SNODO/ASTE

- policentrico libero
- totalmente coperto ed estraibile

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	58-63 cm
XXL	oltre 64 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED701



FILAMED® 701 AR

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA CON SNODO
POLICENTRICO E INCROCIO SUL CAVO POPLITEO



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica tramite compressione dei tessuti molli e guida del movimento dell'articolazione del ginocchio tramite snodi, con cuscinetto ad azione compressiva locale intorno alla rotula.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- coadiuvante nelle sindromi da iperlaxità legamentosa (Marfan, Ehlers-Danlos)
- esiti stabilizzati di lesioni al LCP
- lievi patologie rotulee
- lievi condropatie femoro-rotulee

STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo, fasce posteriori sul cavo popliteo che incrociano per limitare l'iperestensione del ginocchio

SNODO/ASTE

- policentrico libero
- totalmente coperto ed estraibile

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	58-63 cm
XXL	oltre 64 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED701AR



FILAMED® 701 WRAP

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA APERTA
CON SNODO POLICENTRICO



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica tramite compressione dei tessuti molli e guida del movimento dell'articolazione del ginocchio tramite snodi. Utile, ad esempio, nei casi di:

- lieve instabilità post traumatica
- esito distorsione ginocchio
- esiti stabilizzati di traumi del ginocchio
- traumatismi della rotula
- lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- gonartrosi lieve o moderata

STRUTTURA

- soft in neoprene, con foro rotuleo e popliteo, completamente apribile anteriormente

SNODO/ASTE

- policentrico libero
- totalmente coperto ed estraibile

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo

FILAMED® 801

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA
CON SNODO POLICENTRICO PHYSIOGLIDE®



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli, limitazione e guida del movimento articolare tramite snodi regolabili. Utile, ad esempio, nei casi di:

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- esiti di distorsioni ginocchio
- instabilità post traumatica

STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e popliteo

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia
XS	34-37 cm
S	38-43 cm
M	44-49 cm
L	50-55 cm
XL	57-61 cm
XXL	oltre 62 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED701W

MD



MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia	Ext.	Flex.	Imm.
XS	34-39 cm	0°	0°	0°
S	40-45 cm	10°	10°	10°
M	46-51 cm	20°	20°	20°
L	52-57 cm	30°	30°	30°
XL	oltre 58 cm	45°	45°	45°
			60°	
			75°	
			120°	

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED801

MD



FILAMED® 851

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA LUNGA
CON SNODO POLICENTRICO PHYSIOGLIDE®



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli, limitazione e guida del movimento articolare tramite snodi regolabili. Utile, ad esempio, nei casi di:

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- lesioni combinate legamentose di grado lieve o moderato
- trattamento post acuto delle instabilità dei legamenti crociati
- instabilità post traumatica

STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e popliteo

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante quattro fasce a strappo

PHYLO® 90 PT-CONTROL

LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE DINAMICA
PER LA STABILIZZAZIONE ROTULEA



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica tramite compressione dei tessuti molli ed alla limitazione e guida del movimento dell'articolazione del ginocchio tramite snodi regolabili, e alla guida della cinematica rotulea. Utile, ad esempio, nei casi di:

- traumatismi della rotula
- grave artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- esiti di interventi chirurgici sulla rotula, di lateral release rotuleo, di riparazione tendine quadricipitale

STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con sistema di stabilizzazione rotuleo ad avanzamento fisiologico

- regolazione mediante stop

STABILIZZATORE ROTULEO

- con sistema dinamico ad avanzamento fisiologico integrato allo snodo

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore HEIQ SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza HEIQ PURE

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia	Ext.	Flex.	Imm.
XS	34-39 cm	0°	0°	0°
S	40-45 cm	10°	10°	10°
M	46-51 cm	20°	20°	20°
L	52-57 cm	30°	30°	30°
XL	oltre 58 cm	45°	45°	45°

Altezza 40 cm

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	120°	

MD



Codice d'ordine: FILAMED851

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Coscia	Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm	0°	0°	0°
S	37-45 cm	10°	10°	10°
M	45-51 cm	20°	20°	20°
L	51-57 cm	30°	30°	30°
XL	57-65 cm	45°	45°	45°
XXL	65-74 cm		60°	

Altezza 36 cm

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	
	120°	

MD



Codici d'ordine: PHY-90 DX; PHY-90 SX

LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE APERTA DINAMICA
PER LA STABILIZZAZIONE ROTULEA



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica tramite compressione dei tessuti molli ed alla limitazione e guida del movimento dell'articolazione del ginocchio tramite snodi regolabili, e alla guida della cinematica rotulea. Utile, ad esempio, nei casi di:

- traumatismi della rotula
- grave artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- esiti di interventi chirurgici sulla rotula, di lateral release rotuleo, di riparazione tendine quadricipitale

STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore, completamente apribile, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con sistema di stabilizzazione rotuleo ad avanzamento fisiologico
- regolazione mediante stop

STABILIZZATORE ROTULEO

- con sistema dinamico ad avanzamento fisiologico integrato allo snodo

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore HEIQ SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza HEIQ PURE

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA RIABILITATIVA POLICENTRICA
CON SISTEMA A MOLLE



INDICAZIONI

Tutore destinato al blocco del range di movimento dell'articolazione del ginocchio e alla stimolazione neuromuscolare meccanica dei flessori mediante resistenza. Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento postoperatorio delle ricostruzioni isolate o associate del LCA con tendine rotuleo o tendini flessori
- trattamento postoperatorio di osteotomie varizzanti
- trattamento conservativo o post chirurgico, di fratture del piatto tibiale, delle spine tibiali e del femore distale
- lesioni capsulari complesse del ginocchio a eccezione delle lesioni del legamento crociato posteriore

STRUTTURA

- imbottitura a fasce in tessuto accoppiato con MTP all'interno e vellutino grappante all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico libero con sistema a molle
- sistema di blocco e sblocco rapido mediante leva
- aste in alluminio

CHIUSURA

- mediante quattro fasce a strappo

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Coscia	Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm	0°	0°	0°
S	37-45 cm	10°	10°	10°
M	45-51 cm	20°	20°	20°
L	51-57 cm	30°	30°	30°
XL	57-65 cm	45°	45°	45°
XXL	65-74 cm		60°	
			75°	
			90°	
			120°	

Codici d'ordine: PHY-90A DX; PHY-90A SX

MD



MISURE (ambidestro)

Taglia unica

Altezza 40 cm

Codice d'ordine: REHA-100

MD

GNT-601

**LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA IMMOBILIZZATRICE 0°
A 3 PANNELLI**



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione ed all'immobilizzazione dell'articolazione del ginocchio. Utile, ad esempio, nei casi di:

- post operatorio della rotula
- revisione in due tempi protesi ginocchio mobilizzata
- immobilizzazione pre/post operatoria e post traumatica del ginocchio

STRUTTURA

- dotata di pannelli laterali posizionabili in base alla circonferenza dell'arto
- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

- stecche rigide in alluminio modellabile laterale, mediale e doppie nella zona posteriore

CHIUSURA

- mediante sei fasce a strappo

MISURE (ambidestro)

Taglia unica

Altezze 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm



Codici d'ordine:

GNT-601/40; GNT-601/50; GNT-601/60; GNT-601/70

GN-3PAN

**LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA IMMOBILIZZATRICE 0°
A 3 PANNELLI ECONOMY**



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione ed all'immobilizzazione dell'articolazione del ginocchio. Utile, ad esempio, nei casi di:

- post operatorio della rotula
- revisione in due tempi protesi ginocchio mobilizzata
- immobilizzazione pre/post operatoria e post traumatica del ginocchio

STRUTTURA

- dotata di pannelli laterali posizionabili in base alla circonferenza dell'arto
- imbottitura in tessuto accoppiato con rete traspirante all'interno e vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

- stecche rigide in alluminio modellabile laterale, mediale e doppie nella zona posteriore

CHIUSURA

- mediante sei fasce a strappo

MISURE (ambidestro)

Taglia unica

Altezze 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm



Codici d'ordine:

GN-3PAN/40; GN-3PAN/50; GN-3PAN/60; GN-3PAN/70

LINEA POST OPERATORIA GINOCCHIERA CON SUPPORTO TIBIALE PER PCL



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione, all'immobilizzazione dell'articolazione del ginocchio e al supporto posteriore della tibia mediante cuscino.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento post acuto rotture LCP
- post operatoria ricostruzione LCP
- trattamento conservativo di instabilità cronica del LCP

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna di cotone all'interno e vellutino grippante all'esterno
- cuscinetto tibiale anatomico in poliuretano rivestito in cotone

SNODO/ASTE

- stecche rigide in alluminio modellabile laterale, mediale e doppie nella zona posteriore

CHIUSURA

- mediante sei fasce a strappo

MISURE (ambidestro)

Taglia unica

Altezze 50 cm, 60 cm



Codici d'ordine: PTS/50; PTS/60

GNO-970 LEGGY®

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA LEGGY® R.O.M.



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione, al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie varizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grappante all'esterno

SNODO/ASTE

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio

CHIUSURA

- mediante sei fasce a strappo

GNO-970 LEGGY® COOL

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA LEGGY® R.O.M. SCHELETRICA



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione, al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie varizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grappante all'esterno

SNODO/ASTE

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio

CHIUSURA

- mediante sei fasce a strappo

MISURE (ambidestro)

Corta:
per arto <80 cm
Altezza 57 cm
Lunga:
per arto >80 cm;
Altezza 63 cm

Disponibile versione
Extra-Corta con altezza 48 cm

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.
0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°



Codice d'ordine: GNO-970

MISURE (ambidestro)

Corta:
per arto <80 cm
Altezza 57 cm
Lunga:
per arto >80 cm;
Altezza 63 cm

Disponibile versione
Extra-Corta con altezza 48 cm

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.
0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°



Codice d'ordine: GNO-970 COOL



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione, al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio. Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie varizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

STRUTTURA

- imbottitura a fasce in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio

CHIUSURA

- mediante quattro fasce a strappo



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione, al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio. Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie varizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

STRUTTURA

- imbottitura a fasce in tessuto accoppiato con MTP all'interno e vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio

CHIUSURA

- mediante quattro fasce a strappo

MISURE (ambidestro)

REGOLAZIONI



	Ext.	Flex.
Corta:	0°	0°
per arto <80 cm		
Altezza 57 cm	10°	10°
Lunga:	20°	20°
per arto >80 cm;	30°	30°
Altezza 63 cm	45°	45°
	60°	60°
	75°	75°
Disponibile versione	90°	90°
Extra-Corta con altezza 48 cm	105°	105°
	120°	120°

Codice d'ordine: GNO-970ECO

MISURE (ambidestro)

REGOLAZIONI



	Ext.	Flex.
Corta:	0°	0°
per arto <80 cm		
Altezza 57 cm	10°	10°
Lunga:	20°	20°
per arto >80 cm;	30°	30°
Altezza 63 cm	45°	45°
	60°	60°
	75°	75°
Disponibile versione	90°	90°
Extra-Corta con altezza 48 cm	105°	105°
	120°	120°

Codice d'ordine: GNO-970E COOL

GNO-970 LEGGY® PLUS

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA LEGGY® R.O.M. CON VALVE



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione, al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie varizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, fratture femore distale, ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio
- post chirurgico di revisione protesica

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno
- valve di irrigidimento in polietilene sia laterale che mediale

SNODO/ASTE

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio

CHIUSURA

- mediante sei fasce a strappo

GNO-970 LEGGY® PLUS ECO

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA LEGGY® R.O.M. CON VALVE



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione, al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie varizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, fratture femore distale, ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio
- post chirurgico di revisione protesica

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con MTP all'interno e vellutino grippante all'esterno
- valve di irrigidimento in polietilene sia laterale che mediale

SNODO/ASTE

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio

CHIUSURA

- mediante sei fasce a strappo

MISURE (ambidestro)

Corta:
per arto <80 cm
Altezza 57 cm
Lunga:
per arto >80 cm;
Altezza 63 cm

Disponibile versione
Extra-Corta con altezza 48 cm

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.
0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°

MD

Codice d'ordine: GNO-970P

MISURE (ambidestro)

Corta:
per arto <80 cm
Altezza 57 cm
Lunga:
per arto >80 cm;
Altezza 63 cm

Disponibile versione
Extra-Corta con altezza 48 cm

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.
0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°

MD

Codice d'ordine: GNO-970P ECO



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione, al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie varizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, fratture femore distale, ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

STRUTTURA

- imbottitura a fasce in tessuto accoppiato con MTP all'interno e vellutino a strappo all'esterno

SNODO/ASTE

- monocentrico con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione
- aste in alluminio telescopiche

CHIUSURA

- mediante quattro fasce a strappo



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione, al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie varizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, fratture femore distale, ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

STRUTTURA

- imbottitura a fasce in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino gruppante all'esterno

SNODO/ASTE

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio
- blocco/sblocco rapido a 0°/18°/30°/45°/60°
- aste in alluminio con sistema telescopico dotato di tacche di riferimento

CHIUSURA

- mediante 4 fasce a strappo
- regolazione telescopica singola della posizione dei passanti asolati

MISURE (ambidestro)

Taglia unica

Altezza telescopica

da 49 cm a 55 cm

REGOLAZIONI

Ext. Flex.

0° 0°
10° 10°
20° 20°
30° 30°
45°
60°
75°
90°
105°
120°

MD

Codice d'ordine: GNO-960

MISURE (ambidestro)

Taglia unica

Altezze telescopica

da 49 cm a 55 cm

REGOLAZIONI

Ext. Flex. Imm.

0° 0° 0°
10° 10° 10°
20° 20° 20°
30° 30° 30°
45° 45° 45°
60° 60° 60°
75° 75° 75°
90° 90° 90°
105°
120°

NB: blocco/sblocco rapido a 0°/15°/30°/45°/60°

Codice d'ordine: GNO-975

M.4[®]s PCL DYNAMIC

LINEA FUNZIONALI
GINOCCHIERA FUNZIONALE PER PCL



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione, al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio, con meccanismo di spinta tibiale. Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento conservativo delle lesioni del legamento crociato posteriore
- trattamento conservativo delle lesioni capsulo legamentose complesse
- trattamento post operatorio nella ricostruzione del legamento crociato posteriore

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e vellutino grippante all'esterno
- sistema di spinta tibiale regolabile con sistema epicicloidale

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglidle con regolazione mediante stop senza viti di fissaggio con cappuccio di protezione Easy Click

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 4 fasce a strappo numerate regolabili e sistema di tensionamento epicicloidale per il cuscinetto tibiale

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø A	Ø B	Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm	25-27 cm	0°	0°	0°
S	37-45 cm	27-32 cm	10°	10°	10°
M	45-51 cm	32-37 cm	20°	20°	20°
L	51-57 cm	37-41 cm	30°	30°	30°
XL	57-65 cm	41-47 cm	45°	45°	45°
XXL	65-74 cm	47-50 cm		60°	

Altezza 50 cm

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
		75°
		90°

MD



NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codici d'ordine: M4S-PCL DX; M4S-PCL SX

M.4[®]s COMFORT

LINEA FUNZIONALI
GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI
PER ACL PCL CI CON SNODO PHYSIOGLIDE[®]



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione, al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse
- coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
- coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglidle con regolazione mediante stop senza viti di fissaggio
- cappuccio di protezione Easy Click

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø A	Ø B	Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm	25-27 cm	-5°	0°	0°
S	37-45 cm	27-32 cm	10°	10°	10°
M	45-51 cm	32-37 cm	20°	20°	20°
L	51-57 cm	37-41 cm	30°	30°	30°
XL	57-65 cm	41-47 cm	45°	45°	45°
XXL	65-74 cm	47-50 cm		60°	

Altezza 40 cm

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
		75°
		90°
		120°

MD



NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codici d'ordine: M4S-COM DX (bianco); M4S-COM SX (bianco); M4S-COM N DX (nero); M4S-COM N SX (nero)

M.4[®]s COMFORT SHORT

LINEA FUNZIONALI

GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI CORTA
PER ACL PCL CI CON SNODO PHYSIOGLIDE[®]



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione, al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse
- coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
- coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati

STRUTTURA

- rigida short in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e vellutino grappante all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con regolazione mediante stop senza viti di fissaggio
- cappuccio di protezione Easy Click

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

M.4[®]s X LOCK

LINEA FUNZIONALI

GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI CON SNODO
PHYSIOGLIDE[®] E SISTEMA DI BLOCCO A 0°



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione, al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse
- coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
- coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati
- trattamento post traumatico acuto di lesioni capsulo legamentose immediato post operatorio del ginocchio

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in materiale idrorepellente all'interno e vellutino grappante all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con regolazione mediante stop senza viti di fissaggio
- cappuccio di protezione Easy Click
- leva rapida di blocco/sblocco snodo a 0°

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno


CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø A	Ø B	Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm	25-27 cm	-5°	0°	0°
S	37-45 cm	27-32 cm	10°	10°	10°
M	45-51 cm	32-37 cm	20°	20°	20°
L	51-57 cm	37-41 cm	30°	30°	30°
XL	57-65 cm	41-47 cm	45°	45°	45°
XXL	65-74 cm	47-50 cm		60°	

Altezza 34 cm

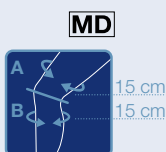


NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codici d'ordine: M4S COM SHORT DX; M4S COM SHORT SX

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø A	Ø B	Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm	25-27 cm	0°	0°	0°
S	37-45 cm	27-32 cm	10°	10°	10°
M	45-51 cm	32-37 cm	20°	20°	20°
L	51-57 cm	37-41 cm	30°	30°	30°
XL	57-65 cm	41-47 cm	45°	45°	45°
XXL	65-74 cm	47-50 cm		60°	

Altezza 40 cm

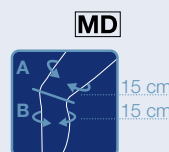

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codici d'ordine: M4S XLOCK DX; M4S XLOCK SX

PROTECT 4 EVO

LINEA FUNZIONALI
GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI
PER ACL PCL CI CON SNODO POLICENTRICO



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione, al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse
- coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
- coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in morbido vellutino grippante

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop con viti di fissaggio
- cappuccio di protezione con chiusura a vite

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø A	Ø B	Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm	25-27 cm	0°	0°	0°
S	37-45 cm	27-32 cm	10°	10°	10°
M	45-51 cm	32-37 cm	20°	20°	20°
L	51-57 cm	37-41 cm	30°	30°	30°
XL	57-65 cm	41-47 cm	45°	45°	45°
XXL	65-74 cm	47-50 cm		60°	

Altezza 40 cm

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
		75°
		90°

MD



Codici d'ordine: PRO4-EVO DX; PRO4-EVO SX

PROTECT 4 SHORT

LINEA FUNZIONALI
GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI CORTA
PER ACL PCL CI CON SNODO POLICENTRICO



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione, al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse
- coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
- coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati

STRUTTURA

- rigida short in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo in acciaio
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in morbido vellutino grippante

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop con viti di fissaggio
- cappuccio di protezione con chiusura a vite

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø A	Ø B	Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm	25-27 cm	0°	0°	0°
S	37-45 cm	27-32 cm	10°	10°	10°
M	45-51 cm	32-37 cm	20°	20°	20°
L	51-57 cm	37-41 cm	30°	30°	30°
XL	57-65 cm	41-47 cm	45°	45°	45°
XXL	65-74 cm	47-50 cm		60°	

Altezza 34 cm

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
		75°
		90°

MD



Codici d'ordine: PROTECT4 S DX; PROTECT4 S SX

LINEA OA GINOCCHIERA AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO BICOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione, al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio, con sistema di contrasto al varismo/valgismo. Utile, ad esempio, nei casi di:

- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- varo/valgo costituzionale doloroso
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile con inserti in acciaio armonico dotata di spinta laterale con regolazione personalizzabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e morbido vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide bilaterale e regolazione con stop fissati a vite
- con cappuccio di protezione Easy Click

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

LINEA OA GINOCCHIERA AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO BICOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO CORTA



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione, al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio, con sistema di contrasto al varismo/valgismo. Utile, ad esempio, nei casi di:

- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- varo/valgo costituzionale doloroso
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse

STRUTTURA

- rigida short in alluminio modellabile con inserti in acciaio armonico dotata di spinta laterale con regolazione personalizzabile
- fibbie di fissaggio fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e morbido vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide bilaterale e regolazione con stop fissati a vite
- con cappuccio di protezione Easy Click

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno


CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø A	Ø B	Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm	25-27 cm	0°	0°	0°
S	37-45 cm	27-32 cm	10°	10°	10°
M	45-51 cm	32-37 cm	20°	20°	20°
L	51-57 cm	37-41 cm	30°	30°	30°
XL	57-65 cm	41-47 cm	45°	45°	45°
XXL	65-74 cm	47-50 cm		60°	
				75°	
				90°	

Altezza 40 cm

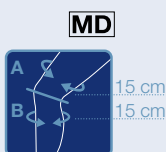


NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codici d'ordine: M4 S OAVGODX; M4 S OAVGOSX;
M4 S OAVARODX; M4 S OAVAROSX

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø A	Ø B	Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm	25-27 cm	0°	0°	0°
S	37-45 cm	27-32 cm	10°	10°	10°
M	45-51 cm	32-37 cm	20°	20°	20°
L	51-57 cm	37-41 cm	30°	30°	30°
XL	57-65 cm	41-47 cm	45°	45°	45°
XXL	65-74 cm	47-50 cm		60°	
				75°	
				90°	

Altezza 34 cm

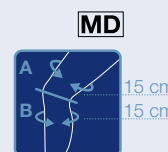

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codici d'ordine: M4SOA SH VALGODX; M4SOA SH VALGOSX;
M4SOA SH VARODX; M4SOA SH VAROSX

M.4[®]s OA COMFORT

LINEA OA
GINOCCHIERA AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO
BICOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione, al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio, con sistema di contrasto al varismo/valgismo. Utile, ad esempio, nei casi di:

- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- varo/valgo costituzionale doloroso
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile con sistema di personalizzazione
- giunti elastici delle arcate superiori e inferiori adattabili alle conformazioni
- giuntura in diagonale per garantire adattabilità
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottitura e cuscinetti in appoggio in tessuto accoppiato morbido e confortevole

SNODO/ASTE

- snodo policentrico regolabile con asta femorale anteposta e cappuccio Easy Click
- sistema di regolazione spinta varo/valgo facile e chiara grazie alla nuova grafica

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a scatto numerate e regolabili

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø A	Ø B	Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm	25-27 cm	0°	0°	0°
S	37-45 cm	27-32 cm	10°	10°	10°
M	45-51 cm	32-37 cm	20°	20°	20°
L	51-57 cm	37-41 cm	30°	30°	30°
XL	57-65 cm	41-47 cm	45°	45°	45°
XXL	65-74 cm	47-50 cm	60°	60°	60°
			75°	75°	75°
			90°	90°	90°

Altezza 40 cm

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codici ordine: M4 S OA COMF VALGO DX; M4 S OA COMF VALGO SX; M4 S OA COMF VARO DX; M4 S OA COMF VARO SX

PROTECT 4 OA

LINEA OA
GINOCCHIERA AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO
BICOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione, al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio, con sistema di contrasto al varismo/valgismo. Utile, ad esempio, nei casi di:

- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- varo/valgo costituzionale doloroso
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio fasce a strappo in acciaio
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in morbido vellutino grappante

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop con viti di fissaggio
- cappuccio di protezione con chiusura a vite

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo regolabili

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø A	Ø B	Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm	25-27 cm	0°	0°	0°
S	37-45 cm	27-32 cm	10°	10°	10°
M	45-51 cm	32-37 cm	20°	20°	20°
L	51-57 cm	37-41 cm	30°	30°	30°
XL	57-65 cm	41-47 cm	45°	45°	45°
XXL	65-74 cm	47-50 cm	60°	60°	60°
			75°	75°	75°
			90°	90°	90°

Altezza 40 cm

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codici ordine: PRO4OA VALGODX; PRO4OA VALGOSX; PRO4OA VARODX; PRO4OA VAROSX



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio, con sistema di contrasto al varismo/valgismo. Utile, ad esempio, nei casi di:

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio o varo/valgo post traumatico
- varo/valgo artrosico lieve, moderato o costituzionale doloroso

STRUTTURA

- tubolare con parte superiore a Wrap
- tessuto Phyllo-Touch in nanofibra traspirante con effetto 3D Made in FGP
- cuciture piatte e cucitura anteriore/laterale non tibiale
- silicone interno per una maggiore stabilità
- rete posteriore sul cavo popliteo con copertura interna in morbido tessuto

SNODO/ASTE

- snodo dinamico brevettato in tecnopolimero che si attiva solo nel momento di piena estensione del ginocchio
- snodo controlaterale policentrico regolabile in alluminio con asta superiore anteposta e valva di stabilizzazione

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- chiusura superiore wrap personalizzabile
- cinghie anteriori di tensionamento a strappo numerate e personalizzabili dotate di scala numerata per la giusta regolazione
- cinghie posteriori a strappo posizionate fuori dalla regione poplitea



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio, con sistema di contrasto al varismo/valgismo. Utile, ad esempio, nei casi di:

- varo/valgo costituzionale doloroso
- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse

STRUTTURA

- tubolare con parte superiore a Wrap
- tessuto Phyllo-Touch in nanofibra traspirante con effetto 3D Made in FGP
- cuciture piatte e cucitura anteriore/laterale non tibiale
- silicone interno per una maggiore stabilità
- rete posteriore sul cavo popliteo con copertura interna in morbido tessuto

SNODO/ASTE

- snodo dinamico brevettato in tecnopolimero che si attiva solo nel momento di piena estensione del ginocchio
- snodo controlaterale policentrico regolabile in alluminio con anteposizione della parte femorale

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- 4 fasce a strappo numerate regolabili: 2 esterne sagomate e 2 interne con aggancio facilitato allo snodo

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
-5°	0°	0°
0°	10°	10°
10°	20°	20°
20°	30°	30°
30°	45°	45°
45°	60°	
	75°	
	90°	
	120°	



Altezza 40 cm

Codici d'ordine: LIGHT OA VALGO DX; LIGHT OA VALGO SX;
LIGHT OA VARO DX; LIGHT OA VARO SX

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
-5°	0°	0°
0°	10°	10°
10°	20°	20°
20°	30°	30°
30°	45°	45°
45°	60°	
	75°	
	90°	
	120°	



Altezza 43 cm

Codici d'ordine: SOFT OA VALGO DX; SOFT OA VALGO SX;
SOFT OA VARO DX; SOFT OA VARO SX

M.3[®]s

LINEA OA
GINOCCHIERA AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO
MONOCOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione, al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio, con sistema di contrasto al varismo/valgismo. Utile, ad esempio, nei casi di:

- varo/valgo costituzionale doloroso
- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile con inserti in acciaio armonico, dotata di spinta laterale con regolazione personalizzabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e morbido vellutino grappante all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide unilaterale e regolazione con stop fissati a vite
- cappuccio di protezione Easy Click

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

NOTE

- dotata di cuscino pneumatico gonfiabile secondo le necessità


MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø A	Ø B	Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm	25-27 cm	0°	0°	0°
S	37-45 cm	27-32 cm	10°	10°	10°
M	45-51 cm	32-37 cm	20°	20°	20°
L	51-57 cm	37-41 cm	30°	30°	30°
XL	57-65 cm	41-47 cm	45°	45°	45°
XXL	65-74 cm	47-50 cm	60°	75°	90°

Altezza 40 cm

REGOLAZIONI

Ext. Flex. Imm.

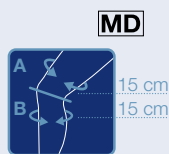

MD

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codici d'ordine: M3 S VALGO DX; M3 S VALGO SX;
M3 S VARO DX; M3 S VARO SX

M.4[®] ANTIRECURVATUM

LINEA RECURVATUM
GINOCCHIERA FUNZIONALE PER RECURVATUM



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione, al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio, con sistema di contrasto al genu recurvatum. Utile, ad esempio, nei casi di:

- controllo del genu recurvatum

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo in acciaio
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e morbido vellutino grappante all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop con viti di fissaggio
- cappuccio di protezione con chiusura a vite
- sistema ARBS di ammortizzamento progressivo mediante gommini a shore differenziati

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili


MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø A	Ø B	Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm	25-27 cm	0°	0°	0°
S	37-45 cm	27-32 cm	10°	10°	10°
M	45-51 cm	32-37 cm	20°	20°	20°
L	51-57 cm	37-41 cm	30°	30°	30°
XL	57-65 cm	41-47 cm	45°	45°	45°
XXL	65-74 cm	47-50 cm	60°	75°	90°

Altezza 40 cm

REGOLAZIONI

Ext. Flex. Imm.

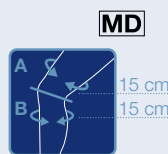

MD

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Kit di regolazione come accessorio su richiesta.

Codici d'ordine: M4 ARBS DX; M4 ARBS SX

PROTEZIONI



A



- A. CAP-100**
PROTEZIONE ROTULEA PER GINOCCHIERE FUNZIONALI
Protezione della rotula negli sport a rischio (motocross, etc.)

MISURE: taglia unica

- B. VAL-100**
VALVE DI PROTEZIONE
per **GNO-970 LEGGY®** e **GNO-970 LEGGY® ECO**

MISURE: lunga, corta



B

STABILIZZATORI ROTULEI



A



B



C

- A. STABILIZZATORE ROTULEO**
cuscinetto stabilizzante per rotula in plastazote (Filamed®)

- B. STABILIZZATORE ROTULEO**
cuscinetto a mezzaluna grippante ricoperto di morbido tessuto (PhyloEtek)

- C. STABILIZZATORE ROTULEO**
cuscinetto stabilizzante ad anello per rotula in silicone
MISURE: piccolo, grande

SNODI PER GINOCCHIERE



A



B



C



D

- A. SNODO POLICENTRICO LIBERO**
per **PHYLOETEK STABIMED® PRO**
e **PHYLOETEK STABIMED® PRO OPEN**

- B. SNODO POLICENTRICO PIATTO**
per **FILAMED® 701**, **FILAMED® 701 WRAP**
e **FILAMED® 701 AR**

- C. SNODO POLICENTRICO PHYSIOGLIDE® PIATTO**
per **FILAMED® 801**
Versione lunga **FILAMED® 851**

- D. SNODO POLICENTRICO PHYSIOGLIDE®**
per **PHYLOETEK STABIMED®**
e **PHYLOETEK STABIMED® CLOSE**
Nella versione con aste lunghe per **PHYLOETEK COLLAMED®**
e **PHYLOETEK COLLAMED® CLOSE**

CVO-700 BOOTY®

TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA
REGOLABILE R.O.M.



CVO-710

INDICAZIONI

Tutore destinato al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione tibio-tarsica. Utile, ad esempio, nei casi di:

- distorsioni di caviglia I, II, III grado
- esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso
- trattamento della pseudoartrosi base V metatarso
- esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale
- post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grappante all'esterno

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- scafo esterno in alluminio leggero ad alta resistenza
- articolazione R.O.M. della dorso flessione da +20° a -40° e della pianta flessione da -20° a +40°, ogni 10°; immobilizzazione a 10° e 20°
- aste disponibili in versione lunga e corta
- suola antiscivolo con conformazione a barca

CHIUSURA

- frontale a strappo dell'imbottitura e 5 fasce di fissaggio per CVO-700
- frontale a strappo dell'imbottitura e 4 fasce di fissaggio per CVO-710

MISURE (ambidestro)

Taglie	Calzata scarpa	Altezza CVO-700
S	32-38	41 cm
M	38-43	43 cm
L	43-48	46 cm

MD



Altezza per CVO-710 BOOTY® SHORT 35 cm

Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.

Codici d'ordine: CVO-700 (normale); CVO-710 (short)

CVO-700 ECO

TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA
REGOLABILE R.O.M. ECONOMY



CVO-700P ECO

INDICAZIONI

Tutore destinato al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione tibio-tarsica. Utile, ad esempio, nei casi di:

- distorsioni di caviglia I, II, III grado
- esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso
- trattamento della pseudoartrosi base V metatarso
- esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale
- post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con vellutino grappante all'interno ed all'esterno per CVO-700 ECO
- imbottitura in tessuto accoppiato con vellutino e interno pneumatico gonfiabile con pompetta nella versione CVO-700P ECO

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- scafo esterno in tecnopolimero ad alta resistenza
- articolazione R.O.M. regolabile mediante pin
- suola antiscivolo con conformazione a barca
- regolazione dell'articolazione R.O.M. della dorso flessione da 0° a 45° e della pianta flessione da 0° a 45° ogni 7.5 e possibilità di immobilizzazione a 0°-7.5°-15°-22.5°-30°-37.5°-45°

CHIUSURA

- frontale a strappo dell'imbottitura e 5 fasce di fissaggio

MISURE (ambidestro)

Taglie	Calzata scarpa
S	36-39
M	40-42
L	43-45
XL	Oltre 45

MD



Altezza 40 cm

Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.

Codici d'ordine:

CVO-700ECO (normale); CVO-700P ECO (pneumatico)



CVO-720

INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione dell'articolazione tibio-tarsica. Utile, ad esempio, nei casi di:

- distorsioni di caviglia I, II, III grado
- esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso
- trattamento della pseudoartrosi base V metatarso
- esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale
- post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grappante all'esterno

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- scafo esterno in alluminio leggero ad alta resistenza
- aste disponibili in versione lunga e corta
- suola antiscivolo con conformazione a barca

CHIUSURA

- frontale a strappo dell'imbottitura e 5 fasce di fissaggio per CVO-750
- frontale a strappo dell'imbottitura e 4 fasce di fissaggio per CVO-720



CVO-750 ECO DELUX PNEUMATICO

INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione dell'articolazione tibio-tarsica. Utile, ad esempio, nei casi di:

- distorsioni di caviglia I, II, III grado
- esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso
- trattamento della pseudoartrosi base V metatarso
- esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale
- post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con vellutino grappante all'interno e all'esterno (versione SMART)
- imbottitura pneumatica in tessuto accoppiato con vellutino grappante all'interno e all'esterno (versione DELUX)
- plantare traspirante e lavabile in materiale shock-absorbing
- kit di imbottiture per aumentare il comfort o removibili per aumentare l'ampiezza mediale laterale

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- un unico pezzo composto da scafo e guscio in tecnopolimero ad alta resistenza con zone traspiranti
- suola antiscivolo con conformazione a barca
- pannello frontale flessibile e removibile
- protezione delle dita regolabile e removibile

CHIUSURA

- frontale a strappo dell'imbottitura e 4 fasce di fissaggio

MISURE (ambidestro)

Taglie	Calzata scarpa	Altezza CVO-750
S	32-38	39 cm
M	38-43	42 cm
L	43-48	44 cm

MD



Altezza per CVO-720 BOOTY SHORT 35 cm

Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.

Codici d'ordine: CVO-750 (normale); CVO-720 (short)

MISURE (ambidestro)

Taglie	Calzata scarpa
S	36-40
M	40-44
L	44-47

MD



Altezza 38 cm

Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.

Codici d'ordine: CVO-750ECO NP (SMART, non pneumatico); CVO-750ECO N (DELUX, pneumatico)

**INDICAZIONI**

Il suo utilizzo è indicato in tutte le situazioni in cui è necessaria una stabilizzazione della caviglia con limitazione della pronazione e supinazione, ad es.:

- in seguito a lesioni dei legamenti dell'articolazione tibio-tarsica (II e III grado) (trattamento post-traumatico / post-operatorio)
- in seguito a distorsioni della caviglia
- in caso di instabilità cronica dell'articolazione tibio-tarsica

STRUTTURA

- cuscinetti anatomici in gel di polimero

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- disponibile in versione:
M.STEP® STANDARD dotata di valve lunghe in tecnopolimero
M.STEP® ATHLETIC dotata di valve slim in tecnopolimero

CHIUSURA

- mediante cinturini a strappo
- cinturino regolabile sottocalcanare

MISURE (ambidestro)

Taglia unica

Altezza

Standard 27 cm

Athletic 25 cm



Codici d'ordine: M.STEP STANDARD; M.STEP ATHLETIC

**INDICAZIONI**

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione della caviglia mediante compressione. Utile, ad esempio, nei casi di:

- distorsioni di I, II, III grado
- esiti chirurgici di fratture bi e tri-malleolari
- instabilità laterale di caviglia
- prevenzione nella recidiva di distorsione
- coadiuvante nel recupero sportivo
- stabilizzazione di caviglia artrosica
- esito artrodesi caviglia

STRUTTURA

- cuscinetto in materiale plastico gonfiabile con pompetta

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- dotata di valve in materiale plastico

CHIUSURA

- a strappo mediante cinturini
- cinturino regolabile sottocalcanare

MISURE (ambidestro)

Taglia unica

Altezza 25 cm



Codice d'ordine: CVO-601



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione della caviglia mediante compressione e fasce elastiche. Utile, ad esempio, nei casi di:

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità acute e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

STRUTTURA

- in neoprene

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- dotata di stecca a spirale laterale e mediale e bendaggio ad 8 realizzato in materiale elastico

CHIUSURA

- a strappo posizionata anteriormente
- ulteriore fascia sopramalleolare per una maggiore stabilizzazione



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione della caviglia mediante compressione e fasce elastiche. Utile, ad esempio, nei casi di:

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità acute e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

STRUTTURA

- in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- dotata di stecca a spirale laterale e mediale e bendaggio ad 8 realizzato in materiale elastico

CHIUSURA

- a strappo posizionata anteriormente
- ulteriore fascia sopramalleolare per una maggiore stabilizzazione

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore HEIQ SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza HEIQ PURE

MISURE (ambidestro)

Taglie Ø Collo piede

XS	24-26 cm
S	27-29 cm
M	30-32 cm
L	33-35 cm
XL	36-38 cm



Codice d'ordine: FILAMED901

MISURE (ambidestro)

Taglie Ø Collo piede

XS	24-26 cm
S	27-29 cm
M	30-32 cm
L	33-35 cm
XL	36-38 cm



Codice d'ordine: DT3-CVT

CVO-800 ANKLE STABIL

CAVIGLIERA STABILIZZANTE CON PLACCHE MALLEOLARI



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione della caviglia mediante compressione. Utile, ad esempio, nei casi di:

- distorsioni di I, II, III grado
- esiti chirurgici di fratture bi e tri-malleolari
- instabilità laterale di caviglia
- prevenzione nella recidiva di distorsione
- coadiuvante nel recupero sportivo
- stabilizzazione di caviglia artrosica
- esito artrodesi caviglia

STRUTTURA

- in poliestere con tallone aperto

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- placche malleolari in materiale plastico estraibili

CHIUSURA

- a laccio

MISURE (ambidestro)

Taglie	Calzata scarpa
S	37-40
M	41-42
L	43-44
XL	45-46

MD



Codice d'ordine: CVO-800

8LIGHT

CAVIGLIERA CON BENDAGGIO AD 8



■ Nero
■ Skin

CL8-200

INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione della caviglia mediante compressione e fasce elastiche. Utile, ad esempio, nei casi di:

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità acute e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

STRUTTURA

- tessuto Sensitive® Fabrics che conferisce elasticità, leggerezza, traspirabilità ed aderenza

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- bendaggio ad 8 realizzato in materiale altamente elastico

CHIUSURA

- a strappo posizionata posteriormente

NOTE

- disponibile in colore nero e skin

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Collo piede
S	24-28 cm
M	28-33 cm
L	33-38 cm

MD



Codici d'ordine: CL8-100 (nero); CL8-200 (skin)



CVO-400

TUTORE PER CAVIGLIA E PIEDE CIONDOLANTE



INDICAZIONI

Tutore atto al sostegno meccanico del piede, utile, ad esempio, nel caso di trattamento del piede ciondolante

STRUTTURA

- in polietilene flessibile con imbottitura sul polpaccio

CHIUSURA

- a strappo mediante cinturino

NOTA

- il materiale può essere ritagliato a misura e modellato

MISURE (DX/SX)

Uomo - **Altezza** 34 cm
Donna - **Altezza** 31 cm



Codici d'ordine: CVO-400 DONNA; CVO-400 UOMO

LEVAMED® 508

CAVIGLIERA ELASTICA CON SUPPORTO IN SILICONE



INDICAZIONI

Tutte le indicazioni in cui è necessaria una compressione dei tessuti molli con cuscinetto(i) imbottito(i) locale(i) sulla caviglia, ad es.:

- leggere instabilità
- distorsioni, ematomi
- gonfiore e versamenti articolari (artrosi / artrite)

STRUTTURA

- in materiale elastico con compressione propriocettiva altamente traspirante e termoregolatore con fibre di eucalipto
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- conformazione anatomica senza cuciture

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- cuscinetti in silicone retromalleolari integrati con design in 3D per massaggio

CHIUSURA

- no

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Caviglia
1°	17-20 cm
2°	20-22 cm
3°	22-24 cm
4°	24-26 cm
5°	26-28 cm
6°	28-30 cm



La tg 1° e 2° è utilizzabile anche dai bambini

Codice d'ordine: M508



INDICAZIONI

Tutte le indicazioni in cui è necessaria una compressione dei tessuti molli con cuscinetto(i) imbottito(i) locale(i) sulla caviglia, ad es.:

- leggera instabilità dell'articolazione della caviglia
- slogamenti e distorsioni
- versamenti articolari e gonfiori dovuti ad artrite e artrosi

STRUTTURA

- in materiale bielastico con fibre merinos latex-free altamente traspirante e termoregolatore
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- conformazione anatomica senza cuciture

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- cuscinetti in silicone con fibre di quarzo retromalleolari integrati con design in 3D per massaggio

CHIUSURA

- no



INDICAZIONI

Il suo uso è indicato in tutte le situazioni in cui è necessaria una compressione dei tessuti molli con cuscinetto(i) imbottito(i) locale(i) sulla caviglia e in cui viene limitata almeno una direzione di movimento con elementi funzionali supplementari, ad es.:

- distorsioni con iperestensione capsulare
- instabilità croniche dei legamenti con traumi da supinazione ricorrenti (lesioni da torsione)
- nella seconda fase di trattamento di rotture dei legamenti esterni
- trattamento conservativo di lesioni del legamento sindestotico, nei casi in cui non sia necessario alcun intervento chirurgico

STRUTTURA

- in materiale elastico con compressione propriocettiva altamente traspirante e termoregolatore
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- conformazione anatomica senza cuciture
- dotata di sistema di fasce a strappo per garantire la stabilità all'articolazione e controllare la supinazione

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- cuscinetti in silicone retromalleolari integrati

CHIUSURA

no

NOTE

- la cavigliera, se necessario, può essere indossata senza il sistema di fasce stabilizzanti

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Caviglia
1°	17-20 cm
2°	20-22 cm
3°	22-24 cm
4°	24-26 cm
5°	26-28 cm

MD



La tg 1° e 2° è utilizzabile anche dai bambini

Codice d'ordine: M508E

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Caviglia
1°	17-20 cm
2°	20-22 cm
3°	22-24 cm
4°	24-26 cm
5°	26-28 cm
6°	28-30 cm

MD



Codici d'ordine: M508 ACTIVE DX; M508 ACTIVE SX

**INDICAZIONI**

Tutte le indicazioni in cui è necessaria una compressione dei tessuti molli con cuscino(i) compressivo(i) locale(i) sul tendine d'Achille, ad es.:

- infiammazione acuta e cronica del tendine d'Achille
- tendinopatie Achillodinia
- borsite del tendine d'Achille

STRUTTURA

- in materiale elastico latex-free con compressione propriocettiva altamente traspirante e termoregolatore con fibre di eucalipto
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- conformazione anatomica senza cuciture

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- cuscinetti in silicone integrati

CHIUSURA

- no

NOTE

- dotata di una coppia di tallonette in silicone per ridurre le tensioni del tendine d'Achille

**INDICAZIONI**

Tutte le indicazioni in cui è necessaria una compressione dei tessuti molli sulla caviglia, ad es.:

- leggere instabilità
- distorsioni, contusioni
- gonfiore e versamenti articolari (artrosi / artriti)

STRUTTURA

- anatomica in materiale elastico bidirezionale (compressione di classe 2)
- conformazione anatomica
- tramatura differenziata sul tallone

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- no

CHIUSURA

- no

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Caviglia
1°	17-20 cm
2°	20-22 cm
3°	22-24 cm
4°	24-26 cm
5°	26-28 cm
6°	28-30 cm

MD



Codice d'ordine: M511

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Caviglia
1°	17-20 cm
2°	20-22 cm
3°	22-24 cm
4°	24-26 cm
5°	26-28 cm
6°	28-30 cm

MD



Codice d'ordine: M501

CVO-730 KIT

SET DI 3 CUNEI DI PRONAZIONE
PER TUTORE WALKER



INDICAZIONI

Dispositivo destinato alla pronazione del piede.
Utile ad esempio, nei casi di:

- trattamento riabilitativo del tendine di Achille

STRUTTURA

- kit composto da 3 cunei di pronazione di 10° ciascuno utilizzabili anche in combinata
- realizzati in gomma sintetica

NOTE

- accessori per CVO-750, CVO-750ECO N, CVO-720, CVO-750ECO NP

SWI-TWO

TAVOLETTA PROPRIOCETTIVA
BIPODALICA



INDICAZIONI

Dispositivo per esercizi propriocettivi della caviglia utile nel trattamento riabilitativo della stessa

STRUTTURA

- in materiale plastico, zigrinato e dotato di tampone
- tavoletta a ufo bipodalica

MISURE

S	32-38
M	38-43
L	43-48



Codice d'ordine: CVO-730

MISURE

Singola - unica
(diametro 36 cm)



Codice d'ordine: SWI-TWO



FGP

Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment





LINEA FULLFIT

LINEA FULLFIT



GOMITIERA

**INDICAZIONI**

Tutore destinato allo scarico della tensione sui tendini flessori ed estensori del polso mediante compressione meccanica.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- lievi epicondiliti o epitrocleiti
- trattamento conservativo della borsite olecranica
- esito rottura tendine distale del bicipite brachiale
- esito protesi capitello radiale
- esiti stabilizzati di fratture e lussazioni del gomito
- post operatorio nelle artroscopie di gomito

STRUTTURA

- soft in tessuto double-layer FGP FullFit® con sagomatura anatomica

PRESSORE

- in materiale ad alta densità posizionabile nella zona desiderata, con fascia di tensionamento a strappo

NOTE

- il materiale è stato realizzato con filo Q-Skin by Fulgar®, il quale ha un'efficacia batteriostatica che gli permette di controllare la propria flora batterica in eccesso

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Avambraccio
XS	18-22 cm
S	22-26 cm
M	26-30 cm
L	30-35 cm

**MD**5 cm
dal gomito

Altezza 24,5 cm

Codice d'ordine: FFG-300

COSCIALE FULLFIT®

SUPPORTO PER COSCIA



INDICAZIONI

Tutore destinato allo scarico della tensione muscolare della coscia mediante compressione meccanica. Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento delle contratture muscolari della coscia
- coadiuvante nel trattamento degli stiramenti muscolari
- esiti di strappi muscolari nella ripresa sportiva

STRUTTURA

- soft in tessuto double-layer FGP FullFit® con sagomatura anatomica
- dotata di particolare fascia siliconata interna superiore per garantire maggiore stabilità

NOTE

- il materiale è stato realizzato con filo Q-Skin by Fulgar®, il quale ha un'efficacia batteriostatica che gli permette di controllare la propria flora batterica in eccesso

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia
XS	40-45 cm
S	45-50 cm
M	50-56 cm
L	56-62 cm
XL	62-68 cm

Altezza anteriore 23 cm

Codice d'ordine: FFC-100



MD

GINOCCHIERA FULLFIT®

GINOCCHIERA TUBOLARE SAGOMATA



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli. Utile, ad esempio, nei casi di:

- lievi distorsioni di ginocchio
- idrarto o emarto moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie

STRUTTURA

- soft tubolare in tessuto double-layer FGP FullFit® con sagomatura anatomica
- dotata di particolare fascia siliconata interna superiore per garantire maggiore stabilità

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- nessuna

NOTE

- il materiale è stato realizzato con filo Q-Skin by Fulgar®, il quale ha un'efficacia batteriostatica che gli permette di controllare la propria flora batterica in eccesso

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia
XS	31-38 cm
S	38-45 cm
M	45-52 cm
L	52-59 cm
XL	59-66 cm
XXL	66-74 cm

Altezza 31,5 cm

Codice d'ordine: FFK-400



MD



INDICAZIONI

Tutore destinato allo scarico della tensione muscolare del polpaccio mediante compressione meccanica. Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento delle contratture muscolari del polpaccio
- coadiuvante nel trattamento degli stiramenti muscolari
- esiti di strappi muscolari nella ripresa sportiva

STRUTTURA

- soft in tessuto double-layer FGP FullFit® con sagomatura anatomica

NOTE

- il materiale è stato realizzato con filo Q-Skin by Fulgar®, il quale ha un'efficacia batteriostatica che gli permette di controllare la propria flora batterica in eccesso



INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione della caviglia mediante compressione. Utile, ad esempio, nei casi di:

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità lievi e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

STRUTTURA

- soft in tessuto double-layer FGP FullFit® con sagomatura anatomica

CHIUSURA


- no

NOTE

- il materiale è stato realizzato con filo Q-Skin by Fulgar®, il quale ha un'efficacia batteriostatica che gli permette di controllare la propria flora batterica in eccesso

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Polpaccio
S	32-36 cm
M	36-40 cm
L	40-44 cm
XL	44-48 cm

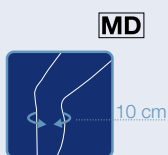

Altezza 29 cm

Codice d'ordine: FFP-200

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Caviglia
S	16-20 cm
M	20-24 cm
L	24-28 cm
XL	28-33 cm



Codice d'ordine: FFA-500



FGP

Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment





LINEA KIDZ

KIDZ-CLM

COLLARE CERVICALE SEMIRIGIDO MODULABILE PEDIATRICO



INDICAZIONI

Tutore pediatrico destinato alla limitazione del range di movimento del rachide cervicale. Utile, ad esempio, nei casi di:

- cervicalgia
- traumi distorsivi del rachide cervicale
- cervico brachialgie con o senza vertigini
- coadiuvante nel trattamento del torcicollo miogeno

STRUTTURA

- gommapiuma ad alta densità rivestita con morbido tessuto e dotato di rinforzo in polietilene

MENTONIERA

- assente

FORO TRACHEALE

- assente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

MISURE

Taglie	Ø Collo	Altezza
1°	22-28 cm	7 cm
2°	28-33 cm	8 cm

MD



Codice d'ordine: KIDZ-CLM

ASPEN® PEDIATRICO

COLLARE CERVICALE BIVALVE PEDIATRICO



INDICAZIONI

Tutore pediatrico destinato alla limitazione del movimento del rachide cervicale. Utile nei casi di:

- procedura decompressiva
- gestione della frattura
- cefalea cervicale
- sindrome del disco cervicale
- stabilizzazione post chirurgica
- dolore muscolo-scheletrico
- colpo di frusta
- strappi
- radicolopatia

STRUTTURA

- Bivalve in plastica rigida con imbottitura in tessuto accoppiato a celle aperte con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno latex free

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

MISURE

Taglie*	Peso	Altezza
PD1	5-13 Kg	53-84 cm
PD2	10-15 kg	74-94 cm
PD3	11-16 kg	84-102 cm
PD4	12-19 kg	89-114 cm
PD5	19-25 kg	94-122 cm

MD

*identificare la taglia sulla base dei due parametri peso e altezza

Codice d'ordine: ASPEN KIDZ



INDICAZIONI

Tutore pediatrico destinato alla limitazione del movimento del rachide cervicale. Utile nei casi di:

- procedura decompressiva
- gestione della frattura
- cefalea cervicale
- sindrome del disco cervicale
- stabilizzazione post chirurgica
- dolore muscolo-scheletrico
- colpo di frusta
- strappi
- radicolopatia

STRUTTURA

- Bivalve in plastica rigida con imbottitura in tessuto accoppiato a celle aperte con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno latex free, asta toracica e dorsale in alluminio

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo con fibbie

MISURE

Taglie*	Peso	Altezza
PD4	12-19 Kg	89-114 cm
PD5	19-25 kg	94-122 cm

Il collare contiene al suo interno il pannello frontale PD4 e PD5

*identificare la taglia sulla base del Collare Aspen Pediatric

Codice d'ordine: ASPEN CTO KIDZ



INDICAZIONI

Tutore pediatrico destinato all'immobilizzazione meccanica dell'articolazione del polso. Utile, ad esempio, nei casi di:

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- esiti fratture legno verde
- esiti distacchi epifisari

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile ed estraibile
- rinforzi laterali e mediali in polietilene

STRUTTURA

- morbido tessuto con monospugna all'interno
- completamente apribile
- sagomatura anatomica

CHIUSURA

- mediante 3 fasce con chiusura a strappo
- la fascia centrale allungata che segue la circonferenza del polso garantisce una maggiore stabilità dell'articolazione

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Polso
1°	11-13 cm
2°	13-15 cm
3°	oltre 15 cm

Altezza: 17 cm



Codice d'ordine: KIDZ-P04

KIDZ-P06

POLSIERA STECCATA LUNGA AMBIDESTRA PEDIATRICA



INDICAZIONI

Tutore pediatrico destinato all'immobilizzazione meccanica dell'articolazione del polso. Utile, ad esempio, nei casi di:

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- esiti fratture legno verde
- esiti distacchi epifisari

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile ed estraibile
- rinforzi laterali e mediali in polietilene

STRUTTURA

- morbido tessuto con monospugna all'interno
- completamente apribile
- sagomatura anatomica

CHIUSURA

- mediante 4 fasce con chiusura a strappo
- la fascia centrale allungata che segue la circonferenza del polso garantisce una maggiore stabilità dell'articolazione

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Polso	Altezza
1°	11-13 cm	22 cm
2°	13-15 cm	23 cm
3°	oltre 15 cm	24 cm

MD



Codice d'ordine: KIDZ-P06

KIDZ-P06D

POLSIERA STECCATA LUNGA CON IMMOBILIZZAZIONE POLLICE PEDIATRICA



INDICAZIONI

Tutore pediatrico destinato all'immobilizzazione meccanica dell'articolazione del polso e del primo dito.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- esiti frattura scafoide carpale
- trattamento lesioni di Stener
- fratture combinate di primo dito e polso stabili
- post operatorio del primo raggio
- traumi distorsivi moderati e severi di polso e primo dito
- esiti fratture legno verde

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile ed estraibile
- steccatura laterale con prolungamento sul pollice in alluminio modellabile ed estraibile
- rinforzi contro-laterale in polietilene

STRUTTURA

- morbido tessuto con monospugna all'interno
- completamente apribile
- morbido tessuto ad avvolgenza del pollice
- sagomatura anatomica

CHIUSURA

- mediante 4 fasce con chiusura a strappo
- la fascia centrale allungata che segue la circonferenza del polso garantisce una maggiore stabilità dell'articolazione

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso	Altezza
1°	11-13 cm	20,5 cm
2°	13-15 cm	21,5 cm
3°	oltre 15 cm	22,5 cm

MD



Codici d'ordine: KIDZ-P06D DX; KIDZ-P06D SX



INDICAZIONI

Tutore pediatrico destinato al sostegno meccanico dell'arto superiore. Utile, ad esempio, nei casi di:

- post trauma spalla e gomito

STRUTTURA

- soft con sacca in morbido tessuto all'esterno e monospugna all'interno
- fascia spalla in morbido tessuto grippante e ritagliabile grazie alla pinzetta removibile
- dotato di imbottitura di protezione collo

CHIUSURA

- a strappo



INDICAZIONI

Tutore pediatrico destinato all'immobilizzazione delle articolazioni della spalla e del braccio. Utile, ad esempio, nei casi di:

- lussazioni gleno-omerali
- post operatorio di fratture diafisarie e prossimale di omero
- traumi distorsivi moderati e severi della spalla
- trattamento distacchi epifisari composti della testa omerale
- fratture composte di clavicola

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in monospugna all'interno e morbido tessuto all'esterno con ampia zona grippante
- la sacca lascia libero il gomito
- dotata di fascia di immobilizzazione con ampia zona grippante

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con chiusura a strappo e ritagliabile a misura grazie alla pinzetta removibile
- dotata di doppia imbottitura a protezione del collo

MISURE (ambidestro)

Taglie	Lungh. avambraccio
1°	fino a 25 cm
2°	25-30 cm



Codice d'ordine: KIDZ-RGB

MISURE (ambidestro)

Taglie	Lungh. avambraccio
1°	fino a 25 cm
2°	25-30 cm



Codice d'ordine: KIDZ-IMB

KIDZ-RDS

IMMOBILIZZATORE CLAVICOLARE PEDIATRICO



INDICAZIONI

Tutore pediatrico destinato alla stabilizzazione dell'articolazione della spalla. Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento delle fratture di clavicola (conservativo o chirurgico)
- lussazioni acromion clavari

STRUTTURA BASE

- pannello posteriore interscapolare in materiale traspirante a contatto pelle, dotato di imbottitura e pannello di irrigidimento in polietilene all'interno
- cinghiaggio spalla in morbido materiale con monospugna all'interno e parte terminale in materiale a strappo removibile e ritagliabile a misura grazie alle pinzette removibili

MISURE

Taglie	Ø Torace
1°	58-70 cm
2°	70-82 cm

MD



Codice d'ordine: KIDZ-RDS

KIDZ-TEK

GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON STABILIZZATORE ROTULEO LINEA PHYLOTEK PEDIATRICA



INDICAZIONI

Tutore pediatrico destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli, con cuscinetto ad azione compressiva locale intorno alla rotula.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- dolore femoro-rotuleo
- lievi tendinopatie del rotuleo
- esiti lussazioni rotulee
- strabismo rotuleo
- iperlaxità di rotula
- morbo di Sinding-Larsen-Johansson
- iniziale Osgood-Schlatter

STRUTTURA

- soft in tessuto Phylotek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto nella zona posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- in silicone ad anello

CHIUSURA

- nessuna

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore HEIQ SMART TEMP

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia	Altezza
S	20-25 cm	18 cm
M	24-29 cm	21 cm
L	28-33 cm	22 cm

MD



Codice d'ordine: KIDZ-TEK



INDICAZIONI

Tutore pediatrico destinato allo scarico della tensione sul tendine rotuleo mediante compressione. Utile, ad esempio, nei casi di:

- sindrome di Osgood Schlatter

STRUTTURA


- parte interna in monospugna per garantire stabilità e comfort, con effetto massaggio
- parte esterna in vellutino grippante per la massima adattabilità

PRESSORE

- cuscinetto in silicone ricoperto in morbido tessuto

CHIUSURA

- a strappo con doppia fibbia
- dotato di un elemento elastico a livello del passante di chiusura per evitare effetto laccio

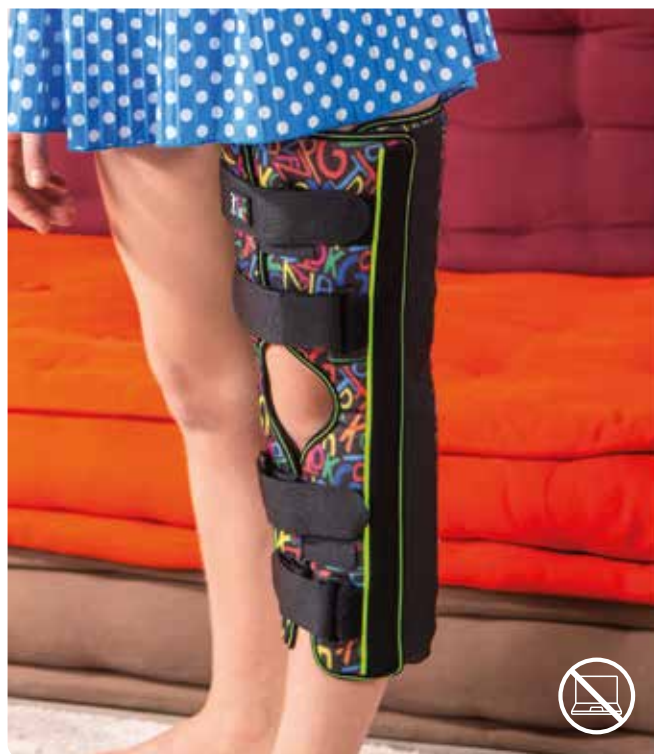

INDICAZIONI

Tutore pediatrico destinato alla stabilizzazione ed all'immobilizzazione dell'articolazione del ginocchio. Utile, ad esempio, nei casi di:

- esiti fratture distacchi epifisari del ginocchio
- traumi distorsivi del ginocchio

STRUTTURA

- dotata di pannelli laterali posizionabili in base alla circonferenza dell'arto
- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

- stecche rigide in alluminio modellabile laterale, mediale e doppie nella zona posteriore
- Tutte le stecche sono estraibili

CHIUSURA

- mediante 4 fasce con chiusura a strappo

MISURE (ambidestro)

Taglia unica



Codice d'ordine: KIDZ-TRB

MISURE (ambidestro)

Taglie	Altezza
1°	26 cm
2°	31 cm
3°	40 cm



Codice d'ordine: KIDZ-601

KIDZ-990

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA R.O.M. PEDIATRICA



INDICAZIONI

Tutore pediatrico destinato alla stabilizzazione, al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio. Utile, ad esempio, nei casi di:

- traumi distorsivi medio-gravi del ginocchio
- esiti distacchi epifisari del ginocchio
- esito epifisiodesi
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Blount
- iperlascità del ginocchio

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

- monocentrico con regolazione mediante pin e coperchio di sicurezza con vite montato su aste in alluminio modellabile

CHIUSURA

- mediante 4 fasce a strappo

MISURE (ambidestro)

Taglie	Altezza	Ext.	Flex.	Imm.
corta	25 cm	0°	0°	0°
lunga	35 cm	15°	15°	15°
		30°	30°	30°
		45°	45°	45°
		60°	60°	60°
			75°	
			90°	
			105°	

MD

Codice d'ordine: KIDZ-990

KIDZ-750

TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA
FISSO A 0° PEDIATRICO



INDICAZIONI

Tutore destinato al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione tibio-tarsica. Utile, ad esempio, nei casi di:

- malattia di Sever
- trattamento delle fratture tarsali, metatarsali e calcaneari
- esiti di fratture distali di tibia e perone
- immobilizzazione post operatoria
- distorsioni di caviglia di III grado
- trattamento post operatorio dell'artrorisi (piede piatto)

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- scafo esterno in tecnopolimero ad alta resistenza
- suola antiscivolo con conformazione a barca

CHIUSURA

- frontale dell'imbottitura a strappo e 4 fasce di fissaggio

MISURE (ambidestro)

Taglie	Calzata scarpa	Altezza
M	23-25	20 cm
L	26-28	23,5 cm
XL	29-33	29,5 cm

MD



Codice d'ordine: KIDZ-750



INDICAZIONI

Tutore pediatrico destinato alla stabilizzazione dell'articolazione della caviglia mediante compressione e fasce elastiche.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità acute e croniche di caviglia
- recupero dell'attività sportiva
- post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

STRUTTURA

- tessuto morbido e sottile per garantire elasticità, leggerezza, traspirabilità e aderenza.

Con zona superiore grippante

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- bendaggio ad 8 realizzato in materiale altamente elastico

CHIUSURA

- a strappo posizionata posteriormente



INDICAZIONI

Il suo utilizzo è indicato in tutte le situazioni in cui è necessaria una stabilizzazione della caviglia con limitazione della pronazione e supinazione, ad es.:

- in seguito a lesioni dei legamenti dell'articolazione tibio-tarsica (II e III grado) (trattamento post-traumatico / post-operatorio)
- in seguito a distorsioni della caviglia
- in caso di instabilità cronica dell'articolazione tibio-tarsica

STRUTTURA

- cuscinetti anatomici in gel di polimero

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- dotata di valve corte in tecnopolimero

CHIUSURA

- mediante cinturini a strappo
- cinturino regolabile sottocalcaneari

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Collo piede
1°	20-22 cm
2°	23-25 cm



MD

Codice d'ordine: KIDZ-CL8

MISURE (ambidestro)

Taglia unica

Altezza 12 cm

MD

Codice d'ordine: M.STEP KIDS



FGP

Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment





LINEA PIEDE



PLANTARE PRT-S01

PLANTARE IN SILICONE CON COPERTURA IN TESSUTO

INDICAZIONI

Tutore destinato al sostegno plantare.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- lieve tallonite
- lieve metatarsalgia
- lieve dolore plantare
- fascite plantare lieve

TIPOLOGIA

- plantare

STRUTTURA

- silicone con fori per aerazione
- con scarico metatarsale e calcaneare
- copertura in tessuto

MISURE

MD

Taglie Calzata scarpa

S	36-37
M	38-39
L	40-41
XL	42-43
XXL	44-45

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S01



PLANTARE PRT-S02

PLANTARE IN SILICONE

INDICAZIONI

Tutore destinato al sostegno plantare.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- lieve tallonite
- lieve metatarsalgia
- lieve dolore plantare
- fascite plantare lieve

TIPOLOGIA

- plantare

STRUTTURA

- silicone con bordi stabilizzanti
- fori per aerazione
- scarico metatarsale e calcaneare

MISURE

MD

Taglie Calzata scarpa

S	36-37
M	38-39
L	40-41
XL	42-43
XXL	44-46

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S02



SOLETTA PRT-S04

MEZZA SOLETTA METAPLANTARE IN SILICONE
CON SCARICO CALCANEARE

INDICAZIONI

Tutore destinato al sostegno metaplantare.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- lieve tallonite
- lieve dolore plantare
- fascite plantare lieve

TIPOLOGIA

- mezza soletta

STRUTTURA

- silicone con bordi stabilizzanti
- scarico ad oliva per zona calcaneare

MISURE

MD

Taglie Calzata scarpa

S	35-37
M	38-40
L	41-44

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S04



TALLONIERA PRT-S06

TALLONIERA IN SILICONE CON ZIGRINATURA

INDICAZIONI

Tutore destinato al sostegno calcaneare.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- tallonite

TIPOLOGIA

- talloniera

STRUTTURA

- silicone zigrinato
- scarico ad oliva per la zona calcaneare

MISURE (ambidestro)

MD

Taglie Calzata scarpa

S	35-37
M	38-40
L	41-44

Confezione: 2 pezzi

Codice d'ordine: PRT-S06

TALLONIERA PRT-S07

TALLONIERA IN SILICONE

INDICAZIONI

Tutore destinato al sostegno calcaneare.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- tallonite

TIPOLOGIA

- talloniera

STRUTTURA

- silicone con bordi stabilizzanti
- scarico ad oliva per zona calcaneare

MISURE (ambidestro)

MD

Taglie Calzata scarpa

S	30-34
M	35-39
L	40-44
XL	45-47

Confezione: 2 pezzi

Codice d'ordine: PRT-S07

CUSCINETTO PRT-S09

CUSCINETTO METATARSALE IN SILICONE ANTISCIVOLO

INDICAZIONI

Tutore destinato al sostegno metatarsale.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- metatarsalgie centrali

TIPOLOGIA

- cuscinetto

STRUTTURA

- silicone zigrinato con conformazione anatomica

MISURE (DX/SX)

MD

Taglia unica

Confezione: 1 pezzo

Codice d'ordine: PRT-S09

CUSCINETTO PRT-S10

CUSCINETTO METATARSALE IN SILICONE

INDICAZIONI

Tutore destinato al sostegno metatarsale.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- metatarsalgie centrali
- neuroma di Morton

TIPOLOGIA

- cuscinetto

STRUTTURA

- silicone con distanziatore da posizionare fra le dita per evitare spostamenti all'interno della calzatura

MISURE

MD

Taglie Calzata scarpa

1°	35-39
2°	40-46

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S10

CUSCINETTO PRT-S11N

CUSCINETTO IN SILICONE PER DITA A MARTELLO

INDICAZIONI

Tutore destinato al sostegno metatarsale.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- dito a martello doloroso

TIPOLOGIA

- cuscinetto

STRUTTURA

- silicone conformato anatomicamente per le dita del piede
- dotato di separatore per evitare la frizione con la calzatura

MISURE

MD

Taglie Calzata scarpa

1°	35-39
2°	40-46

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S11N



SEPARATORE PRT-S12

SEPARATORE IN SILICONE PER DITA PIEDE

INDICAZIONI

Tutore destinato alla separazione meccanica delle dita. Utile, ad esempio, nei casi di:

- deviazione delle dita dei piedi
- sfregamenti interdigitali
- callosità interdigitali

TIPOLOGIA

- separatore

STRUTTURA

- silicone con ridotto spessore

MISURE (ambidestro)

Taglie

S	4°, 5° dito
M	2°, 3°, 4° dito
L	1°, 2° dito

MD

Confezione: 2 pezzi

Codice d'ordine: PRT-S12



DIVARICATORE PRT-S13

DIVARICATORE IN SILICONE PER DITA PIEDE

INDICAZIONI

Tutore destinato alla separazione meccanica delle dita. Utile, ad esempio, nei casi di:

- alluce valgo con secondo dito sovraddotto

TIPOLOGIA

- separatore

STRUTTURA

- silicone con conformazione anatomica per il corretto alloggiamento fra le dita

MISURE (ambidestro)

Taglie

S	4°, 5° dito
M	2°, 3°, 4° dito
L	1°, 2° dito

MD

Confezione: 2 pezzi

Codice d'ordine: PRT-S13



PROTEZIONE PRT-S20

PROTEZIONE TUBOLARE IN TESSUTO ED INTERNO IN SILICONE

INDICAZIONI

Tutore destinato alla separazione meccanica delle dita. Utile, ad esempio, nei casi di:

- protezione per dito in griffe doloroso
- protezione per calli dolorosi

TIPOLOGIA

- protezione

STRUTTURA

- in silicone all'interno e tessuto elastico all'esterno
- ritagliabile

MISURE (ambidestro)

Taglie

S	4°, 5° dito
M	2°, 3°, 4° dito
L	1°, 2° dito

MD

Confezione: 1 pezzo

Codice d'ordine: PRT-S20



PROTEZIONE PRT-S14

PROTEZIONE IN SILICONE PER ALLUCE VALGO

INDICAZIONI

Tutore destinato alla protezione dell'alluce valgo. Utile, ad esempio, nei casi di:

- borsite dolorosa della metatarsofalangea dell'alluce

TIPOLOGIA

- protezione

STRUTTURA

- silicone tubolare con anello di stabilizzazione

MISURE (ambidestro)

Taglie Calzata scarpa

1°	35-39
2°	40-46

MD

Confezione: 1 pezzo

Codice d'ordine: PRT-S14

PRO_HALLUX PRT-S15N

CORRETTORE SOFT PER ALLUCE VALGO

INDICAZIONI

Tutore destinato alla separazione meccanica delle dita. Utile, ad esempio, nei casi di:

- esiti intervento di De Prado all'alluce
- alluce valgo lieve
- borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- iniziale alluce rigido doloroso

TIPOLOGIA

• correttore

STRUTTURA

• in tessuto elastico accoppiato contenitivo ad elasticità differenziata con sistema laterale a strappo per regolare la trazione

MISURE (DX/SX)

Taglie	Calzata scarpa
S	36-38
M	38-42
L	42-44
XL	oltre 44

MD

Confezione: 1 pezzo

Codice d'ordine: PRT-S15N

HALLUX_MED PRT-S16

DIVARICATORE NOTTURNO PER ALLUCE VALGO

INDICAZIONI

Tutore destinato alla separazione meccanica delle dita. Utile, ad esempio, nei casi di:

- esiti intervento di De Prado all'alluce
- alluce valgo lieve
- borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- iniziale alluce rigido doloroso

TIPOLOGIA

• correttore

STRUTTURA

• in tecnopolimero con sistema di fissaggio mediante 2 cinturini a strappo

MISURE (DX/SX)

Taglie	Calzata scarpa
S	36-38
M	38-42
L	oltre 42

MD

Confezione: 1 pezzo

Codice d'ordine: PRT-S16

PDN-ALV

PROGRAMMA NIGHT & DAY
PER ALLUCE VALGO

PROGRAMMA ALLUCE VALGO
NIGHT&DAY
PRO_HALLUX+HALLUX_MED

INDICAZIONI

Tutore destinato alla separazione meccanica delle dita. Utile, ad esempio, nei casi di:

- esiti intervento di De Prado all'alluce
- alluce valgo lieve
- borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- iniziale alluce rigido doloroso

TIPOLOGIA

• correttore

STRUTTURA

• il programma Night & Day è composto dal tutore HALLUX_MED e PRO_HALLUX

FASE DAY

• Prevede l'uso di PRO_HALLUX durante le ore diurne offrendo il massimo comfort nelle normali attività quotidiane. Svolge un'azione protettiva con correzione moderata e costante dell'alluce valgo, grazie alla particolare costruzione con accoppiatura di materiali elastici, inserti di silicone all'interno e sistema di regolazione laterale a strappo, può essere posizionato sotto le calze e indossato nelle scarpe favorendo l'azione terapeutica anche durante la deambulazione, senza alcun fastidio

FASE NIGHT

• Questa fase prevede l'uso di HALLUX_MED durante la notte, per favorire il processo antinfiammatorio e la correzione a riposo. Efficace e confortevole, il divaricatore notturno esercita una efficace pressione sull'articolazione metatarso-falangea, utile a ridurre la torsione e il dolore. Flessibile e anallergico, asseconda perfettamente la morfologia del piede, offrendo benessere in modo naturale

MISURE (DX/SX)

Taglie	Calzata scarpa
S	36-38
M	38-42
L	oltre 42

MD

Codici d'ordine:
PDN-ALV DX; PDN-ALV SX





FASCIA PRT-S21N

FASCIA DI PROTEZIONE METATARSALE

INDICAZIONI

Tutore destinato alla protezione metatarsale.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- metatarsalgie centrali
- neuroma di Morton

TIPOLOGIA

- fascia

STRUTTURA

- morbido tessuto elastico
- cuscinetto metatarsale in silicone

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	36-41
L	42-46

MD

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S21N



PROTEZIONE PRT-S22

FASCIA DI PROTEZIONE CON CUSCINETTO ANATOMICO

INDICAZIONI

Tutore destinato alla protezione metatarsale. Utile, ad esempio, nei casi di:

- alluce valgo

TIPOLOGIA

- fascia

STRUTTURA

- morbido tessuto elastico
- cuscinetto interno anatomico in silicone con scarico centrale per alluce

MISURE

Taglia unica

MD

Confezione: 1 paio

Prodotto in esaurimento

Codice d'ordine: PRT-S22



PROTEZIONE PRT-S23

PROTEZIONE CON SILICONE PER ALLUCE VALGO

INDICAZIONI

Tutore destinato alla protezione dell'alluce valgo. Utile, ad esempio, nei casi di:

- alluce valgo

TIPOLOGIA

- protezione

STRUTTURA

- morbido tessuto elastico
- cuscinetto interno anatomico in silicone per alluce

MISURE

Taglia unica

MD

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S23

UOMO

MEMOSTEP PRT-S50

SOLETTA COMFORT/WORK

Non è un dispositivo medico.

TIPOLOGIA

- soletta

STRUTTURA

- copertura in microfibra super assorbente
- imbottitura effetto memory nella zona metatarsale e calcaneare
- parte inferiore in feltro termoformato con carboni attivi per una sensazione di freschezza e di controllo degli odori

IDEALE PER

- scarpe da tutti i giorni
- scarpe da lavoro

MISURE UOMO

Taglie	Calzata scarpa
S	39-40
M	41-42
L	43-44
XL	45-46

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine:
PRT-S50M (uomo)

DONNA

MISURE DONNA

Taglie	Calzata scarpa
S	35-36
M	37-38
L	39-40
XL	41-42

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine:
PRT-S50W (donna)

ACTIONSTEP PRT-S51

SOLETTA SPORTIVA

Non è un dispositivo medico.

TIPOLOGIA

- soletta

STRUTTURA

- copertura in microfibra assorbente con texture sportiva
- scocca semirigida iniettata nella parte del retro piede
- base realizzata da EVA di diverse densità
- inserto in EVA anti shock a livello del tallone
- parte inferiore con scanalature che garantiscono una maggiore stabilità all'interno della calzatura
- pelota metatarsale termoformata

IDEALE PER

- uso sportivo come corsa, trekking, basket, calcio, ciclismo etc.

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	35-36
M	37-38
L	39-40
XL	41-42
XXL	43-44
XXXL	45-46

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S51



Circonferenza collo



Circonferenza polso

Lunghezza mano.
Misurare dal polso alla punta
del dito medioMisurare dalla mezzera della linea ideale
che congiunge le estremità di ulna
e radio (individuabili alla palpazione)
all'inizio dell'ultima falange del polliceConsiderare la distanza tra i centri di
rotazione del polso e del 5° metacarpoLunghezza avambraccio.
Misurare dal gomito alla base
delle ditaCirconferenza avambraccio.
Misurare 5 cm al di sotto
della punta del gomitoCirconferenza avambraccio.
Misurare 5 cm dal gomito
Circonferenza bicipite.
Misurare 15 cm dal gomito

Circonferenza bicipite



Circonferenza torace



Circonferenza bacino



Circonferenza seno/vita





Circonferenza torace/vita




Circonferenza sottoseno



Ampiezza spalle

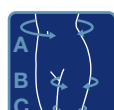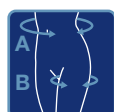Lunghezza colonna
vertebrale.
Misurare dalla zona
sacrale alla cervicaleA: circonferenza vita.
B: circonferenza prossimale
C: circonferenza distaleA: circonferenza vita.
B: circonferenza prossimale

Circonferenza vita

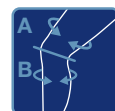Circonferenza coscia.
A: misurare 15 cm al di sopra
del centro del ginocchio
B: misurare 5 cm al di sotto
del centro del ginocchioCirconferenza coscia.
Misurare 10/15 cm al di sopra
del centro del ginocchioCirconferenza gamba.
Misurare 10/15 cm al di sotto
del centro del ginocchio

Misura calzata scarpa



Circonferenza caviglia



Circonferenza collo del piede



Utilizzabile anche da bambini

La misura si riferisce alla
distanza tra il mento in posizione
neutrale e la parte prossimale
della spalla (richiedere misuratore)

Headquarters medi GmbH & Co.
KG Medicusstraße 1
D-95448 Bayreuth, Germany
P +49 921 912-0
F +49 921 912-783
export@medi.de | www.medi.de/en



Aspen Medical Products,
LLC 6481 Oak Canyon, Irvine, CA
92618-5202 USA
+1-800-295-2776 | +1-949-681-0200
aspennmp.com



Dispositivo medico



Vendita esclusiva diretta

FGP prevede solo il canale distributivo fisico
per la vendita di questo prodotto.

L'eccellenza di FGP passa anche dalla scelta del canale di vendita. Per questo disponiamo che la vendita dei prodotti contrassegnati dal logo avvenga solo attraverso rivenditori selezionati e altamente professionali. Una scelta che tutela la nostra immagine, ma prima

di tutto salvaguarda il benessere e la fiducia di chi si affida a noi. L'azienda prevede l'impiego del solo canale distributivo fisico per la vendita di tali prodotti. L'azienda, in ragione dei continui studi che effettua al fine di migliorare l'efficacia dei prodotti offerti, si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza obbligo di preavviso i dati ed i dettagli tecnici relativi ai propri articoli.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]




Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



Scarica l'App
FGPOrteSystem®

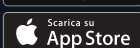

AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016