



- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non usare, rottura o non integrità del materiale.
- Il tutore deve essere indossato con una maglietta o una canottiera.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

#### AVVERTENZE D'USO

**INDICAZIONI:** tutore destinato all'immobilizzazione dell'articolazione della spalla in posizione abducta da 10° a 30°. Utile, ad esempio, nei casi di: iniziale trattamento in protesì spalla; trattamento conservativo di fratture della glena post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori; fratture del trochite omerale; stabili; lesioni di Bankart; lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili).

**CONTROINDICAZIONI:** al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

 Fabbricante	 Dispositivo medico	 Codice prodotto	 Conservare lontano da fonti di calore
 Consultare le istruzioni d'uso	 Conservare in ambiente secco	 Codice lotto	 Uso multiplo singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA  
ISO 13485:2016

 **FGP srl**  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRIMB750  
Rev. 04 - 03/23





# IMB-750






Cuscino abduttore per spalla  
da 10° a 30°



**FGP**  
Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

**NOTA:** questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o assegni malfunctionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

**CONSERVAZIONE:** conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Smettere di usare, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. **Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.**

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. <b>NOTA:</b> normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

PULIZIA

**GRADO ABDUZIONE**

- da 10° a 30°

**STRUTTURA BASE**

- cuscino in gommapiuma ad alta densità anatomico con copertura in vellutino grigio

**STRUTTURA SACCA REGGIRACCIO**

- in monospugna all'interno e vellutino grigio all'esterno

**STRUTTURA CINGHIAGGIO**

- con fasce in vellutino a strappo con manico imbottito di protezione collo e cinghia sottocosciale per la redistribuzione del peso
- dotato di fascia addominale regolabile

**NOTE**

- la conformazione avvolgente del cuscino è in grado di assicurare la stabilità dell'arto anche nella fase notturna.
- A richiesta pallina rabilattiva.

**MISURE (ambidestro)**

Taglia unica

**Codice d'ordine:** IMB-750







# ISTRUZIONI PER L'USO

## PER LA PRIMA APPLICAZIONE: INDICAZIONI PER IL MEDICO O TECNICO ORTOPEDICO

### Avvertenza

La prima applicazione del tutore e le successive regolazioni devono essere fatte solo ed esclusivamente da personale specializzato che dovrà seguire le indicazioni del medico curante.

1. Separare la sacca reggibraccio dal cuscino.
2. Aprire la chiusura della cintura vita e considerando il braccio interessato, posizionare il cuscino sul fianco del paziente. Regolare il grado di abduzione variando l'altezza del cuscino rispetto alla vita (verificare angolo dell'arto con goniometro.) Far girare intorno alla vita la cintura e fissare con la chiusura a scatto che si troverà sulla parte frontale (fig. 1).

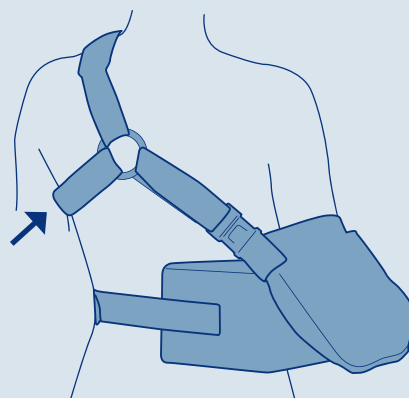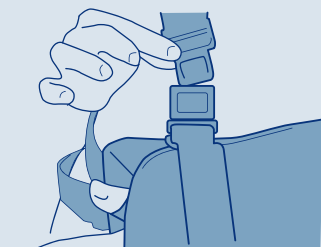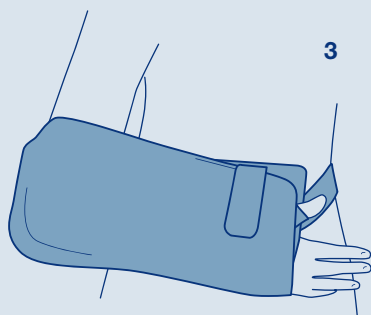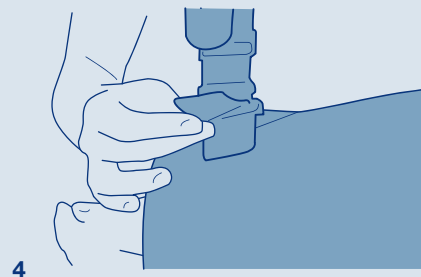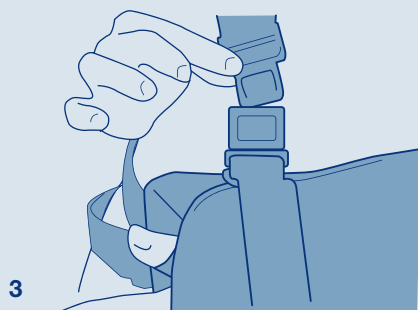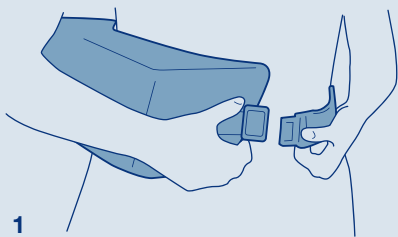

3. Far aderire il reggibraccio al cuscino.
4. Aprire la chiusura a scatto della cintura spalla e la fascia a strappo della sacca come in figura 4, inserire l'avambraccio nell'apposito reggibraccio in modo che la posizione del gomito sia più arretrata possibile (fig. 5). Chiudere la fascia a strappo della sacca (fig. 4).
5. Recuperare con il braccio libero la cintura con gli anelli, passarla sopra la spalla posizionandola alla base del collo ed infine fissarla al cuscino mediante la fibbia posta sopra la sacca (fig. 6).
6. Infine chiudere con la fascia a strappo la cintura sotto-ascellare, opzionale (fig. 7).

**Accorciare opportunamente la lunghezza delle cinture per consentire la corretta vestibilità dell'ortesi.**

## APPLICAZIONI SUCCESSIVE

Rimuovere l'ortesi solo ed esclusivamente con il consenso del medico curante.

Per le applicazioni successive: indossare e togliere il tutore utilizzando le fibbie a scatto (fig. 1 e fig. 2).