

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite protette come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).


AVVERTENZE D'USO

INDICAZIONI: tutore destinato allo scarico della tensione sul tendine rotuleo mediante compressione. Utile, ad esempio, nei casi di: sindrome di Osgood Schatter; sindrome di Sinding-Larsen-Johansson; tendinopatia del rotuleo; esiti dolorosi ricostruzione LCA con tendine rotuleo.

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016

 **F.G.P. s.r.l. unipersonale**
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISITRIB-100
Rev. 06 - 06/24



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



TR-BRACE

Cinturino pressore sottorotuleo




FGP

Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Posizionare il dispositivo nella zona tendinea tra tibia e rotula tenendo inserito il cinturino in uno dei due passanti e ponendo attenzione al corretto posizionamento del cuscinetto pressore. (figg. 1 e 2)
2. Avvolgere il cinturino alla gamba, infilando l'altro lembo nell'apposito passante. (fig. 3)
3. Effettuare la regolazione della chiusura del tutore, trazionando lungo entrambi i lati del cinturino. (fig. 4)
4. Fissare il cinturino su se stesso grazie all'apposito sistema a strappo. (fig. 5)

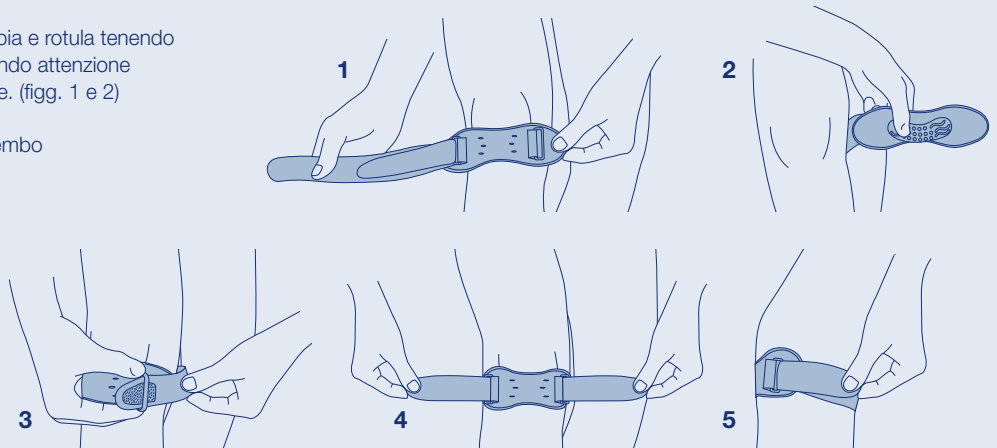

STRUTTURA

- parte interna in monospugna per garantire stabilità e comfort
- particolare effetto 3D interno per un'azione massaggiante
- parte esterna in vellutino grippante per la massima adattabilità

PRESSORE

- cuscinetto pressore in silicone ricoperto in morbido tessuto, agganciato con sistema grippante

CHIUSURA

- a strappo con doppia fibbia
- presenza di un elemento elastico a livello del passante di chiusura per evitare effetto laccio

NOTE

- disponibile in 4 colori: fucsia, lime, azzurro e grigio

MISURE (ambidestro)

Taglia unica

Codici d'ordine:

TRB-100F (fucsia)
TRB-100L (lime)
TRB-100A (azzurro)
TRB-100G (grigio)

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinazione con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.