

- Utilizzare sotto la supervisione dei genitori.
- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

AVVERTENZE D'USO

secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per bambini.

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, sindrome di Osgood Schläter:

ne sul tendine rotuleo mediante compressione. Utile, ad esempio, nei casi di:

INDICAZIONI KIDZ-TRB: tutore pediatrico destinato allo scarico della tensione del rotuleo; esiti lussazioni rotulee; strabismo rotuleo; iperassità di rotula; morbo di Sinding-Larsen-Johansson; iniziale Osgood-Schläter.

Utile, ad esempio, nei casi di: dolore femoro-rotuleo; lievi tendinopatie con cuscinetto ad azione compressiva locale intorno alla rotula.

del'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli.

INDICAZIONI KIDZ-TEK: tutore pediatrico destinato alla stabilizzazione



KIDZ-TRB



KIDZ-TEK

 Fabbricante	 Dispositivo medico	 Codice prodotto	 Conservare lontano da fonti di calore
 Consultare le istruzioni d'uso	 Conservare in ambiente secco	 Codice lotto	 Uso multiplio singolo paziente

CE

AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016

 **F.G.P. s.r.l. unipersonale**
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

FISTRKIDZTEK/TRB
Rev. 02 - 06/24




FGP | **KIDZ**

KIDZ-TEK
KIDZ-TRB

Ginocchiera traspirante con stabilizzatore rotuleo
linea Phylotek pediatrica
Cinturino sottorotuleo pediatrico

ISTRUZIONI D'USO KIDZ-TEK


1. Infilare il tutore come da **figura 1**.
2. Sfilare il tutore come da **figura 2**.

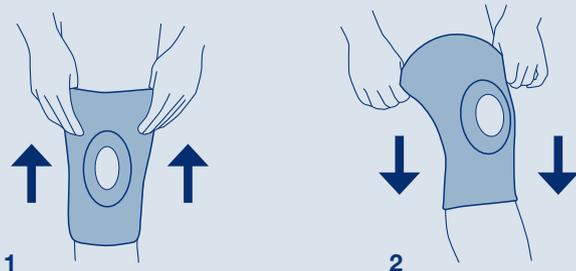

Codice d'ordine: KIDZ-TEK

ISTRUZIONI D'USO KIDZ-TRB

1. Aprire le due cinghie a strappo laterali (**fig. 1**).
2. Sfilare uno dei due elementi a strappo dalla fibbia (**fig. 2**).
3. Inserire il tutore come in **figura 3** posizionando il cuscinetto sottorotuleo nella parte frontale della gamba.
4. Chiudere il tutore facendo passare gli elementi a strappo laterali all'interno delle rispettive fibbie e chiudendoli attorno al tutore (**fig. 4**).

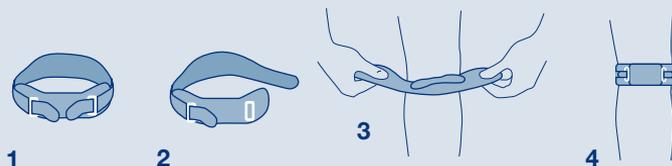

Codice d'ordine: KIDZ-TRB

KIDZ-TEK

STRUTTURA

- soft in tessuto Phylotek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto nella zona posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- in silicone ad anello

CHIUSURA

- nessuna

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore HEIQ SMART TEMP

MISURE (ambidestro)

Taglia	Ø Coscia	Altezza
S	20-25 cm	18 cm
M	24-29 cm	21 cm
L	28-33 cm	22 cm



KIDZ-TRB

STRUTTURA

- parte interna in monospugna per garantire stabilità e comfort, con effetto massaggio
- parte esterna in vellutino grappante per la massima adattabilità

PRESSORE

- cuscinetto in silicone ricoperto in morbido tessuto

CHIUSURA

- a strappo con doppia fibbia
- dotato di un elemento elastico a livello del passante di chiusura per evitare effetto laccio

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.