



PROGRAMMA ALLUCE VALGO NIGHT&DAY HALLUX FLEX + HALLUX GO

PDN-HALLUX



INDICAZIONI: tutore destinato alla separazione meccanica delle dita.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- esiti intervento di De Prado all'alluce
- alluce valgo lieve
- borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- iniziale alluce rigido doloroso

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

AVVERTENZE D'USO

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri MD (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).



HALLUX FLEX



HALLUX GO

STRUTTURA

Il programma **Night&Day** è composto dal tutore: HALLUX FLEX + HALLUX GO.

HALLUX GO offre un'azione di allineamento e correzione dell'alluce valgo, garantendo il massimo comfort nelle normali attività quotidiane, grazie anche alla presenza di un cuscinetto protettivo in materiale espanso a livello della protuberanza. Leggero e traspirante, è progettato per evitare attriti e tensioni sulla zona dell'unghia. Gli inserti interni in tecnopolimero grippante, la regolazione laterale e l'assenza di cuciture, consentono di indossarlo con le scarpe senza fastidi, favorendo l'azione terapeutica durante la deambulazione.



MISURE (DX/SX) Taglie Calzata scarpa

S	35-38
M	38-41
L	41-44
XL	44-47

HALLUX FLEX è progettata per migliorare l'allineamento dell'alluce, mantenendolo sull'asse corretto durante il riposo.

Dotata di una leva graduata per esercitare trazione regolabile sull'articolazione metatarsofalangea (0°, 7,5° e 15°), offre efficacia nella riduzione della deviazione e del dolore, favorendo il processo antinfiammatorio.

**Codice d'ordine:
PDN-HLX**

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al MD, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.



Fabbricante



Dispositivo medico



Codice prodotto



Conservare lontano da fonti di calore



Consultare le istruzioni d'uso



Conservare in ambiente secco



Codice lotto



Uso multiplo singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016



Orthopedic & Rehabilitation Equipment



FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRPDN-HLX
Rev. 00 - 04/24

HALLUX GO

TUTORE SOFT PER ALLUCE VALGO



INDICAZIONI

Tutore destinato alla separazione meccanica delle dita.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- esiti intervento di De Prado all'alluce
- alluce valgo lieve
- borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- iniziale alluce rigido doloroso

TIPOLOGIA


- Correttore

STRUTTURA

- In tessuto elastico accoppiato contenitivo ad elasticità differenziata con sistema laterale a strappo per regolare la trazione

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aprire il cinturino.
2. Rimuovere le pellicole protettive presenti sopra il materiale antiscivolo.
3. Calzare il tutore attraverso l'apertura (fig.1).
4. Inserire l'alluce nell'apposita sede (fig.2).
5. Per regolare la trazione esercitata dal tutore procedere alla chiusura del cinturino in prossimità della caviglia (fig.3).
6. Controllare che il cuscinetto protettivo interno sia posizionato in corrispondenza dell'allargamento alla base dell'alluce (fig.3).
7. Nel caso in cui la porzione di tessuto in corrispondenza della punta dell'alluce creasse fastidi, è possibile accorciarla.

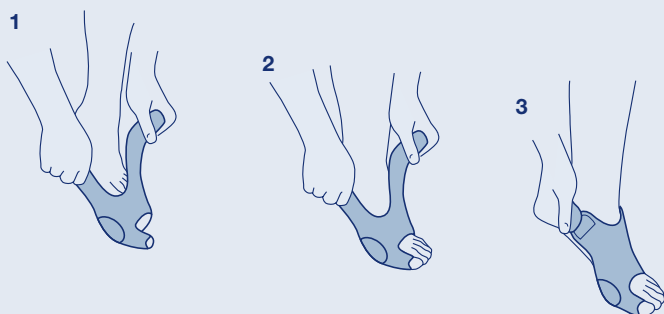

HALLUX FLEX

DIVARICATORE NOTTURNO PER ALLUCE VALGO



INDICAZIONI

Tutore destinato alla separazione meccanica delle dita.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- esiti intervento di De Prado all'alluce
- alluce valgo lieve
- borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- iniziale alluce rigido doloroso

TIPOLOGIA

- Correttore

STRUTTURA

- In tecnopolimero con snodo dotato di regolazione in 3 posizioni e sistema di fissaggio a strappo regolabile

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Utilizzare su epidermide asciutta e pulita.
2. Aprire i nastri a strappo e verificare che la leva graduata presente sullo snodo sia in posizione 1 corrispondente a 0°.
3. Infilare il tutore calzando prima il cinturino grande sul collo del piede (fig.1) e a seguire il cinturino piccolo sull'alluce (fig.1). Durante l'indosso mantenere la parte rigida posizionata sull'interno del piede in modo che lo snodo risulti centrato rispetto all'allargamento alla base dell'alluce (fig.2).
4. Chiudere i nastri a strappo regolando la lunghezza dei cinturini avendo cura di tensionarli in modo da ottenere una prima correzione del valgismo dell'alluce.
5. Nel caso in cui il gancio dei cinturini di chiusura fosse eccessivamente lungo o creasse fastidio, accorciarlo arrotondandone i bordi.
6. Una volta indossato procedere alla regolazione dello snodo spingendo la leva graduata fino alla tacca che assicura una minor sensazione di dolore (fig. 3).

