



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

RHIZO SKIN

Tutore soft per pollice



INDICAZIONI: Tutore destinato alla limitazione del range di movimento del primo dito. Utile, ad esempio, nei casi di:

- rizoartrosi
- tendinopatie del pollice
- distorsioni metacarpofalangee

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** per adulti.

AVVERTENZE D'USO

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modi-fica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri MD (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).



Fabbricante



Dispositivo
medico



Codice
prodotto



Conservare lontano
da fonti di calore



Consultare le
istruzioni d'uso



Conservare in
ambiente secco



Codice
lotto



Uso multiplio
singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



FGP srl


Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRHISKI
Rev. 00 - 04/24

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aprire il cinturino di chiusura
2. Rimuovere la pellicola protettiva presente sopra al materiale antiscivolo.
3. Indossare il tutore come se fosse un guanto inserendo il pollice nell'apposita sede (fig. 1).
4. Chiudere il tutore all'altezza del polso facendo passare il cinturino velcrabile all'interno della fibbia, richiudendolo poi su sé stesso (fig. 2).
5. Ruotare il cinturino sul polso verso destra o verso sinistra, per il raggiungimento della posizione ottimale, fino ad avvertire sollievo dal dolore (fig. 3).

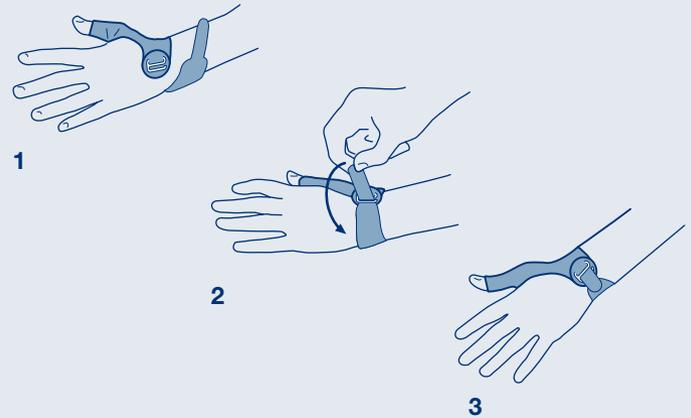

STECCATURA

- nessuna

STRUTTURA

- in tessuto elastico accoppiato contenitivo ad elasticità differenziata con tecnopolimero grippante all'interno

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	13-15 cm
M	15-17 cm
L	17-20 cm



Codice d'ordine:
RHI-SKIN

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinazione con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.