

EPICO-REVO PLUS EPICO-REVO PS PLUS

Tutori per gomito R.O.M.

CONTROLLO RINNOVATO, RECUPERO GUIDATO.

FGP rinnova la linea dei tutori funzionali FGP per il trattamento post-operatorio e conservativo del gomito, **Epico-Revo PS Plus** e **Epico-Revo Plus**.

Progettati per il professionista sanitario che cerca il **giusto compromesso** tra la compliance del paziente e il controllo dell'articolazione.

La linea, completa delle due versioni, offre al medico la giusta alternativa per soddisfare le proprie necessità terapeutiche, e al tecnico ortopedico fornisce una **migliore adattabilità e facilità di regolazione**.



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

EPICO-REVO PLUS e EPICO-REVO PS PLUS

Le caratteristiche descritte in questa pagina sono comuni a entrambe le versioni **Epico-Revo Plus** ed **Epico-Revo PS Plus**, che si distinguono per la presenza, nella versione PS Plus, del sistema di regolazione della **prono-supinazione** del polso.

SISTEMA DI CHIUSURA E CINTURINI QUICK-FIT. FACILE E INTUITIVO.

Il tutore è dotato di **4 cinturini** in vellutino morbido con terminale a pinzetta numerata per guidare l'utilizzatore al corretto posizionamento, e del nuovo dispositivo di aggancio rapido **QUICK-FIT**.

Il sistema, in combinazione con il particolare design del passante a profilo curvilineo, **facilita** l'aggancio e migliora l'adattabilità alle varie conformazioni anatomiche.

TELAIO E STRUTTURA IN ALLUMINIO. TENUTA E AFFIDABILITÀ.

Telaio in alluminio modellabile dotato di elementi di ancoraggio in grado di avvolgere la muscolatura del braccio e dell'avambraccio per offrire una **migliore stabilità**.

L'**asta palmare** è regolabile in lunghezza grazie alla sezione a scorrimento fissabile tramite viti.

FASCIA DI SOSTEGNO. COMFORT E TUTELA.

Dotato di fascia di sostegno in vellutino regolabile agganciato alla struttura e quindi **indipendente** dalla regolazione della **prono-supinazione** della mano.



ARTICOLAZIONE SOTTO CONTROLLO.

IMBOTTITURE TERMOFORMATE. COMFORT E PERSONALIZZAZIONE.

Le imbottiture realizzate in **polietilene** e **termoformate** sono ritagliabili e personalizzabili alla morfologia del paziente.

L'imbottitura dell'avambraccio replica la **conicità anatomica** dello stesso per fornire maggiore aderenza e conseguente **stabilità** senza punti di pressione eccessivi.

I rilievi interni favoriscono il circolo venoso e **riducono la pressione** su un'eventuale ferita chirurgica.

Strisce di silicone nell'imbottitura del braccio evitano la migrazione del tutore durante l'uso.

SNODO ROM E SISTEMA QUICK-LOCK. REGOLAZIONE INTUITIVA.

Il nuovo snodo a basso profilo consente il controllo del **ROM** in flessione (-10° – 120°) e in estensione (-10° – 90°), con regolazioni a step di 10° . L'integrazione del -10° di estensione nel settaggio di regolazione rende il tutore in grado di **adattarsi** a tutte le varie conformazioni anatomiche, come ad esempio quelle femminili che presentano un valgismo di gomito maggiormente pronunciato. Per maggiore sicurezza, la regolazione avviene tramite estrazione dei cursori.

Lo snodo è inoltre dotato di dispositivo **QUICK-LOCK** per il blocco rapido a 0° , 15° , 30° , 45° , 60° , 75° e 90° .

VERSIONE EPICO-REVO PS PLUS

PALMARE DOTATO DI PRONO-SUPINAZIONE REGOLABILE.

L'**articolazione palmare** consente di impostare e bloccare la posizione rotazionale dell'avambraccio in step di 25° , da 75° di pronazione a 75° di supinazione.

La particolare conformazione anatomica dell'impugnatura facilita il posizionamento anche in presenza di edema post-operatorio. La **fascia aggiuntiva** presente sulla mano aiuta il mantenimento della posizione corretta anche durante la fase notturna e di riposo.

VERSIONE EPICO-REVO PLUS

PALMARE FISSO

Dotato di maniglia ergonomica e imbottitura fissa, utile per **stabilizzare l'arto** in posizione neutra.



EPICO-REVO PLUS

TUTORE PER GOMITO R.O.M.

INDICAZIONI: Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica, blocco e limitazione del range di movimento dell'articolazione del gomito. Utile, ad esempio, nei casi di:

- Post-operatorio di fratture, lussazioni, protesi di gomito
- Lussazioni del gomito
- Iniziale trattamento nel post-operatorio di protesi di capitello radiale
- Riabilitazione nel trattamento post-operatorio o conservativo di fratture di gomito
- Trattamento fratture distali dell'omero
- Post-operatorio lesioni del legamento mediale e/o laterale del gomito
- Post-operatorio lesioni di bicipite o tricipite
- Post-operatorio ricostruzione legamenti collaterale ulnare o radiale

STRUTTURA

- Rigida in alluminio modellabile
- Imbottitura termoformata in polietilene accoppiato a vellutino con particolari scanalature. Dotato di strisce in silicone sulla parte superiore, ritagliabile
- Supporto palmare regolabile
- Fasce di chiusura numerate e dotate di sistema Quick-Fit
- Cintura spalla regolabile con tubolare di protezione collo

TIPOLOGIA DI REGOLAZIONE

- Snodo ROM di dimensioni contenute
- Regolabile mediante ghiera di sblocco e cursore estraibile
- Dotato di 14 settaggi per flessione, estensione, immobilizzazione (con regolazione ogni 10°)
- Dotato di dispositivo Quick-Lock per il blocco rapido a 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

PRONO-SUPINAZIONE DEL POLSO

- Fissa

CHIUSURA

- A strappo, dotato di sistema di chiusura Quick-Fit

MISURE DX/SX

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.	Imm. Quicklock
-10	-10	0	0
0	0	10	15
10	10	20	30
20	20	30	45
30	30	40	60
40	40	50	75
50	50	60	90
60	60	70	
70	70	80	
80	80	90	
90	90	100	
		100	110
		110	120
		120	

TAGLIE

EPICO REVO PLUS

S	fino a 28 cm
L	oltre 28 cm



MD

CODICI D'ORDINE:
EPICO-REVOPLDX
EPICO-REVOPLSX

EPICO-REVO PS PLUS

TUTORE PER GOMITO R.O.M. CON DISPOSITIVO DI PRONO SUPINAZIONE DEL POLSO

INDICAZIONI: Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica, blocco e limitazione del range di movimento dell'articolazione del gomito. Utile, ad esempio, nei casi di:

- Post-operatorio di fratture, lussazioni, protesi di gomito
- Lussazioni del gomito
- Iniziale trattamento nel post-operatorio di protesi di capitello radiale
- Riabilitazione nel trattamento post-operatorio o conservativo di fratture di gomito
- Trattamento fratture distali dell'omero
- Post-operatorio lesioni del legamento mediale e/o laterale del gomito
- Post-operatorio lesioni di bicipite o tricipite
- Post-operatorio ricostruzione legamenti collaterale ulnare o radiale

STRUTTURA

- Rigida in alluminio modellabile
- Imbottitura termoformata in polietilene accoppiato a vellutino con particolari scanalature. Dotato di strisce in silicone sulla parte superiore, ritagliabile
- Supporto palmare regolabile
- Fasce di chiusura numerate e dotate di sistema Quick-Fit
- Cintura spalla regolabile con tubolare di protezione collo

TIPOLOGIA DI REGOLAZIONE

- Snodo ROM di dimensioni contenute
- Regolabile mediante ghiera di sblocco e cursore estraibile
- Dotato di 14 settaggi per flessione, estensione, immobilizzazione (con regolazione ogni 10°)
- Dotato di dispositivo Quick-Lock per il blocco rapido a 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

PRONO-SUPINAZIONE DEL POLSO

- Dotato di ampia impugnatura ergonomica e fascia aggiuntiva di blocco mano, utile durante la fase notturna
- Regolabile e/o bloccabile a 0°, 25°, 50°, 75° di pronazione o supinazione

CHIUSURA

- A strappo, dotato di sistema di chiusura Quick-Fit

MISURE DX/SX

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.	Imm. Quicklock
-10	-10	0	0
0	0	10	15
10	10	20	30
20	20	30	45
30	30	40	60
40	40	50	75
50	50	60	90
60	60	70	
70	70	80	
80	80	90	
90	90	100	
		100	110
		110	120
		120	

TAGLIE

EPICO REVO PS PLUS

S	fino a 32 cm
L	oltre 32 cm



MD

CODICI D'ORDINE:
EPICO-REVOPSLDX
EPICO-REVOPSLSX



Inquadra il QR Code
e scopri tutti i prodotti.

FGP srl Via Alessandro Volta 3, I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867 F +39 0458600835 E fgp@fgpsrl.it



Scarica l'App
FGPOrteSystem®

f i n
fgpsrl.it



FGP

Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FFOLDEPICOREVOPLUS
Rev 00 - 02/26