

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

AVVERTENZE D'USO

APPLICAZIONE: solo per adulti.

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni.

INDICAZIONI FEEL TECH 40-41: tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli, con cuscinetto ad azione compressiva locale intorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di: moderate o gravi condropatie femoro-rotulee; lievi tendinopatie del rotuleo; lieve artrosi femoro-rotulea; esiti lussazioni rotulee.



Fabbricante



Dispositivo medico



Codice prodotto



Conservare lontano da fonti di calore



Consultare le istruzioni d'uso



Conservare in ambiente secco



Codice lotto



Uso multiplo singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016



FGP srl

Via Alessandro Volta 3

I-37062 Dossobuono VR

T +39 0458600867

F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTFEEL4041
Rev.00 - 07/26



FGP

Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



FGP


FEELTECH



FEEL TECH 40-41

Linea FEEL TECH - Ginocchiera traspirante con stabilizzatore rotuleo ad anello o a mezzaluna in silicone

1. Risvoltare la fascia antimigrazione verso l'esterno (fig. 1).
2. Infilare la ginocchiera nella gamba infortunata come in (fig. 2) in modo che la zona siliconata presente all'interno del tutore sia posizionata nella parte superiore della gamba.
3. Posizionare il tutore in modo tale che il foro rotuleo sia posto esattamente sulla rotula (fig. 3).
4. Rimuovere la ginocchiera, risvoltando la fascia antimigrazione e sfilando il tutore (fig. 4).

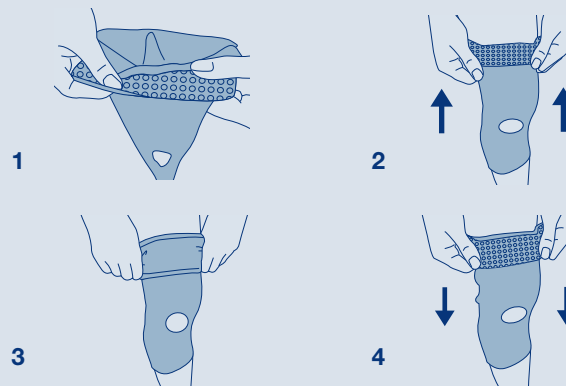

STRUTTURA

- soft in tessuto FEEL TECH traspirante realizzato con intreccio light 3D, tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- **FEEL TECH 40:** in silicone ad anello;
- **FEEL TECH 41:** a forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, orientabile a 360° con sistema a strappo

CHIUSURA

- nessuna

NOTE

- dotato di sistema antimigrazione per migliorare la tenuta
- tasca per stabilizzatore rotuleo realizzata direttamente dal telaio (per **FEEL TECH 40**)

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia
XS	34–40 cm
S	40–46 cm
M	46–52 cm
L	52–58 cm
XL	58–65 cm
XXL	65–72 cm



Altezza

FEEL TECH 40: 25 cm
FEEL TECH 41: 34 cm

Codici d'ordine:

FTH-40
 FTH-41

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE:

conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.