

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La correzione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/imitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

AVVERTENZE D'USO

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

INDICAZIONI FEEL TECH 61: tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli. Utile, ad esempio, nei casi di: ilieve instabilità post traumatica; esito distorsione del ginocchio; esiti stabilizzati di traumi del ginocchio; gonartrosi lievi.

INDICAZIONI FEEL TECH 60: tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli, con cuscinetto ad azione compressiva locale intorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di: moderato o gravi condropatite femoro-rotulee; lievi tendinopatie del rotuleo; ilieve artrosi femoro-rotulee; esiti lussazioni.



FEEL TECH 61



FEEL TECH 60



Fabbricante



Dispositivo medico



Codice prodotto



Conservare lontano da fonti di calore



Consultare le istruzioni d'uso



Conservare in ambiente secco



Codice lotto



Uso multiplo singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016



FGP srl

Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR

T +39 0458600867

F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRFEEL001
Rev.00 - 07/26



FGP

FEELTECH




FEEL TECH 60-61

Linea FEEL TECH - Ginocchiera traspirante aperta e non, con stecche a spirale




FEEL TECH 60

1. Aprire i nastri a strappo e far scorrere l'ortesi lungo la gamba, avvalendosi delle prese grip (fig. 1), in modo che la zona siliconata presente all'interno del tutore sia posizionata sulla parte superiore della gamba.
2. Posizionare il tutore in modo tale che il foro rotuleo sia posizionato esattamente sulla rotula (fig. 2).
3. Fissare infine la chiusura a strappo inferiore e poi quella superiore (figg. 3 e 4).
4. Per rimuovere il tutore aprire i nastri a strappo e sfilare la ginocchiera come da fig. 5.

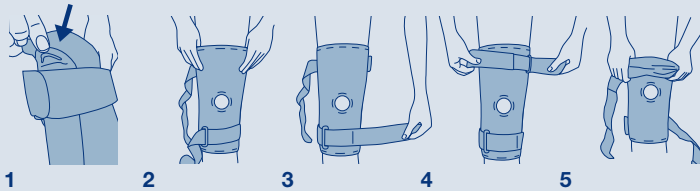

FEEL TECH 61

1. Aprire i nastri a strappo e sfilarli dai relativi passanti. Aprire la chiusura frontale e avvolgere l'ortesi stringendola attorno alla gamba da dietro in modo che la zona siliconata presente all'interno del tutore sia posizionata nella parte superiore della gamba.
2. Posizionare il tutore in modo tale che il foro rotuleo sia posizionato esattamente sulla rotula e chiudere prima la parte inferiore e poi superiore della chiusura frontale (figg. 1 e 2).
3. Infilare i nastri a strappo nei relativi passanti e chiudere prima il nastro a strappo inferiore e poi quello superiore (figg. 3 e 4).
4. Per rimuovere il tutore aprire i nastri a strappo e sfilarli dai passanti, aprire la chiusura frontale e rimuovere la ginocchiera.

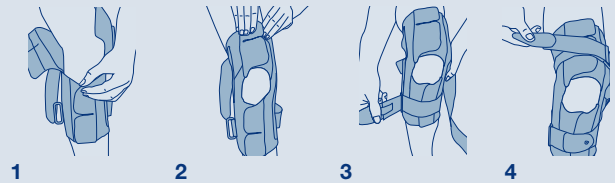

STRUTTURA

- soft in tessuto FEEL TECH traspirante privo di cuciture realizzato con intreccio light 3D, tramatura differenziata nella zona del popliteo, con foro rotuleo
- tubolare per **FEEL TECH 60**
- completamente apribile per **FEEL TECH 61**
- siliconatura interna con funzione di antimigrazione

SNODO/ASTE

- doppie stecche a spirale laterale e mediale

STABILIZZATORE ROTULEO

- a forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, orientabile a 360° con sistema a strappo per **FEEL TECH 60**
- nessuno per **FEEL TECH 61**

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate

NOTE

dotato di presa grip per facilitare l'indosso.

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia	Taglie	Ø Coscia
XS	34-40 cm	L	52-58 cm
S	40-46 cm	XL	58-65 cm
M	46-52 cm	XXL	65-72 cm



Altezza

34 cm

Codici d'ordine:

FTH-60

FTH-61

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE:

conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.