

STRUTTURA

- soft in tessuto FEEL TECH traspirante privo di cuciture realizzato con intreccio light 3D, tramatura differenziata nella zona del popliteo, con foro rotuleo
- tubolare per **FEEL TECH Stabimed® Close**
- completamente apribile per **FEEL TECH Stabimed®**

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide® con regolazione rapida mediante stop, coprisnodo in poliuretano

STABILIZZATORE ROTULEO

- a forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, orientabile a 360° con sistema a strappo per **FEEL TECH Stabimed® Close**
- nessuno per **FEEL TECH Stabimed®**

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate

MISURE (ambidestro)

Taglia	Ø Coscia
XS	34-40 cm
S	40-46 cm
M	46-52 cm
L	52-58 cm
XL	58-65 cm
XXL	65-72 cm



Altezza
34 cm

Codice d'ordine:
FTH-STAB
FTH-STABCL

REGOLAZIONI

EXT.	FLEX.	IMM.
-5°	0°	0°
0°	10°	10°
10°	20°	20°
20°	30°	30°
30°	45°	
	60°	
	75°	
	90°	
	140°	(FLEX FREE)

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

Linea FEEL TECH - Ginocchiera traspirante
aperta e non, con snodo Physioglide®
FEEL TECH STABIMED®
FEEL TECH STABIMED®
CLOSE

FEEL TECH | FGP



FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 04586000867
F +39 04586000835
www.fgppsrl.it - fgp@fgppsrl.it

CE
AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016

FISTFEELSTAB
Rev00 - 07/26

Orthopedic & Rehabilitation Equipment

REF	LOT	MD	MD
Codice prodotto	Codice lotto	Dispositivo medico	Fabbricante
Conservare lontano da fonti di calore	Uso multiplo singolo paziente		

FEEL TECH STABIMED®



FEEL TECH STABIMED® CLOSE



INDICAZIONI FEEL TECH STABIMED®: tutore destinato alla stabilizzazione meccanica tramite compressione dei tessuti molli ed alla limitazione e guida del movimento dell'articolazione del ginocchio tramite snodi regolabili. Utile, ad esempio, nei casi di: modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non; trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale; trattamento distorsioni di ginocchio; gonartrosi lieve e moderata; esiti distorsione ginocchio; instabilità post traumatica.

INDICAZIONI FEEL TECH STABIMED® CLOSE: tutore destinato alla stabilizzazione meccanica tramite compressione dei tessuti molli ed alla limitazione e guida del movimento dell'articolazione del ginocchio tramite snodi regolabili, con cuscinetto ad azione compressiva locale attorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di: modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non; trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale; trattamento distorsioni di ginocchio; gonartrosi lieve e moderata; esiti distorsione ginocchio; instabilità post traumatica; traumi della rotula e moderata artrosi femoro-rotulea; lussazione rotulea cronica e non; iperpressione rotulea grave.


CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

AVVERTENZE D'USO

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

FEEL TECH STABIMED® CLOSE

1. Aprire i nastri a strappo, sedersi su una sedia e piegare la gamba in modo che formi un angolo di 45°. Far scorrere l'ortesi lungo la gamba (fig. 1) in modo che la zona siliconata presente all'interno del tutore sia posizionata nella parte superiore della gamba.
2. Posizionare il tutore in modo tale che il foro rotuleo sia posto esattamente sulla rotula.
3. Fissare la chiusura a strappo inferiore A e poi quella superiore B (figg. 2 e 3).
4. Per rimuovere il tutore aprire i nastri a strappo e sfilare la ginocchiera.

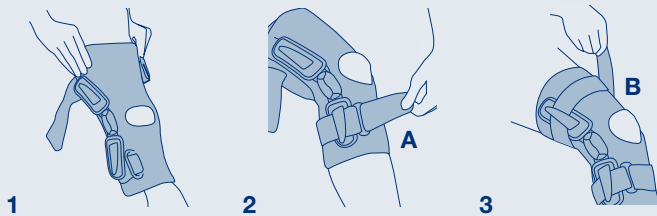**Assicuratevi della corretta posizione dell'ortesi:**

le parti centrali dello snodo devono trovarsi all'altezza della parte superiore della rotula, lo snodo deve essere posizionato dietro la linea mediana laterale della gamba. Fate qualche flessione leggera del ginocchio e riposizionate tutte le chiusure a strappo a fondo, nello stesso ordine, al fine di evitare che l'ortesi scivoli.

PER IL TECNICO ORTOPEDICO

Regolazione della flesso-estensione dello snodo.

Inserti di **limitazione dell'estensione (EXT)**:
-5°, 0°, 10°, 20°, 30°.

Inserti di **limitazione della flessione (FLEX)**:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 140° (Flex free).

Possibilità di **immobilizzazione totale a**: 0°, 10°, 20°, 30°.



A Telaio con inserti

Gli inserti in flessione (FLEX) e in estensione (EXT) devono essere sempre inseriti sullo snodo adempiendo anche alla funzione di copertura.

La configurazione senza limitazioni angolari sarà:


- Stop in estensione: EXT 0°.
- Stop in flessione: FLEX FREE (140°).

**NOTE IMPORTANTI**

Cambiate o modificate i limiti di estensione o di flessione solo su istruzione del vostro medico o tecnico ortopedico.

FEEL TECH STABIMED®




1. Aprire i nastri a strappo e sfilarli dai relativi passanti e le chiusure frontali. Sedetevi su una sedia e piegate la gamba in modo che formi un angolo di 45° e avvolgere l'ortesi stringendola attorno alla gamba da dietro in modo che la zona siliconata presente all'interno del tutore sia posizionata nella parte superiore della gamba.
2. Posizionare il tutore in modo tale che il foro rotuleo sia posto esattamente sulla rotula e chiudere la parte prima inferiore e poi superiore della chiusura frontale (figg. 1 e 2).
3. Infilare i nastri a strappo nei relativi passanti e chiudere prima il nastro a strappo inferiore (fig. 3) e poi quello superiore (fig. 4).
4. Per rimuovere il tutore aprire i nastri a strappo e sfilarli dai passanti, poi aprire la chiusura frontale e rimuovere la ginocchiera.

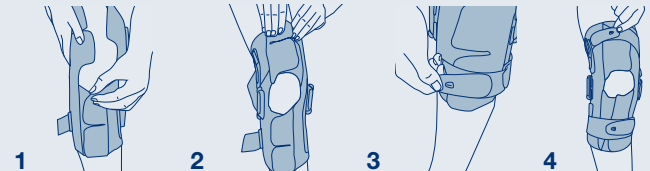**PULIZIA**

Prima del lavaggio rimuovere gli snodi dalla ginocchiera tramite una leggera torsione dello snodo stesso e chiudere tutti i nastri a strappo. Dopo il lavaggio riposizionare gli snodi nelle loro sedi.

Istruzioni per la regolazione della flesso-estensione degli snodi

1. Aprire i due fermi contrapposti. Per effettuare questa operazione è sufficiente utilizzare l'apposita scanalatura (fig. C).
2. Ora che gli inserti sono liberi, togliere prima l'inserto della flessione (FLEX) e poi, se necessario, quello dell'estensione (EXT). Per effettuare questa operazione procedere utilizzando l'apposita scanalatura posta sotto e al centro agli inserti (fig. D).
3. Individuare la coppia di inserti richiesti (uno per la FLEX, uno per l'EXT) e togliere dal telaio spaccando i ponticelli di sostegno (figg. A-B). Inserire prima l'inserto per l'estensione (EXT) e poi quello della flessione (FLEX).

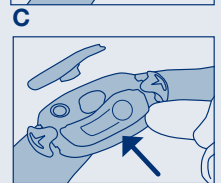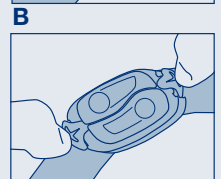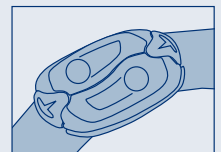

D

Sul telaio è impressa la scritta "FLEX RIGHT" per gli inserti in flessione destri e "EXT RIGHT" per gli inserti in estensione destri (per i sinistri sarà "FLEX LEFT" e "EXT LEFT"). Per evitare di confondere gli inserti destri e sinistri, è stata ricavata un'impronta differente nella piastrina dello snodo in modo che non sia possibile inserire un inserto destro in uno snodo sinistro e viceversa. Sugli inserti vi è un richiamo a tale forma evidenziato in colore differente e riportante la misura di limitazione angolare.