



FEEL TECH STABIMED® PRO OPEN



FEEL TECH STABIMED® PRO

AVVERTENZE D'USO

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

INDICAZIONI FEEL TECH STABIMED® PRO: tutore destinato alla stabilizzazione meccanica tramite compressione dei tessuti molli e guida del movimento dell'articolazione del ginocchio, con cuscinetto ad azione compressiva locale attorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di: modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non; trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale; gonartrosi lieve e moderata; distorsioni di ginocchio; lussazione rotulea; moderata artrosi femoro-rotulea; distorsioni di ginocchio; gonartrosi lieve e moderata; traumi della rotula; lieve e grave; esiti distorsione ginocchio; instabilità post traumatica.

INDICAZIONI FEEL TECH STABIMED® PRO OPEN: tutore destinato alla stabilizzazione meccanica tramite compressione dei tessuti molli e guida del movimento dell'articolazione del ginocchio, con cuscinetto ad azione compressiva locale attorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di: modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non; trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale; gonartrosi lieve e moderata; distorsioni di ginocchio; lussazione rotulea; moderata artrosi femoro-rotulea; distorsioni di ginocchio; gonartrosi lieve e moderata; traumi della rotula; lieve e grave; esiti distorsione ginocchio; instabilità post traumatica.

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.



Fabbricante



Dispositivo medico



Codice prodotto



Conservare lontano da fonti di calore



Consultare le istruzioni d'uso



Conservare in ambiente secco



Codice lotto



Uso multiplo singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016



FGP srl

Via Alessandro Volta 3

I-37062 Dossobuono VR

T +39 0458600867

F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTFEELSTABPRO
Rev.00 - 07-26



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



FGP | FEELTECH


FEEL TECH
STABIMED® PRO

FEEL TECH
STABIMED® PRO OPEN

Linea FEEL TECH - Ginocchiera traspirante
aperta e non, con snodo policentrico

FEEL TECH STABIMED® PRO

1. Aprire i nastri a strappo, sedersi su una sedia e piegare la gamba in modo che formi un angolo di 45°. Far scorrere l'ortesi lungo la gamba avvalendosi delle prese grip (figg.1 e 2) in modo che la zona siliconata presente all'interno del tutore sia posizionata nella parte superiore della gamba.
2. Posizionare il tutore in modo tale che il foro rotuleo sia posto esattamente sulla rotula.
3. Fissare la chiusura a strappo inferiore e poi quella superiore (figg. 3 e 4).
4. Per rimuovere il tutore aprire i nastri a strappo e sfilare la ginocchiera.

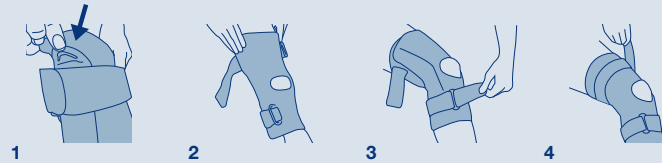

Assicuratevi della corretta posizione dell'ortesi: le parti centrali dello snodo devono trovarsi all'altezza della parte superiore della rotula, lo snodo deve essere posizionato dietro la linea mediana laterale della gamba. Fate qualche flessione leggera del ginocchio e riposizionate tutte le chiusure a strappo a fondo, nello stesso ordine, al fine di evitare che l'ortesi scivoli.

STRUTTURA

- soft in tessuto **FEEL TECH** traspirante privo di cuciture realizzato con intreccio light 3D, tramatura differenziata nella zona del popliteo, con foro rotuleo
- tubolare per **FEEL TECH Stabimed® Pro**
- completamente apribile per **FEEL TECH Stabimed® Pro Open**
- siliconatura interna con funzione di antimigrazione

SNODO/ASTE

- policentrico libero, totalmente coperto ed estraibile

STABILIZZATORE ROTULEO

- a forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, orientabile a 360° con sistema a strappo per **FEEL TECH Stabimed® Pro**
- nessuno per **FEEL TECH Stabimed® Pro Open**

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate

NOTE

- dotato di presa grip per facilitare l'indosso

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia	Taglie	Ø Coscia
XS	34-40 cm	L	52-58 cm
S	40-46 cm	XL	58-65 cm
M	46-52 cm	XXL	65-72 cm




Altezza
34 cm

Codice d'ordine:
FTH-STPRO
FTH-STPROOP

FEEL TECH STABIMED® PRO OPEN

1. Aprire i nastri a strappo e sfilarli dai relativi passanti e aprire le chiusure frontali. Sedetevi su una sedia e piegate la gamba in modo che formi un angolo di 45° e avvolgere l'ortesi stringendola attorno alla gamba in modo che la zona siliconata presente all'interno del tutore sia posizionata nella parte superiore della gamba.
2. Posizionare il tutore in modo tale che il foro rotuleo sia posto esattamente sulla rotula e chiudere prima la parte inferiore e poi superiore della chiusura frontale (figg. 1 e 2).
3. Infilare i nastri a strappo nei relativi passanti e chiudere prima il nastro a strappo inferiore (fig. 3) e poi quello superiore (fig. 4).
4. Per rimuovere il tutore aprire i nastri a strappo e la chiusura frontale e sfilare la ginocchiera.

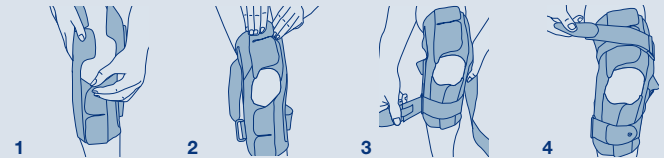

PULIZIA

Prima del lavaggio rimuovere gli snodi dalla ginocchiera tramite una leggera torsione dello snodo stesso e chiudere tutti i nastri a strappo. Dopo il lavaggio riposizionare gli snodi nelle loro sedi.

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.