



FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

CE
AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016

FISTHALPRO
Rev. 00 - 04/25

f @ ln

 Conservare lontano da fonti di calore	 Codice lotto	 Conservare in ambiente secco	 Consultare le istruzioni d'uso
 Codice prodotto	 Dispositivo medico	 Fabbricante	



INDICAZIONI: tutore destinato alla separazione meccanica delle dita.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- esiti intervento di De Prado all'alluce
- alluce valgo lieve
- borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- iniziale alluce rigido doloroso

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** per adulti.

AVVERTENZE D'USO

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

1. Aprire il cinturino.
2. Rimuovere le pellicole protettive presenti sopra il materiale antiscivolo.

3. Calzare il tutore attraverso l'apertura (fig. 1).
4. Inserire l'alluce nell'apposita sede (fig. 2).

5. Per regolare correttamente la trazione del tutore, utilizzare l'ovale allungato come guida per il posizionamento del gancio durante la chiusura del cinturino alla caviglia. (fig. 3).

6. Controllare che il cuscinetto protettivo interno sia posizionato in corrispondenza dell'allargamento alla base dell'alluce (fig. 3).

TIPOLOGIA

- correttore
- in tessuto elastico accoppiato contentitivo ad elasticità differenziata con sistema laterale a strappo per regolare la trazione

STRUTTURA

MISURE (DX/SX)
Taglie
Calzata scarpa

S 35-38
M 38-41
L 41-44
XL 44-47



Codice d'ordine:
HLX-PRO

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.
Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.