


F35 POWER
I-35 TOP
F35-100
F35-100TR

Iperestensori vertebrali a 3 punti

L'evoluzione del sostegno



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

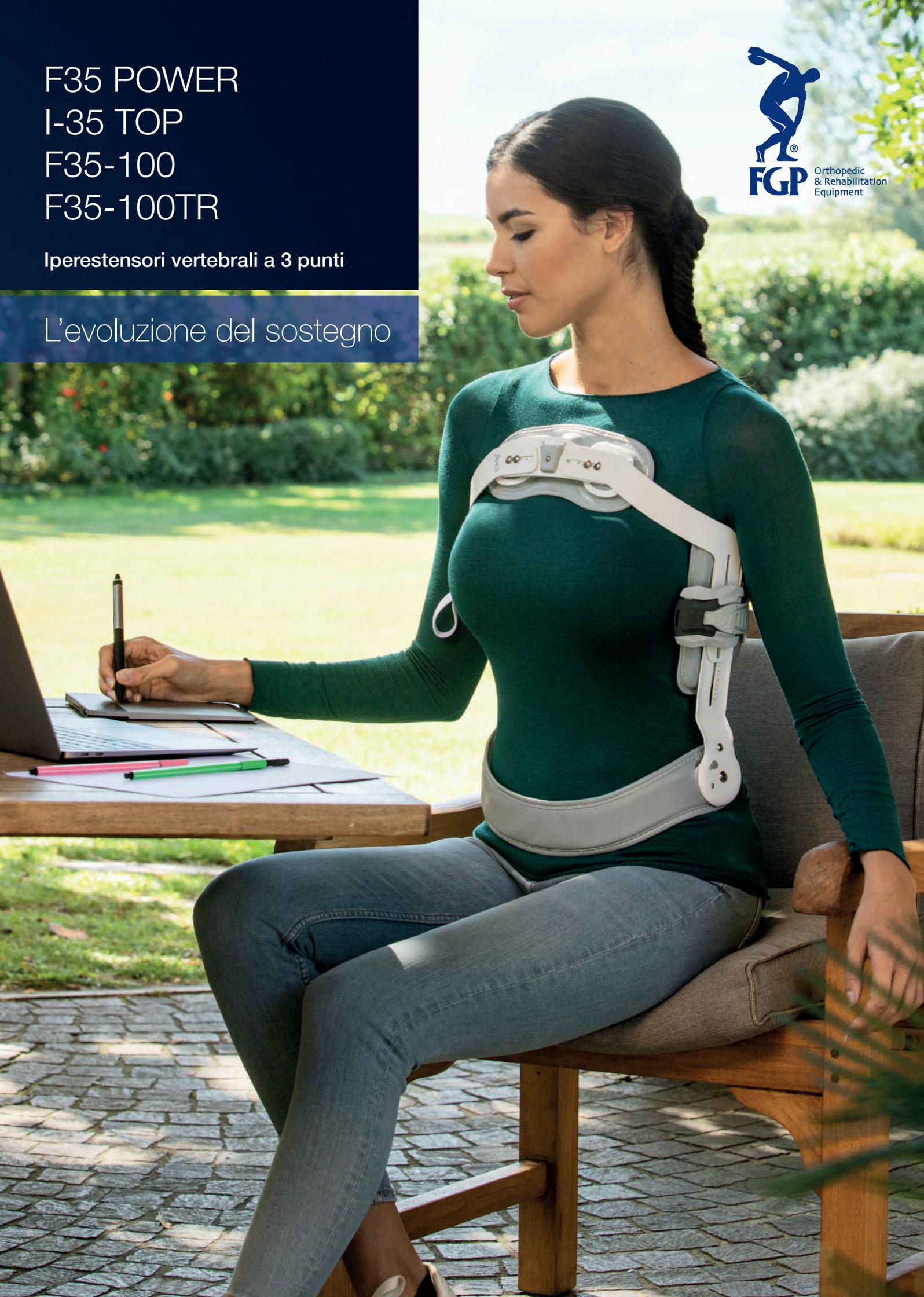

**UN RESTYLING PROFONDO
PER UN **COMFORT**
E UNA **FUNZIONALITÀ**
SENZA PRECEDENTI.**

La serie completa di
iperestensori FGP, oggi è stata
rinnovata in tutti i suoi modelli.

F35 POWER

I-35 TOP

F35-100

F35-100TR

F35 TRICONTROL PLUS





IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA FGP SU TUTTA LA LINEA.

UNA STRUTTURA ERGONOMICA MODELLABILE SU OGNI STRUTTURA FISICA.

La **struttura "a cornice"** è realizzata con i migliori allumini e, con uno spessore di 2 mm, garantisce un'efficace stabilizzazione della colonna. Tutti gli iperestensori FGP sono adattabili alle diverse conformazioni anatomiche, modellabili sul paziente attraverso la **regolazione telescopica di alcune o di tutte le parti della struttura** e l'attenta sagomatura della parte pelvica e sternale. Disponibile in versione normale e short, per facilitare il primo posizionamento.

QUANDO SEMPLIFICAZIONE SIGNIFICA ANCHE PRECISIONE.

Le soluzioni adottate **permettono al tecnico ortopedico di adattare il prodotto più facilmente all'anatomia del paziente** con una distribuzione ottimale delle pressioni che ne favorisce la compliance. L'aver uniformato la tipologia di viti utilizzate consente di effettuare tutte le regolazioni del tutore con un unico cacciavite.

UN LIVELLO DI COMFORT PENSATO PER UN USO PROLUNGATO.

Le **imbottiture sono state rinnovate** per aumentare il comfort del paziente: **i materiali interni sono più morbidi**, alcune forme sono state modificate per migliorarne l'ergonomia - come le imbottiture laterali di F35 e F35TR - mentre l'accoppiatura tra materiali e tecnica di costruzione rende **alcuni modelli idrorepellenti (F35 Power)**.

NUOVE CHIUSURE, PIÙ IMMEDIATE E SICURE.

Studi sull'ergonomia e sulla funzionalità hanno portato a rinnovare le chiusure su tutti i modelli **con l'introduzione dei sistemi C.FAST & SAFE e C.EASY RING**, oggi in comune con il modello F35 Tricontrol Plus al top della gamma.



C.EASY RING

Chiusura facile e intuitiva anzitutto per il paziente. Grazie alla sua forma rotonda permette di agganciare e sganciare la cintura di appoggio lombare della pelota dorsale a prescindere dalla sua inclinazione, facilitandone la gestione da parte dell'utilizzatore.



C.FAST & SAFE

Chiusura veloce e sicura. La posizione anteriorizzata ne facilita l'apertura con entrambe le mani. La chiusura è dotata di un sistema di protezione contro lo sgancio involontario, che ne consente lo sgancio solo dopo i primi 30° di apertura.

F35 POWER

IDROREPELENTE PER LA RIABILITAZIONE IN ACQUA.

IMBOTTITURE IDROREPELLENTI

grazie alla combinazione tra materiali, polietilene a bassa densità per l'interno, coperture in materiale spalmato, e alla tecnica di costruzione della termoformatura. F35 Power risulta pertanto idoneo anche all'immersione in acqua.



PELOTA STERNALE

dotata di un sistema snodabile che la rende autoadattante alle diverse conformazioni anatomiche.



TELESCOPICO IN ALTEZZA

con vite di fissaggio unica, che ne semplifica la regolazione da parte del tecnico, senza comprometterne la tenuta e aumentandone la regolabilità.



PELOTA DORSALE

con imbottitura maggiorata e scarichi studiati per evitare pressioni nelle zone più sensibili. È applicabile sia in verticale che in orizzontale.



BANDA PELVICA

basculante con snodo di spessore ridotto che permette il bloccaggio nel punto di massima flessione a 30°.



I-35 TOP

TOTALMENTE TELESCOPICO, TOTALMENTE REGOLABILE.

PELOTA STERNALE in grado di scaricare le pressioni sulla muscolatura pettorale grazie all'elasticità del supporto e al collegamento basculante con l'ortesi.

LA STRUTTURA realizzata in alluminio in combinazione con la **LAVORAZIONE SCATOLATA** nelle zone di maggiore sollecitazione ne aumenta la robustezza.

TELESCOPICO SIA IN ALTEZZA CHE IN LARGHEZZA grazie alla struttura che ne permette una regolazione sicura e veloce solo allentando le viti.

PELOTA DORSALE

dotata di stecche in alluminio modellabili che ne aumentano la capacità di sostegno e l'adattabilità.



F35-100 F35-100TR NUOVO DESIGN, STESSO COMFORT.

REGOLAZIONE STERNALE nella versione TR tramite ghiera in acciaio, regolabile ogni 5° con la brugola in dotazione.



Sistema di regolazione dell'appoggio sternale.

IMBOTTITURE in polietilene a bassa densità per un maggior comfort e rivestimento in similpelle per una pulizia rapida del tutore.

PELOTE LATERALI riviste nelle forme per essere più confortevoli e protettive.

ASTE LATERALI CON BOCCOLE (non telescopiche): le aste sono tagliabili per consentire al tecnico di adattarle con precisione al paziente.

COPRI SNODO DEL PANCIALE aggiornato nel design per ridurne lo spessore e quindi diminuire l'ingombro.



F35-100TR

F35 POWER

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI
BASCULANTE CON BANDA PELVICA BLOCCABILE



Codici d'ordine: F35P-100N; F35P-090N

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

BANDA PELVICA

- basculante con possibilità di blocco nel punto di massima flessione (30°)

SPINTA STERNALE

- fissa dotata di pelota snodabile imbottita con rivestimento in materiale idrorepellente

STRUTTURA

- in alluminio con regolazione telescopica dell'altezza
- imbottiture rivestite in materiale spalmato idrorepellente, le imbottiture laterali sono fissate mediante viti in tecnopolimero

PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura a strappo
- realizzata con imbottitura maggiorata e scarichi paravertebrali con rivestimento in materiale idrorepellente
- posizionabile sia orizzontalmente che verticalmente

NOTE

- predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia
- il tutore è idrorepellente, pertanto idoneo anche in caso di riabilitazione in acqua
- a richiesta è possibile l'inserimento della doppia fibbia autobloccante per la cintura a strappo

INDICAZIONI

- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile
- tratto colonna interessato: **D10-L3**

MISURE

Taglie	Ø Bacino	Altezza
S	60-75 cm	F35P-100N standard
M	76-90 cm	F35P-090N short
L	91-105 cm	
XL	106-115 cm	



I-35 TOP

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI
BASCULANTE TELESCOPICO



Codici d'ordine: I35T-100N; I35T-090N

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

BANDA PELVICA

- basculante

SPINTA STERNALE

- fissa dotata di pelota snodabile di ridotte dimensioni

STRUTTURA

- scatola in alluminio ed imbottiture spessorate antiscivolo a contatto pelle e grippanti esternamente
- regolazione telescopica dell'altezza e della larghezza sternale e del bacino

PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura a strappo
- realizzata con imbottitura in materiale accoppiato con scarico vertebrale e ulteriore sistema di stecche in alluminio modellabile
- disponibile in 3 misure

NOTE

- predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia
- a richiesta è possibile l'inserimento della doppia fibbia autobloccante per la cintura a strappo

INDICAZIONI

- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile
- tratto colonna interessato: **D10-L3**

MISURE

Taglie	Ø Bacino	Altezza
XS	45-60 cm	I35T-100N standard
S	60-80 cm	I35T-090N short
M	80-110 cm	
L	110-130 cm	Taglia XS adatta anche ai bambini.



F35-100

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI BASCULANTE



Codici d'ordine: F35-100N; F35-090N
Disponibile in versione light: F35T-100N; F35T-090N

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MDI coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

BANDA PELVICA basculante

SPINTA STERNALE fissa dotata di pelota con rivestimento in similpelle snodabile imbottita

STRUTTURA in alluminio; imbottiture realizzate in polietilene a bassa densità e rivestimento in similpelle; la cintura di chiusura è dotata di ulteriore doppia fibbia autobloccante di sicurezza

PELOTA DORSALE agganciata mediante cintura a strappo; realizzata con rivestimento in similpelle e dotata di imbottitura maggiorata e scarichi paravertebrali; orientabile sia orizzontalmente che verticalmente

NOTE predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia

INDICAZIONI cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi; post operatorio regione lombare; fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate); trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare; instabilità dorso-lombare non operabile; tratto colonna interessato: **D10-L3**

MISURE

Taglie	Ø Bacino	Altezza
S	60-75 cm	F35-100N, F35T-100N standard
M	76-90 cm	F35-090N, F35T-090N short
L	91-105 cm	
XL	106-115 cm	



F35-100TR

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI BASCULANTE CON REGOLAZIONE STERNALE



Codici d'ordine: F35TR-100N; F35TR-090N

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MDI coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

BANDA PELVICA basculante

SPINTA STERNALE regolabile; dotata di pelota pneumatica snodabile di dimensioni ridotte

STRUTTURA in alluminio; imbottiture realizzate in polietilene a bassa densità e rivestimento in similpelle; possibilità di regolazione sternale; la cintura di chiusura è dotata di ulteriore doppia fibbia autobloccante di sicurezza

PELOTA DORSALE agganciata mediante cintura a strappo; realizzata con rivestimento in similpelle e dotata di imbottitura maggiorata e scarichi paravertebrali; orientabile sia orizzontalmente che verticalmente

NOTE predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia; possibilità di regolazione dell'appoggio sternale

INDICAZIONI cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi; post operatorio regione lombare; fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate); trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare; instabilità dorso-lombare non operabile; tratto colonna interessato: **D10-L3**

MISURE

Taglie	Ø Bacino	Altezza
S	60-75 cm	F35TR-100N standard
M	76-90 cm	F35TR-090N short
L	91-105 cm	
XL	106-115 cm	



F35 TRICONTROL PLUS

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI BASCULANTE TELESCOPICO



Codici d'ordine: F35TRI-100; F35TRI-090

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MDI coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

BANDA PELVICA basculante con possibilità di blocco nel punto di massima flessione

SPINTA STERNALE fissa con struttura in alluminio con effetto a molla, snodabile, di piccole dimensioni, con imbottitura in poliuretano e rivestimento in tessuto Sensitive® Fabrics

STRUTTURA in alluminio anodizzato con regolazione telescopica dell'altezza e della larghezza ascellare; imbottiture in poliuretano con rivestimento in tessuto Sensitive® Fabrics; possibilità di regolazione sternale

PELOTA DORSALE agganciata mediante cintura ritagliabile dotata di pinzetta a strappo, dotata di fibbia a doppio passaggio per il bloccaggio della stessa; realizzata con imbottitura in poliuretano con scarichi vertebrali e rivestimento in tessuto Sensitive® Fabrics; sistema di aggancio a strappo che permette un posizionamento sia verticale che orizzontale

INDICAZIONI cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi; post operatorio regione lombare; fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate); trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare; instabilità dorso-lombare non operabile; tratto colonna interessato: **D10-L3**

MISURE

Taglie	Ø Bacino	Altezza
XS	60-75 cm	F35TRI-100 standard
S	76-90 cm	F35TRI-090 short
M	91-105 cm	
L	106-115 cm	
XL	116-125 cm	



FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016



Scarica l'App
FGPOrteSystem®



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment