



Fabricante



Consulte as
instruções
de utilização

MD

Código
do produto



Guarde em
local seco

REF

Código
do lote

LOT

Código
do lote



Guarde longe
de fontes de calor



Utilização múltipla
num único paciente



EMPRESA CERTIFICADA
ISO 13485:2016



FGP srl

Via Alessandro Volta 3

I-37062 Dossobuono VR

T +39 0458600867

F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISIRPORTPYTK60/61
Rev. 01 - 06/23

- Utilização em pele intacta.
- Se presentes feridas, proteger conforme as indicações médicas.
- Não utilizar em caso de desgaste, rotura ou não integridade do material.
- A embatagem e as instruções fazem parte do dispositivo médico.
- A modificação/alteração do dispositivo médico exclui todas as responsabilidades do fabricante.
- Para evitar uma possível perda de funcionalidade do produto ou uma duração limitada do mesmo, recomenda-se evitar/limitar o contacto entre o dispositivo e cremes, óleos, loções ou substâncias gordurosas ou ácidas.
- Não modifique os ajustes efetuados pelo médico ou pelo técnico de ortopedia no **MD** para não levar a uma perda de funcionalidade do produto.
- O produto não prevê acessórios e não foi concebido para ser utilizado em combinação com outros (por ex., no caso de aplicação de cremes, aguarde o tempo necessário para a sua absorção completa).

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

CONTRAINDICAÇÕES: no momento, sem registo. A aplicação correta, de acordo com as indicações precisas fornecidas pelo médico assistente ou técnico de ortopedia, não dá origem a contra-indicações. **APLICAÇÃO:** apenas para adultos.

INDICAÇÕES: proteção destinada à estabilização da articulação do joelho por compressão de tecidos moles, com um rolagamento com ação compressiva local ao redor da patela. Util, por exemplo, nos casos de: condropatia femoropatelar moderada ou grave; tendinopatias patelares leves; artrose femoropatelar leve; resultados de luxações patelares e/ou entorses de joelho; instabilidade pós-traumática leve.



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

PHYLOETEK

PHYLOETEK 60


Linha PhyloEtek - Joelheira transpirante
com varetas em espiral

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PHYLOETEK

PHYLOETEK 60

1. Abra as fitas de velcro e faça a ortótese deslizar ao longo da perna para que a zona com silicone dentro da proteção seja posicionada na parte superior da perna. (fig. 1)
2. Posicione a proteção de modo que o orifício patelar seja posicionado exatamente na patela. (figs. 2 e 3).
3. Por fim, prenda a fita de velcro de fechar inferior A e, em seguida, a fita de velcro superior B (figs. 2 e 3).
4. Para remover a proteção, abra as fitas de velcro e desenfie a joelheira, como na fig. 4.

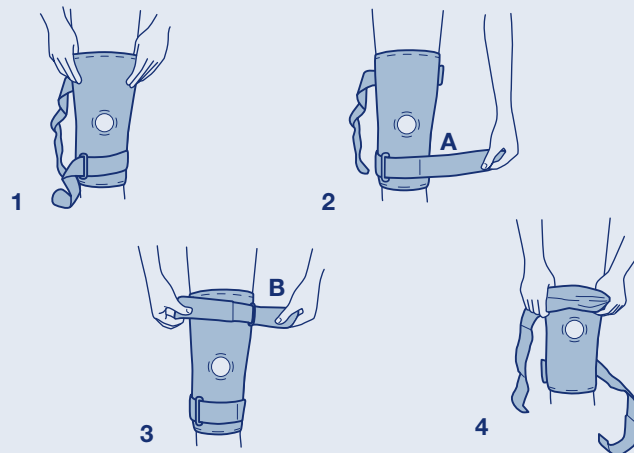

ESTRUTURA

- macia em tecido PhyloEtek® respirável sem costuras com espessura reduzida, tecelagem diferenciada na zona do poplíteo
- tubular
- com orifício rotuliano

ARTICULAÇÃO/HASTE

- varetas duplas em espiral laterais e mediais

ESTABILIZADOR ROTULIANO

- em forma de meia-lua coberto de tecido macio, direcionável a 360° com sistema de fita de velcro

FECHO

- por meio de duas fitas de velcro moldadas ajustáveis com sistema de pinça numeradas

MEDIDAS (ambidestro)

Tamanhos Ø Coxa

XS	34–40 cm
S	40–46 cm
M	46–52 cm
L	52–58 cm
XL	58–65 cm
XXL	65–72 cm



Altura
34 cm

Código de encomenda:
EPY-TK60

LIMPEZA

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Lavagem à mão. NOTA: lavagem à mão normal à temperatura máxima de 30° com sabão neutro. Passar bem por água
	Não branquear
	Não secar na máquina de lavar roupa de tambor rotativo
	Não engomar
	Não lavar a seco

ARMAZENAMENTO: armazenar em local seco à temperatura ambiente.

Proteja do calor, da exposição direta à luz solar e da humidade. **Eliminação:** não disperse no ambiente. O produto pode ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos.

NOTA: Este dispositivo médico de Classe I deve ser utilizado com as devidas precauções referidas nestas instruções, em combinação com as fornecidas pelo técnico ortopédico ou pelo médico assistente, que fazem parte integrante da mesmas. Para todas as eventuais problemáticas surgidas em consequência da utilização do dispositivo, dirija-se ao médico assistente ou ao técnico de ortopedia. Em caso de reclamações ou alegados maus funcionamentos, queira dirigir-se ao revendedor junto do qual foi adquirido o produto. A ortótese é fabricada para utilização exclusiva num único paciente. Em caso de acidente grave, morte ou deterioração grave do estado de saúde do doente, relacionáveis com o **DM**, contacte imediatamente o fabricante e a autoridade competente.

Distribuído em Portugal por: medi Bayreuth, Unip., Lda
Rua do Centro Cultural, 43 1700-106 Lisboa
Telefone: 21 843 71 60 - Fax : 21 847 08 33
mail: medi.portugal@medibayreuth.pt /internet: www.medi.pt