

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

PULIZIA

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinazione con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o assegni malfunctionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortopedico o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.



FGP srl

Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRFFK400/FFA500
Rev. 05 - 07/24



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016



Fabbricante



Dispositivo
medico



Codice
prodotto



Conservare lontano
da fonti di calore



Consultare le
istruzioni d'uso



Conservare in
ambiente secco



Codice
lotto



Uso multiplo
singolo paziente



FFA-500



FFK-400

CAVIGLIERA FULLFIT® GINOCCHIERA FULLFIT®

Supporti per ginocchio e caviglia

Dal tessuto **FullFit®** nasce oggi l'innovativa gamma di supporti elastici ideata e realizzata da FGP per il benessere dei fasci muscolari e l'ottimizzazione delle prestazioni sportive. La leggerezza dei materiali, le cuciture piatte e le dimensioni contenute donano ai prodotti una grande vestibilità. Dal design, ai materiali, alle soluzioni tecniche, alle scelte tecnologiche, la gamma è frutto della ricerca e dell'innovazione FGP, dedicata a chi vive il movimento come un'occasione per rinnovare il benessere, ritrovare equilibrio mentale, esprimere sé stesso con l'attività fisica.

- Il piacere del movimento garantito in ogni momento;
- Il design essenziale dona discrezione;
- Le cuciture piatte ed elastiche aumentano il comfort;
- Il tessuto sottile offre vestibilità.

DESCRIZIONE

ISTRUZIONI PER L'USO - GINOCCHIERA FFK-400



STRUTTURA

- soft tubolare in tessuto double-layer FGP FullFit® con sagomatura anatomica
- dotata di particolare fascia siliconata interna superiore per garantire maggiore stabilità

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- nessuna

NOTE

Il materiale è stato realizzato con filo Q-Skin by Fulgar®, il quale ha un'efficacia batteriostatica che gli permette di controllare la propria flora batterica in eccesso.

ISTRUZIONI PER L'USO

Indossare il tutore al ginocchio posizionando il foro rotuleo esattamente sulla rotula, come da immagine.

MISURE (ambidestro)

Taglie Ø Coscia

XS	31-38 cm
S	38-45 cm
M	45-52 cm
L	52-59 cm
XL	59-66 cm
XXL	66-74 cm



Altezza 31,5 cm

Codice d'ordine: FFK-400

ISTRUZIONI PER L'USO - CAVIGLIERA FFA-500



STRUTTURA

- soft in tessuto double-layer FGP FullFit® con sagomatura anatomica

CHIUSURA

- no

NOTE

Il materiale è stato realizzato con filo Q-Skin by Fulgar®, il quale ha un'efficacia batteriostatica che gli permette di controllare la propria flora batterica in eccesso.

ISTRUZIONI PER L'USO

Indossare e posizionare il tutore alla caviglia, come da immagine.

MISURE (ambidestro)

Taglie Ø Caviglia

S	16-20 cm
M	20-24 cm
L	24-28 cm
XL	28-33 cm



Codice d'ordine: FFA-500