



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

HALLUX GO

Tutore soft per alluce valgo



INDICAZIONI: tutore destinato alla separazione meccanica delle dita.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- esiti intervento di De Prado all'alluce
- alluce valgo lieve
- borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- iniziale alluce rigido doloroso

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** per adulti.

AVVERTENZE D'USO

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri MD (p.es. in caso di applicazioni di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).



Fabbricante



Dispositivo
medico



Codice
prodotto



Conservare lontano
da fonti di calore



Consultare le
istruzioni d'uso



Conservare in
ambiente secco



Codice
lotto



Uso multiplio
singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



FGP srl

Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR

T +39 0458600867

F +39 0458600835


www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRHALGO
Rev. 00 - 04/24

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aprire il cinturino.
2. Rimuovere le pellicole protettive presenti sopra il materiale antiscivolo.
3. Calzare il tutore attraverso l'apertura (fig.1).
4. Inserire l'alluce nell'apposita sede (fig.2).
5. Per regolare la trazione esercitata dal tutore procedere alla chiusura del cinturino in prossimità della caviglia (fig.3).
6. Controllare che il cuscinetto protettivo interno sia posizionato in corrispondenza dell'allargamento alla base dell'alluce (fig.3).
7. Nel caso in cui la porzione di tessuto in corrispondenza della punta dell'alluce creasse fastidi, è possibile accorciarla.

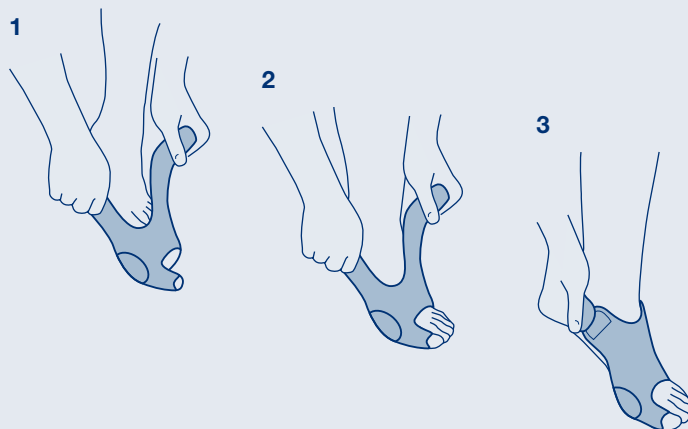

TIPOLOGIA

- correttore

STRUTTURA

- in tessuto elastico accoppiato contenitivo ad elasticità differenziata con sistema laterale a strappo per regolare la trazione

MISURE (DX/SX)

Taglie Calzata scarpa

S	35-38
M	38-41
L	41-44
XL	44-47



Codice d'ordine:
HLX-GO

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinazione con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.