



AZIENDA CERTIFICATA  
ISO 13485:2016



FGP srl  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRAC1100  
Rev. 11 - 12/22

**INDICAZIONI:** tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione della spalla. Utile, ad esempio, nei casi di: instabilità articolazione glenomeroale, prevenzione lussazioni glenomeroali, esiti peggiores lussazioni glenomeroali, coadjuvante nel recupero dello stupor del nervo ascellare, lussazione glenomeroale recidivante, esiti di interventi di Latarjet e artroscopia di spalla, esiti lussazioni acromion clavari di I o II grado secondo Flockwood.

**CONTROINDICAZIONI:** al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

#### AVVERTENZE D'USO

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggele come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).



# SHOULDER ACTION

Supporto spalla




**FGP**

Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

# ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aprire le chiusure a strappo del prodotto: il nastro del braccio, la chiusura toracica e la cintura spalla elastica.
2. Mettere il braccio attraverso il manicotto e allineare il tutore con la spalla (fig. 1).
3. Chiudere la chiusura toracica (fig. 2).
4. Chiudere la cintura braccio (fig. 3).
5. Tirare e quindi chiudere la cintura elastica della spalla. La posizione migliore si ottiene sollevando il braccio all'altezza della spalla e poi tirare ed attaccare il nastro a strappo. Se è difficile alzare il braccio, posizionare il gomito su una superficie solida all'altezza desiderata e chiudere la cintura spalla (figg. 4-5).
6. Il tutore sarà posizionato correttamente quando si avvertirà la sensazione che la spalla è sostenuta e il carico del peso del braccio ridotto. Se non si sente alcun miglioramento si prega di riposizionare il tutore, ripartendo dal punto 1.

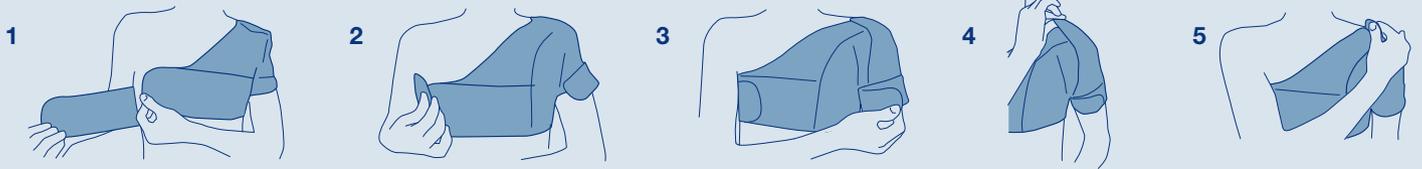

## STRUTTURA BASE

- tessuto elastico traspirante con particolare gommatura in grado di aderire alla cute e creare la giusta tensionatura del tutore
- dotata di particolare cuffia spalla con regolazione a strappo per controllare il movimento della spalla

## MISURE (DX/SX)

Taglia Ø Torace

S	75–85 cm
M	82–100 cm
L	97–110 cm
XL	107–120 cm



## Codice d'ordine:

ACT-100 DX  
ACT-100 SX

## PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

**CONSERVAZIONE:** conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

**Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.**

**Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.**

**NOTA:** questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.