

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri MD (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

AVVERTENZE D'USO

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

INDICAZIONI FILAMED® 101: tutore destinato alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del polso e del primo dito tramite bendaggio. Utile, ad esempio, nei casi di: distorsioni lievi del polso, polsi SNAc iniziale, lievi instabilità radio-carpiche. **INDICAZIONI FILAMED® 101:** tutore destinato alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del polso e del primo dito tramite bendaggio. Utile, ad esempio, nei casi di: distorsioni lievi del polso, polsi SNAc iniziale, lievi instabilità radio-carpiche. **INDICAZIONI FILAMED® 101:** tutore destinato alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del polso e del primo dito tramite bendaggio. Utile, ad esempio, nei casi di: distorsioni lievi del polso e primo dito, iniziale morbo di De Quervain, iniziale primo dito a scatto doloroso, esiti lesioni di Stener (pollice dello scatore).



Fabbricante



Dispositivo medico



Codice prodotto



Conservare lontano da fonti di calore



Consultare le istruzioni d'uso



Conservare in ambiente secco



Codice lotto



Uso multiplio singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016



Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRFIL101
Rev. 13 - 12/22



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



FILAMED® 111



FILAMED® 101



FILAMED®
101/111

Polsino semplice




FGP

Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Far passare il pollice attraverso il foro come da fig. 1; successivamente avvolgere attorno al polso prima il lembo corto e poi quello lungo.
2. Portare in tensione il polsino fissandolo con la chiusura a strappo.

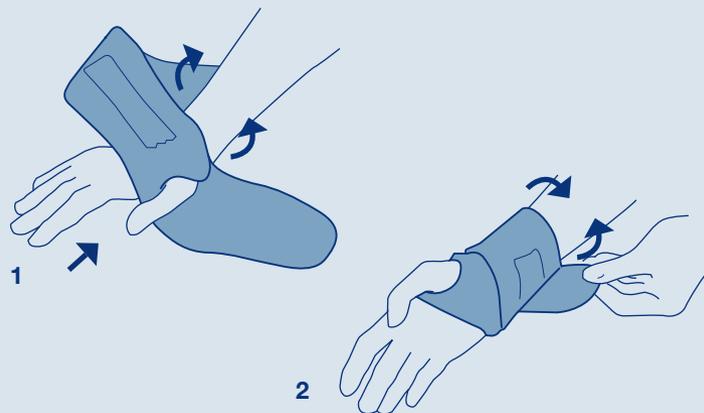

STECCATURA

- nessuna

STRUTTURA

- in neoprene leggero

PRESA POLLICE

- FILAMED® 101: no
- FILAMED® 111: si

CHIUSURA

- a strappo sul polso

MISURE (ambidestro)

Taglia unica

Codice d'ordine:

FILAMED 101

FILAMED 111 (con dito)

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.