

CLL 901

COLLIER CERVICAL PHILADELPHIA



SOCIÉTÉ CERTIFIÉE
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 1 - 10/21



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



NOTE
Ce dispositif médical n'est pas destiné à être utilisé par quiconque sans précautions. Il est donc conseillé de ne l'utiliser qu'après avoir consulté les Techniciens orthopédiques ou un médecin traitant afin d'éviter toute contre-indication possible. Pour tout problème né après l'utilisation de l'appareil, contactez votre médecin ou le technicien Orthopédique. En cas de plainte ou de dysfonctionnement, veuillez contacter la société F.G.P. indiquant les raisons au numéro de téléphone 045 8600867 ou envoyer une télécopie au numéro 045 8600835 ou un e-mail à fgp@fgpsrl.it. L'orthèse est conçue pour l'usage exclusif d'un seul patient.

CONSERVATION
Entreposer dans un endroit sec à température ambiante. Protéger contre la chaleur, l'exposition directe à la lumière du soleil et l'humidité. Ne pas jeter dans l'environnement.



SIGNIFICATION DE SYMBOLE	
	Lavage à la main. Remarque : Laver doucement avec une éponge douce. Pincer complètement.
	Ne pas blanchir
	Ne pas sécher dans les sècheurs à tambour rotatifs
	Ne pas repasser
	Ne pas nettoyer à sec


ENTRETIEN

CONTRE-INDICATIONS
Aucunes contre-indications connues à ce jour.
L'application correcte ne donne pas lieu à des contre-indications.

MESURES	Tailles	Ø Circonférence du cou
S	30-35 cm	CLL-901/3 1/4 (7,5 cm)
M	35-40 cm	CLL-901/4 1/4 (10 cm)
L	40-45 cm	CLL-901/5 1/4 (12 cm)



HAUTEUR

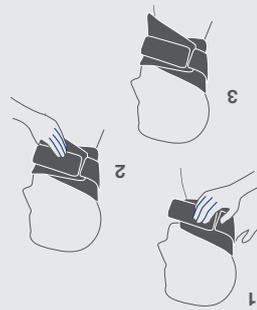

1. Appliquez la partie arrière du collier sur le cou du patient. La mesure de hauteur du collier est donnée par la distance entre la partie inférieure du menton et la partie la plus haute du sternum.
2. Portez l'avant du collier et chevauchez avec la partie arrière, en essayant de trouver la position « équilibrée » afin que le collier soutienne la colonne cervicale.
3. Fermez les deux sangliers latéraux en prenant soin de ne pas trop serrer le collier.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES
• Douleurs cervicales graves secondaires à l'arthrose
• Polyarthrite rhumatoïde
• Spondylarthrite ankylosante
• Résultats de fractures stables des vertèbres cervicales
• Résultats de la chirurgie cervicale de la colonne vertébrale
• Traitement continu dans des opérations
• Foyers détachements osseux du processus épineux cervical
• Arthrose cervicale

STRUCTURE:
Bivales en Plastazote avec plaques de renfort avant et arrière rigides
MENTON: Présent
TROU TRACHÉAL: Présent
RADIOTRANSPARENT: Oui
FERMETURE:
Bandes auto-agrippantes

NOTE: Possibilité d'associer au modèle Hyperextensor F35, F35 POWER, I35 TOP