



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016



Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRLM250
Rev. 04 - 01/23

INDICAZIONI: tutore destinato alla limitazione del range di movimento del rachide cervicale. Utile, ad esempio, nei casi di: cervicalgia; traumi distorsivi del rachide cervicale; cervicalgia in quadro artrosico; cervico brachiale con o senza vertigini; condizioni infiammatorie degenerative post-traumatiche di lieve entità.

CONTROINDICAZIONI: per evitare compressioni vascolari non posizionare in maniera troppo tesa. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o dal tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

AVVERTENZE D'USO

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).




CLM-250P

Collare cervicale semirigido modulabile

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Tendere il collare come da figura con la scanalatura in alto (fig. 1).
2. Posizionare il collare con la chiusura a strappo posizionata posteriormente e la maschera in polietilene all'esterno, quindi chiudere (figg. 2-3).
3. Assestare il collare avendo cura che la chiusura a strappo non sia troppo stretta.
4. Il dispositivo può essere indossato come collare semirigido o morbido, è sufficiente togliere il rinforzo in polietilene. (fig. 4)

⚠ Sarà solo ed esclusivamente il medico curante a dare tempi e modi per come indossare il collare semirigido o morbido.

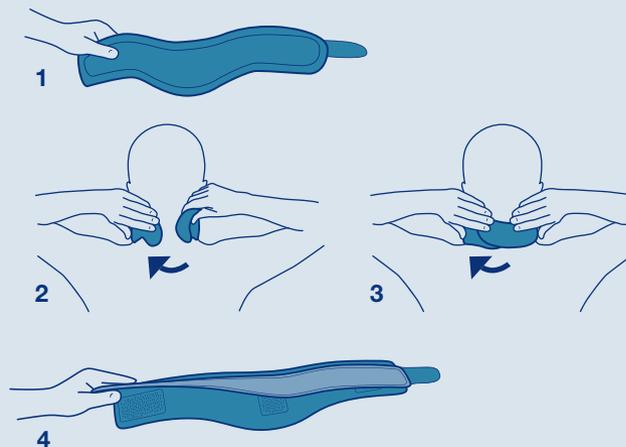

STRUTTURA

- gommapiuma ad alta densità rivestita con maglina in cotone e rinforzo in polietilene

MENTONIERA

- assente

FORO TRACHEALE

- assente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

NOTE

- dotato di maglina di ricambio

MISURE

Taglia	Ø Collo
S	34-39 cm
M	38-44 cm
L	42-48 cm



Altezza
10 cm

Codice d'ordine:
CLM-250P

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.