

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri MD (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

#### AVVERTENZE D'USO

**INDICAZIONI:** tutoretto al sostegno meccanico del piede, utile, ad esempio, nel caso di trattamento del piede ciondolante.

**CONTROINDICAZIONI:** al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni.

**APPLICAZIONE:** solo per adulti.



Fabbricante

MD

Dispositivo medico

REF

Codice prodotto



Conservare lontano da fonti di calore



Consultare le istruzioni d'uso



Conservare in ambiente secco

LOT

Codice lotto



Uso multiplio singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA  
ISO 13485:2016

 FGP srl

Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRCV0400  
Rev. 09 - 03/23



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment



# CVO-400

Tutore per caviglia e piede ciondolante




**FGP**

Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

# ISTRUZIONI PER L'USO

1. Calzare il tutore seguendo l'esempio della figura 1 rispettando il modello destro/sinistro.
2. Successivamente stringere su se stessa l'imbottitura presente sul polpaccio (fig. 2).
3. Far passare il cinturino con chiusura a strappo attraverso la fibbia (fig. 3) e chiudere definitivamente come in (fig. 4).

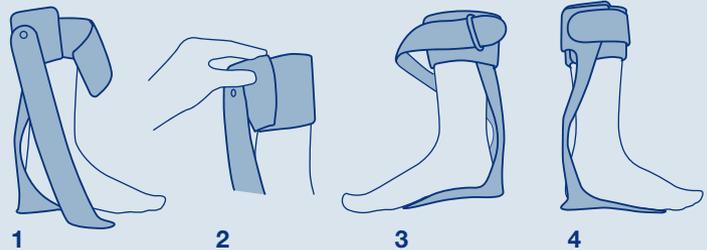

## APPLICAZIONI SUCCESSIVE

- Inserire l'ortesi nella scarpa.
- Calzare la scarpa con l'ortesi inserita.
- Stingere su se stessa l'imbottitura del polpaccio
- Chiudere il cinturino a strappo del polpaccio.

## PER IL TECNICO ORTOPEDICO

Se necessario, è possibile ritagliare la sezione del piede, come desiderato, in modo da adattare l'ortesi alla scarpa e al piede. Fare attenzione arrotondare gli eventuali spigoli creati.

## STRUTTURA

- in polietilene flessibile con imbottitura sul polpaccio

## CHIUSURA

- a strappo mediante cinturino

## NOTA

- il materiale può essere ritagliato a misura e modellato

## MISURE (DX/SX)

Uomo - Altezza 34 cm

Donna - Altezza 31 cm

## Codici d'ordine:

CVO-400 DONNA;

CVO-400 UOMO

## PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

**CONSERVAZIONE:** conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

**Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.**

**Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.**

**NOTA:** questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.