

CVO 400
ORTHÈSE POUR CHEVILLE ET PIED BALLANT



SOCIÉTÉ CERTIFIÉE
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 2 - 10/21



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgpsrl.it



Ce dispositif médical n'est pas conçu pour être utilisé par quiconque sans prendre les précautions nécessaires. Il est donc conseillé de l'utiliser uniquement après avoir consulté le technicien en orthopédie ou le médecin traitant pour prévenir ainsi toute contre-indication éventuelle. S'adresser au médecin traitant ou au technicien en orthopédie en cas de problèmes résultant de l'emploi du dispositif. En cas de réclamations ou de défaillance, prière d'en indiquer les raisons à la société F.G.P. en la contactant au numéro de téléphone 045 8600867 ou bien en lui envoyant une télécopie au numéro 045 8600835 ou un e-mail à l'adresse fgpsrl@fgpsrl.it. L'orthèse est conçue pour être utilisée exclusivement par un seul patient.

NOTE

Conserver dans un endroit sec à l'abri de la chaleur, des rayons directs du soleil et de l'humidité. Ne pas jeter température ambiante. Garder à l'abri



CONSERVATION

SYMBÔLE	SIGNIFICATION
	Laver à la main. NOTE : laver normalement à la main à une température maximum de 30 °C. Rincer soigneusement.
	Ne pas blanchir.
	Ne pas faire sécher au sèche-linge à tambour rotatif.
	Ne pas repasser.
	Ne pas laver à sec.

ENTRETIEN


CONTRE-INDICATIONS

Aucune signalée jusqu'ici.
L'application correcte ne donne pas lieu à des contre-indications.

POUR LE TECHNICIEN EN ORTHOPÉDIE
Fermer la Au besoin, il est possible de découper la section du pied de la manière souhaitée pour adapter l'orthèse à la chaussure et au pied. Veiller à arrondir les arêtes éventuellement créées.

- Introduire l'orthèse dans la chaussure.
- Enfiler la chaussure avec l'orthèse en place.
- Resserrer ensuite le rembourrage sur lui-même au niveau du mollet.
- Fermer la bande Velcro du mollet.

APPLICATIONS ULTÉRIEURES

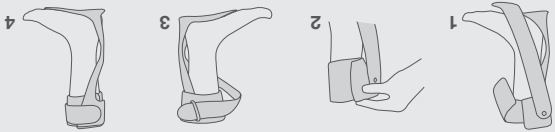

1. Mettre l'orthèse en place conformément à l'exemple de la figure 1 tout en respectant le modèle droit/gauche.
2. Resserrer ensuite le rembourrage sur lui-même au niveau du mollet (fig. 2).
3. Faire passer la bande à fermeture Velcro dans la boucle (fig. 3) et la fermer définitivement comme indiqué à la fig. 4.

MODE D'EMPLOI

TAILLES (DX/SX)
Homme h 34 cm
Femme h 31 cm

INDICATIONS
Stabilise la déambulation pathologique du pied ballant.

DESCRIPTION
Structure en polyéthylène avec fermeture Velcro réglable. Peut être facilement découpée avec n'importe quel type de ciseaux.