



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

DORSOFIXÒ®

Corsetto semirigido con spallacci

INDICAZIONI: tutore destinato alla stabilizzazione e sostegno attraverso la distribuzione della pressione del tratto dorso-lombare della colonna. Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto D4 - S1 della colonna, come ad esempio: dorsalgie (acute e croniche); esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche; dorso curvo; post operatorio interventi discotomie; esiti interventi di stabilizzazione vertebrale; cedimenti somatici su base osteoporotica.

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

AVVERTENZE D'USO

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- Il tutore deve essere indossato con una maglietta o una canottiera.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

Fabbricante

Dispositivo medico

Codice prodotto

Conservare lontano da fonti di calore

Consultare le istruzioni d'uso

Conservare in ambiente secco

Codice lotto

Uso multiplo singolo paziente

AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

FISTRDORSO
Rev. 05 - 02/23

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. **Smaltimento:** non disperdere nell'ambiente. **Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.**

PULIZIA	SIMBOLO	SIGNIFICATO
Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente		Non candeggiare
Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo		Non stirare
Non lavare a secco		Non lavare a secco

STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico traspirante
- **TIRANTI** si agganciano anteriormente in due tiranti
- spallacci imbottiti dotati di sistema modulare di regolazione che si agganciano anteriormente in un tirante

STECATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, le due stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo con maniglia per paziente artrosico

NOTE

- In dotazione vengono fornite 2 stecche aggiuntive di rinforzo

Tg.	Ø Donna	Ø Uomo	Altezza
XXXXL	146-156 cm	-	DFD-210 (donna)
XXXL	136-146 cm	-	DFU-200 (uomo)
XXL	126-136 cm	121-131 cm	
XL	116-126 cm	111-121 cm	
L	106-116 cm	101-111 cm	
M	96-106 cm	91-101 cm	
S	86-96 cm	81-91 cm	
XS	76-86 cm	71-81 cm	55 cm

Codici d'ordine: DFD-210 (donna), DFU-200 (uomo)

ISTRUZIONI D'USO

1. Indossare il corsetto utilizzando la presa interna (fig. 1) e fissare la chiusura frontale (figg. 2 e 3).
2. Togliere la copertura alla zona grippante dei tiranti elastici inferiori, superiori e fissarli alla chiusura frontale (figg. 4 e 5).
3. Fissare i tiranti alti delle spalline facendoli passare sopra le spalle, sotto le ascelle, incrociarsi nel passante verticale posteriore (fig. 6) e poi fermarli alla chiusura frontale del corsetto (fig. 8). Oppure utilizzare il passante orizzontale e regolare la spinta dorsale (fig. 7). Portare i tiranti alti sopra le spalle e poi sotto le ascelle. Infilare le cinture negli anelli del passante orizzontale, cambiare il verso del gancio posizionato all'estremità dei tiranti e poi fermarli alla chiusura frontale (fig. 9).
4. Per togliere il corsetto aprire i tiranti e utilizzare l'apposito passante (fig. 10).

