

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/imitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

AVVERTENZE D'USO

INDICAZIONI: tutore destinato all'immobilizzazione meccanica dell'articolazione del polso e del primo dito. Utilile, ad esempio, nei casi di: traumi distorsivi moderati e severi di polso e primo dito; tendiniti flessori ed estensori; esiti fratture del polso; di radio ed ulna distali; artralgie (per DUAL LOCK T); artralgie in malattia reumatica (per DUAL LOCK MAX T); post interventi alle filiere del carpo (per DUAL LOCK T MAX); esiti frattura scapoloide carpale; trattamento lesioni di Stener; fratture combinate di primo dito e polso stabili; post operatore del primo raglio; esiti artroplastica ed emiarthroplastica per rizoartrosi.

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.



DUAL LOCK T MAX



DUAL LOCK T



Fabbricante



Dispositivo medico



Codice prodotto



Conservare lontano da fonti di calore



Consultare le istruzioni d'uso



Conservare in ambiente secco



Codice lotto



Uso multiplio singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016



FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRDUA300/400
Rev. 00 - 02/23



Orthopedic & Rehabilitation Equipment



DUAL LOCK T DUAL LOCK T MAX

Polsiere steccate con immobilizzatore pollice




Orthopedic & Rehabilitation Equipment

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Il sistema di fissaggio con passante multiplo superiore non necessita di essere completamente slacciato per indossare o togliere il tutore.
2. Slacciare i cinturini di fissaggio e indossare la polsiera (fig. 1).
3. Chiudere rispettivamente e in sequenza i cinturini di fissaggio A, C (fig. 2), B e D per Dual Lock T Max.
4. Posizione ottimale della polsiera (fig. 4).
5. Chiudere il cinturino del pollice (fig. 5).

PER IL TECNICO ORTOPEDICO

Estrarre le stecche modellabili, adattarla al paziente e quindi reinserirla.

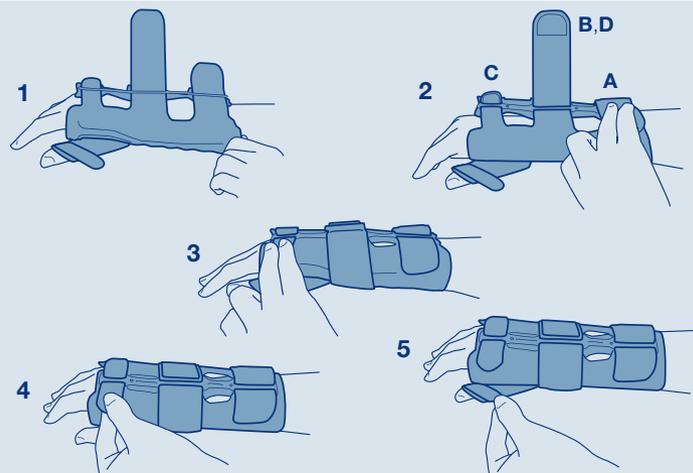

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile
- passante multiplo superiore in tecnopolimero
- stecca di supporto per pollice in alluminio modellabile

STRUTTURA

- materiale interno in morbido tessuto Sensitive® Fabrics con imbottiture di protezione e fori per maggior traspirabilità
- materiale esterno in velluto grappante per una totale adattabilità
- sagomatura anatomica per un controllo ottimale del polso
- apribile completamente

PRESA POLLICE

- sì

CHIUSURA

- mediante 3 cinturini di fissaggio a strappo dotati di alette di sicurezza per impedire l'uscita dal passante multiplo (per DUAL LOCK T)
- mediante 4 cinturini di fissaggio a strappo dotati di alette di sicurezza per impedire l'uscita dal passante multiplo (per DUAL LOCK T MAX)
- fascia centrale allungata per una maggiore stabilizzazione
- del pollice personalizzabile a grip

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	14-18 cm
M	19-23 cm
L	24-28 cm



Altezza	
Dual Lock T	21 cm
Dual Lock T Max	27 cm

Codici d'ordine: DUA-300 DX; DUA-300 SX; DUA-400 DX; DUA-400 SX

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.