

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

AVVERTENZE D'USO

INDICAZIONI: tutore destinato all'immobilizzazione meccanica del primo dito in posizione neutra. Utile, ad esempio, nei casi di:
 rizoartrosi lieve o moderata; traumi distorsivi del primo dito; esiti intervento di artroplastica ed emiartroplastica per rizoartrosi; esiti lesione di Stener (conservativo o post operatorio); esiti fratture primo metacarpo, dolorosi fratture di scafode.

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.



Fabbricante

MD

Dispositivo medico

REF

Codice prodotto



Conservare lontano da fonti di calore



Consultare le istruzioni d'uso



Conservare in ambiente secco

LOT

Codice lotto



Uso multiplio singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016

 FGP srl

Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



F1STRDUJA500
Rev. 00 - 02/23



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



DUAL LOCK RHIZO

Immobilizzatore stecato primo dito



FGP


Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Indossare il tutore come da figura 1 al polso, con la stecca per pollice allineata al pollice.
2. Unire i nastri a strappo come da figura 2 isolando il pollice e accertarsi che la stecca sia in corrispondenza del dorso del pollice.
3. Portare in tensione, avvolgere il polso e allacciare con la chiusura a strappo come da figura 3.
4. Chiudere il nastro pollice

PER IL TECNICO ORTOPEDICO

Se necessario estrarre la stecca modellabile, adattarla al paziente e quindi reinserirla.

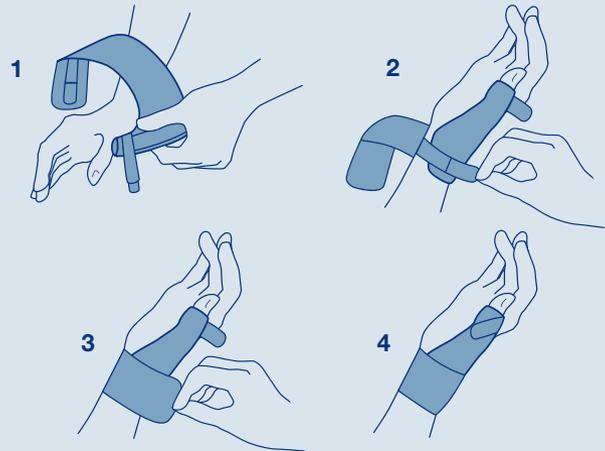

STECCATURA

- laterale in alluminio modellabile

STRUTTURA

- materiale interno in morbido tessuto Sensitive® Fabrics
- materiale esterno in vellutino grippante per una totale adattabilità

PRESA POLLICE

- sì

CHIUSURA

- a strappo sul polso e sul pollice

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
1°	13-17 cm
2°	18-23 cm



Lunghezza
14,5 cm

Codice d'ordine:

DUA-500 DX; DUA-500 SX

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

Si consiglia di rimuovere la stecca modellabile e chiudere le chiusure a strappo prima di lavare il dispositivo.

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.