



- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite protetteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

AVVERTENZE D'USO

INDICAZIONI: tutore destinato alla stabilizzazione meccanica tramite compressione dei tessuti molli e guida del movimento dell'articolazione del ginocchio tramite snodi. Utile, ad esempio, nei casi di: lieve instabilità post-traumatica; esito di distorsione al ginocchio; esiti stabilizzati di traumi del ginocchio; traumi cronici e non; lieve e moderata artrosi femoro-rotulea; lussazione rotulea cronica e non; ipertensione rotulea grave; gonartrosi lieve o moderata.

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016



FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRRL701W
Rev. 05 - 02/23



FILAMED® 701
WRAP AR

FILAMED® 701 WRAP

Ginocchiera in neoprene armata
aperta con snodo policentrico

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni domanda o richiesta di informazioni, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortopedico o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, o in caso di incidente grave, morte, è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente. Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

PULIZIA

Altezza
32 cm

15 cm



Codice d'ordine:
FILAMED701W
FILAMED701 WRAP AR

Taglie
XS 34-37 cm
S 38-43 cm
M 44-49 cm
L 50-55 cm
XL 57-61 cm
XXL oltre 62 cm

MISURE (ambidestro)

- mediante due fasce a strappo

CHIUSURA

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuna

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- totalmente coperto ed estraibile

• policentrico libero

SNODO/ASTE

- l'iperestensione del ginocchio (solo per FILAMED® WRAP AR)

- fasce posteriori sul cavo popliteo che incrociano per limitare








- completamente apribile anteriormente

- soft in neoprene, con foro rotuleo e popliteo,

STRUTTURA

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aprire i nastri a strappo e la chiusura frontale (fig. 1).
2. Chiudere la parte superiore e inferiore della chiusura frontale (figg. 2 e 3).
3. Fissare infine la chiusura a strappo inferiore A (fig. 4) e poi quella superiore B (figg. 5-6).
4. Chiudere le fasce posteriori (per FILAMED® 701 WRAP AR) (fig. 7).

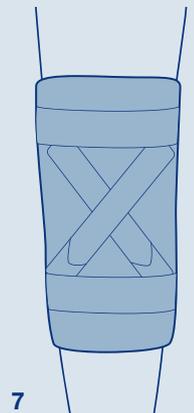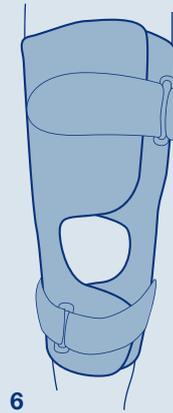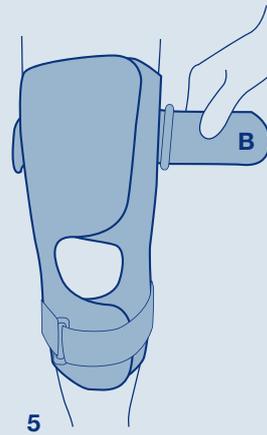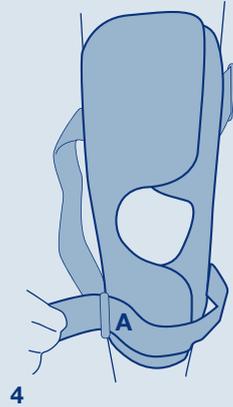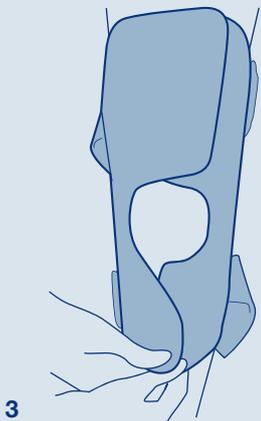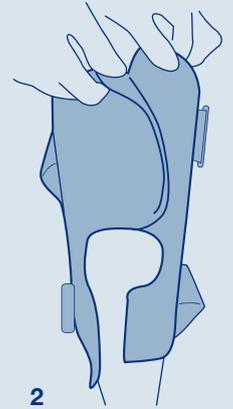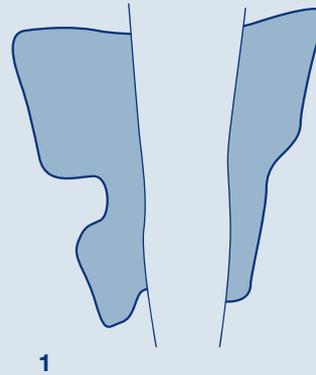

PULIZIA

1. Togliere le articolazioni (figg. A e B per FILAMED® 701 WRAP e FILAMED® 701 WRAP AR e fig. D solo per FILAMED® 701 WRAP AR) e chiudere i nastri a strappo prima del lavaggio.
2. Dopo il lavaggio, reinserire le articolazioni attraverso l'apposita apertura (fig. C), collocata rispettivamente nella parte superiore ed inferiore del copri snodo, in corrispondenza dei nastri a strappo; l'asta più lunga dovrà essere posizionata sulla parte superiore della ginocchiera.

