



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment



AZIENDA CERTIFICATA  
ISO 13485:2016



**FGP srl**  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISIRTAGNIT601  
Rev. 09 - 02/23



Fabbricante



Dispositivo  
medico



Codice  
prodotto



Conservare lontano  
da fonti di calore



Consultare le  
istruzioni d'uso



Conservare in  
ambiente secco



Codice  
lotto



Uso multipl  
singolo paziente

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

#### AVVERTENZE D'USO

**INDICAZIONI:** tutore destinato alla stabilizzazione ed all'immobilizzazione dell'articolazione del ginocchio. Utile, ad esempio, nei casi di: post operatorio della rotula; revisione in due tempi protesi ginocchio mobilizzata; immobilizzazione pre/post operatoria e post traumatica del ginocchio.

**CONTROINDICAZIONI:** al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

GN-3PAN



GNT-601



# GNT-601 GN-3PAN

GINOCCHIERA IMMOBILIZZATRICE 0°  
A 3 PANNELLI ECONOMY E NON



**FGP**

Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

# ISTRUZIONI PER L'USO


 La prima applicazione del tutore al paziente e le successive regolazioni del tutore devono essere fatte solo ed esclusivamente da personale specializzato che dovrà seguire le indicazioni del medico curante. Rimuovere l'ortesi solo ed esclusivamente con il consenso del medico curante.

1. Aprire la ginocchiera sfilando tutte le cinture dalle fibbie mantenendo i terminali chiusi su se stessi.
2. Per ottenere la misura desiderata, modificare la posizione delle parti laterali della ginocchiera dal corpo centrale della stessa (fig. 1) e adattare alla conformazione anatomica della gamba.
3. Posizionare la ginocchiera in modo che la rotula sia esattamente in corrispondenza del foro rotuleo (fig. 2) e chiudere il cinturino a strappo centrale (fig. 3).
4. Se necessario, modellare le aste per adattare al profilo della gamba.

5. Chiudere le fasce a strappo della ginocchiera infilando attraverso le fibbie come in figure 4 e 5, partendo dal basso.

## APPLICAZIONI SUCCESSIVE

Se al paziente è consentito rimuovere l'ortesi durante la convalescenza, o se l'ortesi viene rimossa durante una visita medica, è possibile toglierla semplicemente aprendo le cinghie (figg. 4 e 5).

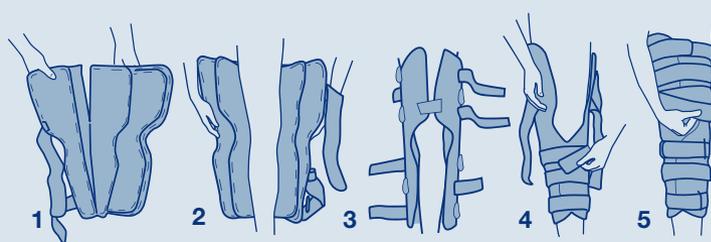

## STRUTTURA

- dotata di pannelli laterali posizionabili in base alla circonferenza dell'arto
- GNT-601: imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno
- GN-3PAN: imbottitura in tessuto accoppiato con rete traspirante all'interno e vellutino grippante all'esterno

## SNODO/ASTE

- stecche rigide in alluminio modellabile laterale, mediale e doppie nella zona posteriore

## CHIUSURA

- mediante sei fasce a strappo

## MISURE (ambidestro)

Taglia unica

## Altezze

40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm

## Codici d'ordine:

GNT-601/40; GNT-601/50;  
GNT-601/60; GNT-601/70;  
GN-3PAN/40; GN-3PAN/50;  
GN-3PAN/60; GN-3PAN/70

## PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

**CONSERVAZIONE:** conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

**Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.**

**Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.**

**NOTA:** questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.