

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- Il tutore deve essere indossato con una maglietta o una canottiera.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri IM (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

AVVERTENZE D'USO

INDICAZIONI: tutore destinato alla stabilizzazione meccanica dell'articolazione dell'anca. Utile, ad esempio, nei casi di:

Fal (frattura acetabular impingement) pre-post operatorio; esiti lussazioni d'anca; coxartrosi non operabile; esiti ipotesizzazioni anca.

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.



Fabbricante

MD

Dispositivo medico

REF

Codice prodotto



Conservare lontano da fonti di calore



Consultare le istruzioni d'uso



Conservare in ambiente secco

LOT

Codice lotto



Uso multiplio singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016

 FGP srl

Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRIMA109
Rev. 04 - 07/23



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



IMA-109

Tutore funzionale per anca soft




FGP

Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Indossare il supporto funzionale con le cerniere laterali chiuse.
2. Aprire la chiusura frontale velcrata e quella della coscia.
3. Chiudere rispettivamente la chiusura frontale velcrata (fig. 1) e la fascia della presa coscia (fig. 2).
4. Per eventuali medicazioni non è necessario togliere il tutore basta semplicemente aprire le cerniere laterali, eseguire l'applicazione e poi chiudere (fig. 3).

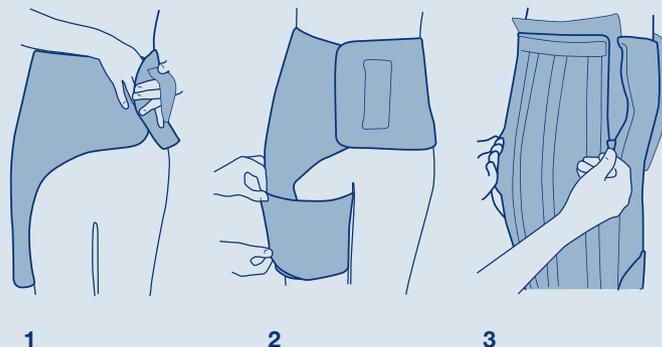

STRUTTURA

- soft in lycra e materiale traspirante ed anallergico
- dotato di rinforzo laterale con stecche a spirale ispezionabile mediante cerniere di apertura

SNODO

- set di stecche a spirale

CHIUSURA

- del bacino e della coscia a strappo

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Vita
S	60–72 cm
M	73–85 cm
L	86–98 cm
XL	99–110 cm



Altezza
44 cm

Codici d'ordine:
IMA-109 DX; IMA-109 SX

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.
Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.