



- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- Il tutore deve essere indossato con una maglietta o una canottiera.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **IMB-400** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **IMB** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

AVVERTENZE D'USO

INDICAZIONI: tutore destinato all'immobilizzazione dell'articolazione della spalla in posizione abdotta da 30° a 70°. Utile, ad esempio, nei casi di: fratture del trochite omale; iniziale trattamento in protesi spalla; trattamento conservativo di fratture della glena stabili; lesioni di Bankart.

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRIMB400
Rev. 12 - 03/23



IMB-400

Cuscino abduttore per spalla da 30° a 70°

Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

IMB-400

Codice d'ordine:

Taglia unica

MISURE (ambidestro)

- dotato di pallina riabilitativa

NOTE

- dotato di fascia addominale a strappo
- con fasce a strappo in vellutino imbottito gripante

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- e pallina riabilitativa di supporto mano
- fissaggio mediante 2 anelli realizzati in vellutino imbottito

STRUTTURA SACCA REGGIARACCIO

con copertura in vellutino

- cuscino in gommapiuma ad alta densità

STRUTTURA BASE

- da 30° a 70°

GRADO ABDUZIONE

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

PULIZIA

ISTRUZIONI PER L'USO

PER LA PRIMA APPLICAZIONE: INDICAZIONI PER IL MEDICO O TECNICO ORTOPEDICO

AVVERTENZA

La prima applicazione del tutore al paziente e le successive regolazioni devono essere fatte solo ed esclusivamente da personale specializzato che dovrà seguire le indicazioni del medico curante.

1. Aprire tutte le chiusure a strappo, comprese quelle della mano.
2. Posizionare il cuscino al grado di abduzione consigliato dal medico. Tale grado viene regolato variando l'altezza del cuscino rispetto alla vita (verificare l'angolo dell'arto con goniometro).
3. Passare la cintura sopra la spalla opposta e poi attraverso la fibbia del cuscino e chiudere il nastro (fig. 2).
4. Successivamente posizionare la cintura addominale intorno al giro vita e chiuderla con il sistema a strappo (fig. 3).
5. Fissare sulla parte posteriore del cuscino l'asta palmare con pallina (fig. 4).
6. Fissare le due cinture dell'avambraccio all'asta palmare e la fascia del braccio leggermente in diagonale sul cuscino (fig. 5).
7. Posizionare il braccio all'interno e chiudere tutte le cinture, evitando di stringere troppo (figg. 6 e 7). Ruotando il cuscino è possibile ottenere un'abduzione da 30° a 70° (figg. 1A e 1B).

AVVERTENZA


Rimuovere l'ortesi solo ed esclusivamente con il consenso del medico curante.

APPLICAZIONI SUCCESSIVE:


1. Appoggiare il cuscino a livello di abduzione consigliato (fig. 1).
2. Far passare la cinghia sopra la spalla opposta e chiudere facendo aderire al cuscino (fig. 2).
3. Indossare la cintura addominale (fig. 3).
4. Aprire e sistemare il braccio all'interno delle cinghie di avambraccio e braccio (figg. 6 e 7).

NOTA

Comprimendo la pallina è possibile allenare la muscolatura dell'avambraccio.

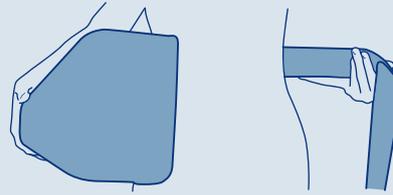


1A POSIZIONAMENTO DEL CUSCINO
A LIVELLO DELLA VITA
PER ABDUZIONE A 30°

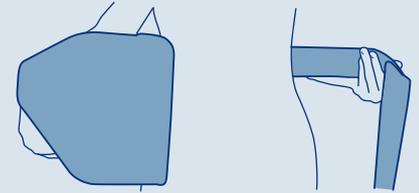


1B POSIZIONAMENTO DEL CUSCINO
A LIVELLO DELLA VITA
PER ABDUZIONE A 70°




2

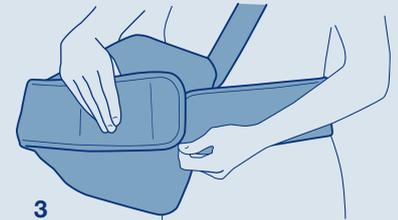


3

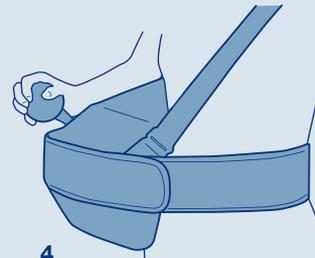


4

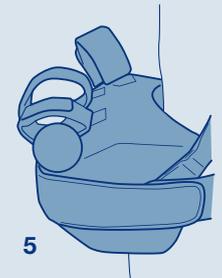

5

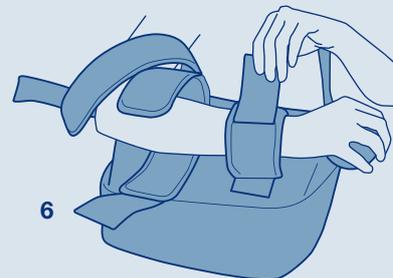

6

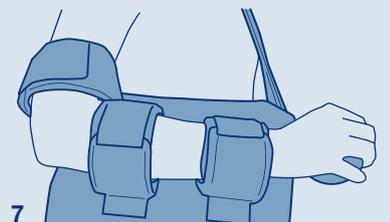

7