



IMB-700N

Cuscino abduttore per spalla da 10° a 20°

INDICAZIONI:

tutore destinato all'immobilizzazione dell'articolazione della spalla in posizione abdotta da 10° a 20°. Utile, ad esempio, nei casi di:

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori; fratture del trochite omereale; iniziale trattamento in protesi spalla; trattamento conservativo di fratture della glena stabile; lesioni di Bankart; lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili).

CONTROINDICAZIONI:

al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

CONSIGLI D'USO:

pressione locale o la compressione di nervi e vasi sanguigni.

AVVERTENZE D'USO

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- Il tutore deve essere indossato con una maglietta o una canottiera.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/iniziare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

Fabbricante

Dispositivo medico

Codice prodotto

Conservare lontano da fonti di calore

Consultare le istruzioni d'uso

Conservare in ambiente secco

Codice lotto

Uso multiplo singolo paziente

AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016

FGP srl

Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

FISTRIMB700N
Rev. 10 - 01/23

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE:

conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinazione con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

GRADO ABDUZIONE

- da 10° a 20°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità con copertura in vellutino grigio
- all'esterno e struttura alveolare trasparente a contatto con il corpo

STRUTTURA SACCA REGGIRACCIO

- in tessuto con struttura alveolare trasparente a contatto con la pelle ed inserti esterni in vellutino grigio con cinturino di sostegno del pollice

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce in vellutino grigio con manico imbottito di protezione collo e fibbia a scatto di chiusura; dotata di cintura addominale
- a strappo regolabile con fibbia a scatto

NOTE

- a richiesta pallina riabilitativa

MISURE (ambidestro)

Taglie	Lunghezza avambraccio
S	fino a 34 cm
M	35-39 cm
L	oltre 39 cm

Codice d'ordine:


IMB-700N

ISTRUZIONI PER LA PRIMA APPLICAZIONE

AVVERTENZA

La prima applicazione del tutore e le successive regolazioni devono essere fatte solo ed esclusivamente da personale specializzato che dovrà seguire le indicazioni del medico curante.

1. Separare la sacca reggibraccio dal cuscino.
2. Aprire la chiusura della cintura vita, posizionare il cuscino sul fianco del braccio da abduire, l'estremità più larga del cuscino appoggerà sulla parete addominale. Far girare intorno alla vita la cintura e fissare con la fibbia a scatto (fig. 1).
3. Far aderire il reggibraccio al cuscino, aprire la chiusura della cintura spalla e inserire l'avambraccio nell'apposita sacca in modo che la posizione del gomito sia il più arretrata possibile (fig. 2).
4. Passare la cintura della spalla diagonalmente, regolare la lunghezza della cintura e fissare con la chiusura a scatto (fig. 3 e fig. 4).
5. Infine bloccare la mano e chiudere il reggibraccio come in figura 5, 6 e 7.

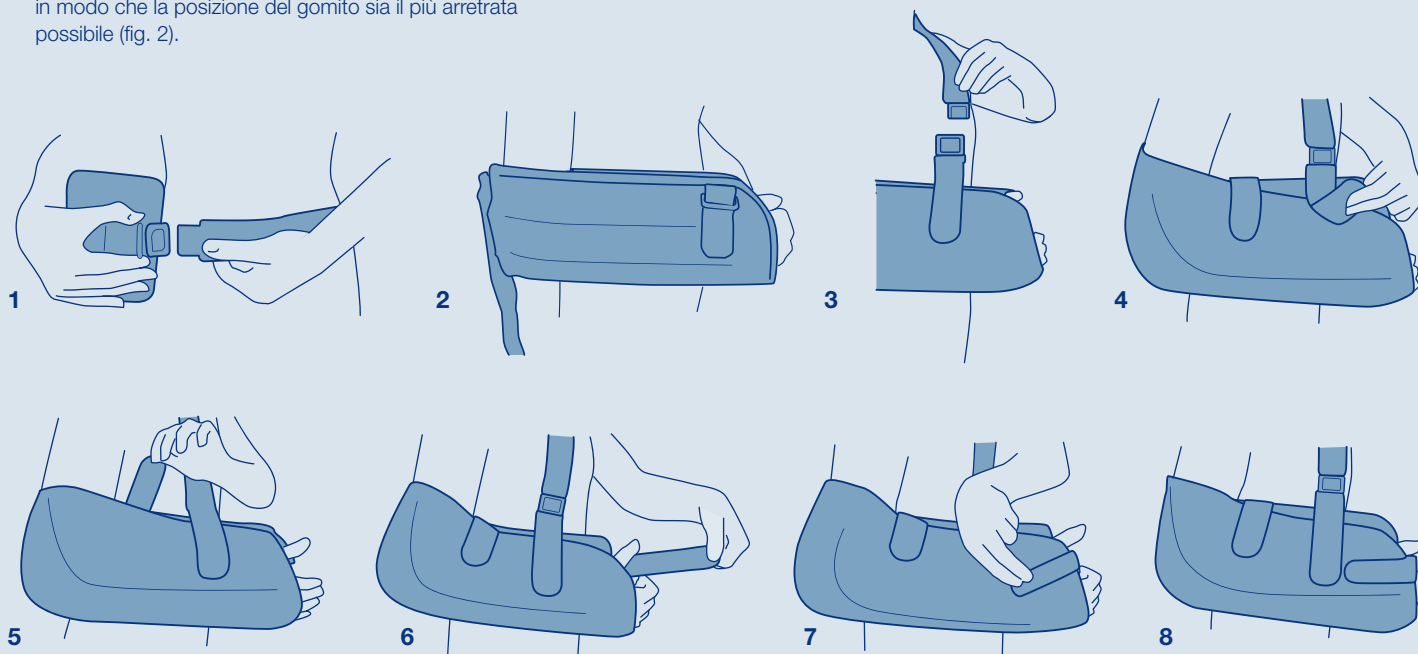

ISTRUZIONI PER LA PRIMA APPLICAZIONE

Rimuovere l'ortesi solo ed esclusivamente con il consenso del medico curante.

Per le applicazioni successive: indossare e togliere il tutore utilizzando la chiusura a scatto della cintura vita e della cintura spalla (figg. 1 e 3).

NOTA

Nella versione con pallina. Comprime la palla è possibile allenare la muscolatura dell'avambraccio.