



IMB 700

Cuscino abduttore per spalla da 10° a 20°

GRADO ABDUZIONE

- da 10° a 20°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità con copertura in vellutino grigiopeste

STRUTTURA SACCA REGGIRACCIO

- in cotone con fettuccia di rinforzo sulla base

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce in vellutino a strappo, manico imbottito di protezione collo
- dotato di fascia addominale regolabile

NOTE

- a richiesta pallina riabilitativa

MISURE (ambidestro)

Taglia unica

Codice d'ordine: IMB-700

INDICAZIONI: tutore destinato all'immobilizzazione dell'articolazione della spalla in posizione abdotta da 10° a 20°. Utile, ad esempio, nei casi di: post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori; fratture del trochiteo; iniezioni terapeutiche in protesi spalla; trattamento conservativo di fratture della glena stabile; lesioni di Bankart; lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili).

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

AVVERTENZE D'USO

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- Il tutore deve essere indossato con una maglietta o una canottiera.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

CE

CONSERVARE LONTANO DA FONTI DI CALORE

USO MULTIPLO SINGOLO PAZIENTE

CODICE LOTTO

CONSERVARE IN AMBIENTE SECCO

CONSULTARE LE ISTRUZIONI D'USO

CODICE PRODOTTO

DISPOSITIVO MEDICO

FABBRICANTE

FGP Orthopedic & Rehabilitation Equipment

FGP srl

Via Alessandro Volta 3

I-37062 Dossobuono VR

T +39 0458600867

F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

FISTRIMB700 Rev. 13 - 01/23

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smanimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinazione con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.



PER LA PRIMA APPLICAZIONE:

INDICAZIONI PER IL MEDICO O TECNICO ORTOPEDICO

AVVERTENZA

La prima applicazione del tutore al paziente e le successive regolazioni del tutore devono essere fatte solo ed esclusivamente da personale specializzato che dovrà seguire le indicazioni del medico curante. Rimuovere l'ortesi solo ed esclusivamente con il consenso del medico curante.

1. Separare la sacca reggibraccio dal cuscino (solo per la prima applicazione).
2. Aprire la chiusura della cintura vita, posizionare il cuscino sul fianco del braccio da abduurre, l'estremità più larga del cuscino appoggerà sulla parete addominale. Far girare intorno alla vita la cintura e fissare con la fibbia a scatto (fig. 1).
3. Far aderire il reggibraccio al cuscino (solo per la prima applicazione). Aprire la chiusura della cintura spalla e inserire l'avambraccio nell'apposita sacca in modo che la posizione del gomito sia più arretrata possibile (fig. 2).
4. Passare la cintura della spalla diagonalmente, inserirla nei due anelli piatti rimasti liberi posti sopra la sacca e fissare con la chiusura a strappo (fig. 3 e fig. 4).

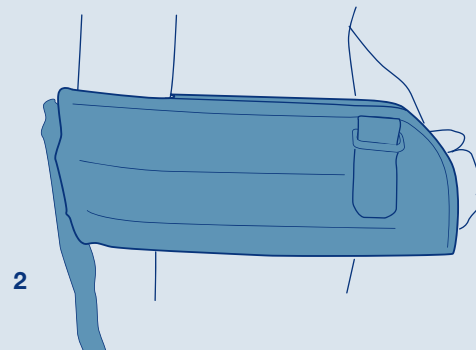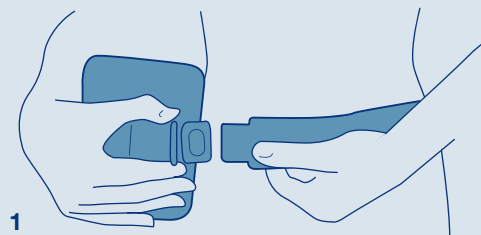

PER LE APPLICAZIONI SUCCESSIVE:

Rimuovere l'ortesi solo ed esclusivamente con il consenso del medico curante.

Per togliere il tutore aprire la cintura spalla (fig. 3) e la fibbia della cintura vita (fig. 5).

NOTA PER IL TECNICO ORTOPEDICO

Accorciare opportunamente la lunghezza delle cinture vita e spalla per consentire la corretta vestibilità dell'ortesi.

