



- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- Il dispositivo deve essere indossato con una maglietta o una canottiera.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata del fabbricante.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

#### AVVERTENZE D'USO

**INDICAZIONI:** tutore destinato all'immobilizzazione dell'articolazione della spalla in posizione abducta da 15° e in intra-extra rotazione +20° - 20°.

Utili, ad esempio, nei casi di: post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori; fratture del trocitere omertale; iniziale trattamento in protesi spalla; trattamento conservativo di fratture della glena stabili; lesioni di Bankart; lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili).

**CONTROINDICAZIONI:** al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

 Fabbricante	 Dispositivo medico	 Codice prodotto	 Conservare lontano da fonti di calore
 Consultare le istruzioni d'uso	 Conservare in ambiente secco	 Codice lotto	 Uso multiplo singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA  
ISO 13485:2016

 **FGP srl**  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRIMB800  
Rev. 05 - 03/23







Orthopedic & Rehabilitation Equipment

# IMB-800 MULTISAS®

Cuscino abduttore per spalla a 15°  
con sistema intra-extra rotazione fino a 20°

**NOTA:** questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che tornerà parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

**CONSERVAZIONE:** conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

**Smatimento: non disperdere nell'ambiente.**

**Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.**

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. <b>NOTA:</b> normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

#### PULIZIA

**GRADO ABDUZIONE**

- a 15°
- cuscino in gommapiuma ad alta densità anatomico ed avvolgente con copertura in velluto e morbida lycra nella zona di appoggio dell'avambraccio
- cuneo di regolazione intra-extra rotazione fino a 20° con copertura in velluto gnrppante

**STRUTTURA SACCA REGGIRACCIO**

- rete di contenimento avambraccio in morbido tessuto trasparente
- agganciata con sistema a strappo sulla struttura del cuscino

**STRUTTURA CINGHIAGGIO**

- con fasce in velluto a strappo con manico imbottito di protezione collo con fibbia a scatto di chiusura e cinghia sottascellare per la ridistribuzione del peso
- dotato di fascia addominale regolabile con fibbia a scatto

**NOTE**

- la conformazione avvolgente del cuscino è in grado di assicurare la stabilità dell'arto anche nella fase notturna, inoltre l'alloggiamento dell'avambraccio inglobato nel cuscino stesso permette di distribuire in modo migliore il peso e ridurre lo stress muscolare, dotato di pallina stabilizzativa

**Codice d'ordine:** IMB-800 DX; IMB-800 SX

Taglia unica


# ISTRUZIONI PER L'USO

## PER LA PRIMA APPLICAZIONE: INDICAZIONI PER IL MEDICO O TECNICO ORTOPEDICO

### AVVERTENZA

La prima applicazione del tutore e le successive regolazioni devono essere fatte solo ed esclusivamente da personale specializzato che dovrà seguire le indicazioni del medico curante.

1. Posizionare il cuscino sulla circonferenza vita in modo che il braccio risulti piegato a 90° mandando in aderenza il profilo posteriore del cuscino (tutore) con il dorso (fig. 1).
2. Fissare il cuscino in vita utilizzando la cintura con la fibbia piccola (fig. 2).
3. Recuperare con il braccio libero la cintura con gli anelli, passarla sopra la spalla posizionandola alla base del collo ed infine fissarla al cuscino mediante la fibbia grande (fig. 3).
4. Posizionare il braccio al cuscino e chiudere la fascia di sostegno (fig. 4).
5. Posizionamento dell'accessorio cintura sotto-ascellare (opzionale) (fig. 5).
6. Posizionamento dell'imbottitura per l'anello posteriore (opzionale) (fig. 6).

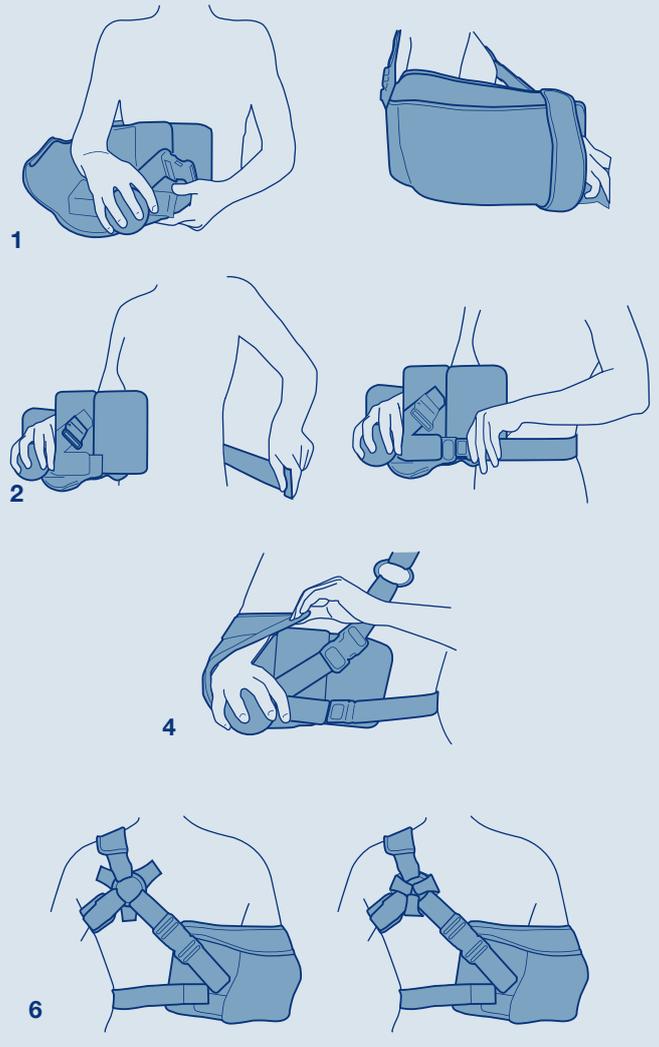

3

5

1

2

4

6

### NOTA 1

Accorciare opportunamente la lunghezza delle cinture per consentire la corretta vestibilità dell'ortesi.

### UTILIZZO DEL CUNEO

A - Posizione neutra.


B - Extra-rotazione + 20°

C - Intra-rotazione + 20°

### APPLICAZIONI SUCCESSIVE

Rimuovere l'ortesi solo ed esclusivamente con il consenso del medico curante.

Per le applicazioni successive: indossare e togliere il tutore utilizzando le fibbie a scatto piccola (fig. 2) e grande (fig. 3) e la fascia di sostegno.

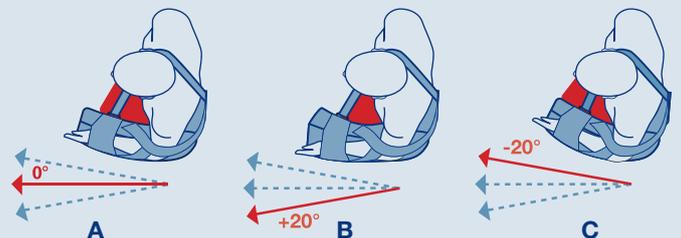

### NOTA 2

Comprimendo la palla è possibile allenare la muscolatura dell'avambraccio.