



- Utilizzare sotto la supervisione dei genitori.
- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- Il tutore deve essere indossato con una maglietta o una canottiera.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

AVVERTENZE D'USO

INDICAZIONI: tutore pediatrico destinato al sostegno meccanico dell'arto superiore. Utili, ad esempio, nei casi di: post trauma spalla e gomito.

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni.


APPLICAZIONE: solo per bambini.

ISTRUZIONI D'USO

1. Sganciare la pinzetta a strappo presente nella cinghia spalla (fig. 1).
2. Inserire l'avambraccio all'interno della sacca reggibraccio (fig. 2).
3. Far passare la cinghia spalla sopra la spalla opposta al braccio infortunato come in figura 3.
4. Chiudere la cinghia inserendo la pinzetta apposita all'interno prima della fibbia più vicina al corpo del paziente, poi nella fibbia più lontana (fig. 4) e fissare la pinzetta sulla cinghia spalla (fig. 5).
5. Per rimuovere il tutore, staccare la pinzetta dalla cinghia spalla e sfilare il tutore dal braccio.

PER IL TECNICO ORTOPEDICO O MEDICO CURANTE

Nel caso in cui la lunghezza della cinghia spalla sia eccessiva, è possibile regolare il tutore: rimuovere la pinzetta, tagliare parte della cinghia spalla in base alla necessità, applicare nuovamente la pinzetta sulla cinghia e chiudere la pinzetta attorno alla cinghia spalla.

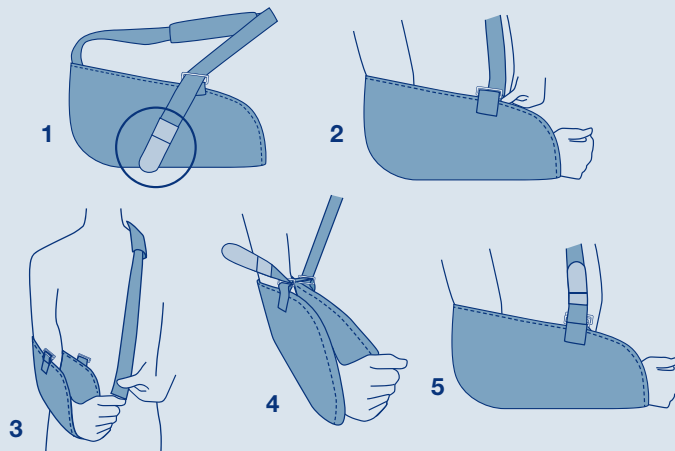

STRUTTURA

- soft con sacca in morbido tessuto all'esterno e monospugna all'interno
- fascia spalla in morbido tessuto grippante e ritagliabile grazie alla pinzetta removibile
- dotato di imbottitura di protezione collo

CHIUSURA

- a strappo

MISURE (ambidestro)

Taglie	Lungh. avambraccio
1°	fino a 25 cm
2°	25-30 cm



Codice d'ordine:

KIDZ-RGB

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.