

ADVERTENCIAS DE USO

INDICACIONES: aparato ortopédico destinado a la inmovilización mecánica o limitación del rango de movimiento del cuarto y quinto dedo. Util, por ejemplo, en los casos de: fracturas de IV y/o V metacarpianas conservadoras o quirúrgicas; fracturas de primera falange de IV y/o V dedo conservadoras o quirúrgicas; luxación volitaria de la metacarpiana talangiana IV y/o V rayo; lesión tendinosa suprafalángica y/o profunda del IV-V rayo postoperatorio; enfermedad de Dupuytren IV y/o V rayo; sesiones tendi-nosas extensoras (comunes de IV y/o V propio del V rayo) postoperatorio; luxación dorsal de la metacarpiana talangiana del IV y/o V rayo; inamovilidad precoz o tardía de IV y/o V rayo (tratamiento conservador o postoperatorio).



EMPRESA CERTIFICADA
ISO 13485:2016



 **FGP srl**
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRSPAPFO100
Rev. 03 - 06/23



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

PFO-100

Férula para 4º y 5º metacarpiano de la mano

Código de pedido:



Tallas	Altura
S	5,5-6,5 cm
M	6,5-8,0 cm
L	8,0-9,5 cm

MEDIDAS (DCH/IZQ)

- el tutor es una patente exclusiva de FGP

NOTAS

- posibilidad de regulación de la ROM de la articulación de la muñeca de aluminio moldeable
- y metacarpo falangea
- acolchado termoformado en suave terciopelo adherente
- mediante 4 tiras de velcro ajustables

ESTRUCTURA

- mediante la estructura de aluminio colocada lateralmente

NOTA: este dispositivo médico de clase I debe utilizarse con estas instrucciones, en combinación con las proporcionadas por el médico tratante, que forman parte integrante de las mismas. El problema es una muy común consecuencia de la disfunción de la articulación de la cadera, o de la técnica ortopédica. En casos de quejas o supuestos de que el paciente no se recupera al distribuir el producto para el uso exclusivo de un solo paciente. En casos de accidentes graves las condiciones de salud del paciente, relacionadas inmediatamente con el fabricante y la Autoridad competente,

El producto puede eliminarse con los residuos domésticos.

ALMACENAMIENTO: almacenar en un lugar seco a temperatura ambiente. Proteger del calor, de la exposición directa a la luz solar y de la humedad.


SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Lavado a mano. NOTA: lavado a mano normal a una temperatura máxima de 30° con jabón neutro. Aclarar cuidadosamente
	No blanquear
	No secar en una secadora de tambor rotativo
	No planchar
	No limpiar en seco

LIMPIEZA

INSTRUCCIONES PARA EL TÉCNICO ORTOPÉDICO


TUTOR BLOQUEADO EN FLEX

de flexión MTC-F fija a 60°
(articulación de la muñeca
bloqueada a 0° o en flexión
a 30° o libre).

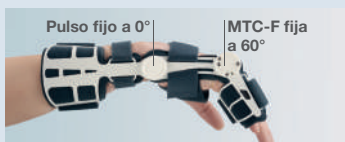

TUTOR PFO DINÁMICO

con MTC-F Dinámica (limitación
R.O.M. 0°-30° o 0°-60° o 0°-libre)
articulación de la muñeca bloqueada
a 0° o a 30° flexión o libre (según
opinión del cirujano ortopédico).

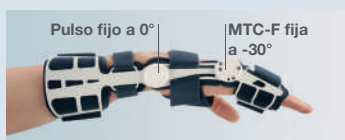


TUTORE BLOQUEADO EN LA POSICIÓN SWAN NECK

Articulación de la muñeca bloqueada en extensión a 60° o 90°,
articulación de la articulación MTC-F bloqueada a 60° en flexión.



TUTOR BLOQUEADO A 0°

de flexión MTC-F fija a 0°
(articulación de la muñeca
bloqueada a 0°).

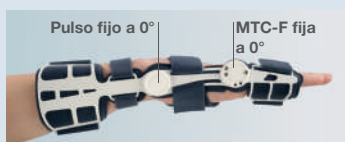


NOTA

Prestando atención a las articulaciones, si es necesario, modelar el soporte siguiendo la anatomía del paciente (fig.1) y el apoyo de los dedos (fig. 2). Asegúrese de que los centros de rotación de las varillas estén en correspondencia con los centros de rotación articulares (fig. 3). Acortar las correas a la longitud deseada.



INSTRUCCIONES DE USO

1. Abrir todas las correas.
2. Ponerse el PFO-100 y cerrar las cintas como se muestra en la secuencia 1, 2, 3, 4.
3. Colocar entre los dedos una gasa estéril para cambiar según las indicaciones.

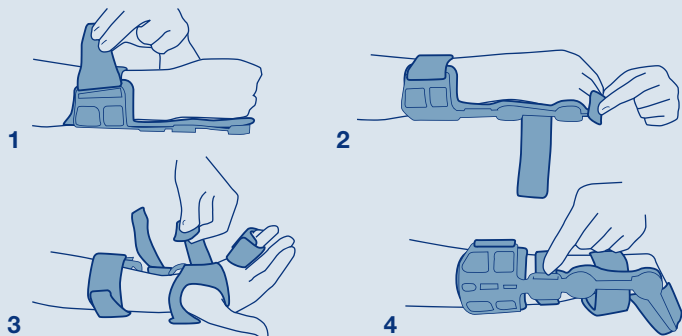


CONFIGURACIONES POSIBLES ARTICULACIONES PFO-100

Esta tabla resume las configuraciones posibles para las dos articulaciones del tutor. Obviamente, la combinación de las configuraciones queda a total discreción del especialista que la establece en función de la necesidad operativa.

ARTICULACIÓN MUÑECA


Bloqueada a 0°

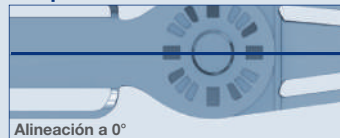



Bloqueada FLEX a 30°





Bloqueada FLEX a 90°

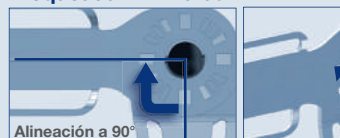

Bloqueada EXT a 60°

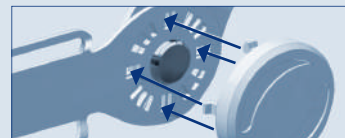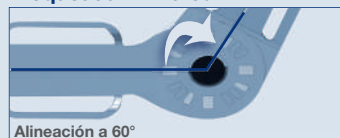

Bloqueada EXT a 90°

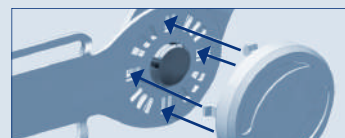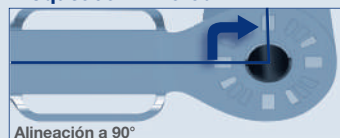


EJE ARTICULACIÓN MTC-F




NO QUITAR LOS TORNILLOS ROJOS


Bloqueada a 0°

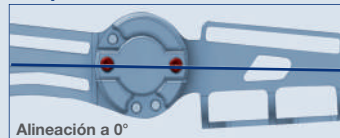


Bloqueada FLEX a 60°

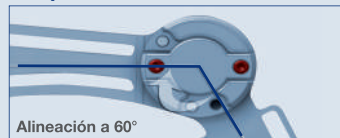

R.O.M. 0°-30°

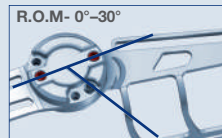

Bloqueada EXT 60°

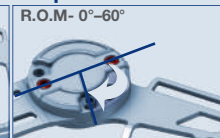

R.O.M. 0°- full range

