



P+ SMART BRA

Reggiseno posturale senza cuciture

POSTURE PLUS SYSTEM

Il nostro ingegno parla italiano, e comunica a tutti la lingua universale del benessere. E a tutti dedichiamo la nostra tecnologia, la nostra ricerca, e le soluzioni più innovative nel campo della riabilitazione nate dal dialogo costante con i più autorevoli professionisti del settore ortopedico e riabilitativo. Perché per noi di FGP, star bene è un diritto di tutti, e migliorare la vita di tutti è un impegno.

Da questo impegno nasce POSTURE PLUS SYSTEM: una soluzione di maglie e dispositivi posturali che, grazie alla sinergia tra fasce di trazione anelastiche e tessuti elastici confortevoli e performanti, stimola impulsi propriocettivi per rieducare alla corretta postura.

POSTURE PLUS SYSTEM è una proposta di abbigliamento frutto dell'innovazione, esperienza e tecnologia FGP, completamente Made in Italy perché confezionate qui, nella nostra struttura e nei nostri impianti, per un benessere dedicato a tutti.

INDICAZIONI:

tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tronco e sostegno del seno mediante stimolazione meccanica neuromuscolare, come ad esempio: dorso curvo non strutturato; patologia spalla con compensazione scapolare; cervicobrachialgie; ipotonotrofia della muscolatura del tronco; contratture muscolari del trapezi, dei medializzatori delle scapole; coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann; coadiuvante nella correzione di vizi posturali.

CONTROINDICAZIONI:

al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

AVVERTENZE D'USO

- Utilizzare su cute integra
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata del fabbricante.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata del fabbricante.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Utilizzare su cute integra

Orthopedic & Rehabilitation Equipment

CE

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Sfoltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

INDICAZIONI: tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tronco e sostegno del seno mediante stimolazione meccanica neuromuscolare, come ad esempio: dorso curvo non strutturato; patologia spalla con compensazione scapolare; cervicobrachialgie; ipotonotrofia della muscolatura del tronco; contratture muscolari del trapezi, dei medializzatori delle scapole; coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann; coadiuvante nella correzione di vizi posturali.

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

AVVERTENZE D'USO

- Utilizzare su cute integra
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata del fabbricante.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Utilizzare su cute integra

FABBRICANTE: FGP srl

DISPOSITIVO MEDICO: MD

CODICE PRODOTTO: REF

CONSERVARE LONTANO DA FONTI DI CALORE

CONSULTARE LE ISTRUZIONI D'USO

CONSERVARE IN AMBIENTE SECCO

CODICE LOTTO: LOT

USO MULTIPLO SINGOLO PAZIENTE

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Durante l'indosso e nel togliere Smart Bra accompagnare sempre il capo come rappresentato nella seguente sequenza di immagini.
 2. Accompagnare il reggiseno fino alla zona delle spalle (figg. 1, 2, 3), successivamente infilare la testa (figg. 4, 5), le braccia (figg. 6, 7, 8, 9) e infine sistemare lungo il busto (fig. 10).
- ⚠ Per agevolare l'inserimento delle braccia, allargare con la mano opposta il giro manica come mostrato nelle figure 6, 7, 8, 9.
3. Per sfilare il reggiseno procedere come nelle figure 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, accompagnando sempre il capo.

⚠ **Prima di indossare il capo togliere anelli, bracciali e qualsiasi cosa possa danneggiare il tessuto.**

STRUTTURA

- realizzato con tecnologia WholeGarment®, ovvero assenza totale di cuciture, con filo Nilit® Breeze per una sensazione di freschezza sulla pelle
- particolare tramatura nella zona interscapolare
- bordo inferiore morbido ed elastico

CHIUSURA

- senza ganci

MISURE

Taglie	Sottoseno	Taglie Reggiseno*
S	66-76 cm	1°-2°
M	72-82 cm	2°-3°
L	78-88 cm	3°-4°
XL	84-94 cm	4°-5°
XXL	90-100 cm	6°-7°



Circonferenza
sottoseno

*taglia abituale del reggiseno indossato

Codici d'ordine:

PPS-SMART BRA B (bianca)

PPS-SMART BRA N (nero);

