

RDS 200 CLAVIO®

IMOBILIZADOR CLAVICULAR



Secondo MDD93/42

EMPRESA CERTIFICADA
UNI CEI EN ISO 13485:2016



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
facebook.com/fgpsrl

Rev. 4 - 11/18



Este dispositivo médico foi concebido para ser usado com as devidas precauções. É, portanto, aconselhável utilizar-se apenas sob aconselhamento médico ou de um técnico ortopédista de modo a evitar eventuais contra indicações. Caso ocorra algum problema durante o uso do dispositivo contate de imediato o seu médico ou técnico ortopédista. Em caso de reclamação contate o seu fornecedor. A ortótese destina-se ao uso exclusivo de um só paciente, caso contrário caduca a garantia do fabricante.

NOTA

Conservar em local seco, à temperatura ambiente. Proteger do calor, da exposição solar direta e da humidade.




SIMBOLO	SIGNIFICADO
	Lavagem à mão. NOTA: Lavar com água e sabão neutro.
	Não usar braseadores.
	Não secar na máquina.
	Não passar a ferro.
	Não limpar a seco.

MANUTENÇÃO

Não se conhecem até à data, desde que a ortótese seja correctamente aplicada, conforme instruções de uso.

CONTRA-INDICAÇÕES

1. Tirar uma das duas tiras superiores esquerda ou direita. Ajustar o imobilizador, posicionando-o na zona axilar. Fazer passar o tirante A na zona axial e introduzi-lo na ranhura superior, depois puxá-lo até que fique justo. (Fig. 1)
2. Puxar os tirantes A e B a uma tensão ótima, que fixe o imobilizador CLAVIO® na posição desejada. (Fig. 2).

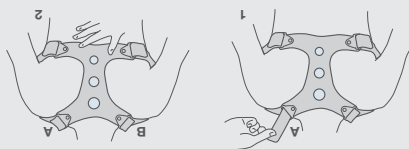

INSTRUÇÕES DE USO

Terapia conservativa da fratura traumática da clavícula

INDICAÇÕES

Distorções e fraturas da clavícula e subluxações axilares. Constituído por uma placa posterior para aplicação na região interesternal, electrosolda de alta frequência.

CARACTERÍSTICAS



Tamanho
S 65-75 cm
M 76-90 cm
L 91-105 cm
XL 106-120 cm

MEDIDAS