

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

PULIZIA

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Smanettare: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinazione con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o assegni malfunctionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

STECATURA

- mediante struttura interna in alluminio modellabile
- doppia imbottitura elettrosaldata con monospugna a contatto con la pelle
- apribile completamente
- cuciture solo sui tiranti
- chiusura
- mediante 3 cinturini a strappo regolabili

Codice d'ordine:

PLE-101 DX
PLE-101 SX



Taglie	Ø Polso	MISURE (DX/SX)
1°	14,5-19,5 cm	
2°	19,5-23,5 cm	
	22cm	
	24 cm	

Altezza

PLE-101 MANUMED® DISK

Tutore rigido per polso



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



Conservare lontano
da fonti di calore



Codice
prodotto



Dispositivo
medico



Fabbricante



Uso multiplo
singolo paziente



Codice
lotto



Conservare in
ambiente secco



Consultare le
istruzioni d'uso



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016



FGP srl

Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRMANUDISK
Rev. 03 - 03/23

AVVERTENZE D'USO

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).







INDICAZIONI: tutore destinato all'immobilizzazione meccanica dell'articolazione del polso. Utile, ad esempio, nei casi di: traumi distorsivi moderati e severi del polso; tendiniti flessori ed estensori; esiti fratture del polso; trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano; post operatorio di fratture di radio e/o ulna distali; artralgie.

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o dal tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.



ISTRUZIONI PER L'USO

1. Sganciare tutti i nastri a strappo della polsiera.
2. Appoggiare la mano alla polsiera modellata (figg. 1 e 2).
3. Chiudere i nastri a strappo, rispettando la sequenza illustrata (da fig. 3 a fig. 7).

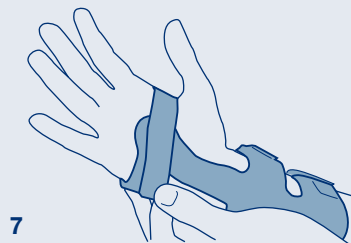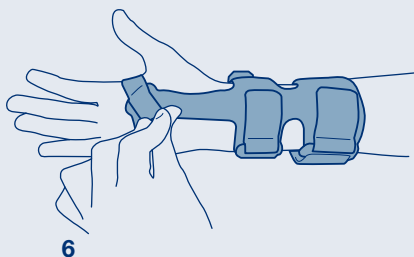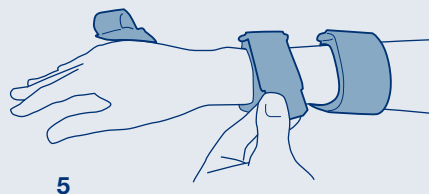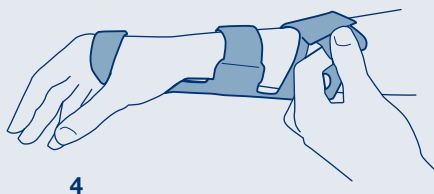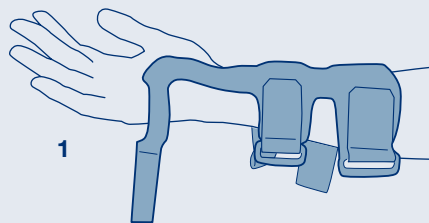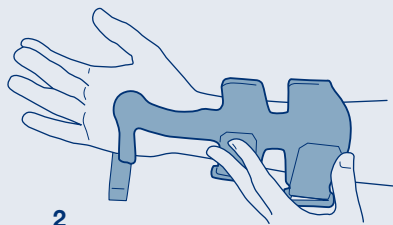

ISTRUZIONI PER IL TECNICO ORTOPEDICO

La stecca preformata anatomicamente deve essere modellata all'anatomia dell'utilizzatore.
Aprire i nastri a strappo e procedere alla modellazione al fine di ottenere una completa aderenza della stecca al braccio e al palmo.