



AZIENDA CERTIFICATA  
ISO 13485:2016

 **F.G.P. s.r.l. unipersonale**  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



F1STRPHYTSTIPRO  
Rev. 02 - 07/24

### AVVERTENZE D'USO

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/imitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **PHYLOETEK STABIMED® PRO OPEN** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico.

**CONTROINDICAZIONI:** al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, e moderata; esiti distorsione ginocchio; instabilità post traumatica.

collaterali mediale e/o laterale; trattamento distorsioni di ginocchio; gonartrosi lieve

instabilità in varo/valgo traumatico e non; trattamento conservativo dei legamenti

dell'articolazione del ginocchio tramite snodi. Utile, ad esempio, nei casi di: modesta

stabilizzazione meccanica tramite compressione dei tessuti molli e guida del movimento

**INDICAZIONI PHYLOETEK STABIMED® PRO OPEN:** tutore destinato alla

ipertensione rotulea grave; esiti distorsione ginocchio; instabilità post traumatica.

lieve e moderata artrosi femoro-rotulea; lussazione rotulea cronica e non;

distorsioni di ginocchio; gonartrosi lieve e moderata; traumi/traumi della rotula;

non; trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale; trattamento

alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di: modesta instabilità in varo/valgo traumatico e

meccanica tramite compressione dei tessuti molli e guida del movimento dell'articolazione



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

**PHYLOETEK**




PHYLOETEK  
STABIMED® PRO

PHYLOETEK  
STABIMED® PRO OPEN

Linea PhyloEtek - Ginocchiera traspirante  
aperta e non, con snodo policentrico

## PHYLOETEK STABIMED® PRO

1. Aprire i nastri a strappo, sedersi su una sedia e piegare la gamba in modo che formi un angolo di 45°. Far scorrere l'ortesi lungo la gamba (fig. 1) in modo che la zona siliconata presente all'interno del tutore sia posizionata nella parte superiore della gamba.
2. Posizionare il tutore in modo tale che il foro rotuleo sia posto esattamente sulla rotula.
3. Fissare la chiusura a strappo inferiore A e poi quella superiore B (figg. 2 e 3).
4. Per rimuovere il tutore aprire i nastri a strappo e sfilare la ginocchiera.

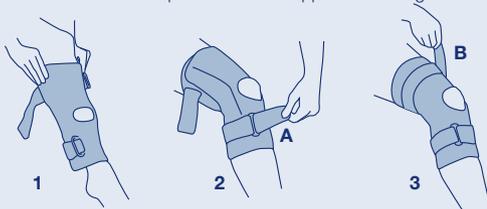

**Assicuratevi della corretta posizione dell'ortesi:** le parti centrali dello snodo devono trovarsi all'altezza della parte superiore della rotula, lo snodo deve essere posizionato dietro la linea mediana laterale della gamba. Fate qualche flessione leggera del ginocchio e riposizionate tutte le chiusure a strappo a fondo, nello stesso ordine, al fine di evitare che l'ortesi scivoli.

## PHYLOETEK STABIMED® PRO OPEN

1. Aprire i nastri a strappo e sfilarli dai relativi passanti e aprire le chiusure frontali. Sedetevi su una sedia e piegate la gamba in modo che formi un angolo di 45° e avvolgere l'ortesi stringendola attorno alla gamba in modo che la zona siliconata presente all'interno del tutore sia posizionata nella parte superiore della gamba.
2. Posizionare il tutore in modo tale che il foro rotuleo sia posto esattamente sulla rotula e chiudere prima la parte inferiore e poi superiore della chiusura frontale (fig. 1).
3. Infilare i nastri a strappo nei relativi passanti e chiudere prima il nastro a strappo inferiore (fig.2) e poi quello superiore (fig.3).
4. Per rimuovere il tutore aprire i nastri a strappo e la chiusura frontale e sfilare la ginocchiera.



### PULIZIA

Prima del lavaggio rimuovere gli snodi dalla ginocchiera tramite una leggera torsione dello snodo stesso e chiudere tutti i nastri a strappo. Dopo il lavaggio riposizionare gli snodi nelle loro sedi.

## STRUTTURA

- soft in tessuto PhyloEtek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, con foro rotuleo
- tubolare per **PhyloEtek Stabimed® Pro**
- completamente apribile per **PhyloEtek Stabimed® Pro Open**

## SNODO/ASTE

- policentrico libero, totalmente coperto ed estraibile

## STABILIZZATORE ROTULEO

- a forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, orientabile a 360° con sistema a strappo per **PhyloEtek Stabimed® Pro**
- nessuno per **PhyloEtek Stabimed® Pro Open**

## CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate

## MISURE (ambidestro)

### Taglie Ø Coscia

XS	34-40 cm
S	40-46 cm
M	46-52 cm
L	52-58 cm
XL	58-65 cm
XXL	65-72 cm



Altezza  
34 cm

**Codice d'ordine:**  
PY-TKST PRO  
PY-TKST PRO OP

## PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

## CONSERVAZIONE:

conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

**Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.**

**Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.**

**NOTA:** questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.