

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione deve essere indossata con una maglietta o una canottiera.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/imitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

#### AVVERTENZE D'USO

**INDICAZIONI:** tutore destinato al sostegno meccanico dell'arto superiore. Utile, ad esempio, nei casi di: post trauma spalla e gomito; entesopatia calcifica della spalla in fase acuta; rottura atraumatica del capolungo del bicipite; fase acuta di artrosi glenomereale e/o acromion clavare; trattamento del braccio pendulo (lesioni del plesso brachiale).

**CONTROINDICAZIONI:** al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.



Fabbricante

**MD**

Dispositivo medico

**REF**

Codice prodotto



Conservare lontano da fonti di calore



Consultare le istruzioni d'uso



Conservare in ambiente secco

**LOT**

Codice lotto



Uso multiplo singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA  
ISO 13485:2016



FGP srl

Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRRGB100  
Rev. 12 - 03/23



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment



# RGB-100


Reggibraccio semplice




Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

# ISTRUZIONI PER L'USO

1. Indossare il tutore. Posizionare l'avambraccio nell'apposita sacca in modo che la posizione sia il più arretrata possibile, quindi inserire, se necessario, il pollice nell'apposito anello di sostegno (fig 1).

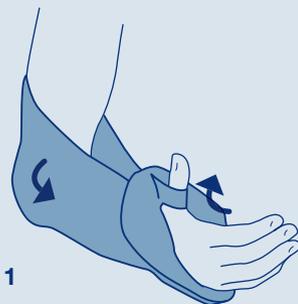

2. Far passare la fascia di sostegno sopra la spalla opposta, quindi fare un doppio passaggio attraverso la fibbia di regolazione (fig. 2).

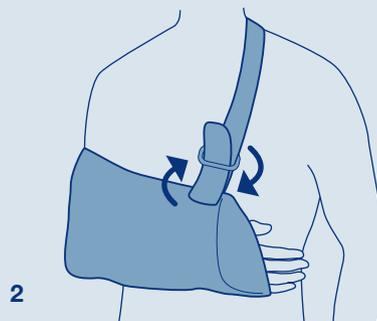

## STRUTTURA

- soft con sacca in cotone e cintura spalla regolabile mediante fibbia dotata di tubolare di protezione collo

## CHIUSURA

- mediante fibbia

## MISURE (ambidestro)

### Taglie Lung. avambraccio

S	fino a 32 cm
M	33-40 cm
L	oltre 40 cm



## Codice d'ordine:

RGB-100

## PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

**CONSERVAZIONE:** conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

**Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.**

**Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.**

**NOTA:** questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.