

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- Il tutore deve essere indossato con una maglietta o una canottiera.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri MD (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

#### AVVERTENZE D'USO

**INDICAZIONI:** tutore destinato al sostegno meccanico dell'arto superiore. Utile, ad esempio, nei casi di: post trauma spalla e gomito; entesopatia calcifica della spalla in fase acuta; rottura atraumatica del capulungo del bicipite; fase acuta di artrosi glenomereale e/o acromion clavaree; trattamento del braccio pendulo (lesioni del plesso brachiale).

**CONTROINDICAZIONI:** al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.



Fabbricante

MD

Dispositivo medico

REF

Codice prodotto



Conservare lontano da fonti di calore



Consultare le istruzioni d'uso



Conservare in ambiente secco

LOT

Codice lotto



Uso multiplio singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA  
ISO 13485:2016



**FGP srl**  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRRGB300  
Rev. 02 - 03/23



# RGB-200

# RGB-300

Reggibraccio con e senza fascia



**FGP**

Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

# ISTRUZIONI PER L'USO



1. Indossare il tutore. Posizionare l'avambraccio nell'apposita sacca in modo che la posizione sia il più arretrata possibile, quindi inserire, se necessario, il pollice nell'apposito anello di sostegno (fig. 1).



2. Far passare la fascia di sostegno sopra la spalla opposta, quindi fare passare attraverso la fibbia, infine chiudere su se stessa (fig. 2).



3. Se necessario avvolgere la fascia di fissaggio al tronco includendo il braccio interessato (fig.3 e 4) (solo per RGB-300).

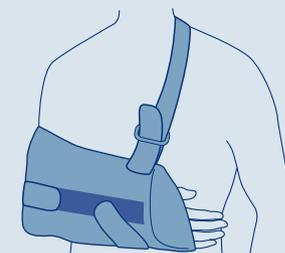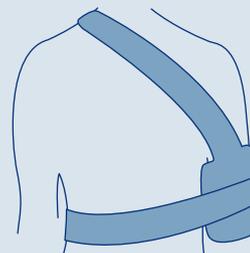

## STRUTTURA

- soft con sacca in cotone e cintura spalla in vellutino regolabile con sistema a strappo

## CHIUSURA

- a strappo

## ACESSORIO

- fascia in vellutino grippante (RGB-300)

## MISURE (ambidestro)

### Taglie Lungh. avambraccio

S	fino a 32 cm
M	33-40 cm
L	oltre 40 cm



## Codice d'ordine:

RGB-300  
RGB-200

## PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

**CONSERVAZIONE:** conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.  
**Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.**

**Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.**

**NOTA:** questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.