



# VAL-100

Valve di protezione



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment



**INDICAZIONI:** dispositivo destinato ad incrementare la stabilità dei tessuti molli della coscia e del polpaccio.

**CONTROINDICAZIONI:** al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

## AVVERTENZE D'USO

- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il dispositivo VAL-100 è stato concepito per essere utilizzato con i dispositivi medici GNO-970 LEGGY® (GNO-970) e GNO-970 LEGGY® ECO (GNO-970ECO) aventi fabbricante FGP srl.
- Il dispositivo non deve essere posizionato a contatto pelle ma sopra l'imbottitura delle ginocchiere post-operatorie GNO-970 LEGGY® (GNO-970) e GNO-970 LEGGY® ECO (GNO-970ECO).



Fabbricante



Dispositivo medico



Codice prodotto



Conservare lontano da fonti di calore



Consultare le istruzioni d'uso



Conservare in ambiente secco



Codice lotto



Uso multiplo singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA  
ISO 13485:2016



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment



FGP srl

Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR

T +39 0458600867

F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it




FISIRVAL100  
Rev. 01 - 02/24

# ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aprire le cinture (fig.1) della ginocchiera post-operatoria GNO-970 o GNO-970ECO richiudendo i terminali a strappo delle cinture su sé stessi (fig.2)
2. Separare le imbottiture dalle aste con le cinture.
3. Sovrapporre la parte velcrabile della valva per la coscia al gancio presente nella parte superiore dell'asta mediale e laterale (fig.3).
4. Sovrapporre la parte velcrabile della valva per il polpaccio al gancio presente nella parte inferiore dell'asta mediale e laterale (fig.4).
5. Riposizionare l'asta mediale e laterale sull'imbottitura della ginocchiera.
6. Procedere al posizionamento del tutore GNO-970 o GNO-970ECO seguendo le relative istruzioni d'uso.

**ATTENZIONE:**  
Qualora l'asta mediale e/o laterale sia stata accorciata in prossimità delle linee di taglio ridurre anche le valve.

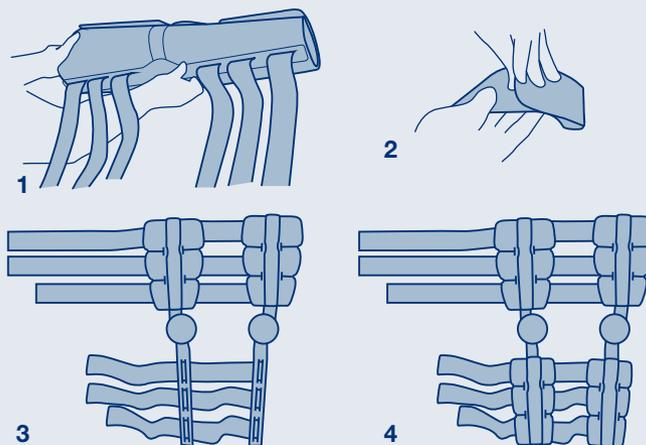

## STRUTTURA

- due valve di protezione per la coscia
- due valve di protezione per il polpaccio

## MISURE



## Codice d'ordine:

VAL-100

## PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

**CONSERVAZIONE:** conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

**Smaltimento:** non disperdere nell'ambiente.

**Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.**

**NOTA:** questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.