

MEDI SELECTION

BY FGP
NUOVE DIMENSIONI
DI BENESSERE E PERFORMANCE.



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

medi

CURA ARTIGIANALE E TECNOLOGIA: LA SINERGIA PER UN BENESSERE COME DIRITTO DI TUTTI.

Crediamo nelle potenzialità dell'uomo e nella sua capacità di immaginare ogni giorno soluzioni innovative per il benessere. Crediamo nella sua abilità di realizzarle, con sensibilità e manualità.

E crediamo in partner come Medi, con cui condividiamo competenze e tecnologie, passione e innovazione, cura del particolare e ricerca nello sviluppo di tecniche, design, materiali sempre più evoluti. Ma soprattutto: la certezza che solo un'eccellenza in ogni dettaglio, sempre costante, senza compromessi è la strada per raggiungere la perfetta combinazione tra comfort e performance in ogni prodotto.

Una combinazione che valorizziamo attraverso la sinergia con Medi, per il pieno rispetto del benessere del paziente in ogni suo gesto, ogni giorno.

SCEGLIERE IL MEGLIO PER FAR STAR MEGLIO.

I feel better: “mi sento meglio”. Poche e significative parole che, da 65 anni, accomunano ogni giorno pazienti di diversi paesi, di diverse età, con diverse situazioni di salute. Sono i pazienti che sperimentano le dimensioni di benessere firmate Medi: da 65 anni leader nella produzione di tutori e calze compressive medicali. Un’azienda attenta alle esigenze del paziente, perché ispirata dalla passione della gestione familiare; una realtà nata in Germania ma con una visione internazionale, grazie alla quale nel tempo ha conquistato la fiducia di professionisti e utenti in oltre 90 paesi e l’anima degli attuali 2.400 dipendenti con cui condivide valori ed entusiasmo.

E I feel better è la promessa che Medi mantiene per tutti i pazienti, facendo vivere esperienze di benessere attraverso prodotti dall’efficacia testata e dalla vestibilità altamente confortevole. Una promessa supportata dalla capacità di unire la funzionalità del tessuto elastico compressivo con lo stile estetico e di tendenza, e che dà forma a diverse e innovative soluzioni: dalle calze compressive, ai dispositivi clinici per flebologia, ai tutori elastici, alle ortesi plantari, ai tutori compressivi post operatori, all’abbigliamento tecnico sportivo.

I feel better è l’espressione della soddisfazione che Medi genera in molti pazienti ogni giorno, da molti anni, in tante e diverse lingue nel mondo.





medi. I feel better.

CARATTERISTICHE MEDI SELECTION



CLIMAFRESH:


Trattamento ad azione antibatterica e preventivo alla formazione di odori. Una soluzione che riduce il rischio di infezioni causate ad esempio da micro-organismi patogeni.

COMFORT ZONE

Ergonomia e indossabilità di ogni prodotto studiate in funzione dell'anatomia allo scopo di evitare sollecitazioni eccessive nelle zone più delicate. Ciò a garanzia di un elevato comfort anche in condizioni di uso prolungato del tutore.

PIÙ PERFORMANCE E PIÙ COMFORT ATTRAVERSO TESSUTO E DESIGN.

Più traspirabilità, più elasticità, maggior sollievo dal dolore: il nuovo tessuto firmato Medi fa vivere al paziente nuove dimensioni di benessere con un tessuto aggiornato e migliorato. La trama è ricca di soluzioni tecnologicamente avanzate nella scelta di materiali e nei trattamenti per un'esperienza ancora più evoluta di comfort e performance. Un comfort ai massimi livelli: **tutti i prodotti Medi sono soluzioni latex free**, per garantire la completa portabilità anche a contatto con la pelle.

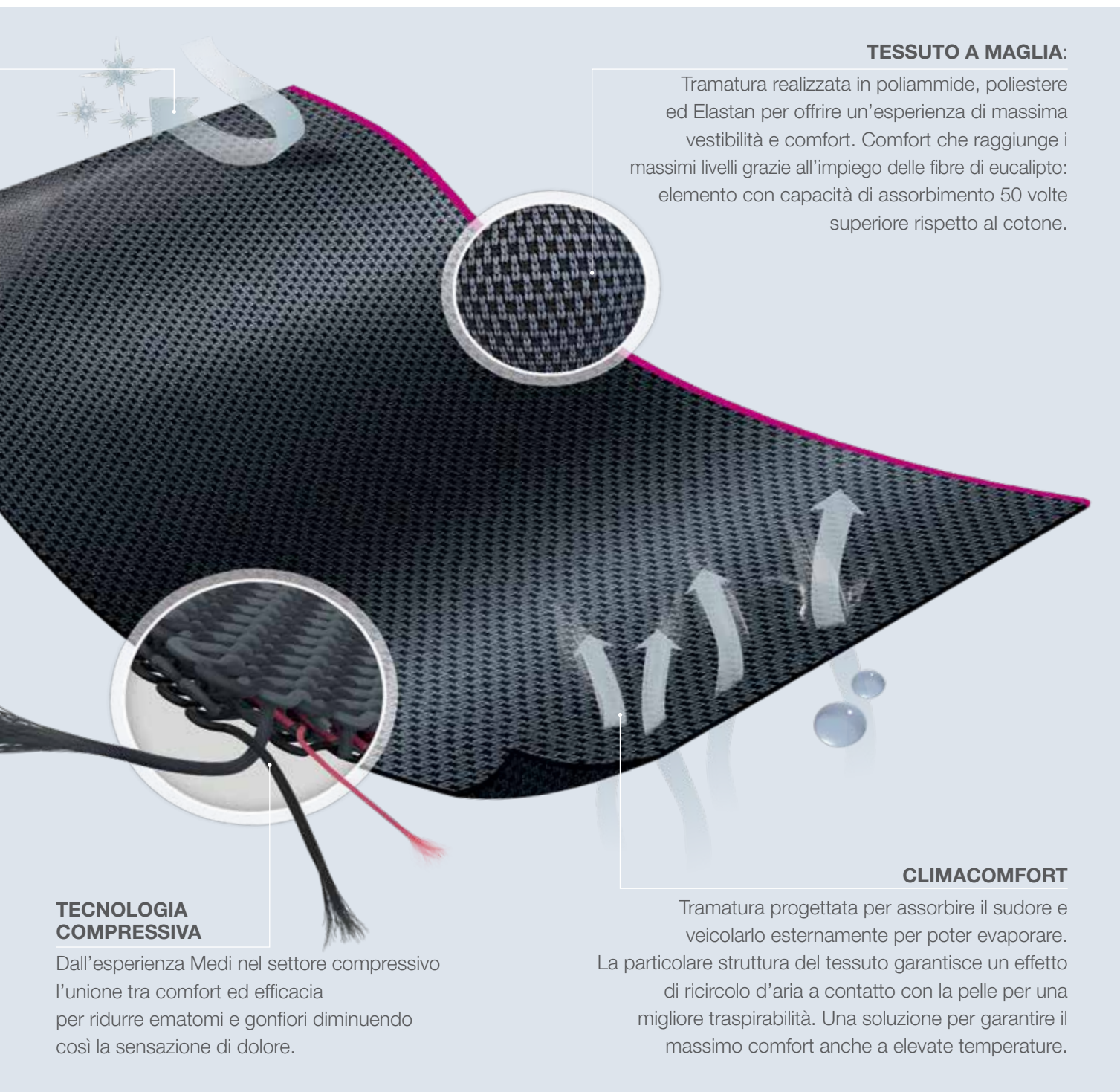

TESSUTO A MAGLIA:

Tramatura realizzata in poliammide, poliestere ed Elastan per offrire un'esperienza di massima vestibilità e comfort. Comfort che raggiunge i massimi livelli grazie all'impiego delle fibre di eucalipto: elemento con capacità di assorbimento 50 volte superiore rispetto al cotone.

TECNOLOGIA COMPRESSIVA

Dall'esperienza Medi nel settore compressivo l'unione tra comfort ed efficacia per ridurre ematomi e gonfiori diminuendo così la sensazione di dolore.

CLIMACOMFORT

Tramatura progettata per assorbire il sudore e veicolarlo esternamente per poter evaporare. La particolare struttura del tessuto garantisce un effetto di ricircolo d'aria a contatto con la pelle per una migliore traspirabilità. Una soluzione per garantire il massimo comfort anche a elevate temperature.

NUOVA LINEA MEDI E+MOTION®



NUOVA LINEA MEDI E+MOTION: PER CUSTODIRE IL BENESSERE, PER LIBERARE L'ENERGIA ANCHE NELLE PIÙ ALTE PERFORMANCE.

Ci sono momenti in cui il corpo è chiamato a dare il meglio di sé. Ci sono soluzioni che aiutano il corpo ad esprimersi ai massimi livelli. La linea rinnovata **Medi E+Motion by FGP** unisce comfort e alte prestazioni, sicurezza e vestibilità, per accompagnare il fisico anche nei movimenti più estremi. L'alta tecnologia e la ricerca dei materiali, il design e la cura dei dettagli assecondano ogni gesto e sono compagni di squadra nello sport e compagni di vita nel tempo libero e nella quotidianità. E il look esclusivo danno più energia alle performance. Con la **nuova** linea **Medi E+Motion by FGP**, il benessere è sempre in movimento.

Levamed E+ Motion®



Epicomed E+ Motion®



CARATTERISTICHE


Altissima stabilità per un supporto preciso anche sotto sforzo elevato

Altissima elasticità per una vestibilità sicura, anche durante i movimenti estremi

Funzionali fibre merinos per una migliore regolazione del calore durante l'estate e l'inverno

Fibre attive innovative per una perfetta gestione dell'umidità sulla pelle

Zone di comfort aumentate per una maggiore libertà di movimento e comfort

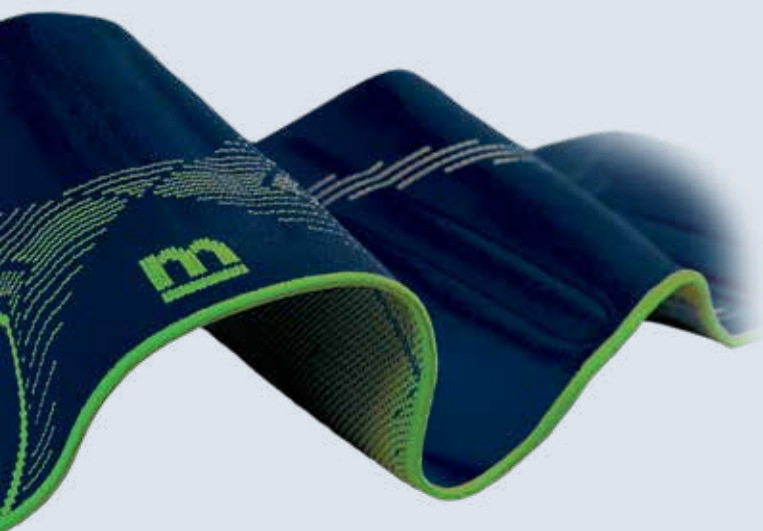


CARATTERISTICHE MEDI E+MOTION®

GENUMEDI E+MOTION

MASSIMA PROTEZIONE
SOTTO STRESS,
PERFORMANCE SOPRA
LE ASPETTATIVE.


Altissima elasticità che veste il movimento, perfetta stabilità per la massima sicurezza, comfort estremo grazie alle fibre innovative: la nuova ginocchiera **Genumedi E+Motion** è tutto questo, perché la tranquillità di muoversi diventi libertà di esprimersi anche nelle più alte prestazioni.

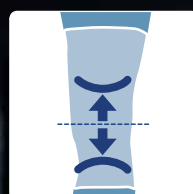

COMFORT ZONE
nella zona del cavo
popliteo.



**SILICONE
ANTISCIVOLO
INTEGRATO** nella
zona superiore
del tutore.

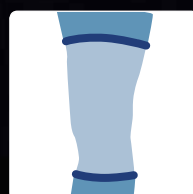


BORDI MORBIDI
sia superiore che
inferiore per garantire
comfort e facilità
nell'indossare il tutore.




**MEDI COMFORT
MERINOS**
combinazione
di fibre innovative
con fibre Merinos.

SETTORE TRONCO


LEGENDA

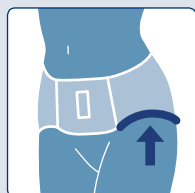


SGAMBATURA OTTIMIZZATA
per una vestibilità ed ergonomia ottimale.

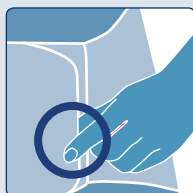

APERTURA FACILITATA
grazie al design della patella.

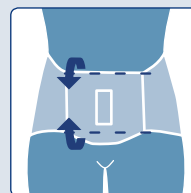

BORDO superiore e inferiore della PATELLA PIEGHEVOLE
per una seduta comoda che evita iperpressioni.

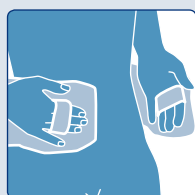

MANIGLIA
presente su entrambe le patelle per una chiusura/apertura facilitata.



MEDI COMFORT EUCALIPTO
nuova combinazione di fibre innovative e fibre di Eucalipto.



MEDI COMFORT MERINOS
combinazione di fibre innovative con fibre Merinos.

LUMBAMED® BASIC

CORSETTO LOMBARE CON STECCHE DI STABILIZZAZIONE REALIZZATO NEL NUOVO TESSUTO MEDI COMFORT



CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Dotato di **4 stecche** in acciaio allo scopo di stabilizzare il tratto di colonna interessato alleviando così il dolore.

Tra le stecche vengono mantenute **zone traspiranti**.

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- stati irritativi delle piccole articolazioni
- traumi lievi del rachide lombare
- **tratto colonna interessato L1-S1**



CARATTERISTICHE DELLA LINEA



LUMBAMED® PLUS

CORSETTO LOMBAR CON PELOTA MASSAGGIANTE
REALIZZATO NEL NUOVO TESSUTO MEDI COMFORT



CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Fornito di **2 stecche a spirale** posteriori di **stabilizzazione**.

Pelota posteriore removibile in silicone dotata di scarico in corrispondenza dei processi spinosi.
Superficie tridimensionale in corrispondenza dei muscoli paravertebrali per un **effetto massaggiante**.
Pelota **forata** per garantire la traspirabilità.
La copertura in cotone garantisce maggior **comfort**.

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia
- discartrosi; discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare; stati infiammatori dell'articolazione ileo-sacrale
- traumi lievi rachide lombare
- **tratto colonna interessato L1-S1**



CARATTERISTICHE DELLA LINEA



LUMBAMED® PLUS E+ MOTION

CORSETTO LOMBAR CON PELOTA MASSAGGIANTE EMOTION
REALIZZATO IN TESSUTO CON LANA MERINOS

NUOVO



CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Fornito di **2 stecche a spirale** posteriori di **stabilizzazione**.

Pelota posteriore removibile realizzata in silicone e **fibre di quarzo**.
Dotata di scarico in corrispondenza dei processi spinosi e di superficie tridimensionale in corrispondenza dei muscoli paravertebrali per un **effetto massaggiante**. Pelota **forata** per garantire la traspirabilità. La copertura in cotone garantisce maggior **comfort**.

Il materiale di base è dato dalla combinazione di pura lana merinos con fibre innovative per garantire traspirabilità e calore.

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia
- discartrosi e discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari e artrosi lombare
- stati infiammatori dell'articolazione ileo-sacrale
- traumi lievi del rachide lombare
- **tratto colonna interessato L1-S1**

Fino ad esaurimento scorte gli ordini saranno evasi con il modello precedente.



CARATTERISTICHE DELLA LINEA



LUMBAMED® DISC

CORSETTO LOMBARE CON SISTEMA A PONTE REALIZZATO NEL NUOVO TESSUTO MEDI COMFORT E FUNZIONE DI MOBILIZZAZIONE PROGRESSIVA



CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Sistema modulare di steccatura per variare il livello di supporto del tutore in funzione della necessità del paziente.

FASE I (fase acuta): configurazione completa con 4 stecche rigide in acciaio più elemento a ponte esterno per un elevato grado di stabilità.


FASE II (fase sub-acuta): eliminare l'elemento a ponte esterno e mantenere le 4 stecche in acciaio.

Fase III (in recupero di mobilità): sostituire le 4 stecche in acciaio con 4 più flessibili (richiedere a pagamento).

INDICAZIONI

- lombalgia, lombosciatalgia, discartrosi, discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombari
- stati irritativi delle piccole articolazioni
- spondilolisi (grado I di Mayerding)
- traumi lievi del rachide lombare
- **tratto colonna interessato D12-S1**

Andamento della capacità di stabilizzazione in funzione della mobilità del paziente.

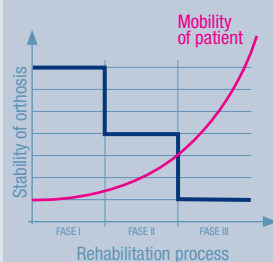

CARATTERISTICHE DELLA LINEA



LUMBAMED® SACRO

CORSETTO PER L'ARTICOLAZIONE SACRO-ILIACA REALIZZATO NEL NUOVO TESSUTO MEDI COMFORT



CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Sistema **configurabile** a seconda dell'intensità del dolore e del livello di instabilità dell'articolazione sacro-iliaca.

Doppia pelota removibile con **effetto massaggiante**.

Cintura addizionale anelastica efficace per apportare una maggior spinta.

INDICAZIONI

- patologia sacro-iliaca (sindrome SIJ)
- artrite e instabilità dell'articolazione sacro-iliaca
- mialgie e tendinopatie della regione pelvica
- instabilità della cintura pelvica; problematiche strutturali dopo spondilolistesi del tratto lombare della colonna (LWS)
- blocco ricorrente dell'articolazione sacro-iliaca
- miotendinopatie ricorrenti (retto dell'addome, piriforme)
- diastasi e allentamento della sinfisi pubica
- **tratto colonna interessato: L5-S2**




CARATTERISTICHE DELLA LINEA



SETTORE ARTO SUPERIORE

LEGENDA

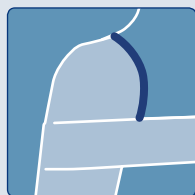

BORDI MORBIDI
per evitare effetto
laccio.



COMFORT ZONE
Area in spessore
ridotto e dal design
sagomato per un
maggior comfort.



**MEDI COMFORT
EUCALIPTO**
nuova combinazione
di fibre innovative e
fibre di Eucalipto.



**MEDI COMFORT
MERINOS**
combinazione
di fibre innovative con
fibre Merinos.

OMOMED®

SUPPORTO PER SPALLA



CARATTERISTICHE SPECIFICHE

2 Anelli di trazione che consentono di modulare il **range di movimento** della spalla in base alle necessità del paziente.

Cinghia toracica in grado di limitare la rotazione esterna della spalla.

INDICAZIONI

- trattamento conservativo dell'artrosi dolorosa della spalla
- trattamento postoperatorio nelle protesi di spalla
- trattamento conservativo nella lussazione di spalla cronica o acuta
- esiti dolorosi post ricostruzione della cuffia dei rotatori

CARATTERISTICHE DELLA LINEA



EPICOMED®

GOMITIERA IN TESSUTO ELASTICO CON PRESSORE IN SILICONE



CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Cuscinetto pressore in silicone, posto lateralmente, dotato di scarico trocleare e superficie 3D per azione massaggiante sulla zona infiammata.

Cinturino a strappo removibile che permette un tensionamento regolabile.

INDICAZIONI

- epicondiliti
- epitrocleiti
- esiti lussazione del gomito
- borsite olecranica
- versamenti e/o tumefazioni articolari da artrite o artrosi o malattie reumatiche



CARATTERISTICHE DELLA LINEA



EPICOMED® E+ MOTION

GOMITIERA IN TESSUTO ELASTICO EMOTION CON PRESSORE IN SILICONE

NUOVO



CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Cuscinetto pressore in silicone e fibre di quarzo, posto lateralmente, dotato di scarico trocleare e superficie 3D per azione massaggiante sulla zona infiammata.

Cinturino a strappo per un tensionamento regolabile. Può essere anche rimosso.

Bordo superiore ampio e flessibile per una vestibilità ottimale.

INDICAZIONI


- epicondiliti
- epitrocleiti
- esiti lussazione del gomito
- borsite olecranica
- versamenti e/o tumefazioni articolari da artrite o artrosi o malattie reumatiche

Fino ad esaurimento scorte gli ordini saranno evasi con il modello precedente.




CARATTERISTICHE DELLA LINEA



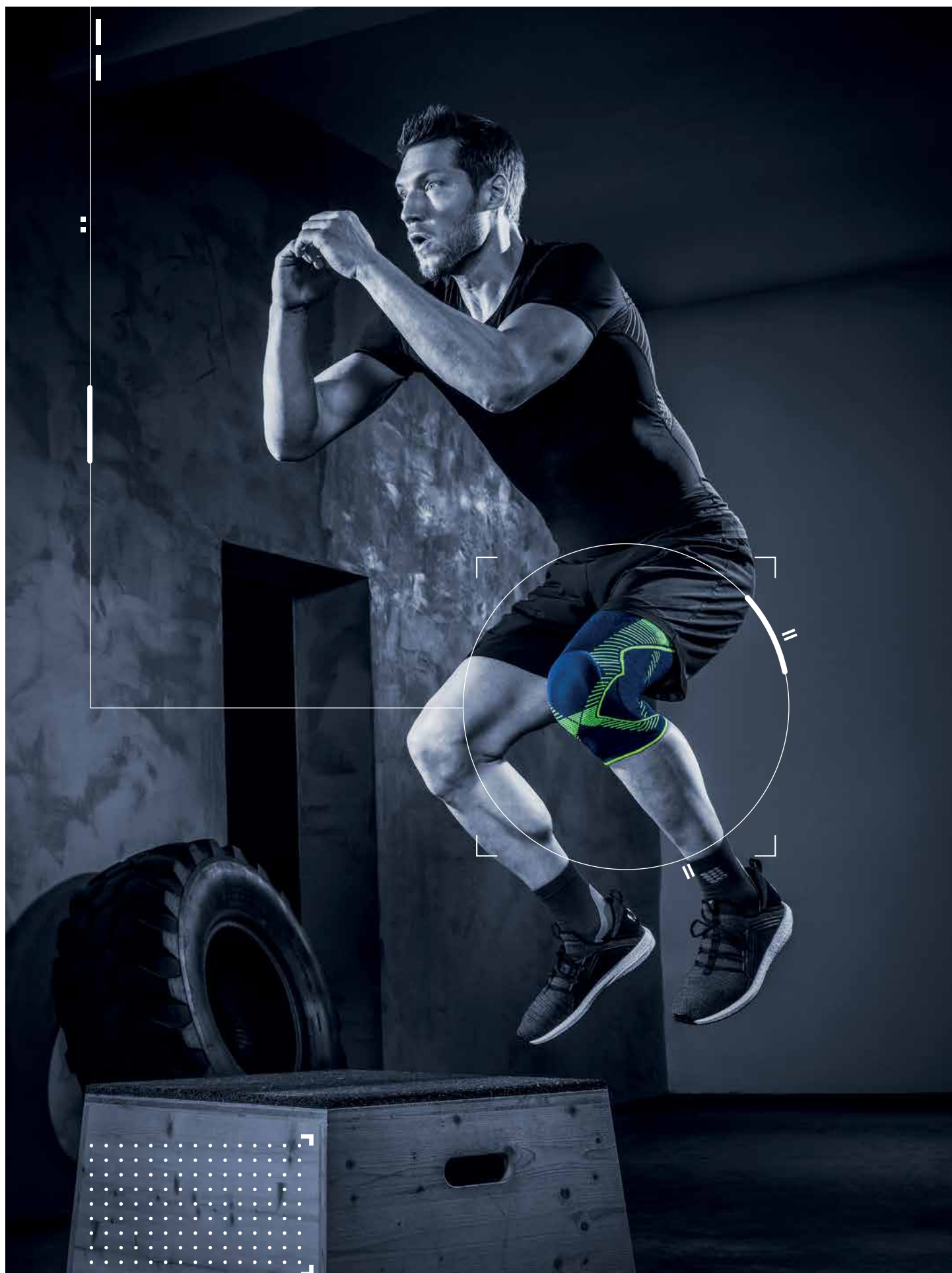

SETTORE GINOCCHIO

LEGENDA

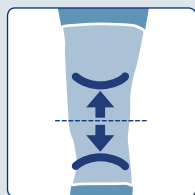


COMFORT ZONE
nella zona del cavo
popliteo.



**SILICONE
ANTISCIVOLO
INTEGRATO** nella
zona superiore
del tutore.



**MEDI COMFORT
EUCALIPTO**
nuova combinazione
di fibre innovative e
fibre di Eucalipto.

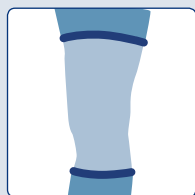

BORDI MORBIDI
sia superiore che
inferiore per garantire
comfort e facilità
nell'indossare il tutore.



**MEDI COMFORT
MERINOS**
combinazione
di fibre innovative con
fibre Merinos.

GENUMEDI®

**GINOCCHIERA ELASTICA CON ANELLO ROTULEO IN SILICONE
REALIZZATA NEL NUOVO TESSUTO MEDI COMFORT**



CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Stecche a spirale di stabilizzazione laterale.

Anello di stabilizzazione rotuleo in silicone removibile, con design ottimizzato per la massima efficacia e minor pressione rotulea utile a garantire un comfort ottimale.*

La **superficie 3D** dell'anello assicura un effetto massaggiante utile a ridurre l'edema e il gonfiore.


INDICAZIONI

- condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee



* Test comparativi effettuati presso l'Istituto di Fisica Medica dell'Università di Erlangen/Norimberga del 2009. La pressione esercitata dal prodotto Genumedi sulla rotula è inferiore a 40 mmHg. A parità di efficacia i valori sono nettamente inferiori a quelli testati della concorrenza.


CARATTERISTICHE DELLA LINEA

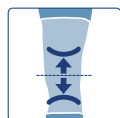

GENUMEDI® E+ MOTION

GINOCCHIERA ELASTICA EMOTION CON ANELLO ROTULEO IN SILICONE

NUOVO

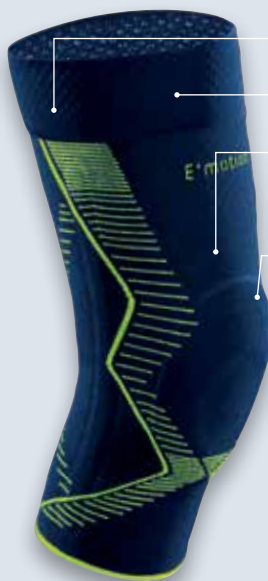

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Stecche a spirale di stabilizzazione laterale.

Bordo superiore aumentato con silicone per una **maggiore stabilità** del tutore

Anello di stabilizzazione rotulea in silicone integrato con fibre di quarzo, removibile, con design ottimizzato per la massima efficacia e minor pressione rotulea (*).

La **superficie 3D** dell'anello assicura un effetto massaggiante utile a ridurre l'edema e il gonfiore.

INDICAZIONI


- condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee

Fino ad esaurimento scorte gli ordini saranno evasi con il modello precedente.



* Test comparativi effettuati presso l'Istituto di Fisica Medica dell'Università di Erlangen/Norimberga del 2009. La pressione esercitata dal prodotto Genumedi sulla rotula è inferiore a 40 mmHg, valori nettamente inferiori a quelli testati della concorrenza.

CARATTERISTICHE DELLA LINEA

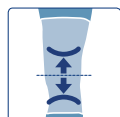

GENUMEDI® PT

GINOCCHIERA ELASTICA CON SISTEMA DI STIMOLAZIONE MUSCOLARE PER IL CONTROLLO DELLA ROTULA REALIZZATA NEL NUOVO TESSUTO MEDI COMFORT



CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Stecche a spirale di stabilizzazione laterale.

Sistema di pressori in silicone di forma e spessore studiati per la stimolazione del vasto mediale e il rilassamento del vasto laterale per un bilanciamento della rotula nella troclea.


Tirante per la personalizzazione della **stimolazione meccanica del muscolo**.

INDICAZIONI

- sindrome del dolore femoro-rotuleo dovuta a squilibrio muscolare
- cattivo allineamento rotuleo
- lateralizzazione rotulea
- rotula ipermobile
- trattamento post operatorio (stabilizzazione della rotula)



CARATTERISTICHE DELLA LINEA

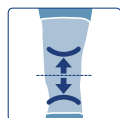

GENUMEDI® PRO

GINOCCHIERA ELASTICA CON SNODO POLICENTRICO IN TECNOPOLIMERO
REALIZZATA NEL NUOVO TESSUTO MEDI COMFORT



CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Snodi policentrici in tecnopolimero **Easyglide** per la stabilizzazione dell'articolazione.

Anello di stabilizzazione rotulea in silicone removibile con **design ottimizzato** per la massima efficacia e minor pressione rotulea (*).

La **superficie 3D** dell'anello assicura un effetto massaggiante riducendo l'edema e il gonfiore.

Fasce regolabili a strappo che offrono una miglior stabilizzazione dell'ortesi.



INDICAZIONI

- instabilità da lieve a moderata dell'articolazione del ginocchio
- artrosi
- moderate lesioni del menisco
- lieve instabilità dei legamenti collaterali
- per la stabilizzazione e la compressione post operatoria, ad esempio dopo la parziale meniscectomia o la levigatura della cartilagine




* Test comparativi effettuati presso l'Istituto di Fisica Medica dell'Università di Erlangen/Norimberga del 2009. La pressione esercitata dal prodotto Genumedi sulla rotula è inferiore a 40 mmHg, valori nettamente inferiori a quelli testati della concorrenza.

CARATTERISTICHE DELLA LINEA

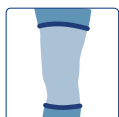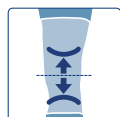

GENUMEDI® PSS

GINOCCHIERA ELASTICA CON PRESSORE SOTTOROTULEO INTEGRATO

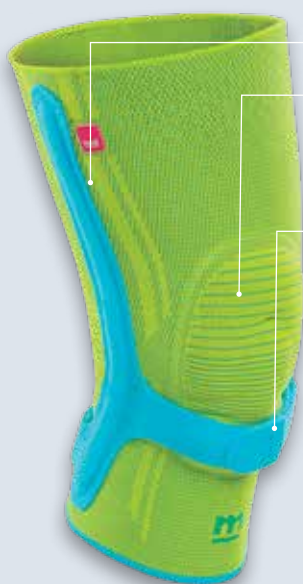

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Stecche a spirale di stabilizzazione laterale.

Stabilizzatore rotuleo e cuscinetto sottorotuleo indipendenti, realizzati in silicone e removibili. La superficie 3D assicura un effetto massaggiante con riduzione del dolore e conseguente stimolazione muscolare.


Disassamento del **cinghiaggio** che esercita spinta al tendine rotuleo per **prevenire effetto laccio** e garantire maggior comfort.

INDICAZIONI

- infiammazione del tendine rotuleo (Ginocchio del saltatore)
- sindrome di Osgood-Schlatter
- sindrome da dolore femoro-rotuleo
- condropatia e condromalacia rotulea
- lesioni al tendine del rotuleo
- artrosi retrorotulea
- malformazione di rotula
- sindrome della plica



CARATTERISTICHE DELLA LINEA

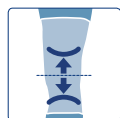

M 601

GINOCCHIERA SEMPLICE POLIESTENSIVA



CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Bordo superiore ed inferiore **anti-arricciamento**.

Materiale con **elasticità bidirezionale** che garantisce un **massaggio costante** anche durante i movimenti del paziente.

Tramatura differenziata a livello di rotula e cavo popliteo per un maggior comfort anche in caso di uso prolungato.

Materiale **altamente traspirante e superleggero** con compressione di classe 2.

INDICAZIONI

- lievi distorsioni di ginocchio
- idrartro o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie
- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo



SETTORE CAVIGLIA

LEGENDA



BORDO MORBIDO

sia superiore che inferiore per garantire facilità di calzatura e comfort durante l'utilizzo.



DESIGN ERGONOMICO

nella zona del collo del piede.



MEDI COMFORT EUCALIPTO

nuova combinazione di fibre innovative e fibre di Eucalipto.



MEDI COMFORT MERINOS

combinazione di fibre innovative con fibre Merinos.

LEVAMED®

CAVIGLIERA ELASTICA CON SUPPORTO IN SILICONE
REALIZZATA NEL NUOVO TESSUTO MEDI COMFORT



CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Cuscinetti in silicone retromalleolari integrati per la riduzione dell'edema e del gonfiore.

Superficie 3D dei cuscinetti per un effetto massaggiante e conseguente riduzione dell'edema e del gonfiore.

INDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità lievi e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie



CARATTERISTICHE DELLA LINEA



LEVAMED® E+ MOTION

CAVIGLIERA ELASTICA CON SUPPORTO IN SILICONE EMOTION

NUOVO



CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Cuscinetti in silicone con fibre in quarzo retromalleolari integrati per la riduzione dell'edema e del gonfiore.

Superficie 3D dei cuscinetti per un effetto massaggiante con conseguente riduzione dell'edema e del gonfiore.

INDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità lievi e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

Fino ad esaurimento scorte gli ordini saranno evasi con il modello precedente.



CARATTERISTICHE DELLA LINEA



LEVAMED® ACTIVE

CAVIGLIERA ELASTICA CON SISTEMA DI CINGHIE STABILIZZANTI



CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Cuscinetti in silicone retromalleolari integrati in 3D ad **azione massaggiante** per la riduzione dell'edema e del gonfiore.

Sistema di **fasce a strappo "Medi Active"** personalizzabili con bendaggio a 8 e sistema di controllo della supinazione per la **massima stabilità** dell'articolazione nella fase acuta del trauma.

Fasce "Medi Active" removibili in modo da poter indossare il tutore anche nella fase di recupero.

INDICAZIONI

- funzionalità ridotta dei legamenti nell'articolazione tibio-tarsale
- insufficienza legamentosa
- protezione da ulteriori distorsioni, in particolare nell'attività sportiva
- stati infiammatori dell'articolazione tibio-tarsale (acuti o cronici, posttraumatici o post operatori)
- lievi lesioni della sindesmosi



CARATTERISTICHE DELLA LINEA



ACHIMED®

CAVIGLIERA ELASTICA PER IL TENDINE D'ACHILLE CON SUPPORTI IN SILICONE
REALIZZATA NEL NUOVO TESSUTO MEDI COMFORT



CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Coppia di **tallonette in silicone** per ridurre tensioni sul tendine d'Achille.

Cusineti in silicone retromalleolari integrati con superficie 3D ad **azione massaggiante** per ridurre edema e gonfiore.

INDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità lievi e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie achilodinia; borsite del tendine di Achille.

CARATTERISTICHE DELLA LINEA



CAVIGLIERA M 501

CAVIGLIERA ELASTICA POLIESTENSIVA



CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Materiale **altamente traspirante e superleggero** con compressione classe 2.

Materiale con **elasticità bidirezionale**, per un massaggio costante anche durante vari movimenti del paziente.

Tallone scaricato dalle varie forze di trazione per garantire comfort ottimale.

Bordo superiore e inferiore antiarricciamento.

INDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità lievi e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie



TAGLIE



LUMBAMED® BASIC


Codici d'ordine:
M.663 donna
M.664 uomo

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna
I	76-86 cm
II	87-98 cm
III	99-111 cm
IV	112-125 cm
V	126-140 cm

MISURE VITA

Taglie	Ø Uomo
I	66-76 cm
II	77-88 cm
III	89-101 cm
IV	102-115 cm
V	116-130 cm

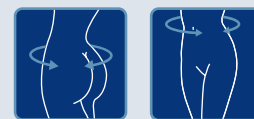

Altezza

M.663 27 cm; M.664 26 cm



LUMBAMED® PLUS

Codici d'ordine:
M.669 donna
M.666 uomo

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna
I	76-86 cm
II	87-98 cm
III	99-111 cm
IV	112-125 cm
V	126-140 cm

MISURE VITA

Taglie	Ø Uomo
I	66-76 cm
II	77-88 cm
III	89-101 cm
IV	102-115 cm
V	116-130 cm



Altezza

M.669 24 cm; M.666 23 cm



LUMBAMED® PLUS E+ MOTION NUOVO

Codice d'ordine: M.670E

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna
I	76-86 cm
II	87-98 cm
III	99-111 cm
IV	112-125 cm
V	126-140 cm

MISURE VITA

Taglie	Ø Uomo
I	66-76 cm
II	77-88 cm
III	89-101 cm
IV	102-115 cm
V	116-130 cm



Altezza

24 cm



LUMBAMED® DISC


Codici d'ordine
M.667 donna
M.668 uomo

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna
I	76-86 cm
II	87-98 cm
III	99-111 cm
IV	112-125 cm
V	126-140 cm

MISURE VITA

Taglie	Ø Uomo
I	66-76 cm
II	77-88 cm
III	89-101 cm
IV	102-115 cm
V	116-130 cm

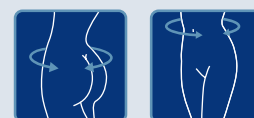

Altezza

M.667 35 cm; M.668 37 cm



LUMBAMED® SACRO

Codice d'ordine
M.680

MISURE BACINO

Taglie	Ø Bacino
I	70-85 cm
II	85-100 cm
III	100-115 cm
IV	115-130 cm
V	130-145 cm



Altezza

18 cm



OMOMED®

Codice d'ordine:
M.808

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Bicipite
0	inferiore 26 cm
I	26-29 cm
II	29-33 cm
III	33-36 cm
IV	36-39 cm



EPICOMED®

Codice d'ordine:
M.822

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Avambraccio
I	17-20 cm
II	20-23 cm
III	23-26 cm
IV	26-29 cm
V	29-32 cm
VI	32-35 cm



5 cm dal gomito



EPICOMED® E+ MOTION NUOVO

Codice d'ordine: M.822E

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Avambraccio
II	20-23 cm
III	23-26 cm
IV	26-29 cm
V	29-32 cm
VI	32-35 cm



5 cm dal gomito

TAGLIE



GENUMEDI®

Codice d'ordine:
M.613

MISURE*

Tg.	Ø A	Ø B
I	37-41 cm	25-28 cm
II	41-43 cm	28-31 cm
III	43-46 cm	31-34 cm
IV	46-49 cm	34-37 cm
V	49-52 cm	37-40 cm
VI	52-56 cm	40-43 cm
VII	56-58 cm	43-46 cm



Altezza 30 cm



GENUMEDI® E+ MOTION NUOVO

Codice d'ordine: M.613E

MISURE*

Tg.	Ø A	Ø B
II	41-43 cm	28-31 cm
III	43-46 cm	31-34 cm
IV	46-49 cm	34-37 cm
V	49-52 cm	37-40 cm
VI	52-56 cm	40-43 cm



Altezza 30 cm



GENUMEDI® PT

Codice d'ordine:
M.614 DX/SX

MISURE*

Tg.	Ø A	Ø B
I	37-41 cm	25-28 cm
II	41-43 cm	28-31 cm
III	43-46 cm	31-34 cm
IV	46-49 cm	34-37 cm
V	49-52 cm	37-40 cm
VI	52-56 cm	40-43 cm
VII	56-58 cm	43-46 cm



Altezza 30 cm



GENUMEDI® PRO

Codice d'ordine:
M.615

MISURE*

Tg.	Ø A	Ø B
I	37-41 cm	25-28 cm
II	41-43 cm	28-31 cm
III	43-46 cm	31-34 cm
IV	46-49 cm	34-37 cm
V	49-52 cm	37-40 cm
VI	52-56 cm	40-43 cm
VII	56-58 cm	43-46 cm



Altezza 30 cm



GENUMEDI® PSS

Codice d'ordine:
M.616

MISURE*

Tg.	Ø A	Ø B
0	34-37 cm	22-25 cm
I	37-41 cm	25-28 cm
II	41-43 cm	28-31 cm
III	43-46 cm	31-34 cm
IV	46-49 cm	34-37 cm
V	49-52 cm	37-40 cm
VI	52-56 cm	40-43 cm
VII	56-58 cm	43-46 cm



Altezza 30 cm




M.601

Codice d'ordine:
M.601

MISURE*

Tg.	Ø A	Ø B
I	37-41 cm	25-28 cm
II	41-43 cm	28-31 cm
III	43-46 cm	31-34 cm
IV	46-49 cm	34-37 cm
V	49-52 cm	37-40 cm
VI	52-56 cm	40-43 cm
VII	56-58 cm	43-46 cm

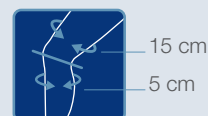

Altezza 30 cm

TAGLIE



LEVAMED®

Codice d'ordine:
M.508

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Caviglia
I	17-20 cm
II	20-22 cm
III	22-24 cm
IV	24-26 cm
V	26-28 cm
VI	28-30 cm



LEVAMED® E+ MOTION

NUOVO

Codice d'ordine: M.508E

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Caviglia
I	17-20 cm
II	20-22 cm
III	22-24 cm
IV	24-26 cm
V	26-28 cm



LEVAMED® ACTIVE

Codice d'ordine:
M.508ACTIVE DX/SX

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Caviglia
I	17-20 cm
II	20-22 cm
III	22-24 cm
IV	24-26 cm
V	26-28 cm
VI	28-30 cm



ACHIMED®

Codice d'ordine:
M.511

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Caviglia
I	17-20 cm
II	20-22 cm
III	22-24 cm
IV	24-26 cm
V	26-28 cm
VI	28-30 cm



M.501

Codice d'ordine:
M.501

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Caviglia
I	17-20 cm
II	20-22 cm
III	22-24 cm
IV	24-26 cm
V	26-28 cm
VI	28-30 cm





FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
E fgp@fgpsrl.it
www.fgpsrl.it



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 0 - 01/19

www.cabcomunicazione.it



Scarica l'App
FGPOrteSystem®

